

MANUALE D'USO

Poltrone

POLTRONE ITALIA



 **MOVI**

CE

INDICE:

1. INTRODUZIONE:	pg.3
2. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:	pg.5
3. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:	pg.10
4. DESCRIZIONE:	pg.10
5. MONTAGGIO:	pg.11
6. MODALITÀ D'USO:	pg.13
7. CORRISPONDENZA CODICI:	pg.17
8. ACCESSORI:	pg.20
9. MANUTENZIONE E PULIZIA:	pg.26
10. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA:	pg.28
11. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.29
12. NOTE:	pg.32
13. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.33
14. SMALTIMENTO:	pg.35
15. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.35
16. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.36

1. INTRODUZIONE:

Gentile Cliente,

desideriamo ringraziarla per la fiducia riposta in Movi Spa per l'acquisto della nostra poltrona. Movi Spa offre un'ampia gamma di dispositivi e la possibilità di scegliere tra numerose combinazioni di poltrone con movimentazione elettrica. Ogni modello di poltrona garantisce un supporto ergonomico con un'elevata performance di utilizzo ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze dell'utilizzatore, sia in termini di praticità e comfort, sia in termini di sicurezza ed efficacia. Le poltrone realizzate da Movi Spa garantiscono momenti di prezioso relax e di ritrovata autonomia.

Le poltrone sono dispositivi medici di Classe I in accordo al Regolamento UE 2017/745, particolarmente indicati per persone disabili e/o con difficoltà motorie che da seduti non riescono autonomamente ad alzarsi per porsi in posizione verticale. Costituisce anche un valido supporto ergonomico per chi è costretto a rimanere seduto per molto tempo. Sono delle strutture mobili costituite da uno schienale e sedile imbottiti e da un asservimento motorizzato elettricamente, che solleva il sedile fornendo anche un sostegno al paziente quando viene spostato in posizione verticale. Ideale per chi desidera alzarsi con facilità, in autonomia e in sicurezza.

Il Fabbricante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbricante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

ELENCO CODICI:

La famiglia delle Poltrone Movi è composta dai modelli e codici indicati al capitolo "Corrispondenza codici".



Attenzione!

Leggere attentamente il manuale d'uso al fine di evitare danni in fase di movimentazione e di utilizzo del dispositivo.

Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per i danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Nota: Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

2. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale. Utilizzare il prodotti unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

2.1 Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di tensione elettrica pericolosa che può causare pericolo di vita.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

Il simbolo di sicurezza non sostituisce il testo di avvertenza a cui si riferisce. Leggere sempre le avvertenze sulla sicurezza e seguirle attentamente!



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica l'obbligo di leggere le istruzioni prima dell'utilizzo del dispositivo



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.

2.2 Avvertenze sulla sicurezza

Assicurarsi di avere letto e compreso il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo.

Il presente manuale d'uso contiene avvertenze sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutti gli utilizzatori che lavorano con il dispositivo devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.

Prima di ogni utilizzo del dispositivo, è opportuno controllarne lo stato generale e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva. Dopo un lungo inutilizzo verificare attentamente lo stato di tutte le parti del dispositivo e procedere alla necessaria manutenzione. Effettuare un controllo periodico di tutte le parti. La regolazione corretta e la sostituzione tempestiva di parti usurate o danneggiate garantirà per anni un utilizzo privo di problemi. Qualora il dispositivo non risulti integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.



Attenzione!

Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.

- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta.
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- Prestare sempre molta attenzione, in fase di movimentazione, alla presenza di bambini e animali domestici.
- Si declina qualsiasi responsabilità del costruttore e del rivenditore per i danni causati a persone, animali o cose, derivanti, da interventi di personale non autorizzato e dall'inosservanza del presente manuale d'uso.

- Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi dell'integrità dei vari componenti della poltrona ed accertarsi che non ci siano parti visibilmente danneggiate causa trasporto.
- Se in dotazione, controllare che le ruote e i piedini siano integre e funzionanti.
- Non sedersi mai sul poggiapiedi quando la pediera è alzata e non bloccare il poggiapiedi quando viene azionato.
- Sedersi con la poltrona completamente sollevata evitando di lasciarsi cadere di peso.
- Tenere la giusta distanza dal muro in modo che la poltrona possa inclinarsi.
- Essendo un prodotto imbottito, piccoli fruscii e rumori sono frutto del normale sfregamento tra i tessuti.
- Per i materiali di rivestimento, in caso di completamento in un secondo momento, non si garantisce la perfetta corrispondenza di colore, per cui l'azienda declina qualsiasi responsabilità.
- Se presente, il ROLLER SYSTEM va azionato SOLO in posizione abbassata con schienale e pediera chiusi.
- Non abbassare lo schienale a poltrona sollevata.
- Non sedersi sui braccioli.
- Disinserire immediatamente il cavo elettrico dalla rete, qualora si riscontrino irregolarità di funzionamento e controllare eventuali dispersioni elettriche.
- Non utilizzare prolunghe elettriche e/o connessioni volanti.
- Le poltrone non sono idonee ad un utilizzo contemporaneo da parte di più persone.
- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare il filo alla presa.
- Non staccare o inserire la presa con le mani bagnate.
- Non inserire le mani all'interno della meccanica quando la poltrona è aperta.
- Verificare che la tensione della presa di corrente sia identica a quella riportata sull'etichetta del motore. La poltrona funziona con corrente a 220 V.
- Nel caso di utilizzo da parte di bambini o persone non autosufficienti è necessaria l'assistenza e la presenza da parte di un'altra persona competente.
- Prestare attenzione alle componenti di piccole dimensioni che possono essere ingerite.
- Non appoggiare oggetti o camminare su cavo di alimentazione.
- Si raccomanda l'utilizzo di accessori originali. Le nostre poltrone sono predisposte per accettare gli accessori originali.
- Non sedersi mai sul poggiapiedi quando la poltrona è in posizione relax

(distesa)

- Non posizionare la poltrona vicino a fonti di calore, in ambienti umidi o pavimenti non in piano.
- Si raccomanda di azionare i vari comandi con una persona seduta sulla poltrona.
- Posizionare la poltrona a una distanza di almeno 80 cm dal muro.
- Togliere la polvere con una regolare pulizia.
- Disinserire la presa quando si sposta la poltrona o si effettuano operazioni di manutenzione.
- Non utilizzare la poltrona superando la portata massima.
- Tenere il telecomando al di fuori della portata dei bambini.
- La poltrona è collegata con un alimentatore 100-240Vac 50/60Hz 1,5A. Si raccomanda di utilizzare la poltrona esclusivamente con il modello di alimentatore fornito di serie.
- In fase di installazione e di utilizzo della poltrona, verificare che l'alimentatore sia posto in una posizione facilmente accessibile, qualora, in caso di emergenza, si rendesse necessario isolare la poltrona dalla rete elettrica.



Nella poltrona sono installati più cavi elettrici, che ne garantiscono il corretto funzionamento. Si raccomanda la massima attenzione, in particolare verso il cavo del telecomando che, in alcune posizioni, potrebbe comportare il rischio di strangolamento. Non lasciare i cavi pendenti o accessibili mentre il dispositivo è in uso o a riposo.

Prestare particolare attenzione alla presenza di bambini, che non devono giocare né entrare in contatto con i cavi elettrici. Allo stesso modo, i caregiver o gli assistenti devono vigilare nel caso di utenti con capacità cognitive ridotte o alterate (ad esempio persone con disabilità cognitiva, demenza, o che assumono farmaci che compromettono l'attenzione o la percezione del rischio), assicurandosi che i cavi non rappresentino un pericolo di intrappolamento o strangolamento.



Controllare che durante le manovre operative non si verifichino condizioni di pericolo; arrestare immediatamente la poltrona nel caso in cui si riscontrino irregolarità funzionali ed interpellare il servizio assistenza del rivenditore autorizzato. Interventi anche di lieve entità necessitano l'intervento di personale qualificato. Ogni e qualsiasi manomissione o modifica dell'apparecchiatura non preventivamente autorizzate dal costruttore sollevano quest'ultimo da danni derivanti o riferibili agli atti suddetti.



L'utilizzatore e/o il paziente è tenuto a segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo, o al fabbricante o all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito (Ministero della Salute Italiano)

3. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

Le Poltrone MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 13).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto in vigore al momento dell'immissione in commercio.

4. DESCRIZIONE:

L'obiettivo di Movi Spa, da sempre, è fornire un valido sostegno e garantire l'autonomia delle persone, grazie a delle poltrone comode ed eleganti. Vent'anni di esperienza nel settore consentono di realizzare un prodotto italiano di qualità eccellente e la ricerca costante di materiali e rivestimenti innovativi. Permettendo così la sperimentazione di nuove forme e modelli per essere sempre al passo coi tempi.

Le poltrone montano due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiapiedi separatamente, consentendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione.

Le poltrone inoltre sono dotate della funzione alzainpiedi, grazie ad un motore che offre un aiuto all'alzata in piedi dell'utilizzatore. Con questo dispositivo di sollevamento, la persona seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando così la messa in piedi della persona.

5. MONTAGGIO:

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità delle varie componenti della poltrona, controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate. In caso di danneggiamento non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore. Per il collegamento alla rete di alimentazione elettrica utilizzare il cavo con la spina uscente dalla poltrona e collegarla alla presa elettrica. Non appoggiare oggetti o camminare sul cavo di alimentazione.

Nota: verificare che la tensione della presa di corrente sia identica a quella riportata sull'etichetta del motore. La poltrona funziona con corrente a 220 V. La poltrona è così predisposta per l'uso.

Nota: gli interventi elettrici anche di lieve entità richiedono l'opera di personale professionalmente qualificato.

Posizionare la poltrona in luoghi ampi, distante da sorgenti di calore (caminetti, stufe, lampade alogene, etc.) e su superfici piane. Assicurarsi che il movimento della pediera e dello schienale non sia ostacolato in alcun modo. La poltrona deve avere una distanza minima di 60 cm da qualsiasi ostacolo (muro, tavola, etc.). Il montaggio della poltrona deve essere effettuato da personale tecnico abilitato onde evitare danni meccanici e/o elettrici al prodotto.

Assemblaggio schienale

Applicare lo schienale inserendo i montanti, situati ai lati, nelle due baionette posizionate sul retro della seduta, quindi spingere verso il basso fino allo scatto di fine corsa. Per estrarre lo schienale agire all'inverso. Sollevare lo schienale mentre si agisce sulla baionetta per sganciare i montanti.

Assemblaggio braccioli


Laddove presenti i braccioli estraibili, applicare i braccioli inserendo i tubolari situati sul fondo dei braccioli all'interno dei fori predisposti ai lati della poltrona. Spingere verso il basso fino a fine corsa. Per estrarre i braccioli, agire all'inverso sollevando il bracciolo verso l'alto.



- Ogni danno derivante dalla mancata osservanza delle disposizioni sopra indicate non sarà addebitabile al costruttore e potrà causare la decadenza della garanzia.
- Quando si azionano i comandi si deve essere in grado di visualizzare l'area circostante al fine di impedire che persone, animali o cose rimangano sotto le parti in movimento.
- La poltrona deve essere montata su un piano orizzontale. Evitare piani cedevoli o sconnessi.
- Prima dell'utilizzo controllare che i cavi elettrici di alimentazione non interferiscano con la movimentazione delle sezioni, che non siano di intralcio e che non si intersechino con cavi di alimentazione di altri apparecchi e dispositivi.
- Prima dell'utilizzo verificare che durante la procedura nessuno inserisca mani, parti del corpo o qualsiasi altro oggetto estraneo tra le sezioni in movimento per evitare schiacciamenti.

6. MODALITÀ D'USO:

La poltrona deve essere utilizzata solo da persone in grado di comprendere il presente manuale d'uso, ricordandosi che questa deve essere movimentata solo se si è seduti sopra. Si ricorda che eventuali utilizzi da parte di persone non a conoscenza delle procedure specificate nel presente manuale potrebbero causare pericoli.

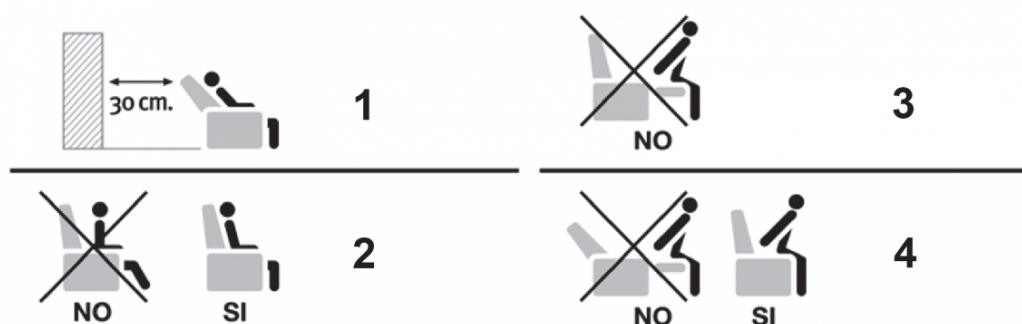

Note:

- 1) Posizionare la poltrona ad almeno 60 cm dal muro.
- 2) Sedersi correttamente con la schiena appoggiata allo schienale.
- 3) Non sedersi sulla pediera.
- 4) Terminato l'utilizzo della poltrona, prima di alzarsi, riposizionare lo schienale eretto e chiudere la pediera.



1

Nota:

1) Telecomando poltrone a 2 motori (E4,E5)

- TASTO SX IN ALTO: dalla posizione naturale si passa alla posizione con lo schienale abbassato
- TASTO SX IN BASSO: dalla posizione con lo schienale abbassato la poltrona ritorna in posizione naturale
- TASTO DX IN ALTO: partendo dalla posizione messa in piedi posiziona la poltrona in posizione naturale; partendo invece dalla posizione naturale fa estrarre la pediera
- TASTO DX IN BASSO partendo dalla posizione naturale porta la poltrona in posizione messa in piedi; partendo invece dalla posizione pediera estratta fa rientrare la pediera nella sua sede

Nota: la poltrona Sharon è dotata di motorizzazione **E7**. Rispetto ai modelli con le motorizzazioni E4 ed E5, la poltrona Sharon è fornita di un telecomando di dimensioni ridotte che presenta due tasti aggiuntivi per la regolazione del basculamento e che sono indicati di seguito:



POGGIATESTA REGOLABILE

I modelli **Sharon, Michelle e Matisse** sono dotati di poggiatesta regolabile. Nella parte alta dello schienale sono montati dei cricchetti a scatto che permettono la regolazione in inclinazione dell'appoggiatesta. Di seguito alcune indicazioni per l'utilizzo.

Attenzione: far eseguire a un caregiver le seguenti operazioni. Non effettuarle mai dalla posizione seduta.

- Regolare lo schienale in posizione verticale.
- Posizionarsi dietro la poltrona e afferrare con entrambe le mani la parte alta dello schienale.
- Spingere in avanti il poggiatesta fino al raggiungimento della posizione desiderata: il meccanismo è a scatto, pertanto, nella movimentazione, si sentiranno diversi clic che indicheranno il livello di inclinazione raggiunto.
- Per tornare alla posizione verticale, spingere l'appoggiatesta completamente avanti per sganciare il meccanismo e farlo tornare alla posizione iniziale.

OPTIONAL: ROLLER SYSTEM*

Con il roller system inserito, quindi abbassando la leva sul retro della poltrona, le ruote scendono e la poltrona è libera di muoversi. In questa posizione le movimentazioni elettriche sono bloccate per ragioni di sicurezza. Alzando la barra del roller system la poltrona è saldamente fissata a terra.

*Non disponibile per i modelli Sharon e Nicole Small



- **Non utilizzare il Roller System con la persona seduta sulla poltrona.**
- **Non superare scalini superiori ad 1 centimetro.**
- **Non saltare sul Roller system.**



1



2

Note:

- 1) Abbassamento della leva con il piede
- 2) Movimentazione della poltrona (blocco di sicurezza dei comandi elettrici)

Le poltrone hanno differenti movimentazioni a seconda del numero dei motori e delle opzioni scelte e integrate al momento dell'acquisto. Qualsiasi poltrona esiste in due versioni: E4, E5

Esiste inoltre una motorizzazione E7, al momento prevista solo per la poltrona Sharon

E4: 2 motori + alzainpiedi



E5: 2 motori + alzainpiedi + verticalizzazione + posizione letto



E7: 2 motori + alzainpiedi + verticalizzazione + posizione letto + rotazione + basculamento





Attenzione!

Il telecomando e l'alimentatore sono dotati di apposite coperture che ne garantiscono l'isolamento secondo lo standard IP21. Si raccomanda di verificare che siano sempre correttamente posizionate e di non rimuoverle durante l'utilizzo della poltrona.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura	Utilizzo	10 / 40 °C
Temperatura	Stoccaggio/Utilizzo	- 5 / 60 °C
Umidità	Utilizzo	30 / 70 % Ur senza condensa
Umidità	Stoccaggio/Utilizzo	20 / 70 % Ur senza condensa

7. CORRISPONDENZA CODICI:

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
NADIA	56710000_M	POLTRONA NADIA PERSONALIZZATA
	56712010_M	POLTR.NADIA 2M - ROSSO 010 Maracaibo
	56712130_M	POLTR.NADIA 2M - SABBIA 130 Maracaibo
	56712205_M	POLTR.NADIA 2M - GRIGIO 205 Maracaibo
	56712639_M	POLTR.NADIA 2M - MARE 639 Maracaibo
	56712643_M	POLTR.NADIA 2M - PAVONE 643 Maracaibo
NADIA PROFESSIONAL	56715500_M	POLTRONA NADIA PROFESSIONAL PERSONALIZZATA
	56784010_M	NADIA PRO.E4.2M - ROSSO 010/Maracaibo
	56784130_M	NADIA PRO.E4.2M - SABBIA 130/Maracaibo
	56784205_M	NADIA PRO.E4.2M - GRIGIO 205/Maracaibo
	56784639_M	NADIA PRO.E4.2M - MARE 639/Maracaibo
	56784643_M	NADIA PRO.E4.2M - PAVONE 643/Maracaibo

Poltrone POLTRONE ITALIA

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
NADIA XL	56714402_M	NADIA XL 2 MOTORI PERSONALIZZATA
NADIA XXL	56714403_M	NADIA XXL 3 MOTORI PERSONALIZZATA
NADIA LIFE	56715010_M	NADIA LIFE.E4.2M - ROSSO 010/Maracaibo
	56715130_M	NADIA LIFE.E4.2M - SABBIA 130/Maracaibo
	56715205_M	NADIA LIFE.E4.2M - GRIGIO 205/Maracaibo
	56715639_M	NADIA LIFE.E4.2M - MARE 639/Maracaibo
	56715643_M	NADIA LIFE.E4.2M - PAVONE 643/Maracaibo
	56715601_M	NADIA LIFE PERSONALIZZATA
MICHELLE	56720241_M	POLTR. MICHELLE Personalizzata
MATISSE	56730241_M	POLTR. MATISSE Personalizzata
BEATRICE	56730010_M	POLTR.BEATRICE 2M - ROSSO 010 Maracaibo
	56730130_M	POLTR.BEATRICE 2M - SABBIA 130 Maracaibo
	56730205_M	POLTR.BEATRICE 2M - GRIGIO 205 Maracaibo
	56730639_M	POLTR.BEATRICE 2M - MARE 639 Maracaibo
	56730643_M	POLTR.BEATRICE 2M - PAVONE 643 Maracaibo
	56730000_M	POLTR.BEATRICE PERSONALIZZATA
MARGHERITA	56709205_M	POLTRONA MARGHERITA 2M - GRIGIO 205
	56709010_M	POLTRONA MARGHERITA 2M - ROSSO 010
	56709130_M	POLTRONA MARGHERITA 2M - SABBIA 130
	56709639_M	POLTRONA MARGHERITA 2M - MARE 639
	56709643_M	POLTRONA MARGHERITA 2M - PAVONE 643
	56709000_M	POLTR. MARGHERITA PERSONALIZZATA
	56786003_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Sand 03/Prime
	56786005_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Beige 05/Prime
	56786006_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Camel 06/Prime
	56786010_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Taupe 10/Prime
	56786011_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Tabac 11/Prime
	56786015_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Mostaza 15/Prime
	56786018_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Red 18/Prime
	56786022_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Light grey 22/Prime

Poltrone POLTRONE ITALIA

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
	56786023_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Grey 23/Prime
	56786026_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Jeans 26/Prime
	56786027_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Elephant 27/Prime
	56786028_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Dark grey 28/Prime
	56786032_M	POLTR. MARGHERITA 2M+Roller - Black 32/Prime

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
NICOLE SMALL	56738900_M	POLTRONA NICOLE SMALL PERSONALIZZATA
	56770010_M	NICOLE SMALL 2M - ROSSO 010
	56770130_M	NICOLE SMALL 2M - SABBIA 130
	56770205_M	NICOLE SMALL 2M - GRIGIO 205
	56770639_M	NICOLE SMALL 2M - MARE 639
	56770643_M	NICOLE SMALL 2M - PAVONE 643
MARILU SMALL	56750000_M	POLTRONA MARILU' SMALL PERSONALIZZATA
	56750010_M	MARILU' SMALL 2M - Rosso 010
	56750130_M	MARILU' SMALL 2M - Sabbia 130
	56750205_M	MARILU' SMALL 2M - Grigio 205
	56750639_M	MARILU' SMALL 2M - Mare 639
	56750643_M	MARILU' SMALL 2M - Pavone 643
SHARON	56720242_M	POLTR. SHARON PERSONALIZZATA
NADIA COMFORT	56712050_M	EDIZIONE SPECIALE 50esimo - DENIM 11/Genova

8. ACCESSORI:

Le poltrone sono personalizzabili, a seconda delle proprie necessità, attraverso l'impiego dei seguenti accessori.

I codici degli accessori, abbinati al modello di poltrona, sono indicati nelle tabelle presenti all'interno di questo capitolo.

Kit vibromassaggio

Il kit vibromassaggio è un accessorio che deve necessariamente essere installato in fabbrica in quanto consta di una centralina, con alimentazione e comando proprie e otto cosiddette “saponette” vibranti che vengono posizionate direttamente all'interno delle parti in spugna della poltrona. Il sistema, mediante una vibrazione controllata delle saponette su quattro zone differenziate, favorisce il rilassamento muscolare e il relax dell'utilizzatore.

Il telecomando in foto permette la completa gestione del sistema:

- Il tasto rosso ON/OFF, in alto a destra, accende e spegne il sistema.
- Il tasto MODE, in alto a sinistra, permette di selezionare la modalità di massaggio tra le 5 preimpostate.
- Il tasto INTENSITY, subito sotto, permette di aumentare o diminuire l'intensità della vibrazione.
- I quattro tasti in fondo identificano invece le zone del corpo dove attivare/disattivare la funzione massaggiante:
 - BACK: parte alta della schiena
 - LUMBAR: parte bassa della schiena
 - THIGHS: cosce e zona della seduta
 - LEGS: gambe



Kit batteria

Il kit batteria, installabile sulle meccaniche E4 ed E5 con o senza roller, permette di movimentare la poltrona senza necessità di attaccarla alla presa di corrente.

Il kit consta di una batteria al litio che può essere facilmente ricaricata alla corrente di casa; il ciclo completo di carica dura 12 ore.

Il kit batteria può essere installato anche in un momento successivo all'acquisto della poltrona.

Kit telecomando wireless

Il kit telecomando wireless, installabile sulle meccaniche E4 ed E5 con o senza roller, sostituisce il normale telecomando cablato con uno senza filo. È ideale nei casi in cui non sia l'utilizzatore in prima persona, ma un caregiver, ad azionare la poltrona.

Kit ruote 50mm

Le ruote da 50 mm vengono montate direttamente sulla meccanica della poltrona e ne permettono un'agevole movimentazione.

Tutte e quattro le ruote sono piroettanti e le due posteriori sono dotate di freno: si raccomanda di azionare i movimenti della poltrona SOLO con i freni delle ruote posteriori inseriti.

Pediera estensibile

La pediera estensibile è un accessorio utile sia per le persone più alte, sia, in generale, per garantire un buon supporto alla zona dei talloni quando la pediera è completamente estesa.

A poltrona chiusa l'estensione, lunga circa 6 cm, alloggia dietro la pediera principale e si aziona automaticamente all'aprirsi/chiudersi di quest'ultima. Non è quindi necessario alcun intervento né sul telecomando né sulla pediera, ma il funzionamento è autonomo e gestito meccanicamente dai leveraggi.

La pediera estensibile può essere installata su meccaniche E4 ed E5, con o senza roller.

Gran foulard

Il gran foulard è un telo di copertura della poltrona, realizzato nel materiale e colore richiesto, di misura 200x140 cm.

Nota: si raccomanda di verificare che il telo non interferisca con il corretto funzionamento dei meccanismi e dei motori.

Kit copripoltrona completo

Il copripoltrona completo consta di una coppia di coperture per i braccioli e una copertura per schienale e seduta, realizzati nel materiale e colore richiesto.

Nota: si raccomanda di verificare che nessuna parte del copripoltrona interferisca con il corretto funzionamento dei meccanismi e dei motori.

Kit copritesta+copribraccioli

Il kit copritesta+copribraccioli consta di una coppia di coperture per i braccioli e una cuffia di copertura su misura per la parte alta dello schienale, in corrispondenza della testa.

Nota: si raccomanda di verificare che nessuna parte, del copritesta e/o dei copribraccioli, interferisca con il corretto funzionamento dei meccanismi e dei motori.

Cuscinetto per la testa

Il cuscinetto per la testa consta di un piccolo cuscino imbottito, realizzato nel materiale e colore richiesto, a cui è applicata una pattina all'interno della quale sono inseriti dei piombini di contrappeso.

Per posizionare correttamente il cuscino:

- Posizionare il cuscino sullo schienale all'altezza desiderata con la pattina rivolta verso la parte alta dello schienale.
- Posizionare la parte piombata della pattina oltre la parte alta dello schienale, lasciandola cadere posteriormente.
- In questo modo, il peso dei piombini permetterà al cuscino di rimanere posizionato all'altezza desiderata.

Nota: il cuscino è progettato, nella forma e nelle misure, per essere utilizzato ad altezza testa o cervicale. Non è pertanto possibile né consigliato utilizzarlo come cuscino lombare. Verificare sempre che nessuna parte del cuscino interferisca con il corretto funzionamento dei meccanismi e dei motori.

Tavolino per braccioli estraibili

I modelli dotati di bracciolo estraibile possono essere accessoriati con un apposito tavolino. Il tavolino presenta due baionette ripiegabili montate sulla parte inferiore, che permettono una facile installazione dopo aver rimosso i braccioli.

Per un corretto montaggio:

- Far accomodare l'utilizzatore sulla poltrona.
- Rimuovere i braccioli estraibili
- Aprire le baionette e inserirle nei fori dei braccioli, avendo cura di posizionare l'incavo del tavolino verso l'utilizzatore.

Attenzione: per una facile movimentazione, il tavolino non ha blocchi, ma rimane in posizione solo grazie al proprio peso; pertanto, una spinta dal basso verso l'alto può causarne l'uscita dalle apposite sedi. Si raccomanda di evitare questo tipo di movimenti, se non in fase di smontaggio.

Maniglione

Su alcuni modelli è possibile installare un maniglione di spinta che aiuta nella movimentazione della poltrona.

Il maniglione è realizzato in acciaio verniciato, facilmente lavabile. L'installazione del maniglione comporta la foratura della stoffa nella parte posteriore dello schienale.

Codici accessori

Codice	Descrizione
56400005_M	MANIGLIONE DI SPINTA
56700001_M	ROLLER SYSTEM
56700002_M	TAVOLINO A BAIONETTA
56700003_M	SET 4 RUOTE PIROET. diam 50 - 2 CON FRENO
56700004_M	SET 4 RUOTE PIROET. diam 100 - 2 CON FRENO
56700007_M	SEDUTA IN MEMORY FOAM
56700008_M	BRACCIOLI ESTRAIBILI
56700009_M	KIT LUCE + USB
56700010_M	TAVOLINO SNODABILE
56700011_M	KIT COPRITESTA + COPRIBRACCIOLI
56700012_M	KIT COMPLETO COPRIPOLTRONA
56700013_M	CUSCINETTO POGGIATESTA
56700020_M	POUF
56700021_M	PEDIERA ESTENSIBILE 7 CM
AC-ME-M.KITBATTERIA	Kit batteria freedom Motion
AC-ME-M.TCWIRELESS	Kit telecomando wireless
AC-ME-M.VIBRO2TC	Kit vibromassaggio 5 punti - doppio telecomando
GRAN1_M	GRANFOULARD
ME-M.GEL.GRAVITYLIFT	Meccanica girevole elettrica gravity+alzainpiedi
PAC_M	PIEDINI IN ACCIAIO CROMATO X POLTRONE - CP

Abbinamento accessori - modelli di poltrona

Accessorio	Montabile successivamente	Installabile su modelli
Kit vibromassaggio	NO	Tutti i modelli con meccaniche E4, E4 con roller, E5, E5 con roller, E7, E4 XL, E4 XXL
Kit batteria	SI, con tecnico specializzato	Tutti i modelli con meccaniche E4, E4 con roller, E5, E5 con roller, E7
Kit telecomando wireless	SI, con tecnico specializzato	Tutti i modelli con meccaniche E4, E4 con roller, E5, E5 con roller, E4 XL, E4 XXL
Kit ruote 50mm	SI, con tecnico specializzato	Meccaniche E4 senza roller, E5 senza roller, E4 SMALL
Pediera estensibile	SI, con tecnico specializzato	Tutti i modelli con meccaniche E4, E4 con roller, E5, E5 con roller
Gran foulard	SI, ma i bagni di colore potrebbero non corrispondere perfettamente	Tutti i modelli
Kit copripoltrona completo	SI, ma i bagni di colore potrebbero non corrispondere perfettamente	Tutti i modelli, esclusa Sharon
Kit copritesta+copribraccioli	SI, ma i bagni di colore potrebbero non corrispondere perfettamente	Tutti i modelli, esclusa Sharon
Cuscinetto per la testa	SI, ma i bagni di colore potrebbero non corrispondere perfettamente	Tutti i modelli
Tavolino per braccioli estraibili	SI, solo su modelli con bracciolo estraibile	NADIA PROFESSIONAL, NADIA LIFE
Maniglione	SI, con tecnico specializzato	NADIA, BEATRICE

9. MANUTENZIONE E PULIZIA:

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.

In caso di utilizzo prolungato della poltrona, è necessario eseguire controlli a cadenza regolare (si suggerisce almeno una volta all'anno), per verificarne le funzionalità e individuare eventuali danni visibili. Si raccomanda vivamente di regolare e sostituire le parti usurate. Si consiglia di rivolgersi a un rivenditore autorizzato.

- Verificare prima di ogni utilizzo l'assenza di giochi che possano rendere instabile o apparentemente insicuro il dispositivo.
- Verificare prima di ogni utilizzo la totale integrità del rivestimento.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia ben distante dagli elementi in movimento e privo di schiacciamenti o evidenti segni di lacerazione.
- In fase di reclinazione, verificare l'assenza di rumori non usuali e la fluidità di esecuzione del movimento.

La poltrona non necessita manutenzione tranne la pulizia del rivestimento. Per effettuare la pulizia scollegare dalla rete elettrica staccando la spina dalla presa. La pulizia si può effettuare mediante aspirapolvere o, nei casi di sporco ostinato, lavando i tessuti: staccare la spina e, nei modelli sfoderabili, sfoderare le varie parti della poltrona per poi procedere al lavaggio come indicato sulle caratteristiche del tessuto.

Indicazioni specifiche per il tessuto Genova

Rimozione delle macchie più comuni

Tamponare prima possibile la macchia con carta assorbente prima di agire con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. Testare prima il prodotto su una piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni. Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito.

Attenzione: non utilizzare detergenti aggressivi, smacchiatori o sgrassatori in quanto potrebbero danneggiare il materiale

N.B.: La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e accessori (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. Movi spa si assume alcuna responsabilità in caso di migrazione di colore. Il colore può subire delle leggere variazioni in base alle diverse partite.

MARACAIBO:     

MALIBU:     

NOBILBOND:     

SWEET DREAMS:     

SILVERTEX:      

GENOVA:     



- L'esecuzione di manipolazioni del dispositivo non contemplate in questo manuale sono considerate manomissione del dispositivo con conseguente decadimento della responsabilità del fabbricante.
- Nel caso in cui le Verifiche ed i Controlli sopra citati dovessero far emergere anomalie, è severamente vietato l'utilizzo del dispositivo se non dopo aver contattato il fabbricante o il rivenditore autorizzato.
- La manutenzione straordinaria di qualsiasi tipo deve essere eseguita da personale autorizzato. Qualsiasi attività eseguita da persone non autorizzate è riconosciuta come manomissione.

10. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA:

Il dispositivo è conforme alle normative vigenti di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica. Per ridurre l'effetto delle fonti elettromagnetiche di interferenza, leggere le indicazioni seguenti.



- il dispositivo potrebbe interferire con il funzionamento di dispositivi che si trovano nello stesso ambiente e generano campi elettromagnetici.
- Per i pazienti portatori di pacemaker, consultare il medico prima di utilizzare la poltrona.
- Qualora il dispositivo eseguisse qualsiasi movimento non comandato, disconnettere la presa di corrente e contattare il fabbricante.

11. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	Nadia	Nadia Professional	Nadia XL	Nadia XXL	Nadia Comfort
Larghezza seduta	52 cm	52 cm	63 cm	63 cm	52 cm
Altezza seduta da terra	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Profondità seduta	50 cm	50 cm	51 cm	51 cm	50 cm
Larghezza totale	75 cm	75 cm	83 cm	83 cm	75 cm
Profondità totale	75 cm	75 cm	76 cm	76 cm	75 cm
Altezza poltrona	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm
Altezza poggiatesta aperto da terra	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Altezza schienale	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Profondità massima posizione letto	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm
Portata massima	120 kg	120 kg	160 kg	230 kg	120 kg
Massima inclinazione schienale	45°	45°	45°	45°	45°

Poltrone POLTRONE ITALIA

Modello	Nadia Life	Nicole	Nicole Small	Michelle	Matisse
Larghezza seduta	52 cm	52 cm	45 cm	48 cm	52 cm
Altezza seduta da terra	52 cm	46 cm	46 cm	47 cm	48 cm
Profondità seduta	50 cm	50 cm	48 cm	48 cm	50 cm
Larghezza totale	78 cm	70 cm	63 cm	80 cm	80 cm
Profondità totale	88 cm	82 cm	90 cm	82 cm	80 cm
Altezza poltrona	109 cm	106 cm	106 cm	117 cm	120 cm
Altezza poggiapiedi aperto da terra	60 cm	50 cm	59 cm	47 cm	48 cm
Altezza schienale	65 cm	73 cm	73 cm	75 cm	82 cm
Profondità massima posizione letto	155 cm	155 cm	155 cm	160 cm	180 cm
Portata massima	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Massima inclinazione schienale	45°	45°	45°	45°	45°

Poltrone POLTRONE ITALIA

Modello	Marilù	Sharon	Beatrice	Margherita
Larghezza seduta	52 cm	da 52 a 56 cm	52 cm	52 cm
Altezza seduta da terra	45 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Profondità seduta	48 cm	57 cm	50 cm	50 cm
Larghezza totale	64 cm	78 cm	78 cm	78 cm
Profondità totale	84 cm	84 cm	88 cm	88 cm
Altezza poltrona	110 cm	118 cm	104 cm	106 cm
Altezza poggiatesta aperto da terra	52 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Altezza schienale	60 cm	75 cm	65 cm	70 cm
Profondità massima posizione letto	163 cm	180 cm	160 cm	160 cm
Portata massima	120 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Basculamento	NO	15°	NO	45°
Massima inclinazione schienale	45°	45°	45°	45°

12. NOTE:



Nota bene: Il produttore si riserva il diritto di modificare senza ulteriore preavviso qualsiasi particolare, peso, misura o dato indicati in questo manuale. Tutti i numeri, le dimensioni e le unità di misura contenuti in questo manuale sono approssimativi e non costituiscono alcuna specifica.

Movi S.P.A declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

Indirizzo del fabbricante

SOCIETÀ: Movi s.p.a

Indirizzo: Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Telefono: 02 509051

E-mail: info@movirelax.com

Per ordinare le parti di ricambio, per ogni richiesta di assistenza e per ulteriori informazioni, contattare il fabbricante oppure il rivenditore autorizzato.

13. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

MOVI S.p.A.
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano Italy
MADE IN ITALY

POLTRONA NADIA PRO.E4.2M - MARE 639/Maracaibo
LIFTCHAIR NADIA Professional 2 motors, 639 Maracaibo - sea

SN xxxxxxxxxx
REF 56784639_M


Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A
120 Kg IP21
120 Kg
MD
CE

MOVI S.p.A.
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano Italy
MADE IN ITALY

POLTRONA NADIA COMFORT EDIZIONE SPECIALE 50esimo - DENIM 11/Genova
LIFTCHAIR NADIA COMFORT - 50th ANNIVERSARY SPECIAL EDITION - Denim 11 / GENOA

SN xxxxxxxxxx
REF 56712050_M

Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A
120 Kg IP21
120 Kg
MD
CE

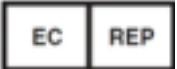	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA
	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B

Poltrone POLTRONE ITALIA

	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		INTERVALLO DI TEMPERATURA
	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO		CLASSE III DI ISOLAMENTO
	TENERE AL RIPARO DA PIOGGIA E UMIDITÀ		UMIDITÀ DI STOCCAGGIO E FUNZIONAMENTO

14. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

15. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

16. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281 F.: 02 50905217 e-mail: assistenza@movirelax.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è

stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);

- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

Poltrone POLTRONE ITALIA
Rev.2 22/12/2025

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano
www.movigroup.com
info@movirelax.com