

CABINATO ELETTRICO RHINO CON MANUBRIO COL. BIANCO E AZZURRO

Manuale d'uso BN026 WHITEBLU



Grazie per aver scelto il nostro dispositivo elettrico.

Si raccomanda di leggere attentamente tutto il contenuto di questo manuale prima di utilizzare il dispositivo, in quanto è stato progettato specificamente per il corretto utilizzo del prodotto.

PREMESSA

- Questo dispositivo è classificato come dispositivo medico per la mobilità personale destinato a supportare utenti con ridotte capacità motorie. L'utilizzo del dispositivo medico deve avvenire in conformità alla destinazione d'uso definita dal fabbricante e nel rispetto delle normative nazionali applicabili.
Qualsiasi utilizzo difforme dalle istruzioni può comportare rischi per l'incolumità dell'utente, perdita della conformità e invalidamento della garanzia.
- Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente il presente manuale. Non utilizzate questo dispositivo prima di averne compreso le caratteristiche.
- L'utente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni del Codice della Strada e delle normative locali relative ai dispositivi di mobilità elettrica destinati a persone con ridotta mobilità.
Nel Codice della Strada italiano (D.Lgs. 285/1992), i dispositivi medici per la mobilità—come carrozzine elettriche e scooter per disabili—non sono considerati veicoli. Vengono legalmente definiti "macchine per uso di invalidi" e seguono le stesse regole di circolazione dei pedoni.
- Non modificare il dispositivo
- Non guidare mai questo dispositivo sotto l'effetto di droghe o alcol.
- Non guidare in condizioni meteorologiche avverse, in caso di scarsa visibilità.
- Divieto di sovraccarico alla guida
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il dispositivo. L'utilizzo di altri caricabatterie può danneggiare la batteria.
- Il continuo miglioramento della struttura del dispositivo, della configurazione e delle prestazioni dei componenti assicura che i prodotti della nostra azienda abbiano un elevato livello di sicurezza e un'altissima qualità, ma non può evitare completamente gli errori nel manuale, Vi preghiamo quindi di comprendere laddove dovesse verificarsi un errore
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso e chiediamo gentilmente la vostra attenzione, qualsiasi dato, illustrazione o descrizione in questo manuale non deve essere utilizzato come base per i reclami. Se avete domande da porre, saremo lieti di servirvi in qualsiasi momento.

INDICE

Istruzioni di sicurezza	pag.4
Precauzioni prima di ogni viaggio	pag.4
Specifiche tecniche	pag.5
Istruzioni per la struttura	pag.6
Utilizzo del dispositivo	pag.7
Introduzione alle funzioni	pag.11
Immagine retromarcia, display	pag.15
Sedili e porte	pag.16
Tetto apribile, lunotto.....	pag.16
Ricarica	pag.17
Problemi e soluzioni	pag.19
Etichettatura e indirizzi utili.....	pag. 20

Istruzioni di sicurezza



Precauzioni prima di ogni viaggio

- Accendere il dispositivo con la chiave in dotazione, assicurarsi che tutti gli impianti elettrici funzionino correttamente, ad esempio il display, tutte le luci, clacson, ecc.
- Assicurare la corretta posizione dello specchietto retrovisore
- Assicurarsi che la pressione degli pneumatici sia perfettamente funzionante
- Assicurarsi che le viti della ruota non siano allentate o mancanti.
- Assicurarsi che i freni siano perfettamente funzionanti
- Assicurarsi che tutte le porte siano chiuse a chiave
- Assicurarsi che le cinture di sicurezza siano allacciate
- Regolare la posizione anteriore e posteriore del sedile e l'altezza del poggiatesta in modo appropriato.
- Assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica. Se la batteria è scarica, caricarla.
- Utilizzare sempre il dispositivo in modo controllato, mantenendo una velocità adeguata all'ambiente circostante.

- Tenere entrambe le mani sui comandi e mantenere una postura stabile durante la guida.
- Ridurre la velocità in prossimità di curve, rampe, porte automatiche, spazi stretti o affollati.
- NON utilizzare il dispositivo sotto l'effetto di sostanze che alterano attenzione e capacità di guida (alcol, farmaci sedativi, droghe).
- Prestare particolare attenzione ai bambini, agli ostacoli bassi, ai gradini e ai dislivelli.

Specifiche tecniche

Modello: BN026 Telaio: Acciaio

Freno: Freno a disco anteriore e posteriore

Freno a mano indipendente

Freno elettromagnetico: assente

Motore: 1200W

Display: Display multifunzione

Pneumatico: F/R 125/65-12

Batteria: Batteria al piombo da 60V 58Ah

Tempo di ricarica della batteria: circa 8 ore

Ingresso di ricarica: 220V, 50 Hz

Velocità massima: 25 KM/H

Immagine in retromarcia: presente

con Bluetooth: presente

Sedile anteriore girevole: presente

Ventilazione dell'aria: presente

Finestre elettriche nelle portiere: presente

Finestra sul tetto: apribile a mano


Lunotto posteriore: apribile a mano

Capacità di salita massima: 15°

Peso massimo di carico: 150 kg

Autonomia massima: circa 70 km, a seconda delle condizioni stradali, della capacità di carico, ecc.

Istruzioni per la struttura

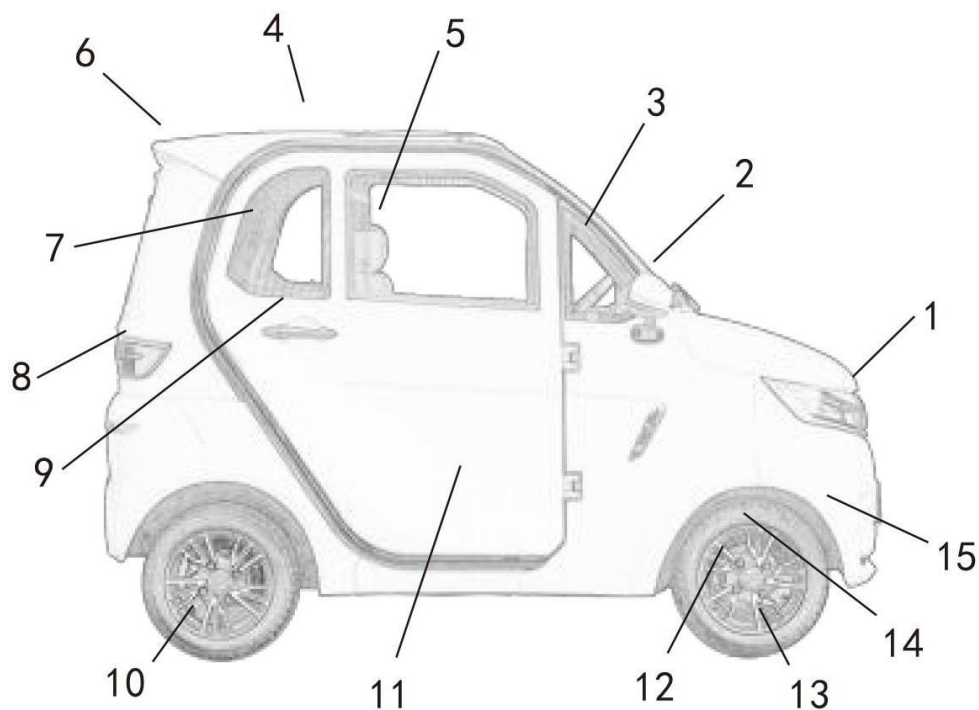

1. Combinazione di fari
2. Specchio retrovisore
3. Finestra laterale anteriore
4. Tetto
5. Sedili anteriori
6. Luce di posizione alta
7. Finestrino posteriore
8. Luce posteriore
9. Maniglia della porta
10. Pneumatico posteriore
11. Porta
12. Freno a disco anteriore
13. Pneumatico anteriore
14. Sospensione anteriore
15. Parafango anteriore

Utilizzo del dispositivo

1. Accensione e spegnimento del dispositivo



Accensione tramite chiave

Quando la chiave ruota all'interno dell'interruttore, sono presenti due posizioni

Posizione “**ON**” : accende il dispositivo.

Posizione “**OFF**” : spegne il dispositivo




Nota: quando si parcheggia il prodotto, non dimenticare di rimuovere la chiave

Accensione tramite pulsante

Per prima cosa va premuto il pulsante “apertura” sul telecomando, e quando il blocchetto della chiave (figura sotto) lampeggia con luce bianca, è possibile premerlo per accendere/spegnere lo scooter.





Accensione tramite pressione mantenuta del pulsante centrale del telecomando
(fig. sotto)

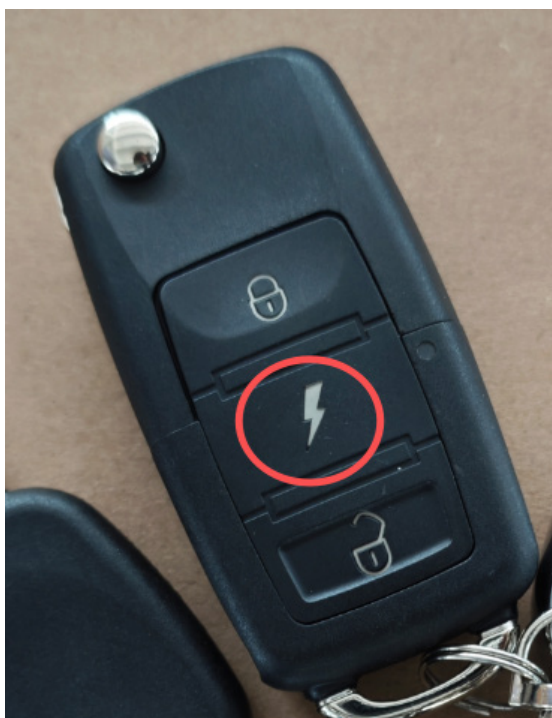

Utilizzo del telecomando dell'allarme

Premere due volte in sequenza rapida il pulsante dell'allarme del telecomando per accendere lo scooter. Per spegnere lo scooter premere il pulsante di apertura del telecomando dell'allarme.

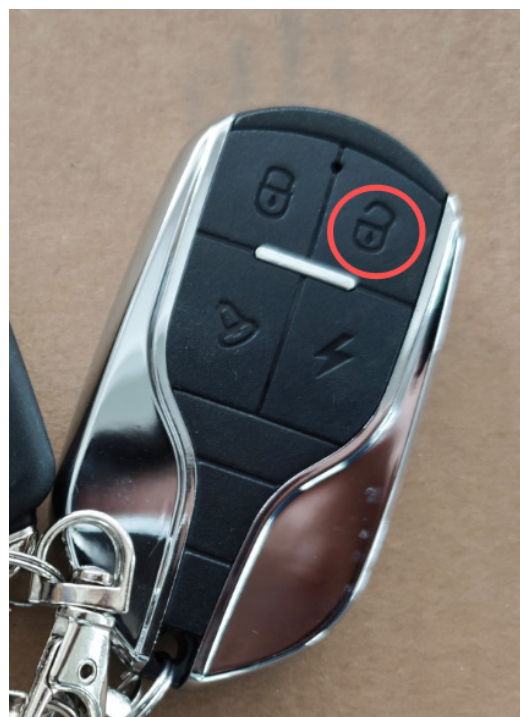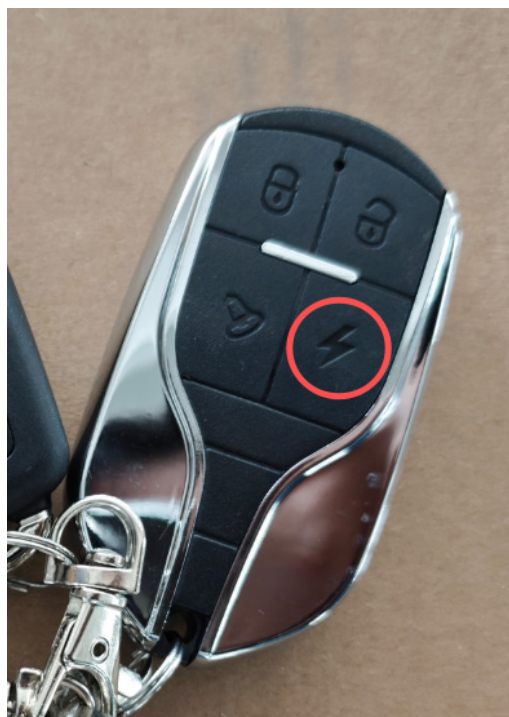

Attenzione: una volta acceso lo scooter con uno di questi metodi, lo spegnimento va effettuato nello stesso modo (chiave-chiave, telecomando allarme-telecomando allarme ecc)

2. Operazioni di avviamento del prodotto

Accendere il dispositivo, rilasciare completamente il freno a mano e verificare che non vi siano ostacoli davanti a sé prima di accelerare lentamente.

il prodotto ha tre marce: stazionamento, marcia avanti e retromarcia.



- (1) Rotazione del pomello del cambio elettronico
La "N" è in posizione di stazionamento e in questa modalità, quando si gira lentamente l'acceleratore, il prodotto non si muove ancora.



- (2) Rotazione del pomello del cambio elettronico
La "D" è la marcia avanti e in questo momento, quando si gira lentamente l'acceleratore, il prodotto viene guidato.




- (3) Rotazione del pomello del cambio elettronico
La "R" indica la retromarcia e in questo momento, quando si gira lentamente l'acceleratore, il prodotto andrà in retromarcia.

- ① utilizzare l'acceleratore del manubrio per accelerare
- ② quando è necessario decelerare, si prega di rilasciare l'acceleratore
- ③ Quando è necessario frenare, utilizzare la leva del freno destra e sinistra.
- ④ L'avanzamento e la retromarcia del prodotto sono controllati dalle marce "avanti" e "indietro", che devono essere commutate solo dopo che il dispositivo si è fermato e l'acceleratore è in stato di rilascio libero! In caso contrario, potrebbe causare incidenti! Fate attenzione!
- ⑤ È severamente vietato inserire la retromarcia mentre il dispositivo procede in avanti!
- ⑥ Quando si parcheggia, utilizzare prima la leva del freno per fermare il prodotto, quindi tirare il freno a mano di stazionamento.
- ⑦ Quando si parcheggia il dispositivo in pendenza, usare il freno a mano!
- ⑧ Freno a mano di stazionamento del prodotto (come mostrato nell'immagine a destra)

Per frenare il dispositivo, sollevare la maniglia di stazionamento con la mano destra;

se è necessario rilasciare la maniglia di stazionamento, prima tirare leggermente la maniglia verso l'alto, premere il pulsante di blocco sulla parte superiore della maniglia con il pollice, quindi portare in basso la maniglia per rilasciare il freno di stazionamento.

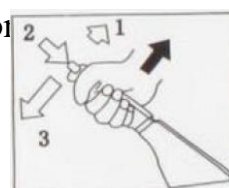

Lasciare il dispositivo solo dopo aver verificato che il freno a mano di stazionamento sia inserito!

Introduzione alle funzioni

Display del prodotto

Il tachimetro indica la velocità del dispositivo in chilometri orari (km/h), mentre il contachilometri indica il chilometraggio percorso dal dispositivo, espresso in chilometri.

1. Indicatore di direzione destro
2. Indicatore di direzione sinistro
3. Spia di stato Pronto per l'uso
4. Spia batteria
5. Radio, sistema multimediale integrato nell'area display
6. Area di visualizzazione delle marce



Simboli e istruzioni dello strumento

Articolo	Svolta a sinistra	Svolta a destra	Luce abbagliante	Fendinebbia	Spia di stato Pronto per l'uso
Simboli					PRONTO
Colore	verde	verde	Blu	Giallo	verde

Indicatori di direzione destro e sinistro

Le spie degli indicatori di direzione sono luci verdi installate sul quadro strumenti. Quando lampeggiano, indicano che gli indicatori di direzione funzionano. Premere l'interruttore delle luci di emergenza: entrambe le luci degli indicatori di direzione lampeggiano contemporaneamente.

Indicatori di direzione degli abbaglianti

La spia degli abbaglianti si accende, indicando che i fari sono in stato di funzionamento abbagliante.

Indicatori di direzione dei fendinebbia

La spia dei fendinebbia si accende, indicando che i fendinebbia sono in funzione.

Pulsanti del manubrio



Pulsante 1: interruttore di abbaglianti e anabbaglianti

Pulsante 2: interruttore dell'indicatore di direzione

Pulsante 3: interruttore del clacson

Pulsante 4: interruttore dell'acqua dei tergicristalli



Pulsante 1:interruttore delle luci

Pulsante 2:interruttore del clacson

Pulsante 3:interruttore del tergicristallo

Pulsante 4:interruttore del faro antinebbia

Riscaldatore elettrico

(1) Pulsante dell'interruttore della ventola

Quando si preme il pulsante "  ", la ventola si avvia e il soffio del vento naturale si diffonde.

(2) Interruttore di selezione della modalità di riscaldamento

Premere prima "  " e poi "PTC", a ventola e il nucleo riscaldante si mettono in funzione e il vento caldo viene soffiato fuori.



Interruttore della luce di emergenza

Per attivare questo interruttore, tutte le luci degli indicatori di direzione lampeggiano e si accendono.

Per spegnerlo, basta azionare l'interruttore!

Se il prodotto deve essere parcheggiato in una zona pericolosa a causa di un'emergenza,
è necessario accendere l'interruttore delle luci di emergenza
per avvertire gli altri conducenti!



Specchietti retrovisori

Regola gli specchietti retrovisori fino a quando non si riesce a vedere il lato del prodotto negli specchietti retrovisori.

Non regolare gli specchietti retrovisori
quando il dispositivo è in movimento per evitare incidenti.



L'interruttore principale di alimentazione

L'interruttore principale di alimentazione si trova sotto il cuscino del sedile (all'esterno).

Scollegare l'interruttore principale
quando si riparano le apparecchiature elettriche del prodotto
o in caso di cortocircuito accidentale!

Quando il dispositivo è parcheggiato accertarsi, prima di lasciarlo, che il freno a mano di stazionamento e l'interruttore di alimentazione principale siano scollegati!



Funzione radio

Descrizione dei tasti funzione multimediali:


Il pulsante 1 è l'interruttore multimediale. Premerlo a lungo per accendere e spegnere.

I pulsanti 2 e 3 servono a passare tra il contenuto precedente e successivo nelle funzioni di musica e video.

Il pulsante 4 è la funzione di modalità, che consente di passare tra radio, musica, video e Bluetooth.

I pulsanti 5 e 6 aumentano o diminuiscono il volume.

Window 7 è l'interfaccia USB.

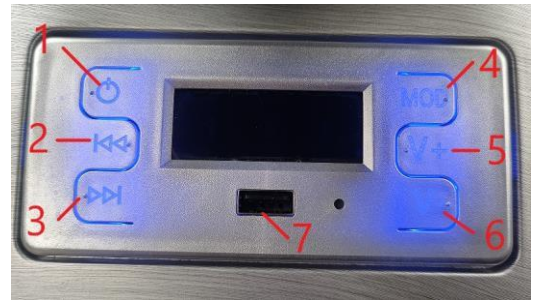

Strumento Funzione Descrizione

Per la sicurezza di guida, i video possono essere riprodotti solo quando la velocità è di 0 km/h. Se è in corso la riproduzione di un video, all'avvio il prodotto passa automaticamente alla modalità musica.

Immagine retromarcia, display multimediale

1. L'immagine di retromarcia è integrata nel display e installata sul cruscotto. La telecamera ad alta definizione si trova nella parte superiore sinistra del paraurti posteriore del dispositivo. Il sistema di immagine di retromarcia rende più intuitiva e visibile la situazione dietro il dispositivo durante la retromarcia. È una delle configurazioni più pratiche per la sicurezza in retromarcia.

2. Quando si innesta la retromarcia, il sistema di telecamere si collega automaticamente alla telecamera ad alta definizione posta sul retro del dispositivo e visualizza chiaramente la situazione dietro il prodotto sul display, consentendo di cogliere con precisione le condizioni della strada retrostante e di fare retromarcia con la stessa facilità e sicurezza con cui si procede in avanti.



Sedili e porte

Sedili

1. Il sedile anteriore può essere regolato in avanti e indietro.
2. È possibile regolare l'inclinazione del sedile.
3. Il sedile anteriore può essere azionato per ruotare
4. Allacciare le cinture di sicurezza prima di partire
5. È severamente vietato regolare il sedile durante la guida!

Finestrino della portiera

Il finestrino della portiera viene sollevato e abbassato elettricamente e l'interruttore del sollevatore elettrico del vetro è installato sulla piastra di protezione interna della portiera.

Dispositivo di chiusura

Tutte le portiere sono dotate all'interno di dispositivi di chiusura manuale (pulsanti di sollevamento cilindrici).

Quando lo sportello è chiuso, premere il pulsante di blocco e la serratura della porta si bloccherà.

Sollevando il pulsante verso l'alto, la serratura della portiera si aprirà.

Chiudere tutte le portiere prima di partire



Tetto apribile, lunotto posteriore

Il tetto apribile e il lunotto sono suddivisi in due modalità: completamente chiusi e aperti.

Quando il tetto apribile e il lunotto sono chiusi, accertarsi che la linguetta sia in posizione e non sia allentata o falsamente allacciata, cosa che danneggerebbe il tetto apribile e il lunotto.

Quando si deve aprire il tetto apribile, spostare la linguetta del tetto apribile all'indietro e verso l'alto. Questo stato è uno stato di forte ventilazione, utilizzato per rinfrescare rapidamente l'aria nel dispositivo.

Non aprire il tetto apribile subito dopo la fine della pioggia. Continuare a guidare per cinque minuti e attendere che l'acqua tra la lastra di vetro e il telaio si sia scaricata prima di aprire il tettuccio.



Stato On



Stato Off

Ricarica

1. Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito con il prodotto.

L'uso di altri caricabatterie può danneggiare la batteria o costituire un pericolo.


2. Leggere attentamente le istruzioni allegate prima della ricarica. Controllare e pulire inoltre la spina di ricarica e la presa per garantire un buon contatto.

3. Durante la ricarica, accertarsi che il caricatore sia collocato in un'area ben ventilata.

Il caricabatterie stesso non deve mai essere posizionato nelle vicinanze o coperto da materiali infiammabili come il tessuto

4. Per la ricarica, inserire prima la spina di ricarica nell'apposita sede, quindi collegare la spina di alimentazione alla rete elettrica da 220V.

5. Al termine della ricarica, scollegare prima la corrente alternata a 220 V e poi la spina di ricarica del prodotto.

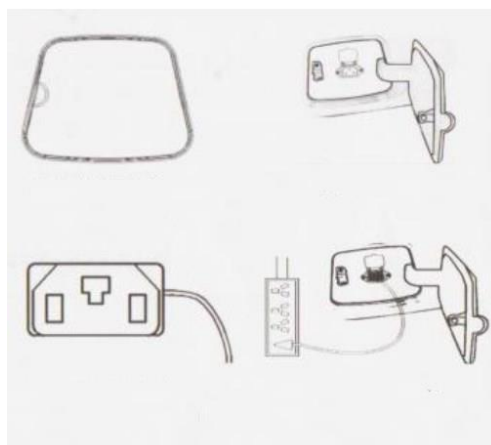

6. Non caricare all'aperto quando piove per evitare incidenti di sicurezza.
7. Assicurarsi di spegnere il motore e rimuovere la chiave prima della ricarica, non utilizzare caricabatterie elettrici ad alta tensione.
8. È consigliabile mantenere sempre la batteria completamente carica, a tutto vantaggio della sua durata. È meglio caricare quando il misuratore di potenza indica il 20% - 30%. Caricare immediatamente quando lampeggia il 10%. L'energia consumata dalla batteria nello stesso giorno deve essere reintegrata nello stesso giorno.
9. Durante la ricarica, tenere lo scooter fuori dalla portata dei bambini.
10. Quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di caricare la batteria dell'auto almeno una volta al mese, a vantaggio della durata della batteria.
11. Non tenere la batteria in carica per lungo tempo in un luogo troppo freddo o caldo. Non toccare mai il connettore di carica con le mani, le chiavi o altri oggetti metallici.
12. Non lasciare il caricabatterie in carica oltre al tempo necessario; non deve essere lasciato e collegato alla presa elettrica oltre al tempo necessario, perché potrebbe danneggiare il caricabatterie e causare incendi

AVVERTENZE PER LA PULIZIA

ATTENZIONE – RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO

Al fine di evitare danni al prodotto, rispettare le seguenti istruzioni:

- **NON lavare gli scooter cabinati in autolavaggi automatici.**
- **NON lavare gli scooter cabinati presso centri o negozi di lavaggio auto.**
- **NON utilizzare idropulitrici o getti d'acqua ad alta pressione.**
- **Lavare esclusivamente a mano, utilizzando acqua e detersivi delicati.**

Problemi e soluzioni

Problema	Causa	Soluzione
All'accensione del dispositivo non viene emesso alcun segnale.	1) Cattivo collegamento della batteria 2) L'interruttore dell'aria del prodotto è spento 3) Il controller non funziona	1) Pulizia dei collegamenti 2) Accendere l'interruttore dell'aria 3) Test del controllore
Il motore non si avvia quando si attiva l'interruttore di accensione.	1) Cattivo collegamento tra il motore e il controllore 2) Il controller non funziona	1) Controllare il collegamento 2) Test del controllore
la velocità diventa bassa quando si guida	la batteria è diventata scarica	Ricaricarlo
Improvvisa interruzione di corrente	Il problema è legato al circuito di protezione della batteria	Controllare se l'interruttore dell'aria del dispositivo è spento
La spia non si accende durante la ricarica	1) Il cavo di collegamento è allentato 2) caricabatterie danneggiato	1) Inserire saldamente la presa di corrente 2) Sostituire il caricabatterie
Altri problemi	Contatta il fornitore	Contatta il fornitore

Etichettatura



Indirizzi utili

Per segnalazioni e reclami: qualityregulatory@pec.movigroup.com

Per informazioni generali sul prodotto: infotecnichewimed@movigroup.com

Per riparazioni: satwimed@movigroup.com