

Sistema
**SISTEMA EASY XCELL 2 CON
ALLARME**
Cod. 94131040



Manuale d'uso



Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

INDICE:

1. INTRODUZIONE:	pg.3
2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:	pg.5
3. PARTI DEL COMPRESSORE:	pg.9
4. REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE:	pg.11
5. DESCRIZIONE MATERASSO EASY:	pg.12
6. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.14
7. COMPATIBILITA' ELETTRROMAGNETICA:	pg.15
8. MANUTENZIONE E PULIZIA:	pg.21
9. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.22
10. INDICAZIONE DEL NUMERO DI LOTTO:	pg.24
11. SMALTIMENTO:	pg.25
12. NOTE:	pg.26
13. CORRISPONDENZA CODICI:	pg.27
14. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.28
15. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.29

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

1. INTRODUZIONE:

Vi ringraziamo per la vostra scelta.

Il Sistema EASY XCELL 2 CON ALLARME è conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il presente manuale fa riferimento ai prodotti per la prevenzione delle lesioni da pressione sotto elencati e che dovranno essere utilizzati in combinazione tra loro negli abbinamenti descritti:

- Cod. 94131040 - **SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME (MATERASSO+COMPRESSORE)**
- Cod. 94130920 - **MATERASSO PER SISTEMI EASY XCELL 2 E AIR CELL PRO**
- Cod. 94130850 - **COMPRESSORE**

E' un Dispositivo Medico di Classe I conforme al Regolamento Europeo 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il Fabbricante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbricante per ricevere l'ultima versione aggiornata.



Attenzione!

Leggere attentamente il manuale d'uso al fine di evitare danni in fase di movimentazione e d'uso.

Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

I sistema ed i prodotti sopra riportati gonfiano e sgonfiano alternativamente metà della superficie ogni circa 6 minuti con schema alternato: un elemento gonfio, uno sgonfio. In questo modo

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

scaricano periodicamente i punti di appoggio del corpo.

Sono indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito e senza fratture instabili della colonna vertebrale. Sono composti da un compressore e da un sovra materasso ad aria e possono essere utilizzati appoggiati direttamente sopra il normale materasso e collegando lo stesso al compressore.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale. Utilizzare il dispositivo unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di tensione elettrica pericolosa che può causare pericolo di vita.



Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.

Il simbolo di sicurezza non sostituisce il testo di avvertenza a cui si riferisce. Leggere sempre le avvertenze sulla sicurezza e seguirle attentamente!

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME



- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare sempre lo stato d'integrità del dispositivo prima di utilizzarlo mediante accurata ispezione visiva. Se tale ispezione, dovesse rilevare una qualunque anomalia, il dispositivo non deve essere utilizzato.
- Non utilizzare in ambienti umidi e nelle vicinanze di vasche e lavandini.
- Non immergere o far penetrare liquidi all'interno Non tirare il cavo di alimentazione.
- Non lasciare esposto ad agenti atmosferici ed in luoghi ad atmosfera esplosiva.
- Non toccare la spina di alimentazione con mani umide o bagnate.
- In caso di caduta accidentale dell'apparecchio in acqua prima di estrarlo, togliere la spina della corrente. Una volta estratto, non utilizzarlo ma inviarlo ad un centro autorizzato per la revisione.
- Utilizzare il sistema lontano da materiali ed agenti chimici infiammabili o sensibili al calore.
- Non appoggiare al materasso riscaldatori elettrici ed Utilizzarlo solo quando asciutto.
- Disconnettere il cavo di alimentazione subito dopo l'uso.
- In caso di danneggiamento del compressore, in qualsiasi sua parte, non utilizzare lo stesso ed inviarlo ad un centro autorizzato per la riparazione.
- In caso di utilizzo da parte di pazienti diversi, è necessario prendere opportune precauzioni per evitare il verificarsi di infezioni incrociate.
- In particolare, pulire sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo, prestando particolare cura alle parti che vengono in contatto con l'utilizzatore come ad esempio le impugnature.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

- È severamente vietato fumare, utilizzare sigarette, sigari, pipe, accendini, candele, fiammiferi o qualsiasi altra fonte di calore o fiamma libera sul materasso o nelle immediate vicinanze dello stesso. Questi comportamenti possono causare l'innescio di incendi anche su materiali ignifughi.
- Utilizzare tutte le precauzioni ragionevoli per prevenire il rischio di incendio, mantenendo il materasso lontano da fonti di accensione e rispettando le istruzioni del presente manuale.
- Non utilizzare apparecchi elettrici non idonei o non certificati sul materasso, né esporre il materasso a fonti di calore diretto (stufe, lampade riscaldanti, ferri da stiro, ecc.).
- Non utilizzare in ambienti esterni o dove vengono utilizzati prodotti spray o viene somministrato ossigeno.
- Prestare particolare attenzione a tutte le situazioni che potrebbero causare la foratura o il danneggiamento degli elementi ad aria.
- Prima dell'utilizzo verificare che il piano di appoggio del letto sia pulito e privo di parti taglienti, viti sporgenti o altri oggetti che possano danneggiare il materasso. Assicurarsi inoltre che sotto il materasso non siano presenti corpi estranei.
- Durante l'uso evitare il contatto con oggetti appuntiti o taglienti (ad esempio forbici, aghi, strumenti metallici o oggetti personali). Prestare attenzione anche a unghie lunghe, gioielli, fibbie, cerniere o altri elementi rigidi che potrebbero provocare abrasioni o perforazioni.
- Durante la movimentazione o il riposizionamento del paziente evitare di trascinare persone o dispositivi sulla superficie del materasso; non appoggiare oggetti pesanti e appuntiti sul materasso.
- **N.B.:** il rispetto di queste precauzioni contribuisce a preservare l'integrità degli elementi pneumatici e il corretto funzionamento del sistema antidecubito.
- **Il carico massimo di utilizzo sicuro è di 160 Kg per il sistema Easy XCELL 2 con allarme. Tale carico non deve essere superato in nessun caso.**

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

Nota: Movi Spa declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da incendi causati da un uso improprio del materasso o comportamenti non conformi alle presenti istruzioni, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di sigarette, accendini, fiammiferi o altre fonti di calore/fiamma libera sul materasso. L'utilizzatore è tenuto a rispettare tutte le norme di sicurezza e prevenzione incendi indicate nel presente manuale.



ATTENZIONE: rispettare sempre le misure massime e minime per i materassi. Per individuare le corrette dimensioni del materasso, verificare le indicazioni presenti sul manuale del letto in uso.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

3. PARTI DEL COMPRESSORE:

Il compressore, assemblato in fase di produzione, è costituito da:

- 1) Interruttore ON/OFF
- 2) Manopola di regolazione pressione
- 3) Connettore per tubi dell'aria
- 4) Coppia di ganci - sul retro
- 5) Pulsante funzione statico/dinamico
- 6) Allarme acustico e visivo

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

Per installare il sistema seguite attentamente le indicazioni fornite in questo capitolo:

- Collocare il compressore su una superficie piana, oppure utilizzando gli appositi ganci, alla struttura del letto alla posizione "ai piedi" del paziente.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia integro e che non venga calpestato o sia d'intralcio.
- Appoggiare il sovra materasso su quello normale, con i tubi dell'aria situati nei pressi della pompa, e rimboccare i lembi (laddove presenti) al materasso solo verso la testa. Laddove presenti agli angoli elastici di fissaggio, agganciare gli stessi al materasso in uso.
- Collegare i tubi per l'aria del sovra materasso al connettore del compressore ed assicurarsi che non abbiano pieghe, tagli o siano attorcigliati impedendo così il flusso dell'aria.
- Collegare il compressore alla presa di corrente ed accenderlo, posizionando l'interruttore su "ON".
- Regolare la manopola di regolazione della pressione al massimo ed attendere 10/15 minuti che il sovra materasso si gonfi completamente e quindi rimboccare i lembi (laddove presenti) alla posizione "ai piedi".
- Si consiglia di utilizzare un lenzuolo, o se necessario una traversa per incontinenza, sopra il sovra materasso antidecubito evitando di tenderli eccessivamente per non vanificare l'efficacia del sistema.
- Stendere il paziente e regolare la pressione, in accordo con il paziente e considerando il suo peso, in modo da assicurare il massimo del comfort con la massima efficacia. Per sgonfiare il materassino portare l'interruttore del compressore in posizione "OFF" e disinserire il cavo di alimentazione. Scollegare i tubi e far defluire l'aria.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME


4. REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE:



Raccomandiamo, all'accensione del compressore, di portare la manopola di regolazione della pressione al massimo per 20÷30 minuti.

Quindi l'utilizzatore potrà trovare una regolazione confortevole o chiedere il consiglio di un operatore sanitario che considerando il peso del paziente potrà trovare il livello adeguato.

La situazione idonea si ottiene quando vi è uno spazio di 2 dita tra la cella sgonfia e i glutei del malato (circa 4 cm).

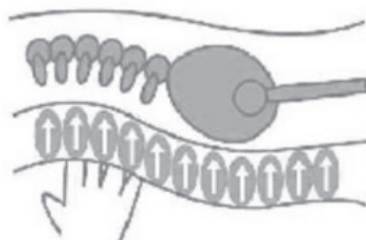

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

5. DESCRIZIONE MATERASSO EASY:

MATERASSO PER SISTEMI EASY XCELL 2 E AIR CELL PRO

Cod. 94130920:

Sistema ad elementi trasversali a riempimento d'aria in PVC,

La caratteristica distintiva del sovramaterasso a pressione alternata con pompa è costituita dalle celle (o bolle) che si gonfiano e si sgonfiano in maniera alternata, determinando un cambiamento ciclico dei punti di contatto con l'epidermide e consentendo così di scaricare le pressioni in un tempo definito.

ATTENZIONE: rispettare sempre le misure massime e minime per i materassi. Per individuare le corrette dimensioni del materasso, verificare le indicazioni presenti sul manuale del letto in uso.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

TABELLA Problema-Soluzione:

PROBLEMA:	SOLUZIONE:
Il compressore non funziona	1)Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di rete. 2)Premere e portare l'interruttore d'accensione su "ON". Se l'indicatore dell'interruttore è acceso e la pompa non lavora contattate il servizio assistenza o il rivenditore locale. Se l'indicatore dell'interruttore è spento provate ad inserire meglio il cavo di alimentazione nella presa di rete o cambiate presa. Se il problema persiste contattate il servizio assistenza o il rivenditore locale.
Pressione bassa	Per una prima verifica, regolate al massimo la manopola di regolazione della pressione ed attendete 20÷30 minuti. Verificate che i tubi di connessione possano portare liberamente l'aria al materasso, siano collegati e non siano attorcigliati o piegati. Verificate che il materasso od i tubi non abbiano fori o perdite d'aria. In questi casi riparare o sostituire.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

6. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Portata	160 Kg
Dimensioni e pesi sopra materassi	B01: 200x86x11cm/2,5 Kg
Classe di protezione elettrica compressore e tipologia di parte applicata	Classe II; AP/APG NO; IPX0; Tipo B
Ciclo compressione	6 min ciclo completo
Pressione	45-110mmHg
Alimentazione compressore	CA 220-240V 50Hz; 7W
Fusibile compressore	1A
Dimensioni e peso compressore (L x l x H)	26,5 x 12,5 x 10,5 cm
Condizioni ambientali di utilizzo e stoccaggio	Temperatura: Funzionamento 10~35°C (50°F~95°F) ambientali Conservazione -15~50°C (5°F ~122°F) Trasporto -15~70°C (5°F ~158°F) Umidità: Funzionamento 20%~80% non condensata Conservazione 10%~90% non condensata

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

7. COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA:

Indicazioni e dichiarazione del fabbricante Immunità elettromagnetica			
Il Sistema EASY XCELL 2 è destinato all'utilizzo in ambiente elettromagnetico indicato qui di seguito. L'utente deve accertarsi che sia utilizzato in un ambiente elettromagnetico consono.			
Test di immunità	Livello test IEC 60601	Conformità	Ambiente elettromagnetico: indicazioni
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2	6 kV contatto 8 kV aria		La pavimentazione dovrebbe essere costituita da materiali non conduttori. L'umidità relativa dovrebbe essere almeno del 30%.
Picco tensione IEC 61000-4-4	2 kV per alimentazione di rete 1 kV in ingresso/uscita		La qualità dell'alimentazione di rete dovrebbe essere quella di un ambiente commerciale od ospedaliero tipico.
Impulso IEC 61000-4-5	1 kV differenza 2 kV modo comune		La qualità dell'alimentazione di rete dovrebbe essere quella di un ambiente commerciale od ospedaliero tipico.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

Indicazioni e dichiarazione del fabbricante Immunità elettromagnetica		
Caduta tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione dell'alimentazione IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % caduta su UT) per 0,5 cicli 40 % UT (60 % caduta su UT) per 5 cicli 70 % UT (30 % caduta su UT) per 25 cicli <5 % UT(>95 % caduta su UT) per 5 secondi	La qualità dell'alimentazione di rete dovrebbe essere quella di un ambiente commerciale od ospedaliero tipico. Se l'utente del "Materasso a pressione alternata con pompa" necessita di un funzionamento continuo durante le interruzioni dell'alimentazione di rete, si consiglia una fonte di alimentazione non passibile di interruzione o una batteria.
Campo magnetico della frequenza di rete (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	Il campo magnetico della frequenza di rete dovrebbe essere quello di un ambiente commerciale od ospedaliero tipico.
NOTA UT è la tensione della rete di alimentazione prima dell'applicazione del test.		

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

Indicazioni e dichiarazione del fabbricante Immunità elettromagnetica			
Il Sistema EASY XCELL 2 è destinato all'utilizzo in ambiente elettromagnetico indicato qui di seguito. L'utente deve accertarsi che sia utilizzato in un ambiente elettromagnetico consono.			
Test di immunità	Livello test IEC 60601	Conformità	Ambiente
RF condotta IEC 61000-4-6	3 Vrms per 150 kHz a 80 MHz	3 V	I dispositivi per la comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili e tutte le loro parti, compresi i cavi, non devono essere utilizzati a una distanza inferiore alla distanza di separazione calcolata dall'equazione pertinente alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione consigliata: $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ da 80MHz a 800MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ da 800MHz a 2,5 GHz dove P è la potenza di uscita nominale del trasmettitore espressa in watt (W) in base ai dati del fabbricante, e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m). L'intensità di campo emessa da trasmettitori in radiofrequenza fissi, determinata mediante rilevamenti elettromagnetici in loco, a deve essere inferiore al livello di
RF irradiata IEC 61000-4-3	3 V/m per 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

Indicazioni e dichiarazione del fabbricante Immunità elettromagnetica			
			conformità per ogni gamma di frequenza.b Potrebbero verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi recanti il seguente simbolo: [dispositivo_acustico.jpeg]

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di frequenza più elevata.

NOTA 2 Le indicazioni qui riportate potrebbero non essere pertinenti in ogni situazione. La propagazione elettromagnetica è influenzata da fenomeni di assorbimento e riflessione da strutture, oggetti e persone.

- a) L'intensità di campo emessa da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni (cellulari/senza fili) e radiomobili terrestri, trasmettenti amatoriali, emittenti radiofoniche AM e FM ed emittenti televisive, non possono essere previste con precisione su base teoretica. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori in radiofrequenza fissi, si deve prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato il Sistema Easy Xcell 2 con allarme supera il livello di conformità per le radiofrequenze pertinente indicato, è necessario verificare che il Sistema Easy Xcell 2 con allarme funzioni normalmente. Se si nota un funzionamento anomalo, potrebbero essere necessarie ulteriori misure, come il riorientamento o la collocazione in altro luogo.

- b) Oltre la gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, l'intensità di campo dovrebbe essere inferiore a [V1] V/m.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

Indicazioni e dichiarazione del fabbricante Immunità elettromagnetica		
Il Sistema EASY XCELL 2 è destinato all'utilizzo in ambiente elettromagnetico indicato qui di seguito. L'utente deve accertarsi che sia utilizzato in un ambiente elettromagnetico consono.		
Test emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico: indicazioni
Emissioni in RF CISPR 11	Gruppo 1	Il Sistema Easy X-CELL utilizza energia in radiofrequenza unicamente per il funzionamento interno, pertanto le emissioni in radiofrequenza sono molto basse ed è improbabile che provochino interferenze a dispositivi elettronici situati nelle vicinanze.
	Classe B	Il Sistema Easy X-CELL è idoneo all'utilizzo in qualsiasi ambiente, inclusi gli ambienti domestici e quelli direttamente collegati alla rete pubblica di erogazione di energia elettrica in bassa tensione che alimenta gli edifici a uso abitativo.
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Classe A	Il Sistema Easy X-CELL è idoneo all'utilizzo in qualsiasi ambiente, inclusi gli ambienti domestici e quelli direttamente collegati alla rete pubblica di erogazione di energia elettrica in bassa tensione che alimenta gli edifici a uso abitativo.
Sfarfallio/Variazioni di tensione IEC 61000-3-3	Conforme	Il Sistema Easy X-CELL è idoneo all'utilizzo in qualsiasi ambiente, inclusi gli ambienti domestici e quelli direttamente collegati alla rete pubblica di erogazione di energia elettrica in bassa tensione che alimenta gli edifici a uso abitativo.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

Distanze di separazione consigliate tra i dispositivi per la comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili e il Sistema Easy Xcell 2 con allarme			
Il Sistema Easy XCELL 2 è destinato all'utilizzo in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi in radiofrequenza irradiati siano controllati. L'utente del "Materasso a pressione alternata con pompa" può contribuire a evitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza di separazione minima tra i dispositivi per la comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili (trasmettitori) e il Sistema Easy XCELL 2 in base alla potenza di uscita nominale massima del trasmettitore, facendo riferimento alla tabella qui di seguito illustrata.			
	Distanza di separazione in base alla frequenza del Trasmettitore m		
Potenza di uscita nominale massima del trasmettitore W	da 150 kHz a 80 MHz [formula1_air2.jpeg]	da 80 MHz a 800 MHz [formula2_air2.jpeg]	da 800 MHz a 2,5 GHz [formula3_air2.jpeg]
0,01	0.12		0.23
0.1	0.38		0.73
1	1.2		2.3
10	3.8		7.3
100	12		23
Per i trasmettitori la cui potenza di uscita nominale massima non sia presente nella tabella, la distanza di separazione consigliata d in metri (m) può essere calcolata dall'equazione pertinente alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza di uscita nominale massima del trasmettitore espressa in watt (W) in base ai dati del fabbricante.			
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di frequenza più elevata.			
NOTA 2 Le indicazioni qui riportate potrebbero non essere pertinenti in ogni situazione. La propagazione elettromagnetica è influenzata da fenomeni di assorbimento e riflessione da strutture, oggetti e persone.			

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

8. MANUTENZIONE E PULIZIA:

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.



Prima di effettuare interventi sul compressore scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.

Verificare regolarmente l'integrità del sistema.

COMPRESSORE :

Pulire l'involucro con un panno inumidito con detergente non abrasivo,

Non utilizzare detergenti contenenti ipercarbonati o fenoli.

Non utilizzare prodotti spray direttamente sul dispositivo ma spargete il prodotto su di un panno.

Nell'effettuare queste operazioni assicuratevi che non penetrino liquidi all'interno del compressore.

SOVRAMATERASSI:

Si raccomanda il lavaggio a mano dei sovra materassi a una temperatura non superiore ai 40° C.

Sono vietati il lavaggio in lavatrice e l'utilizzo di macchinari per l'asciugatura



Nel caso di utilizzo su pazienti diversi, provvedere sempre a pulire ed igienizzare il sistema.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

9. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME
EASY XCELL 2 SYSTEM WITH ALARM

LOT XXXXX

REF 94131040

MD


20XX 

Input: 230V~ 50/60Hz



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
 Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

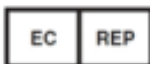

	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA
	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

10. INDICAZIONE DEL NUMERO DI LOTTO:

Si vedano di seguito le etichette riportanti il numero di lotto del dispositivo acquistato.

SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME
EASY XCELL 2 SYSTEM WITH ALARM

LOT XXXXX

REF 94131040

MD

20XX 

Input: 230V~ 50/60Hz



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA



COMPRESSORE CON ALLARME PER SISTEMA EASY 2
AIR PUMP WITH ALARM FOR EASY 2 SYSTEM

LOT XXXXX

REF 94130850

MD

20XX 

Input: 230V~ 50/60Hz



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA



MATERASSO PER SISTEMI EASY XCELL 2 E AIR CELL PRO
MATTRESS FOR EASY XCELL 2 AND AIR CELL PRO SYSTEMS

LOT XXXXX

REF 94130920

MD

20XX 

160 kg 



MOVI S.p.A.
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA



Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

11. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati con i rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni come da D.Lgs 151/2005.

In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

12. NOTE:

- Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un tecnico competente, in quanto è necessaria una buona conoscenza dell'oggetto da ispezionare. Se tale ispezione dovesse rilevare un qualsiasi difetto o segno di usura o guasto, che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, esso deve rimanere, fuori servizio, fino alla riparazione,
- Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA — Via Dione Cassio, 15— 20138 Milano

Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

13. CORRISPONDENZA CODICI:

Il presente manuale fa riferimento al seguente sistema e accessori/ricambi:

- Cod. 94131040 - **SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME (MATERASSO + COMPRESSORE)**
- Cod. 94130920 - **MATERASSO PER SISTEMI EASY XCELL 2 E AIR CELL PRO**
- Cod. 94130850 - **COMPRESSORE**



Movi Spa non garantisce il funzionamento e la sicurezza del sistema in caso di utilizzo di componentistiche non originali.

14. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

15. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail:
satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON ALLARME

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com



www.movigroup.com

Manuale d'uso originale

**Sistema SISTEMA EASY XCELL 2 CON
ALLARME**

Rev.10 29/05/2026

Movi SpA

Via Dione Cassio, 15—Milano—Italy