

MANUALE D'USO

DEAMBULATORE FISSO "DELUXE"

PUSH-BUTTON

Cod. 15651500 - Deambulatore "Deluxe" Push-Button

Cod. 15651600 - Con ruote fisse da 3"

Cod. 15651700 - Con ruote piroettanti da 3"




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INTRODUZIONE:	pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO:	pg.4
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:	pg.6
4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:	pg.8
5. MONTAGGIO E UTILIZZO:	pg.8
6. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:	pg.10
7. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.11
8. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.13
9. PULIZIA E DISINFEZIONE:	pg.14
10. MANUTENZIONE:	pg.15
11. NOTE:	pg.16
12. SMALTIMENTO:	pg.17
13. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.17
14. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.18

1. INTRODUZIONE:

Gentile Cliente,

desideriamo ringraziarla per l'acquisto del Deambulatore Fisso Deluxe Push-button e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono concepiti per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza.

Il Deambulatore Fisso Deluxe Push-button, classificato come dispositivo medico di classe I in conformità Regolamento Europeo MDR del 5 Aprile 2017.

Il presente manuale fornisce informazioni utili all'acquirente e all'utilizzatore per tutte le funzioni che garantiscono un utilizzo quotidiano, pratico e sicuro di questo deambulatore. Si consiglia di usare questo manuale come guida pratica e di conservarlo vicino al deambulatore.

Il Fabbricante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbricante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

Il presente manuale fa riferimento al seguente deambulatore:

- Cod. 15651500 - DEAMBULATORE FISSO "DELUXE" PUSH-BUTTON
- Cod. 15651600 -DEAMBULATORE FISSO "DELUXE" PUSH-BUTTON con ruote fisse da 3"
- Cod. 15651700 -DEAMBULATORE FISSO "DELUXE" PUSH-BUTTON con ruote piroettanti da 3"

2. DESTINAZIONE D'USO:

I deambulatori MOVI sono indicati per fornire un sostegno alla mobilità a persone con difficoltà motorie.



Prima di utilizzare il deambulatore:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni al deambulatore a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente il deambulatore.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (gomme, puntali ecc.) e del serraggio della viteria.
- É vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano il deambulatore devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo dei deambulatori MOVI non è indicato a:

- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso.
- Il deambulatore non deve essere utilizzato da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.
- Il deambulatore non può essere utilizzato da pazienti che presentano una funzionalità compromessa delle mani e/o delle braccia.

COMPLICAZIONI

Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

Il Deambulatore Fisso Deluxe Push-button è un prodotto accuratamente studiato. Assicurarsi, pertanto, di leggere l'intero manuale. Utilizzare il Deambulatore Fisso Deluxe Push-button unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.



Movi S.P.A - declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un utilizzo improprio del dispositivo o da un utilizzo diverso da quanto indicato nel presente manuale.



- Non utilizzare il dispositivo prima di avere letto attentamente il manuale d'uso.
 - Il dispositivo deve essere utilizzato nelle condizioni di fornitura e non può essere modificato in alcun modo.
 - Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi dalla destinazione d'uso prevista.
 - Verificare lo stato del dispositivo prima di ogni utilizzo. Se si dovessero riscontrare segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.
 - Fare controllare periodicamente lo stato del dispositivo e di tutti i suoi componenti da un centro tecnico autorizzato. Se si dovessero riscontrare segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.
 - Per eventuali riparazioni, contattare il centro tecnico autorizzato.
 - Qualora puntali o ruote risultassero usurati, provvedere alla sostituzione.
 - Accertarsi che nessuna parte del corpo (ad es. dita) né indumenti, coperte ecc. vengano intrappolati nelle parti mobili del dispositivo: **PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!**
 - Non utilizzare il deambulatore su superfici sconnesse o pendenze. Si consiglia l'uso su superfici dove tutte e quattro le gambe possano poggiare a terra.
 - Non utilizzare il deambulatore per scendere le scale o su scale mobili.
 - Prestare estrema attenzione all'utilizzo del dispositivo su superfici scivolose e/o bagnate.
 - Se il deambulatore viene utilizzato per alzarsi da una posizione seduta, accertarsi che sia stabile e non possa ribaltarsi quando ci si appoggia.
 - Tenere il deambulatore lontano dalla portata dei bambini.
 - Verificare che il deambulatore sia consegnato integro e conservarlo imballato lontano da qualsiasi fonte di calore.
 - Per un utilizzo corretto del dispositivo, consultare sempre il medico e/o il terapeuta.
-
- **Il carico massimo di sicuro utilizzo è di 100 Kg. Non superare mai tale carico.**

4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Il Deambulatore Fisso Deluxe Push-button può essere utilizzato da chi ha necessità di un ausilio o un sostegno per camminare. Il Deambulatore è regolabile in altezza ed è dotato di puntali antiscivolo in gomma naturale. La sua struttura pieghevole, realizzata interamente in alluminio, lo rende leggero e maneggevole.

5. MONTAGGIO E UTILIZZO:

Il Deambulatore Fisso Deluxe Push-button può essere utilizzato a tempo indeterminato fino a quando mantiene la propria integrità e non sono presenti segni di usura.

Il Deambulatore si presenta smontato, composto da un blocco impugnatura e quattro tubolari dotati di puntale o ruote.

Per montarlo inserire nel blocco impugnatura i puntali o le gambette dotate di ruote, regolando l'altezza desiderata.

Apertura

Per aprire il Deambulatore, ruotare le parti laterali verso l'esterno finché non scatta in posizione con un "clic".

Chiusura

Per chiudere il Deambulatore, premere il bottone posizionato sulla barra orizzontale e ruotare le parti laterali verso l'interno.



Attenzione! Prestare attenzione alla posizione delle dita in fase di apertura e chiusura del Deambulatore. Pericolo di schiacciamento!

Regolazione dell'altezza

Premere il pulsante a molla posizionato su ciascuna gamba del Deambulatore, come illustrato nella fig. 1. Allungare o accorciare le gambe secondo le necessità dell'utilizzatore.

Fare scattare nuovamente il pulsante per fissare il Deambulatore all'altezza desiderata.

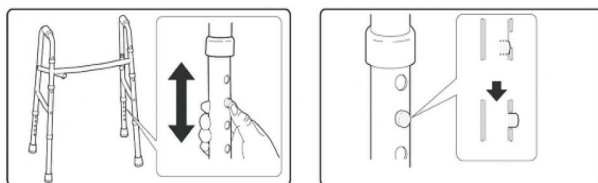


Fig. 1

Utilizzo del deambulatore

L'impugnatura del deambulatore deve essere regolata all'altezza del polso, misurata mantenendo il braccio teso lungo i fianchi.

Durante l'appoggio i gomiti devono mantenere un angolo compreso tra i 20° e i 30°.

Per camminare, se provvisto di 4 puntali, bisogna sollevare il deambulatore, appoggiarlo in avanti e quindi, assicurandosi che tutti e 4 i puntali siano correttamente appoggiati a terra, procedere un passo alla volta.

Se invece il deambulatore è provvisto di ruote spingerlo in avanti e quindi, assicurandosi che tutte e 4 le gambe siano correttamente appoggiate a terra, procedere un passo alla volta.

Per una corretta regolazione, affidarsi al tecnico ortopedico o a un professionista sanitario.

Attenzione!: non spostare mai il deambulatore troppo distante dal corpo.
RISCHIO DI CADUTA O DI RIBALTAMENTO!

6. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

I deambulatori MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

DEAMBULATORE FISSO "DELUXE" PUSH-BUTTON

7. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

DEAMBULATORE FISSO "DELUXE" PUSH-BUTTON FIXED WALKER "DELUXE" PUSH-BUTTON

REF 15651500 MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXXX

20XX

100 kg



DEAMBULATORE FISSO "DELUXE" PUSH-BUTTON CON RUOTE FISSE DA 3" FIXED WALKER "DELUXE" PUSH-BUTTON W/2 3" FIXED WHEELS

REF 15651600 MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXXX

20XX

100 kg



DEAMBULATORE FISSO "DELUXE" PUSH-BUTTON CON RUOTE PIROETTANTI DA 3" FIXED WALKER "DELUXE" PUSH-BUTTON W/2 3" SWIVELLING WHEELS

REF 15651700 MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXXX

20XX

100 kg



	FABBRICANTE	EC REP	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
--	-------------	--------	---

DEAMBULATORE FISSO "DELUXE" PUSH-BUTTON

	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA
	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

8. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Codice	15651500	15651600	15651700
Altezza	83 - 101 cm	83 - 101 cm	83 - 101 cm
Profondità	47 cm	48 cm	49 cm
Largezza	56 cm	57 cm	58 cm
Larghezza da chiuso	9 cm	9 cm	9 cm
Peso	2,6 kg	2,7 kg	2,9 kg
Potata massima	100 kg	100 kg	100 kg

Accessori e ricambi

Cod. 15651091 - Ruote fisse diam. 3" - Coppia

Cod. 15651092 - Ruote piroettanti diam. 3" - Coppia

Cod. 15651093 - Ruote 3" + puntale/freno deambulatore - Coppia

Cod. 15651093/1 - Puntale/freno - Coppia

Cod. 15651094 - Puntali per deambulatore - Coppia

Cod. 15651095 - Ruote fisse diam. 5" - Coppia

Cod. 15651096 - Ruote piroettanti diam. 5" - Coppia

9. PULIZIA E DISINFEZIONE:

La pulizia e la disinfezione sono aspetti fondamentali. In generale, una pulizia regolare del Deambulatore in caso di utilizzo da parte di un singolo paziente è sufficiente in termini di igiene.



Ogni volta che il Deambulatore viene utilizzato da un nuovo paziente, deve essere obbligatoriamente pulito e disinfettato mediante strofinamento accurato!

Detergere con acqua tiepida e sapone neutro. Non utilizzare solventi, sostanze corrosive o spugne abrasive. Asciugare con un panno morbido e asciutto.

10. MANUTENZIONE:



In seguito a ripetute operazioni di trasporto, montaggio, smontaggio, utilizzo errato e impiego per un lungo periodo di tempo, non è da escludere che si possano verificare danni, difetti e usura. Questi problemi possono rappresentare un pericolo per la sicurezza se non vengono riconosciuti e risolti in tempo!

Pertanto si raccomanda di far controllare almeno ogni 2 anni l'idoneità d'uso del deambulatore da un centro tecnico autorizzato. Si intende che l'ispezione periodica preveda:

- Il controllo della struttura portante del deambulatore, incluse le parti di collegamento e i punti di saldatura
- Laddove presenti, il controllo di montaggio e funzionamento delle ruote.
- La verifica delle parti soggette a usura, e in modo particolare dei puntali.

In caso di riparazioni, devono essere utilizzati esclusivamente ricambi e accessori originali.

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.



Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del prodotto in caso di utilizzo di componenti/accessori non originali.

11. NOTE:



Nota bene: Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA - Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

12. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

13. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

14. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica
via Dione Cassio, 15
20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A divisione Wimed - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

DEAMBULATORE FISSO "DELUXE" PUSH-BUTTON

Cod. 15651500 - Deambulatore "Deluxe" Push-Button

Cod. 15651600 - Con ruote fisse da 3"

Cod. 15651700 - Con ruote piroettanti da 3"

Rev.1 11/07/2025



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com