


Cuscino antidecubito in fibra di
silicone

EASY SEAT Fibre

Cod. 94004051

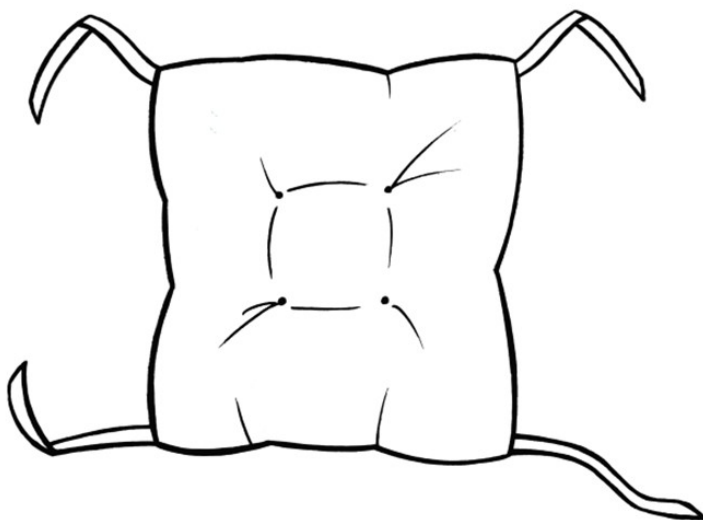

Manuale d'uso



INDICE:

1. INTRODUZIONE:	pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO:	pg.4
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:	pg.5
4. PULIZIA E DISINFEZIONE:	pg.8
5. MANUTENZIONE:	pg.8
6. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.9
7. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.11
8. NOTE:	pg.11
9. SMALTIMENTO:	pg.12
10. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.12
11. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.13

1. INTRODUZIONE:

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarla per l'acquisto del cuscino EASY SEAT Fibre e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Il cuscino EASY SEAT Fibre, classificato come dispositivo medico di classe I, è conforme al Regolamento Europeo 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il presente manuale fornisce informazioni utili all'acquirente e all'utilizzatore per tutte le funzioni che garantiscono un uso quotidiano, pratico e sicuro di questo prodotto.

Si consiglia di usare questo manuale come guida pratica e di conservarlo vicino al dispositivo.

Il Fabbrikante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbrikante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

2. DESTINAZIONE D'USO:

Cuscino antidecubito.

La prima misura preventiva dalle lesioni da pressione consiste nel cambiare i punti di appoggio del corpo sul cuscino, in media ogni tre ore. Quando il corpo si trova in posizione seduta su un cuscino, sarebbe opportuno sollevarsi regolarmente ogni volta che ciò è possibile per poter limitare la compressione troppo prolungata dei vasi rispetto alle protuberanze ossee e per permettere l'irrorazione dei tessuti.

I cuscini EASY SEAT Fibre sono costituiti da materiali che assicurano l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio, limitando i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta e valutati a Basso Rischio.

Sono idonei all'utilizzo su carrozzelle, sedie o letti. Assumono la proprietà principale del materiale di imbottitura in fibra cava siliconata: la resilienza, la capacità cioè di ritornare alla forma originaria anche dopo forte sollecitazione. Un manufatto realizzato con questo materiale risulta molto morbido ma allo stesso tempo garantisce portanza ed elasticità.

Gli ausili, realizzati con una federa per l'80% di poliestere e 20% di cotone e riempiti con questa particolare fibra, isolano dal caldo e dal freddo poiché la fibra cava ha anche un elevato potere di coibentazione termica.

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale. Utilizzare il dispositivo unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.



Divieto di fumare e utilizzare fiamme libere

Questo simbolo indica il divieto di accendere sigarette o altre fonti di fuoco, come ad esempio accendini o fiammiferi perché sussiste il pericolo d'incendio.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale del dispositivo e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.
- Qualora il dispositivo risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.

Il simbolo di sicurezza non sostituisce il testo di avvertenza a cui si riferisce. Leggere sempre le avvertenze sulla sicurezza e seguirle attentamente!



Attenzione!



Leggere attentamente il manuale d'uso al fine di evitare danni in fase di utilizzo del dispositivo.

Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per i danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.



- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.
- Il cuscino è provvisto di lacci di fissaggio agli angoli. Dopo il definitivo posizionamento, eliminare la parte in eccesso.
- Per motivi igienici, l'utilizzo del dispositivo per la prevenzione delle lesioni da pressione dovrebbe essere riservato a un unico paziente.
- In caso di incontinenza, procedere alla pulizia del cuscino.
- L'utilizzo del cuscino per una parte del corpo diversa da quella prevista (regione glutea e sacrale) è assolutamente sconsigliato.
- Non esporre alla luce diretta del sole.
- Prodotto confezionato in doppio involucre, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Verificare periodicamente che la fodera non risulti strappata o abbia cedimenti.
- Controllare sempre lo stato d'integrità del dispositivo prima di utilizzarlo mediante accurata ispezione visiva. Se tale ispezione, dovesse rilevare una qualunque anomalia, il dispositivo non deve

Cuscino antidecubito in fibra di silicone EASY SEAT Fibre

essere utilizzato.

- **La capacità massima di portata è di 115 kg. Non superare mai il peso indicato!**



- Utilizzare il dispositivo lontano da materiali ed agenti chimici infiammabili o sensibili al calore.
- È severamente vietato fumare, utilizzare sigarette, sigari, pipe, accendini, candele, fiammiferi o qualsiasi altra fonte di calore o fiamma libera sul dispositivo o nelle immediate vicinanze dello stesso. Questi comportamenti possono causare l'innesco di incendi anche su materiali ignifughi.
- Non utilizzare apparecchi elettrici non idonei o non certificati sul dispositivo, né esporre lo stesso a fonti di calore diretto (stufe, lampade riscaldanti, ferri da stiro, ecc.).
- Utilizzare tutte le precauzioni ragionevoli per prevenire il rischio di incendio, mantenendo il dispositivo lontano da fonti di accensione e rispettando le istruzioni del presente manuale.

Nota: Movi Spa declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da incendi causati da un uso improprio del dispositivo o comportamenti non conformi alle presenti istruzioni, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di sigarette, accendini, fiammiferi o altre fonti di calore/fiamma libera sul dispositivo. L'utilizzatore è tenuto a rispettare tutte le norme di sicurezza e prevenzione incendi indicate nel presente manuale.

Cuscino antidecubito in fibra di silicone EASY SEAT Fibre

4. PULIZIA E DISINFEZIONE:

Pulizia



Lavare con un ciclo delicato fino a una temperatura massima di 30°C.

Non candeggiare. Non stirare.

Non lavare a secco. Non asciugare a macchina.

5. MANUTENZIONE:

Composizione

Imbottitura: fibra cava siliconata poliestere 100% HSC.

Fodera esterna: cotone 100% sanforizzato.

Conservazione

Conservare il cuscino in posizione orizzontale.

Non esporre a fonti di calore.

Per una lunga durata, conservare in ambiente secco e temperato, lontano dalla luce diretta e da fonti di calore.

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.

Cuscino antidecubito in fibra di silicone EASY SEAT Fibre

6. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

EASY SEAT Fibre

Cuscino Antidecubito in Fibra di Poliestere
Antidecubitus Cushion with Polyester Fibres

REF 94004051

LOT XXXXXXXXX

 20XX

 115 Kg

MOVI S.p.A.

Via Dione Cassio, 15
20138 Milano, Italy

MADE IN CHINA



Vietato fumare e
usare fiamme libere

ISTRUZIONI per il LAVAGGIO WASHING LABEL



	FABBRICANTE	<table><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
EC	REP				

Cuscino antidecubito in fibra di silicone EASY SEAT Fibre

	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA
	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

7. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni	Codice articolo	Peso cuscino	Peso max paziente	Densità
45x41x9,5 cm	94004051	0,5 kg	115 kg	n.d.

8. NOTE:



Nota bene: Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA - Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

9. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati con i rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base al D.Lgs 151/2005.

In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

10. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

11. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail:
satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movì S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movì S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com



www.movigroup.com

Manuale d'uso originale

Cuscino antidecubito in fibra di silicone
EASY SEAT Fibre
Rev.3 28/07/2025

Movi SpA

Via Dione Cassio, 15—Milano—Italy