

SISTEMA ANTIDECUBITO MID CURE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

MID CURE - versione sovramaterasso - Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di pazienti ad alto rischio di ulcere da pressione ovvero pazienti con lesioni fino al III-IV stadio. Il sistema è composto da un compressore digitale e da un materasso a riempimento d'aria dotato di cinghie elastiche per fissaggio al letto. La doppia funzione statico/alternate permette di scaricare i picchi di pressione responsabili della occlusione del distretto precapillare e prevenire la genesi delle lesioni da pressione. Il flusso continuo di aria al di sotto della copertura assicura la traspirabilità e previene la macerazione cutanea. Copertura bielastica, impermeabile, traspirante e trattata contro microrganismi.

Disponibile come accessorio il materassino in poliuretano cod. 94003850 (per una versione versione MR)

DESTINAZIONE D'USO

Il sistema MID CURE di Movi è indicato per l'utilizzo preventivo con pazienti ad alto rischio di sviluppare lesione da decubito. Può essere utilizzato anche come coadiuvante della terapia di decubiti esistenti sino allo stadio 3°-4° (secondo EPAUP).

CONTROINDICAZIONI/PRECAUZIONI D'USO

Le condizioni dei pazienti per i quali l'applicazione di terapia a pressione alternante è controindicata sono:

- Trazioni cervicali o scheletriche
- Lesioni instabili del midollo spinale

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
94140001	SISTEMA MID CURE versione materasso - compressore	143925	N.A.
94140930	Materasso con copertura	2156358	V080701
94140910	Compressore	2154669	V080701



SISTEMA ANTIDECUBITO MID CURE

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017
--------------------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE/FUNZIONI DEL COMPRESSORE

Modalità Statica / Alternante	Il tasto "statico/alternato" permette l'impostazione della modalità di funzionamento in Statico/Alternante. In modalità statica tutte le celle raggiungono un livello di pressione ottimale per il peso del paziente e lo mantengono invariato nel tempo (bassa pressione continua). In modalità alternate le celle scaricano periodicamente la pressione sul 50% del corpo del paziente.
Tempo ciclo di alternanza	10 minuti (5 minuti + 5 minuti: gli elementi alternanti ad aria mantengono la pressione di gonfiaggio terapeutica automaticamente regolata per 5 minuti, mentre restano completamente sgonfi per altri circa 5 minuti). Il completamento dell'intero ciclo di gonfiaggio e sgonfiaggio avviene in 10 minuti totali ed il tipo di alternanza è : "una cella gonfia e una cella sgonfia".
Impostazione del "Peso Paziente"	Regolazione digitale del livello di gonfiaggio degli elementi in funzione del peso paziente (da 20 Kg a 180 Kg)
Durata del ciclo	A scelta tra 12 / 18 / 24 minuti
Tipologia di allarmi	Acustici e visivi per malfunzionamenti, per guasto sistema o bassa pressione negli elementi
Impostazione peso	Scelta digitale del peso paziente
Rumorosità del compressore	29 dB
Silenziamento allarmi	Mediante attivazione di apposito tasto "Mute"

SISTEMA ANTIDECUBITO MID CURE

Dimensioni	28x20,5x10 cm
Peso	2,6 Kg
Materiale della scocca	ABS
Funzione seduta	Massimizza la pressione nella zona sacrale in caso di posizionamento seduto del paziente sul letto
Funzione blocco tasti	Presenza del pulsante "Blocco tasti"
Pulizia	Pulire la superficie con un panno umido morbido. Per disinfettare utilizzare soluzioni a base di ammonio quaternario. Non utilizzare soluzioni a base di Fenoli o ipercarbonati.

SPECIFICHE TECNICHE MATERASSO

Sezioni a gestione differenziata	Zona testa: N°3 celle non alternanti per evitare fastidio al paziente Zona tronco: N° 11 celle statiche/ alternanti (ciclo di alternanza 1 in 2) con micro-cessione d'aria zona arti inferiori: N° 4 celle statiche / alternanti (ciclo di alternanza 1 in 2)
Configurazione dei singoli elementi	Gli elementi di forma ovalizzata, si sovrappongono parzialmente per aumentare il comfort e la protezione del paziente
N° complessivo elementi ad aria	N° 18 elementi
Altezza degli elementi al centro	13 cm
Dimensioni Materasso (largh. x lung. x h)	83x200x18 cm
Peso del materasso	8 Kg
Valvola CPR	Doppia valvola CPR: posizionata in corrispondenza della regione "testa" è facilmente identificabile grazie alla linguetta rossa con la scritta "CPR" - permette lo sgonfiaggio rapido di tutto il materasso in meno di 20 secondi per consentire di effettuare le manovre di rianimazione cardio polmonare.

SISTEMA ANTIDECUBITO MID CURE

Micro cessione d'aria	In corrispondenza della zona tronco sono presenti n° 11 celle dotate di microfori che, consentono un flusso continuo di aria (200 l/h) che mantiene la copertura sempre opportunamente asciutta. In questo modo si previene la macerazione cutanea, causa principale che scatena la genesi delle lesioni da pressione.
Funzione "Trasporto"	In caso di necessità di trasporto sono possibili due opzioni: Scollegare i tubi dalla parte del compressore, mediante l'apposito connettore a sgancio rapido, ed inserire l'apposito connettore di chiusura agganciato ai tubi. In questo caso, è possibile trasportare il materasso senza compressore. Le celle ad aria mantengono una pressione interna congrua per un periodo superiore a 6 ore. - alternativamente è possibile, spegnere il compressore lasciando i tubi collegati, le celle d'aria mantengono una pressione interna congrua per un periodo non inferiore a 4-5 ore.
Pulizia	Il materasso può essere pulito con detergenti neutri e disinfettato con soluzioni a base di ipoclorito di Sodio (1000 ppm) o prodotti similari. Non utilizzare disinfettanti a base di Fenoli. Dopo aver lavato o disinfettato il materasso, lasciar asciugare per almeno 10 minuti.

SPECIFICHE TECNICHE COPERTURA

Materiale della copertura	Trama di poliestere trattata mediante induzione di poliuretano
Peculiarità del rivestimento	Prodotto in materiale: bi-elastico, dotato di un ottimo coefficiente di adesività/scivolamento, impermeabile ai liquidi, permeabile ai vapori, resistente, facile da pulire, ignifugo. -Trattato con principio Batteriostatico, Antimicotico, Antimicrobico. (testato MRSA)- Ignifugo. Testato per la resistenza al fuoco (classe 1)
Pulizia	Il telo di copertura (completamente asportabile) può essere lavato e disinfettato in lavatrice, non utilizzare temperature superiori a 95° C. Dopo il lavaggio lasciar asciugare completamente all'aria prima di utilizzare nuovamente.

SPECIFICHE TECNICHE SISTEMA

Portata Terapeutica	180 Kg
----------------------------	--------

SISTEMA ANTIDECUBITO MID CURE

Smaltimento	Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/ o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati come rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità preposte allo smaltimento che li riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste indicazioni contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni come da D. Lgs 151/2005 e D. LGS 152-06. In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.
Presenza / Assenza di Lattice	assente