

MANUALE D'USO

ROLLATOR ASCELLARE con appoggi anti-brachiali ROLLATOR ASCELLARE con tavolino

Cod. 15601508

Cod. 15601509




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI



INDICE:

1. GENERALITA':	pg.3
2. AVVERTENZE:	pg.4
3. DESCRIZIONE:	pg.5
4. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.8
5. ISTRUZIONI PER L'USO:	pg.9
6. COSA NON FARE:	pg.10
7. REGOLE FONDAMENTALI:	pg.11
8. MANUTENZIONE:	pg.12
9. CORRISPONDENZA CODICI:	pg.13
10. NOTE:	pg.13
11. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.14
12. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.16

1. GENERALITA':

Vi ringraziamo per la vostra scelta.

Il Rollator ascellare regolabile in altezza è stato concepito per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza ed è adatto per l'utilizzo in esterni ed interni.

Il Rollator è realizzato in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.

È classificato come dispositivo medico di classe I.

Il presente Manuale d'Uso contiene avvertenze sulla sicurezza, che devono essere assolutamente rispettate.

Tutti gli utilizzatori del Rollator ascellare, devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.



Attenzione!

Leggere attentamente il manuale d'uso al fine di evitare danni in fase di movimentazione del Rollator .

Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

2. AVVERTENZE:




- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.
- Il carico massimo di utilizzo sicuro è di 130 Kg. Tale carico, non deve essere superato in nessun caso.
- In caso di utilizzo da parte di pazienti diversi, è necessario prendere opportune precauzioni per evitare il verificarsi di infezioni incrociate.
- In particolare, pulire sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo, prestando particolare cura alle parti che vengono in contatto con l'utilizzatore come ad esempio le impugnature.
- Non utilizzare il dispositivo su terreni sconnessi, con scarsa aderenza (selciati, sterrati, sabbia) o pendenze, anche di modesta entità.
- In caso di sosta, inserire i freni di stazionamento delle ruote posteriori.
- Prima di affidare il proprio sostegno al dispositivo, accertarsi che si trovi in una configurazione stabile, completamente aperto.
- Controllare sempre lo stato d'integrità del dispositivo prima di utilizzarlo mediante accurata ispezione visiva. Se tale ispezione, dovesse rilevare una qualunque anomalia, il dispositivo non deve essere utilizzato.
- Il dispositivo dev' essere utilizzato nelle condizioni di fornitura e non può essere modificato in nessun modo.
- Durante l'operazione di apertura o di chiusura del dispositivo, l'inserimento e l'estrazione delle parti amovibili, o anche durante l'operazione di regolazione dell'altezza, fare molta attenzione alla posizione delle dita per evitare il loro accidentale schiacciamento.
- Il dispositivo è stato concepito come sostegno per utilizzatore, per questo non deve essere utilizzato come supporto per oggetti di alcun genere.
- Il dispositivo è progettato per essere utilizzato a tempo indeterminato, sempre che rimanga integro e non mostri soprattutto nei suoi componenti usurabili, segni di consumo eccessivo.
- Non utilizzare mai questo dispositivo come carrozzina di trasporto all'interno di un veicolo in movimento.
- Non disperdere nell'ambiente: smaltire insieme ai normali rifiuti solidi urbani.

3. DESCRIZIONE:

Il deambulatore con ascellari è un dispositivo medico di classe 1 utilizzabile da chi necessita un appoggio o un sostegno per camminare o stare in piedi.

- Esso è costituito da un telaio pieghevole in acciaio tubolare con sistema di apertura/chiusura a crociera. È provvisto di due supporti ascellari (1) estraibili e regolabili in altezza, di un maniglione trasversale (2) con impugnatura in materiale morbido, che ha anche la funzione di bloccare il dispositivo in posizione aperta, di un sedile imbottito (3) facilmente estraibile (accessorio, codice 15601504) .
- Le quattro ruote (4) sono piroettanti, quelle posteriori sono munite di freno. Le ruote sono regolabili in altezza con 3 fori distanti l'uno dall'altro di 2,5 cm (4a) .Di conseguenza l'altezza del sedile è regolabile in 3 posizioni: 55—57,5—60 cm.
- La regolazione deve essere effettuata in funzione della statura del paziente e dipende dal comfort e dalla manovrabilità soggettiva del paziente stesso.
- Il dispositivo è richiudibile e può quindi essere riposto facilmente, nonché trasportato in auto.

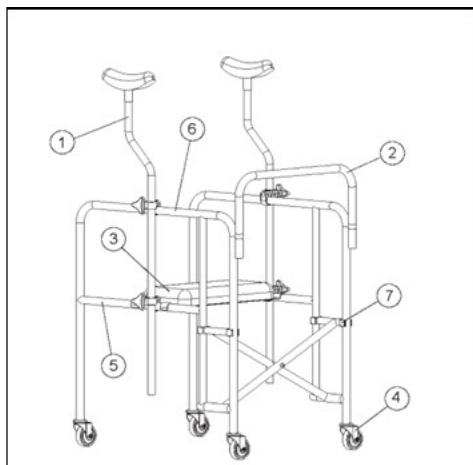



Durante l'operazione di montaggio del dispositivo, fare molta attenzione alla posizione delle dita per evitare il loro accidentale schiacciamento.

DESCRIZIONE: Rollator ascellare con appoggio anti-brachiali

- Rollator ascellare pieghevole con appoggio antibrachiali realizzati per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in acciaio con 4 ruote piroettanti di mm 80 di cui 2 con freni, supporti regolabili in altezza, appoggi antibrachiali regolabili in larghezza e profondità.
- Il rollator può essere utilizzati con un sedile imbottito (optional)



DESCRIZIONE: Rollator ascellare con Tavolino

- Rollator ascellare pieghevole con tavolini incavo per il massimo comfort dell'utilizzatore
- Costruiti in acciaio con 4 ruote piroettanti di mm 80 di cui 2 con freni, supporti regolabili in altezza, appoggi antibrachiali regolabili in larghezza e profondità.
- Il rollator può essere utilizzati con un sedile imbottito (optional)



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Carico massimo di sicuro utilizzo	130 kg
Massa complessiva del dispositivo	11,5 Kg
Ascellari regolabili	da 110 cm a 152 cm
Ruote regolabili in altezza con 3 fori	da 2,5 cm l'uno distante dall'altro
Altezza sedile regolabile in 3 posizioni	55—57,5—60 cm
Larghezza aperto	53 cm
Profondità	72 cm
Larghezza chiuso	17 Cm
Profondità chiuso	74 Cm

5. ISTRUZIONI PER L'USO:

Utilizzo in piedi:

Posizionarsi all'interno del perimetro del dispositivo, poggiando le ascelle sugli appositi supporti e tenendosi saldamente al maniglione trasversale. Procedere compiendo piccoli passi e cercando di non sbilanciarsi lateralmente. In caso di sosta è necessario attivare i freni posti sulle ruote posteriori, premendo con il piede sugli appositi pedali.

Utilizzo da seduto:

Prendere il sedile (accessorio, codice 15601504) , staccandolo dal bordo del telaio dove si trova agganciato, e applicarlo in modo che i suoi 4 punti di sospensione appoggino sui tubolari longitudinali (5) a cavallo del supporto sotto ascellare. Verificare che il sedile sia posizionato stabilmente prima di sedersi, per evitare il rischio di cadute. Il carico massimo del sedile è 130kg e non deve mai essere superato.

Regolazione dei supporti sottoascellari:

I supporti sotto ascellari possono essere regolati in altezza e in ampiezza, secondo le necessità dell'utente. Allentare i due morsetti a vite che vincolano ciascun supporto sotto ascellare, spostare il supporto (traslandolo verticalmente e ruotandolo) fino a portarlo nella posizione desiderata, serrare nuovamente a fondo i due morsetti;
ripetere l'operazione dall'altro lato, regolando il secondo supporto nella stessa posizione del primo.



Apertura/chiusura del dispositivo:

- Per aprire il dispositivo bisogna allargare le due sponde laterali (6) e premere sui manicotti scorrevoli della crociera (7) , fino a portarli a battuta contro il fine corsa.
- Per bloccare il dispositivo in posizione aperta, inserire il maniglione trasversale negli appositi alloggi, facendo attenzione che scattino i nottolini a molla.
- Per chiudere il dispositivo bisogna prima togliere il maniglione trasversale, sganciando i nottolini a molla. Poi sollevare i manicotti scorrevoli della crociera e accostare le due sponde laterali.

6. COSA NON FARE:

- Non utilizzare il dispositivo come seduta se esso non si trova su di una superficie perfettamente orizzontale.
- Non utilizzare il dispositivo su pendenze, neanche di modesta entità.
- Non utilizzare il dispositivo su terreni scivolosi o con scarsa aderenza (fango, sabbia ..)
- Non utilizzare il dispositivo come appoggio o per trasportare oggetti.
- Non superare il carico massimo di utilizzo.

7. REGOLE FONDAMENTALI:

- CONTROLLARE SEMPRE prima di ogni utilizzo lo stato e l'integrità del dispositivo.
- CONTROLLARE SEMPRE dopo un lungo periodo di inutilizzo il serraggio di tutti i bulloni.
- CONTROLLARE SEMPRE dopo un lungo periodo di inutilizzo lo stato dei componenti di usura (le gomme e le imbottiture sotto ascellari) .
- LAVARE SEMPRE il dispositivo dopo ogni utenza, per evitare infezioni incrociate



Durante l'operazione di montaggio del dispositivo, fare molta attenzione alla posizione delle **dita per evitare il loro accidentale schiacciamento.**

8. MANUTENZIONE:

- Pulire il dispositivo dopo ogni utenza detergendolo con sapone neutro e acqua tiepida.
- Non utilizzare solventi, sostanze corrosive o abrasive.
- Asciugare con un panno morbido e asciutto.
- Il dispositivo deve essere ispezionato accuratamente almeno una volta all'anno.
- Tale ispezione deve comprendere un attento esame visivo di tutte le componenti del dispositivo per accertarne l'integrità, una prova di corretto funzionamento dei vari meccanismi e il controllo di tutte le regolazioni e tutti i serraggi, nonché eventuali interventi di ripristino là dove ce ne sia bisogno.



Nota: Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un tecnico competente, in quanto è necessaria una buona conoscenza dell'oggetto da ispezionare.

Se tale ispezione dovesse rilevare un qualsiasi difetto o segno di usura o guasto, che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, esso deve rimanere, fuori servizio, fino alla riparazione.

Movi Spa—Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del Rollator in caso di utilizzo di componentistiche non originali.

9. CORRISPONDENZA CODICI:

Il presente manuale fa riferimento al seguente rollator :

- Cod 15601508 - Rollator ascellare con appoggi anti-brachiali
- Cod. 15601509 - Rollator ascellare con tavolino.

Accessorio

- Cod. 15601504 - Sedile per rollator ascellare blu

10. NOTE:



Nota bene:

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA — Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15— 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

11. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

ROLLATOR ASCELLARE CON TAVOLINO WALKER WITH TABLE

Colore Blu / Colour Blue




15601509



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN VIETNAM



XXXXXXXXXX

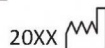

130 kg



	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA

**ROLLATOR ASCELLARE con appoggi anti-brachiali ROLLATOR ASCELLARE con
tavolino**

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

12. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato. Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dagli articoli. 128-135 del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 2005) .

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

ROLLATOR ASCELLARE con appoggi anti-brachiali ROLLATOR
ASCELLARE con tavolino

Cod. 15601508

Cod. 15601509

Rev.1 03/08/2021



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com