


Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

Cod. 15131016 - 40 cm

Cod. 15131017 - 43 cm

Cod. 15131018 - 46 cm

Cod. 15131020 - 50 cm

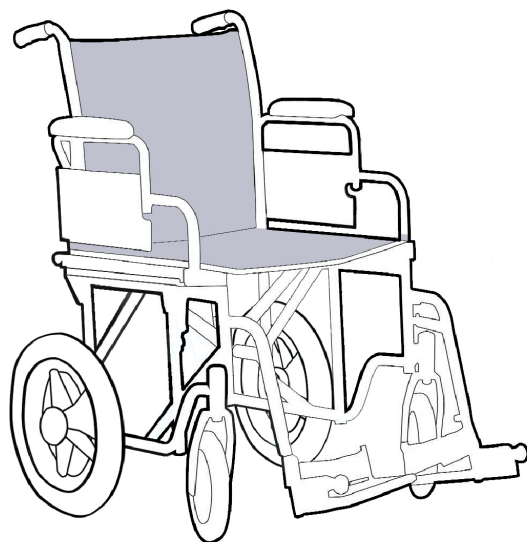

Manuale d'uso



Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

INDICE:

1. INTRODUZIONE:	pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO:	pg.4
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:	pg.7
4. MOVIMENTAZIONI / TRASPORTO:	pg.12
5. TECNICHE GUIDA:	pg.15
6. TECNICA DI TRASFERIMENTO:	pg.19
7. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:	pg.21
12. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.22
8. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.25
7. PULIZIA E DISINFEZIONE:	pg.26
7. MANUTENZIONE:	pg.27
9. CONSIGLI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI :	pg.29
14. RICAMBI:	pg.30
15. NOTE:	pg.31
16. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.31
17. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.32

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

1. INTRODUZIONE:

Vi ringraziamo per la vostra scelta.

La Carrozzina Easy Wheel Transit è stata concepita per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza ed è adatta per l'utilizzo in esterni ed interni.

La carrozzina Easy Wheel Transit dev'essere usata solo con l'aiuto di un assistente e le tecniche di guida consigliate, solo da persone esperte.

E' un Dispositivo Medico di Classe I conforme al Regolamento Europeo 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il presente manuale d'uso contiene avvertenze sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate.

Tutti gli utilizzatori, che lavorano con la Carrozzina Easy Wheel Transit, devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.

Il Fabbrikante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbrikante per ricevere l'ultima versione aggiornata

ELENCO CODICI:

Il presente manuale fa riferimento alle seguenti carrozzine :

Cod. 15131016 - Carrozzina Easy Wheel Transit 16" - 40 cm

Cod. 15131017 - Carrozzina Easy Wheel Transit 17" - 43 cm

Cod. 15131018 - Carrozzina Easy Wheel Transit 18" - 46 cm

Cod. 15131020 - Carrozzina Easy Wheel Transit 20" - 50 cm

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

2. DESTINAZIONE D'USO:

Le Carrozze MOVIE sono destinate a persone con difficoltà motorie e possono essere utilizzate tramite autospinta (se dotate di ruote posteriori grandi) oppure con il supporto di un operatore

Le carrozzine MOVIE sono spinte manualmente e devono essere utilizzate esclusivamente per il trasporto indipendente o assistito di una persona disabile con difficoltà motorie.

Le Carrozze MOVIE, ad esclusione dei modelli pediatrici, sono concepite per consentire la mobilità di persone di età maggiore di 15 anni.

La carrozzina deve essere utilizzata solo a livello del suolo e su superfici facilmente accessibili.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT



Prima di utilizzare la carrozzina:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni alla carrozzina a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente la carrozzina.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (gomme, freni, rivestimenti di seduta e schienale, poggiatesta, ecc.) e del serraggio della viteria.
- É vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano la carrozzina devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo delle Carrozze MOVIE non è indicato a:

- Bambini di età inferiore ai 15 anni (ad esclusione dei modelli pediatrici)
- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso
- La carrozzina non deve essere utilizzata da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.

COMPLICAZIONI

Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

Qualora vi fosse il rischio di sviluppare piaghe da decubito, munirsi di strumenti di prevenzione adeguati a seguito di consulto con il medico curante.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

Le carrozzine Movi sono dispositivi medici. Assicurarsi, pertanto, di leggere l'intero manuale. Utilizzare i prodotti unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Tenere lontano da fonti di calore, umidità e contenitori di liquidi.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

Il simbolo di sicurezza non sostituisce il testo di avvertenza a cui si riferisce. Leggere sempre le avvertenze sulla sicurezza e seguirle attentamente!



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica l'obbligo di leggere le istruzioni prima dell'utilizzo del dispositivo

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo della carrozzina e una migliore comprensione delle istruzioni.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale della carrozzina e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.
- Qualora la carrozzina risulti non integra, non utilizzarla e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.



- Evitare di utilizzare il dispositivo in condizioni di scarsa visibilità o illuminazione, oppure provvedere a rendersi chiaramente visibili tramite catarifrangenti.
- Sia per la sicurezza dell'utilizzatore che per quella del dispositivo, non usare il dispositivo su terreni con scarsa aderenza, come sabbia, fango e neve.
- La carrozzina non è da considerarsi un sedile da usare all'interno dell'autoveicolo.
- Prima di inclinarsi in avanti o di alzarsi dalla carrozzina, assicurarsi che le ruote anteriori siano dritte e quelle posteriori siano bloccate.
- **ATTENZIONE:** non modificare in alcun modo questo dispositivo.
- **ATTENZIONE:** non sollevare mai la carrozzina afferrando le pedane ma utilizzare invece il telaio metallico.
- **ATTENZIONE:** non salire mai sui poggiatesta per evitare il rischio di ribaltamento.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

- **ATTENZIONE:** non modificare questo dispositivo senza l'autorizzazione del fabbricante.
- **ATTENZIONE:** prestare attenzione per evitare lo schiacciamento delle mani quando si compiono le operazioni di apertura e chiusura della carrozzina.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare mai scale mobili, neanche con l'aiuto dell'assistente.
- **ATTENZIONE:** evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale, mantenendo sempre il baricentro entro il perimetro della carrozzina stessa.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

Avvertenze sulla sicurezza per OPERATORI SANITARI

- Prima del primo utilizzo della carrozzina, informare l'utilizzatore riguardo a come utilizzare in sicurezza la carrozzina, seguendo attentamente le istruzioni riportate in questo manuale che deve essere fornito insieme a essa. Informare tutti gli utilizzatori su ogni possibile pericolo a causa di un utilizzo errato.
- Le carrozzine sono classificate come dispositivi medici di Classe I. È necessario assolvere i propri doveri in conformità alle normative vigenti in materia di installazione e utilizzo dei dispositivi medici, al fine di assicurare un utilizzo duraturo e in sicurezza di questo prodotto senza alcun rischio per pazienti, utilizzatori e terze parti. In caso di utilizzo prolungato della carrozzina, è necessario eseguire controlli a cadenza regolare (si suggerisce almeno una volta all'anno), per verificarne le funzionalità e individuare eventuali danni visibili.
- Assicurarsi che questa carrozzina sia utilizzata esclusivamente da personale qualificato.
- Assicurarsi che eventuali sostituti del personale siano sufficientemente istruiti sul corretto utilizzo di questa carrozzina.
- Assicurarsi che il personale rispetti le avvertenze sulla sicurezza.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

Avvertenze sulla sicurezza per l'UTILIZZATORE


- Leggere il presente manuale prima dell'utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato e l'assenza di difetti della carrozzina.
- Prima di affrontare ostacoli come scalini o dossi, assicurarsi che non si creino interferenze con il dispositivo.
- Evitare, quando possibile, di attraversare pozze d'acqua. Il dispositivo è resistente all'acqua, ma in caso venga bagnato è consigliabile provvedere all'asciugatura nel più breve tempo possibile.
- La carrozzina non deve essere considerata un sedile da usare all'interno di un autoveicolo.
- Prima di inclinarsi in avanti o di alzarsi dalla carrozzina, arretrare di pochi centimetri per far in modo che le ruote anteriori siano rivolte in avanti e quelle posteriori siano bloccate, quindi frenare le ruote posteriori.
- Evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale, mantenendo sempre il baricentro entro il perimetro della carrozzina stessa.
- Verificare il corretto montaggio delle parti removibili.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

4. MOVIMENTAZIONI / TRASPORTO:

Chiusura


- Alzare i poggiatesta o la pedana.
- Sollevare il telo della seduta e avvicinare le due estremità della crociera.

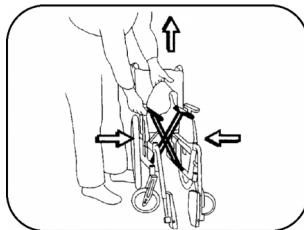

Fare attenzione a non schiacciarsi le dita tra le parti in movimento, vedere figura.

Apertura:

- Tenendo una mano sul sedile, premere verso il basso uno dei tubi del sedile, vedere figura.

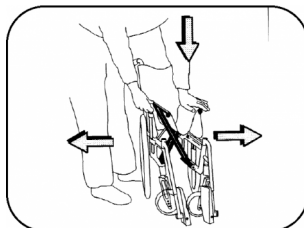


Durante l'apertura togliere la mano dal tubo per evitare il rischio di incastrarsi.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

Sollevamento della sedia a rotelle:

- Alzare il poggiapiedi.
- Sollevare la sedia per le impugnature e la parte anteriore del telaio, in corrispondenza dei fermi delle pedane.

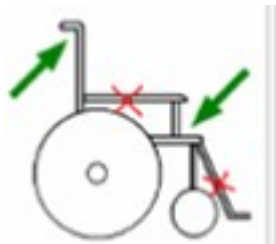


ATTENZIONE: Non sollevare la carrozzina per i braccioli non costituiscono un punto di presa stabile

TRASPORTO:

Automobile privata/taxi:

Sistemare la sedia a rotelle nel bagagliaio. Se non è possibile, posizionarla sul sedile posteriore in modo che sia sufficientemente stabile e non possa ribaltarsi o scivolare. Se possibile, bloccare la sedia con la cintura di sicurezza dell'automobile.

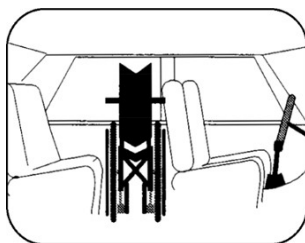



Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

Minibus/Autobus/Mezzi pubblici:

L' utilizzatore della sedia a rotelle deve sedere su uno dei sedili del minibus, mentre la sedia a rotelle deve essere bloccata in modo che non possa ribaltarsi o scivolare.

Se il minibus è dotato di apposito spazio per utilizzatori di sedie a rotelle, adottare le seguenti precauzioni:

- Per la sicurezza dell'utilizzatore, lo spazio deve essere dotato di un montante con cintura di sicurezza a tre punti e poggiatesta (non è sufficiente il poggiatesta della sedia a rotelle).
- La sedia a rotelle deve essere fissata per le fiancate, non per le ruote. Le cinghie di fissaggio devono avere un'inclinazione compresa fra 0° e 30°.
- La cintura (optional) della sedia a rotelle non è sufficiente per impedire che l'utilizzatore venga proiettato in avanti in caso di brusca frenata.

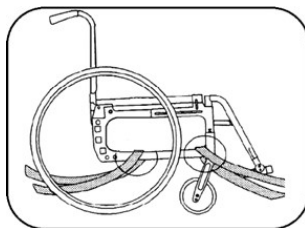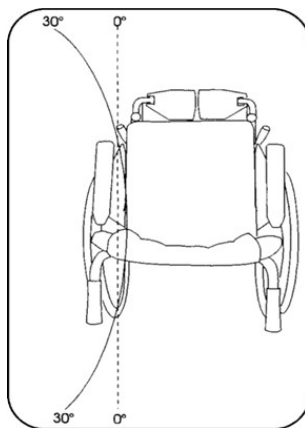

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

5. TECNICHE GUIDA:

Le tecniche di guida elencate in seguito, sono consigliate ad utilizzatori esperti: assicurarsi delle proprie capacità e dei propri limiti.

Caratteristiche di guida:

La distribuzione dei pesi sulla sedia a rotelle è determinante per le caratteristiche di guida. Essa dipende infatti dal peso della corporatura e dalla posizione dell'utilizzatore della sedia a rotelle, ma anche dalla posizione delle ruote posteriori in senso longitudinale. Maggiore è il peso esercitato sulle ruote gonfiabili, più facile risulta la guida della sedia a rotelle. Maggiore è il peso sulle ruote guida, più difficile risulta la guida sulla sedia a rotelle.

Assistenti: prima di lasciare l'utilizzatore da solo sulla sedia a rotelle, innestare i freni.

Parcheggio: aumentare la superficie di appoggio della sedia a rotelle facendola arretrare di 10 cm, in modo che le ruote guida siano rivolte in avanti.

Salita sul marciapiede:

ASSISTENTI: salita in avanti:

- Inclinare la sedia a rotelle, agendo eventualmente sul pedale di sollevamento, in modo che le ruote guida salgano sul marciapiede.



Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

ASSISTENTI: salita all'indietro

- Fare arretrare la sedia a rotelle finché non si trova in corrispondenza del bordo del marciapiede o della soglia.
- Inclinare la sedia a rotelle, agendo eventualmente sul pedale di sollevamento, in modo che le ruote guida siano sollevate da terra.
- Alzare la sedia a rotelle e farla arretrare in modo da sollevare le ruote guida controllare che abbiano superato l'ostacolo prima di "abbassare" la sedia a rotelle su tutte e 4 le ruote.



Discesa dal marciapiede:

ASSISTENTI: discesa in avanti:

- Inclinare la sedia a rotelle, agendo eventualmente sul pedale di sollevamento, in modo che le ruote guida siano sollevate da terra.
- Scendere lentamente dal marciapiede, quindi "abbassare" le ruote guida a terra.



Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT



Questa manovra comporta un forte pericolo di ribaltamento.

ASSISTENTI: discesa all'indietro:

- Fare arretrare la sedia a rotelle finché non si trova in corrispondenza del bordo del marciapiede.
- Scendere lentamente dal marciapiede e fare arretrare la sedia a rotelle sulle ruote posteriori finché le ruote guida non hanno superato l'ostacolo.
- "Abbassare" la sedia a rotelle su tutte e 4 le ruote.



Tecniche di guida su scale:



Chiedere sempre aiuto a qualcuno!

Non utilizzare scale mobili, nemmeno con l'aiuto dell'assistente!

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

Assistenti all'indietro:

- Fare arretrare la sedia rotelle fino al primo scalino.
- Inclinare la sedia a rotelle sulle ruote posteriori, aiutandosi eventualmente con il pedale di sollevamento.
- Tirare la sedia a rotelle lentamente verso l'alto uno scalino alla volta, tenendola costantemente bilanciata sulle ruote posteriori.
- Dopo l'ultimo scalino, tirare indietro la sedia a rotelle in modo che le ruote guida siano appoggiate sul pavimento prima di "abbassare" la sedia a rotelle su tutte e 4 le ruote.



Assistenti in avanti:

- Fare avanzare la carrozzina sino al primo scalino. Inclinare la carrozzina sulle ruote posteriori, aiutandosi eventualmente con il pedale di sollevamento.
- Scendere lentamente uno scalino alla volta, tenendo costante e bilanciata la carrozzina sulle ruote posteriori.
- Dopo l'ultimo scalino, "abbassare" la carrozzina su tutte e 4 le ruote.



Se sono disponibili due assistenti:

il secondo può aiutare a sollevando la sedia a rotelle per le pedane bloccabili o, in mancanza di esse, reclinare/smontare le pedane e sollevare la sedia a rotelle per il telaio.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT



Si consiglia agli assistenti di usare la forza delle gambe, senza piegare o fare leva sulla schiena.

6. TECNICA DI TRASFERIMENTO:



Salire o scendere da soli dalla carrozzina è un'operazione potenzialmente molto pericolosa: farlo solo se ne siete fisicamente in grado e siate comunque molto cauti. Non appoggiarsi sui freni, non caricare peso sui poggiatesta mentre salite o scendere dalla carrozzina, potreste ribaltarvi.

SALIRE:

- Avvicinare il più possibile la carrozzina, in modo da posizionarla di fianco a voi.
- Azionare i freni di stazionamento. Se necessario togliete la spondina o il bracciolo.
- Sollevarsi, facendo forza sulle braccia e appoggiandovi al telaio della seduta e, se necessario, anche a qualcosa di stabile e vicino; lasciatevi scivolare verso la seduta della carrozzina.



SCENDERE:

- Seduti sulla carrozzina, avvicinarsi il più possibile, in modo da trovarsi di fianco alla zona di arrivo.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

- Arretrare di qualche centimetro, in modo da posizionare le ruote anteriori in avanti ed aumentare la superficie di appoggio della carrozzina, e di conseguenza la sua stabilità.
- Azionare i freni di stazionamento. Se necessario togliere la spondina o il bracciolo.
- Sollevarsi, facendo forza sulle braccia e appoggiarsi al telaio della seduta e, se necessario, anche a qualcosa di stabile e vicino; lasciatevi scivolare verso la zona di arrivo.



Si consiglia agli assistenti di usare la forza delle gambe, senza piegare o fare leva sulla schiena.

RUOTE DI SPINTA:

La Carrozzina Easy Wheel Transit viene fornita di serie con corrimano in alluminio. Il materiale e la distanza fra la ruota di spinta e ruote gonfiabili influenzano la capacità di presa da parte dell'utilizzatore

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT



Attenzione!

- Sussiste il rischio di schiacciamento delle dita quando si percorrono corridoi stretti oppure se le dita vengono infilate nei raggi delle ruote.
- Se sussiste il rischio che l'utilizzatore possa infilare le dita fra i raggi, si consiglia l'applicazione di una guaina protettiva sui raggi stessi.

7. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

Le carrozzine MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

12. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

CARROZZINA EASY-WHEEL TRANSIT misura 40 cm
WHEELCHAIR EASY-WHEEL TRANSIT seat width 16"
Colore Blu / Colour Blue

REF 15131016

MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT 224000775

2022

110 kg



CARROZZINA EASY-WHEEL TRANSIT misura 43 cm
WHEELCHAIR EASY-WHEEL TRANSIT seat width 17"
Colore Blu / Colour Blue

REF 15131017

MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT 224000775

2022

110 kg



CARROZZINA EASY-WHEEL TRANSIT misura 46 cm
WHEELCHAIR EASY-WHEEL TRANSIT seat width 18"
Colore Blu / Colour Blue

REF 15131018

MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT 224000775

2022

110 kg



Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

CARROZZINA EASY-WHEEL TRANSIT misura 50 cm
WHEELCHAIR EASY-WHEEL TRANSIT seat width 20"
Colore Blu / Colour Blue

LOT 224000775

2022 

110 kg 

REF 15131020

MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
 Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA



	FABBRICANTE	EC REP	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE	LOT	LOTTO
REF	CODICE PRODOTTO	SN	NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
MD	DISPOSITIVO MEDICO	CE	PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA	~	CORRENTE ALTERNATA
	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

8. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Carrozzina standard pieghevole a transito. Modelli entry level a ruote non estraibili della gamma di carrozzine in acciaio Wimed:

- Rivestimento in nylon lavabile
- Braccioli ribaltabili
- Appoggia gambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- Ruote posteriori da 12"
- Ruote anteriori da 8"

Larghezza seduta:	40—43—46—50 cm
Larghezza totale aperta:	+ 16 cm
Ingombro senza ruote:	+ 16 cm
Ingombro da chiusa:	29 cm
Profondità seduta:	40 cm
Altezza schienale:	42 cm
Altezza totale:	92 cm
Profondità totale:	97-104 cm
Profondità senza pedane:	71 cm
Distanza seduta-pedana:	40 - 50 cm
Altezza seduta anteriore:	51 cm
Altezza seduta posteriore:	48 cm
Altezza bracciolo:	25 cm
Peso totale:	17 Kg
Portata max:	110 Kg

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

7. PULIZIA E DISINFEZIONE:



Quando il paziente cambia, la carrozzina deve essere prima pulita e poi disinfettata per strofinamento!

Programma di pulizia e disinfezione:

- Raccomandiamo di utilizzare un metodo di disinfezione (umido) per strofinamento. Il detergente scelto non deve essere aggressivo ma ecologico. In generale può essere utilizzato un detergente di uso domestico. Non utilizzare prodotti abrasivi, prodotti per la pulizia dell'acciaio inossidabile e detergenti contenenti solventi o tamponi detergenti, per evitare di danneggiare la superficie.
- Non utilizzare prodotti abrasivi, prodotti per la pulizia dell'acciaio inossidabile e detergenti contenenti solventi o tamponi detergenti, per evitare di danneggiare la superficie.
- In caso di contaminazione visibile della carrozzina con materiale infettivo o potenzialmente infettivo, deve essere disinfettata per strofinamento utilizzando un disinfettante appositamente raccomandato per l'uso ospedaliero adatto alla superficie in questione.
- La disinfezione delle rotelle si rende necessaria solo in caso di contaminazione visibile con materiale infettivo o potenzialmente infettivo.



NOTA: la disinfezione continua di rende necessaria solo in caso di pazienti con agenti patogeni multi resistenti all'interno di un ospedale.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

7. MANUTENZIONE:

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.

- Far controllare il dispositivo da personale qualificato almeno ogni 2 anni.
- I rivestimenti sono realizzati in nylon rinforzato e possono essere asportati dal telaio semplicemente svitandoli. I rivestimenti di sedile e di schienale possono essere lavati con spugna inumidita e sapone neutro. Pulire le parti metalliche con detersivo o sapone per auto, in caso di sporco ostinato utilizzare uno sgrassante.
- Raggi: raggi allentati possono deformare le ruote. Se occorre regolare i raggi, rivolgersi ad un centro di assistenza per articoli sanitari.
- Assi delle ruote: aver cura di mantenerli puliti evitando l'accumularsi di sporcizia.
- Corrimano: se dovessero graffiarsi in misura tale da irritare la mano dell'utilizzatore, devono essere sostituiti.
- Freni: l'effetto frenante dipende dalla pressione dei pneumatici. La forte presenza di sporcizia può influenzare negativamente l'utilizzo dei freni. Controllare frequentemente il funzionamento dei freni.
- **In presenza di qualsiasi anomalia non utilizzare la carrozzina e rivolgersi al proprio fornitore o ad un centro di assistenza specializzato.**

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT



Movi Spa—Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza della carrozzina in caso di utilizzo di componentistiche non originali.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

9. CONSIGLI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI :

La sedia a rotelle tende a sterzare da una parte:

- Gonfiare i pneumatici.
- I fermi delle ruote gonfiabili non sono montati correttamente.
- L'utilizzatore non distribuisce equamente il carico sulla sedia a rotelle.
- La ruota di spinta è serrata maggiormente su un lato.

La sedia a rotelle avanza con difficoltà:

- Gonfiare i pneumatici.
- I fermi delle ruote gonfiabili non sono montati correttamente.
- Eliminare capelli e sporcizia dagli assi delle ruote guida.
- Carico eccessivo sulle ruote guida, regolare il baricentro della sedia a rotelle.

La sedia a rotelle sterza con difficoltà:

- Gonfiare i pneumatici.
- Accertarsi che i fermi delle forcelle anteriori non siano serrati eccessivamente.
- Eliminare i capelli e sporcizia dagli assi delle ruote guida.
- I freni non funzionano bene: - Gonfiare i pneumatici - Regolare la distanza fra pneumatico e freno

La sedia a rotelle è difficile da aprire e chiudere:

- Il rivestimento è troppo teso.
- Ingrassare e pulire i giunti del rinforzo a crociera sotto il sedile.

La sedia a rotelle è instabile:

- Gonfiare i pneumatici.
- Accertarsi che le viti ed i comandi siano serrati correttamente.

*** L'utilizzatore può avvertire questi sintomi anche a causa di un'errata regolazione della sedia a rotelle e/o tecnica**

Se il problema persiste contattare un centro di assistenza autorizzato.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

14. RICAMBI:

I ricambi originali Movi sono garantiti per un (1) anno a decorrere dalla data di ricezione del ricambio stesso.

Le informazioni necessarie si trovano sull'etichetta del prodotto applicata sulla carrozzina (vedere paragrafo 8 del presente manuale).

Le parti di ricambio sono disponibili indicando il modello della carrozzina, il codice articolo e il numero di lotto.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

15. NOTE:

- Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un tecnico competente, in quanto è necessaria una buona conoscenza dell'oggetto da ispezionare. Se tale ispezione dovesse rilevare un qualsiasi difetto o segno di usura o guasto, che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, esso deve rimanere, fuori servizio, fino alla riparazione,
- Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA — Via Dione Cassio, 15— 20138 Milano

Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

16. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:

regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:

qualityeregulatory@pec.movigroup.com

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

17. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dagli articoli. 128-135 del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 2005).

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail:
satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano -
www.movigroup.com



www.movigroup.com

Manuale d'uso originale

Carrozzina Easy WHEEL TRANSIT
Rev. 2 11/11/2024

Movi SpA

Via Dione Cassio, 15—Milano—Italy