

MANUALE D'USO

COMODA IMBOTTITA

Cod. 15501059




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI: pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO: pg.4
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI: pg.5
4. CLASSIFICAZIONE - STANDARD: pg.8
5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: pg.9
6. PULIZIA E DISINFEZIONE: pg.13
7. MANUTENZIONE: pg.13
8. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI: pg.14
9. CARATTERISTICHE TECNICHE: pg.15
10. NOTA: pg.16
11. SMALTIMENTO: pg.17
12. RECLAMI E INCIDENTI: pg.17
13. CERTIFICATO DI GARANZIA: pg.18

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarla per l'acquisto della sedia Comoda da doccia imbottita e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono concepiti per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza.

La Comoda imbottita, classificata come dispositivo medico di classe I, è conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017

Il Fabbrikante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbrikante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

2. DESTINAZIONE D'USO:

Le Comode MOVI sono destinate a persone con difficoltà motorie e possono essere utilizzate come ausilio per l'utilizzo in doccia e in bagno.

La comoda deve essere utilizzata solo a livello del suolo, su superfici facilmente accessibili e solo all'interno di edifici.



Prima di utilizzare la comoda:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni al dispositivo a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente il dispositivo.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (puntali, rivestimenti di seduta e schienale ecc.) e del serraggio della viteria.
- É vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano il dispositivo devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale. Utilizzare La Comoda imbottita unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale del dispositivo e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.
- Qualora il dispositivo risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.



- Conservare sempre il presente manuale e leggerlo prima di utilizzare il Dispositivo.
- Il prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Attenzione non è ammessa alcuna modifica. Interventi, anche di lieve entità, devono essere effettuati da personale autorizzato. Ogni manomissione o modifica non preventivamente autorizzate dal costruttore, sollevano quest'ultimo dai danni derivati o riferibili agli atti suddetti.
- Sostituire immediatamente i pezzi usurati o rotti con l'aiuto di un tecnico autorizzato
- Non lasciare parti dell'imballo alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- L'ausilio deve essere utilizzato su superfici piane ed orizzontali. Non è in grado di superare barriere o gradini anche se bassi.
- Verificare periodicamente la stabilità, la rigidità e il corretto serraggio di tutte le parti.
- Non lasciare o conservare all'esterno.
- **La portata massima è di Kg 100.** Tale carico non deve essere superato in nessun caso. Prima di utilizzare la sedia accertatevi che il peso dell'utilizzatore non sia superiore a questo valore.
- Non utilizzare in esterno o come sedile per autoveicoli.
- Non utilizzare mai i braccioli per alzare o spostare la comoda.
- Inserire i freni durante la movimentazione del paziente
- Prima di salire o scendere dalla comoda bloccare i freni.
- Non alzarsi in piedi sui poggipiedi e ripiegarli prima di salire o scendere.
- Non usare la comoda come deambulatore.
- La comoda deve sempre essere utilizzata con l'aiuto di un accompagnatore.
- Non salire in piedi sulla comoda.
- Prima di salire e scendere l'accompagnatore deve frenare le ruote dotate di freno e contestualmente aiutare il paziente durante le operazioni di spostamento.

Avvertenze sulla sicurezza per OPERATORI SANITARI

- Prima del primo utilizzo del dispositivo, informare l'utilizzatore riguardo a come utilizzare in sicurezza il dispositivo, seguendo attentamente le istruzioni riportate in questo manuale che deve essere fornito insieme a esso. Informare tutti gli utilizzatori su ogni possibile pericolo a causa di un utilizzo errato.
- Le comode sono classificate come dispositivi medici di Classe I. È necessario assolvere i propri doveri in conformità alle normative vigenti in materia di installazione e utilizzo dei dispositivi medici, al fine di assicurare un utilizzo duraturo e in sicurezza di questo prodotto senza alcun rischio per pazienti, utilizzatori e terze parti. In caso di utilizzo prolungato del dispositivo, è necessario eseguire controlli a cadenza regolare (si suggerisce almeno una volta all'anno), per verificarne le funzionalità e individuare eventuali danni visibili.
- Assicurarsi che questo dispositivo sia utilizzato esclusivamente da personale qualificato.
- Assicurarsi che eventuali sostituti del personale siano sufficientemente istruiti sul corretto utilizzo di questo dispositivo.
- Assicurarsi che il personale rispetti le avvertenze sulla sicurezza.

Avvertenze sulla sicurezza per l'UTILIZZATORE

- Leggere il presente manuale prima dell'utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato e l'assenza di difetti del dispositivo.
- La comoda non deve essere considerata un sedile da usare all'interno di un autoveicolo.
- Evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale, mantenendo sempre il baricentro entro il perimetro della comoda stessa.
- Verificare il corretto montaggio delle parti removibili.

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo delle Comode MOVI non è indicato a:

- Bambini di età inferiore ai 15 anni
- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso
- La comoda non deve essere utilizzata da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.

COMPLICAZIONI

Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

4. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

Le comode MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

L'utilizzo della sedia Comoda imbottita è semplice e intuitivo.

È indicata per soggetti con disabilità motorie che necessitano di una sedia a comoda.

Nota: è richiesta sempre la conduzione da parte di un accompagnatore.

Se le dimensioni della tazza WC di casa e le dimensioni della stanza lo permettono la Comoda Imbottita può essere utilizzata anche direttamente sul WC.

MATERIALI:

Struttura in acciaio verniciato.

Seduta e schienale in PVC.



La Comoda imbottita è composta da:

1. 1x Schienale con 2 braccioli
2. 1x Sedile con foro
3. 1x Secchio con coperchio
4. 1x Struttura a 4 ruote (2 con freno)
5. 2x Pedane poggiagambe

Istruzioni di montaggio

ASSEMBLAGGIO:

1) Applicare i braccioli allo schienale (1) e quindi inserirlo nella struttura base (4) e stringere con forza le viti posteriori.

2) Appoggiare alla struttura il sedile (2) ed agganciare il secchio (3) alle guide sino a raggiungere la posizione corretta.

3) Inserire le pedane (5) alla struttura base e farle ruotare verso il centro della sedia sino a raggiungere lo scatto di chiusura.



BRACCIOLI:

I braccioli (1) sono del tipo reclinabile a scomparsa posteriore. Per compiere senza sforzi gli spostamenti laterali da/e verso la sedia, possono essere abbassati con facilità.

Per effettuare l'operazione tirare il perno (2) per sganciare, quindi abbassare il bracciolo sino alla posizione desiderata.

Per riportare il bracciolo nella posizione normale è sufficiente alzarlo ed inserire il perno (2) nella sua sede.



PEDANE REGGIGAMBE:

Alloggiare le pedane facendo combaciare i perni (4) e quindi ruotare verso l'interno della sedia sino a raggiungere la posizione di sicurezza facendo scattare il dispositivo di chiusura (2).



Per togliere le pedane agire sul dispositivo di chiusura (2), e ruotare le pedane verso l'esterno. Alzarle per estrarle.

Regolazione dell'altezza dei poggiapiedi:

I poggiapiedi possono essere regolati in altezza secondo le proprie esigenze o conformazione fisica. Per effettuare la regolazione occorre togliere il cappuccio nero (1) in plastica che protegge il dado (2) da allentare.



Regolare la posizione corretta e quindi stringere forte il dado. Ricoprire con il cappuccio in plastica.

Per favorire i movimenti, per salire e scendere dalla sedia, le pedane poggiapiedi possono essere alzate come mostrato nell'illustrazione.



Pericolo di ribaltamento.

Non salire in piedi sui poggiapiedi.

RUOTE

La comoda imbottita è dotata di 4 ruote di cui 2 con freno di stazionamento.

- Per frenare, premere con forza con il piede sul pedale indicato al punto "a"
- Per sbloccare l'azione frenante agire sulla parte indicata al punto "b"



SECCHIO WC:

Il secchio WC è composto da:

- 1 secchio con maniglia
- 1 coperchio

Da inserire nelle guide poste sotto il sedile sino a raggiungere la posizione corretta.



6. PULIZIA E DISINFEZIONE:

La sedia non è stata progettata per essere mono-paziente.

Ogni qual volta vi fosse il cambio dell'utilizzatore va lavata e disinfettata secondo le condizioni di utilizzo e degli utilizzatori.

Ogni 2/3 mesi vi preghiamo voler seguire le semplici regole di seguito elencate:

Lavare periodicamente con uno straccio morbido inumidito in una soluzione con acqua e detersivi non aggressivi provvedendo ad asciugare bene le parti metalliche.

7. MANUTENZIONE:

La sedia Comoda imbottita non richiede particolari attività di manutenzione.

Periodicamente, ogni 2/3 mesi, vi preghiamo voler seguire le semplici regole di seguito elencate:

- Per la sicurezza dell'utilizzatore controllare il serraggio di tutte le parti della sedia.
- Ingrassare le ruote ed il perno dei braccioli.
- Sostituire immediatamente i pezzi usurati o rotti con l'aiuto di un tecnico autorizzato.

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.

8. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

SEDIA COMODA IMBOTTITA COMMODE CHAIR



15501059



MOVI S.p.A.

Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy

MADE IN CHINA



XXXXXXXXXX

20XX



100 kg



	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA

COMODA IMBOTTITA

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

9. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Portata max:	100 kg
Peso:	14.5 kg
Larghezza seduta:	45 cm
Profondità seduta:	43 cm
Altezza schienale:	28 cm
Ingombro:	55 cm
Secchio:	Ø 30 x H 17 cm H da terra 30 cm
Altezza seduta da terra:	49 cm
Profondità totale:	89 cm

10. NOTA:

Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un centro tecnico autorizzato, in quanto è necessaria una buona conoscenza del prodotto da ispezionare. Se tale ispezione dovesse rilevare qualsiasi difetto, malfunzionamento o segno di usura che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, la Comoda non deve assolutamente essere utilizzata fino alla riparazione.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Movi S.P.A - declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:
Movi SpA — Via Dione Cassio, 15 — 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

11. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

12. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityregulatory@pec.movigroup.com

13. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica
via Dione Cassio, 15
20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è

stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);

- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

COMODA IMBOTTITA

Cod. 15501059

Rev.3 29/07/2025



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com