

MANUALE D'USO

ROLLATOR 4 RUOTE

Cod. 15615100




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. GENERALITA':	pg.3
2. AVVERTENZE:	pg.4
3. DESCRIZIONE:	pg.5
4. MONTAGGIO:	pg.6
5. ISTRUZIONI PERL'USO:	pg.8
6. REGOLE FONDAMENTALI:	pg.12
7. MANUTENZIONE:	pg.13
8. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.14
9. CORRISPONDENZA CODICI:	pg.15
10. NOTE:	pg.15
11. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.16
12. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.18

1. GENERALITA':

Vi ringraziamo per la vostra scelta.

Il ROLLATOR 4 RUOTE pieghevole è stato concepito per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza ed è adatta per l'utilizzo in esterni ed interni.

Il rollator, classificato come dispositivo medico di classe I, è conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017

Il presente Manuale d'Uso contiene avvertenze sulla sicurezza, che devono essere assolutamente rispettate.

Tutti gli utilizzatori del ROLLATOR 4 RUOTE pieghevole, devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.



Attenzione!



Leggere attentamente il manuale d'uso al fine di evitare danni in fase di movimentazione del rollator .

Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

2. AVVERTENZE:

- **Non utilizzare il dispositivo prima di aver letto il manuale d'uso**
- Il carico massimo di utilizzo sicuro è di 136 Kg. Tale carico, non deve essere superato in nessun caso.
- Utilizzare tale dispositivo solo come supporto della deambulazione o appoggio per sedersi.



- In caso di utilizzo da parte di pazienti diversi, è necessario prendere opportune precauzioni per evitare il verificarsi di infezioni incrociate.
- In particolare, pulire sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo, prestando particolare cura alle parti che vengono in contatto con l'utilizzatore come ad esempio le impugnature.
- Non utilizzare il dispositivo su terreni sconnessi, con scarsa aderenza (selciati, sterrati, sabbia) o pendenze, anche di modesta entità.
- In caso di sosta, inserire i freni di stazionamento delle ruote posteriori.
- Prima di affidare il proprio sostegno al dispositivo, accertarsi che si trovi in una configurazione stabile, completamente aperto, con il sedile inserito correttamente.
- Controllare sempre lo stato d'integrità del dispositivo prima di utilizzarlo mediante accurata ispezione visiva. Se tale ispezione, dovesse rilevare una qualunque anomalia, il dispositivo non deve essere utilizzato.
- Il dispositivo dev' essere utilizzato nelle condizioni di fornitura e non può essere modificato in nessun modo.
- Durante l'operazione di apertura o di chiusura del dispositivo, l'inserimento e l'estrazioni delle parti amovibili, o anche durante l'operazione di regolazione dell'altezza delle impugnature, fare molta attenzione alla posizione delle **dita per evitare il loro accidentale schiacciamento**.
- Il dispositivo è stato concepito come sostegno per utilizzatore, per questo non deve essere utilizzato come supporto per oggetti di alcun genere.
- Il dispositivo è progettato per essere utilizzato a tempo indeterminato, sempre che rimanga integro e non mostri soprattutto nei suoi componenti usurabili, segni di consumo eccessivo.
- Non disperdere nell'ambiente: smaltire insieme ai normali rifiuti solidi urbani.

3. DESCRIZIONE:

Il ROLLATOR 4 RUOTE pieghevole è un dispositivo medico, utilizzabile da chi necessita di appoggio per stare in piedi o per camminare

- Esso è costituito da un telaio pieghevole in ferro con sistema di apertura/chiusura.
- E' provvisto di due impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni a pattino.
- E' dotato di 4 ruote antiforo in ABS con anello in PU di diametro 20 cm, di cui le anteriori piroettanti, mentre quelle posteriori frenanti.
- Il dispositivo è richiudibile e può quindi essere riposto facilmente, nonchè trasportato in auto.
- Struttura arricchita con appoggio lombare per schiena e cestino porta oggetti.



4. MONTAGGIO:

- Togliere dalla confezione tutti gli elementi: sostegno lombare, manopole di spinta con relativo tubo, telaio e cestello.
- Aprire il telaio e far scivolare lo schienale imbottito nei supporti del telaio. Accertarsi che i pulsanti di blocco sporgano dai fori.
- Allentare il pomello di serraggio delle manopole di spinta e inserire i tubi delle manopole nel telaio. Il cavo del freno deve essere posizionato all'esterno del telaio.
- Posizionare le manopole all'altezza desiderata e serrare il pomolo ruotandolo in senso orario fino a completo blocco.
- Prima dell'utilizzo, accertarsi che entrambe le manopole siano alla stessa altezza.

Montaggio del cestino:

Montare il cestino mediante gli appositi ganci.
Non trasportare carichi troppo pesanti.



Ricordare che carichi eccessivi aumentano il rischio di ribaltamento.

Montaggio sostegno lombare:

Il sostegno deve essere montato solamente quando il rollator è in posizione sicura e con i freni attivati. Prendere il sostegno lombare e premere con gli indici sui fermi a destra e sinistra. Inserire il sostegno nelle guide. Per rimuovere il sostegno lombare ripetere le operazioni in senso inverso.



5. ISTRUZIONI PERL'USO:


REGOLAZIONE DEI FRENI:

Il sistema frenante installato su questo Rollator è conforme agli standard di qualità del fabbricante. Il sistema frenante è stato preimpostato (regolato) al miglior livello di prestazioni. Per l'adattamento ottimale all'utente, seguire le istruzioni seguenti. Occasionalmente, potrebbe essere necessario regolare il sistema frenante a seguito del normale deterioramento con l'utilizzo.



Tenere saldamente in posizione senza ruotare

- Per stringere il freno girare il dado in senso orario
- Per allentare il freno, girare il dado in senso antiorario.

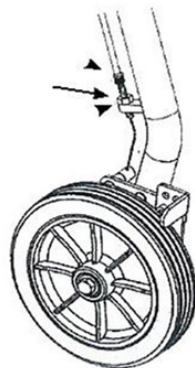

MECCANISMO DI BLOCCAGGIO:

- Attivare sempre simultaneamente il meccanismo di bloccaggio delle due rotelle.
- Rallentare o arrestare il Rollator: tirare verso l'alto la manopola di bloccaggio con quattro dita fino al rallentamento o all'arresto.
- Bloccaggio temporaneo delle rotelle: con il palmo delle mani, premere verso il basso entrambe le manopole di bloccaggio fino a sentire un "clic" che indica il blocco delle rotelle.
- Sbloccaggio delle rotelle: con il palmo delle mani, premere verso l'alto le manopole di bloccaggio e riportarle nella posizione iniziale.



Fig. 1 - Fig. 2 - Fig. 3

CONTROLLO RUOTE

Verificare che le ruote frenanti, siano libere in esecuzione

Per il controllo, sollevare il deambulatore, e attivare il freno.

Se la ruota gira regolarmente, il freno è stato regolato correttamente, se la ruota è frenata, bisognerà allentare il freno, ripetendo l'operazione.

Nelle suddetta operazione, stare attenti a non schiacciarsi le dita.



Verificare il meccanismo di bloccaggio prima dell'utilizzo.

Se le rotelle sono state bloccate (consultare le figure 1,2,3 per il bloccaggio e lo sbloccaggio delle rotelle) , il bloccetto dovrebbe impedire alle rotelle posteriori di girare liberamente. Se le rotelle ruotano nono-stante siano state bloccate, rivolgersi al rivenditore autorizzato per la regolazione del dispositivo. Le rotelle dovrebbero girare liberamente quando il meccanismo di bloccaggio è disattivato.

MODALITA' DI UTILIZZO DISPOSITIVO

• UTILIZZO IN PIEDI:

Posizionarsi all'interno del perimetro, poggiando mani sulle apposite impugnature. Procedere compiendo piccoli passi e cercando di non sbilanciarsi lateralmente. In caso di sosta è necessario attivare i freni posti sulle impugnature stesse

• UTILIZZO SEDUTO:

Verificare che il sedile sia posizionato stabilmente prima di sedersi, per evitare il rischio di cadute.

REGOLAZIONI DELLE IMPUGNATURE:

Le impugnature, possono essere regolate in altezza, secondo le necessità dell'utente. Girare la farfallina posta sul telaio e spostare i supporti (traslando verticalmente - Fig A) , fino a portarlo nella posizione desiderata, controllare che il pulsante fuoriesca nel foro.

Ripetere l'operazione per l'altro lato, regolando il supporto nella stessa posizione del primo.





COSA NON FARE:

- Non utilizzare il dispositivo prima di aver letto il presente manuale in ogni sua parte.
- Non utilizzare il dispositivo come seduta se esso non si trova su di una superficie perfettamente orizzontale.
- Non utilizzare il dispositivo su pendenze, neanche di modesta entità.
- Non utilizzare il dispositivo su terreni scivolosi o con scarsa aderenza (fango, sabbia ..)
- Non utilizzare il dispositivo come appoggio o per trasportare oggetti.
- Non superare il carico massimo di utilizzo.

6. REGOLE FONDAMENTALI:

- CONTROLLARE SEMPRE prima di ogni utilizzo lo stato e l'integrità del dispositivo.
- CONTROLLARE SEMPRE dopo un lungo periodo di inutilizzo il serraggio di tutti i bulloni.
- CONTROLLARE SEMPRE dopo un lungo periodo di inutilizzo lo stato dei componenti di usura (le gomme) .
- QUALORA, dopo il controllo, il rollator risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o ad un centro di assistenza specializzato
- LAVARE SEMPRE il dispositivo dopo ogni utenza, per evitare infezioni incrociate

7. MANUTENZIONE:

- Pulire il dispositivo dopo ogni utenza detergendolo con sapone neutro e acqua tiepida.
- Non utilizzare solventi, sostanze corrosive o abrasive.
- Asciugare con un panno morbido e asciutto.
- Il dispositivo deve essere ispezionato accuratamente almeno una volta all'anno.
- Tale ispezione deve comprendere un attento esame visivo di tutte le componenti del dispositivo per accertarne l'integrità, una prova di corretto funzionamento dei vari meccanismi e il controllo di tutte le regolazioni e tutti i serraggi, nonché eventuali interventi di ripristino là dove ce ne sia bisogno.



Nota: Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un tecnico competente, in quanto è necessaria una buona conoscenza dell'oggetto da ispezionare.

Se tale ispezione dovesse rilevare un qualsiasi difetto o segno di usura o guasto, che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, esso deve rimanere, fuori servizio, fino alla riparazione,

Movi Spa—Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del Rollator in caso di utilizzo di componentistiche non originali.

8. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso:	7 Kg
Portata:	136 Kg
Ingombro:	58 cm
Reg. manopole	80 a 89 cm
Profondità:	63 cm
Altezza seduta da terra:	50 cm
Larghezza sedile:	31 cm
Profondità sedile:	32 cm
Altezza schienale da terra:	78 cm

Rollator in ferro verniciato, particolarmente indicato per l'uso esterno.

- 4 ruote in PU, due anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse
- Struttura arricchita con sostegno lombare per la schiena
- Impugnature regolabili in altezza
- Cestello porta oggetti

9. CORRISPONDENZA CODICI:

Il presente manuale fa riferimento al seguente rollator :

- Cod. 15615100

10. NOTE:



Nota bene:

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA — Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15— 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

ROLLATOR 4 RUOTE

11. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO
ROLLATOR 4 WHEELS WITH BASKET

Colore Rosso / Colour Red

REF 15615100

MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
 Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXXX

20XX

136 kg



	FABBRICANTE	EC REP	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE	LOT	LOTTO
REF	CODICE PRODOTTO	SN	NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
MD	DISPOSITIVO MEDICO	CE	PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA

ROLLATOR 4 RUOTE

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

12. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dagli articoli. 128-135 del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 2005) .

MOVI S.p.A- Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

ROLLATOR 4 RUOTE

Cod. 15615100

Rev.2 04/07/2023



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com