

MANUALE D'USO

Passeggino Posturale

ETA

Cod. 15760000

Cod. 15761000




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI:	pg.3
2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:	pg.4
3. DESCRIZIONE:	pg.6
4. TECNICHE DI GUIDA:	pg.7
5. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.9
6. REGOLAZIONI:	pg.10
7. MANUTENZIONE:	pg.23
8. PULIZIA:	pg.25
9. CONTROLLI DEL PASSEGGINO:	pg.26
10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:	pg.29
11. NOTA:	pg.30
12. SMALTIMENTO:	pg.31
13. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.32
13. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.34

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,

Desideriamo ringraziarla per l'acquisto del Passeggino ETA e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Il Passeggino ETA è stato concepito per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza ed è adatto per l'utilizzo in ambienti esterni e interni.

Il Passeggino, classificato come dispositivo medico di classe I, è conforme al Regolamento Europeo 2017/745 del 5 Aprile 2017 sui dispositivi medici.

Il presente manuale d'uso contiene avvertenze sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutti gli utilizzatori che lavorano con il Passeggino ETA devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.



Attenzione!

Leggere attentamente il manuale d'uso al fine di evitare danni in fase di movimentazione e di utilizzo del Passeggino.

Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per i danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:

Prima di ogni utilizzo del Passettino, è opportuno controllare lo stato generale del dispositivo e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva. Dopo un lungo inutilizzo verificare attentamente lo stato di tutte le parti del Passettino e procedere alla necessaria manutenzione. Effettuare un controllo periodico di tutte le parti. La regolazione corretta e la sostituzione tempestiva di parti usurate o danneggiate garantirà per anni un utilizzo privo di problemi del Passettino. Qualora il Passettino non risulti integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.



Attenzione!

La capacità massima di portata è di kg 45.

Non superare mai questo peso.

- Sia per la sicurezza dell'utilizzatore che per l'integrità del dispositivo, non utilizzare il Passettino su terreni con scarsa aderenza, come sabbia, fango e neve.
- Inserire sempre il freno in caso di utilizzo in ascensore e ogni volta che l'utilizzatore deve scendere.
- Il trasporto del dispositivo all'interno di un autoveicolo, anche in presenza di soluzioni di allestimento specifiche per il trasporto del Passettino, è interamente a rischio dell'utilizzatore.
- Il Passettino non deve essere considerato una seduta da usare all'interno di un autoveicolo.
- Non utilizzare mai il Passettino in presenza di parti danneggiate.
- Non collegare nulla alle ruote.
- Non spingere il Passettino quando il freno è inserito. Il Passettino potrebbe esserne danneggiato e il bambino trovarsi in una situazione potenzialmente pericolosa.
- Non lasciar salire il bambino in piedi sul poggiatesta per evitare il rischio di ribaltamento.
- Prestare attenzione per evitare lo schiacciamento delle mani quando si compiono le operazioni di apertura e chiusura del Passettino.
- L'utilizzo del Passettino è inteso per una sola persona .

- Un cambio di direzione repentino potrebbe comportare il ribaltamento del Passeggino. Per evitare il verificarsi di tale situazione, spingere il Passeggino mantenendo una direzione costante.
- Non affrontare mai una pendenza superiore a 10°.
- Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del Passeggino in caso di utilizzo di componenti non originali e/o di modifiche non autorizzate apportate al dispositivo.
- Non lasciare mai il bambino nel Passeggino senza sorveglianza. Mantenere sempre il controllo visivo del bambino.
- Utilizzare sempre la cintura di sicurezza a cinque punti per evitare che il bambino possa scivolare e/o cadere dal Passeggino.
- Accertarsi che il Passeggino sia sempre appoggiato al terreno con tutte le quattro ruote.

3. DESCRIZIONE:

Il Passeggino è composto da diverse parti che è necessario conoscere prima di qualsiasi utilizzo. Questo Passeggino è estremamente confortevole ed è realizzato in alluminio di alta qualità. È fornito di sedile smontabile e reclinabile, barra di spinta regolabile in altezza, cuneo di abduzione e cintura di sicurezza, oltre a una gamma completa di accessori disponibili, quali ombrellino e barra di protezione.

1. Barra di spinta
2. Cappottina
3. Schienale
4. Cuneo di abduzione
5. Poggiapiedi
6. Rete portaoggetti
7. Ruote posteriori
8. Rotelle anteriori



4. TECNICHE DI GUIDA:



Prima di qualsiasi utilizzo, è importante conoscere tutti i componenti del dispositivo e imparare le corrette tecniche di guida elencate qui di seguito. Chiedere sempre l'aiuto di una persona esperta per sviluppare tecniche sicure e corrette in base alle proprie capacità e ai propri limiti.

Stabilità

Le normali operazioni quotidiane quali salire, scendere, sporgersi e piegarsi, modificano la distribuzione del peso e il centro di gravità dell'utilizzatore e del Passeggino. Questi movimenti devono essere eseguiti in base alle tecniche descritte qui di seguito.

Posizionamento sicuro del bambino nel Passeggino

È importante che il bambino sia posizionato in modo sicuro nel Passeggino. Sistemare il bambino in modo che il cuneo di abduzione sia tra le gambe. Il poggiatesta sostiene la testa del bambino. Il bambino deve sempre indossare la cintura di sicurezza a cinque punti in modo da non scivolare dal Passeggino, evitando potenziali lesioni.

Superare ostacoli in salita

Per affrontare un ostacolo, un gradino o uno scalino in salita, occorre spingere il Passeggino in avanti. Fare pressione con il peso del corpo sulla barra di spinta in modo da sollevare le rotelle anteriori e creare un effetto leva per far superare l'ostacolo al Passeggino. Non appendere pesi aggiuntivi, come borse ecc. al Passeggino, in quanto il centro di gravità si trova nella zona retrostante e potrebbe verificarsi un ribaltamento.

Superare ostacoli in discesa

Per affrontare un ostacolo, un gradino o uno scalino in discesa, occorre spingere il Passettino in avanti. Fare pressione con il peso del corpo sulla barra di spinta in modo da sollevare le rotelle anteriori e creare un effetto leva per far superare l'ostacolo al Passettino. Spingere in avanti il Passettino con cautela e appoggiare le rotelle anteriori sul terreno sottostante. Continuare a spingere lentamente in modo da appoggiare anche le ruote posteriori sul terreno sottostante. Non spingere con forza eccessiva in quanto le ruote posteriori appoggerebbero in modo violento sul terreno sottostante mettendo a rischio il bambino e il Passettino.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Larghezza seduta reg. con riduttori:	da 20 a 40 cm
Profondità seduta reg. :	da 24 a 31 cm
Altezza schienale reg. :	da 43 cm a 62 cm
Peso totale:	20 kg
Portata max:	45 kg
Larghezza massimo ingombro:	67 cm
Colore :	cod. 15760000 — rosso cod. 15761000 — blu



6. REGOLAZIONI:

Il Passeggino è costituito da una serie di componenti regolabili. Seguire le istruzioni riportate di seguito se si desidera aggiungere, rimuovere, sostituire o regolare uno dei componenti.

Aprire e chiudere il Passeggino

Il Passeggino è progettato per essere facilmente trasportato all'interno di un autoveicolo. Per aprire e chiudere il Passeggino seguire le istruzioni seguenti prestando attenzione a non danneggiarlo.

Chiudere il Passeggino

1. Prima di chiudere il Passeggino rimuovere la cappottina e il tavolino.
2. Tirare la leva rossa, indicata nella Figura 1, per rimuovere il sedile. Per ripiegare il sedile, allentare la manopola nera posizionata sullo schienale e spingere in avanti lo schienale. Per nascondere il poggiatesta premere i pulsanti neri posizionati sotto al sedile.
3. Tirare le leve rosse posizionate sotto alla barra di spinta, illustrate nella Figura 3.
4. Spingere in avanti la barra di spinta per ripiegare il Passeggino, come illustrato nella Figura 4.
5. Premere quindi il pulsanti neri e spingere verso il basso la barra di spinta.
6. Il Passeggino ora è chiuso (Figura 5) .





Figura 4



Figura 5




Aprire il Passeggino

1. Posizionarsi dietro al Passeggino, vicino alla barra di spinta.
2. Fare pressione sui tubi del sedile per iniziare ad aprire il Passeggino.
3. Tirare la barra di spinta per aprire ulteriormente il Passeggino.
4. L'apertura corretta del Passeggino è segnalata dal suono "clic".
5. Posizionare quindi il sedile sugli appositi tubi.
6. Riposizionare anche la cappottina e il tavolino. Il Passeggino è pronto per l'utilizzo.

Barra di spinta

La barra di spinta del Passeggino è di tipo ergonomico in modo da consentire una presa salda. In questo modo la spinta del Passeggino non solo è più comoda ma anche molto più sicura. L'inclinazione della barra di spinta è facilmente regolabile premendo il pulsante nero (Figura 6) e modificando l'angolazione fino a trovare la posizione desiderata.

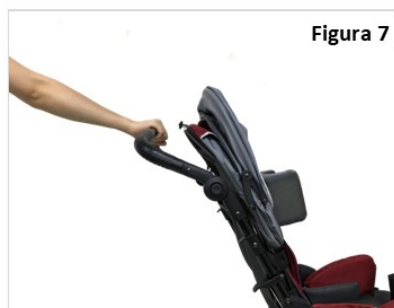

Poggiapiedi

Il poggiapiedi del Passeggino è costituito da una pedana metallica. La pedana è rivestita da uno strato anti-scivolo ed è facilmente ripiegabile e regolabile in altezza e inclinazione.

Regolazione altezza: Utilizzare il sistema di fermo. Rimuovere i perni e regolare l'altezza.

Regolazione inclinazione: Premere entrambi i pulsanti neri posizionati sotto al sedile, come indicato nella Figura 9. Regolare l'inclinazione nella posizione desiderata.

Il Passeggino è dotato inoltre di un cinturino per i polpacci che fornisce un ulteriore sostegno alla parte inferiore delle gambe del bambino. Il cinturino viene fissato grazie a una pratica chiusura Velcro



Figura 8



Figura 9



Figura 10

Schienale

Regolazione inclinazione

1. Allentare la manopola nera posizionata sullo schienale, illustrata nella Figura 11, e regolare lo schienale fino a trovare la posizione desiderata.
2. Stringere la manopola per fissare lo schienale.



Figura 11

Regolazione altezza

Sul lato posteriore dello schienale, sotto alla tappezzeria, è presente un dado a farfalla, illustrato nella Figura 12. Per regolare l'altezza, allentare il dado a farfalla e far scorrere il segmento superiore dello schienale verso l'alto o verso il basso. Una volta trovata la posizione desiderata, stringere il dado a farfalla per fissarlo. Infine riposizionare la tappezzeria sullo schienale.



Figura 12



Figura 13

Freno centrale

Il Passeggino è dotato di freno centrale. Per inserire il freno, premere la leva argento del freno verso il basso con il piede, come illustrato nella Figura 14. Il freno centrale del Passeggino è attivato (Figura 15) .



Ruote

Eseguire regolarmente un controllo delle ruote posteriori e delle rotelle anteriori per individuare eventuali segni di usura eccessiva.

Rotelle anteriori

Il Passeggino è dotato di rotelle anteriori da 8" collegate tramite forcelle al telaio (Figura 16) . Le rotelle anteriori sono molto importanti per il controllo del Passeggino. Se le rotelle non scorrono agevolmente e la manovra del Passeggino è difficoltosa, oppure in caso di vibrazione delle rotelle, rivolgersi al servizio di assistenza per il controllo e la regolazione.

Ruote posteriori

Il Passeggino è dotato di ruote posteriori piene da 12,5" in PU (Figura 17) a prova di foratura ad estrazione rapida.



Figura 16



Figura 17

Sedile

Il sedile del Passeggino è realizzato in materiale confortevole grazie al quale il bambino può rimanere seduto comodamente a lungo all'interno del Passeggino. La tappezzeria è rimovibile e lavabile. Il sedile è fornito di cuneo di abduzione rimovibile e di cappottina regolabile. Il Passeggino è corredato da una cintura di sicurezza a cinque punti che mantiene il bambino in posizione corretta e sicura. È inoltre presente una rete portaoggetti posizionata sotto al sedile.

Il sedile può essere posizionato in due modi diversi, sia con il bambino seduto rivolto verso la persona che spinge il Passeggino, sia con il bambino seduto rivolto nella direzione del movimento.

Rotazione sedile

1. Tirare in fuori la leva rossa (Figura 18) posizionata sul sedile, allontanandola dal telaio.
2. Rimuovere il sedile.
3. Ruotare il sedile e riposizionarlo sul telaio.
4. Il posizionamento corretto del sedile sul telaio è segnalato dal suono "clic".



Regolazione profondità

Sotto al sedile sono posizionati quattro bulloni a farfalla, illustrati nella Figura 19. Allentare i bulloni a farfalla per regolare la profondità del sedile. Far scorrere il sedile in avanti o indietro, come nella Figura 20. Una volta trovata la posizione desiderata, stringere saldamente i bulloni a farfalla.

Figura 20



Regolazione larghezza

Allentare i due bulloni a farfalla superiori, posizionati sotto al sedile, illustrati nella Figura 21. Far scorrere i supporti laterali in avanti o indietro. Una volta trovata la posizione desiderata, stringere saldamente i bulloni a farfalla.

Figura 21



Basculamento

Il Passeggino può essere facilmente basculato. Tirare in alto la leva rossa illustrata nella Figura 22. Basculare quindi tutta la seduta nella posizione desiderata, come nella Figura 23.



7. MANUTENZIONE:

Sottoporre il Passeggino a controlli e manutenzioni regolari, necessari per il comfort ottimale e prolungato nel tempo dell'utilizzatore. Una cattiva manutenzione del Passeggino potrebbe comportare problemi tecnici che non sono coperti dalla garanzia. Si consiglia di fare effettuare i controlli almeno una volta all'anno rivolgendosi al proprio rivenditore o a un servizio di assistenza specializzato.



Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza della Passeggino in caso di utilizzo di componenti non originali.

Per mantenere il Passeggino in condizioni ottimali si consiglia di controllare il Passeggino e di effettuare piccoli interventi di manutenzione che ne prolungheranno la vita e ne faciliteranno l'utilizzo. Nei paragrafi successivi vengono descritti i piccoli interventi che si possono effettuare.

Gomme rotelle anteriori

Controllare regolarmente le gomme in quanto sono componenti usurabili. Se l'usura della gomma è eccessiva, è necessario sostituire la gomma.

Gomme ruote posteriori in PU

Le gomme in PU (poliuretano)) vengono sempre più utilizzate per i Passeggini. Si riconoscono per l'assenza di valvole. Queste gomme hanno il vantaggio di non dovere essere gonfiate e sono a prova di foratura, tuttavia sono usurabili esattamente come gli pneumatici. Controllare regolarmente la profondità del battistrada.

Freno

Verificare regolarmente che i cerchioni non siano taglienti e nel caso provvedere alla sostituzione.

Accertarsi che tutti i componenti del freno si trovino nella posizione corretta e che siano serrati. Verificare inoltre che il meccanismo funzioni senza difficoltà e in caso contrario applicare una o due gocce di lubrificante WD40 o di Teflon nei meccanismi di rotazione. Rimuovere l'eccesso di lubrificante e di sporcizia.

Verificare inoltre che il freno non entri in contatto con le ruote durante il movimento.

Ruote posteriori

Controllare anche le ruote posteriori. La regolazione delle ruote posteriori aumenta la stabilità del Passeggino e ne rende più agevole la manovra. Controllare le ruote posteriori in questo modo:

- Verificare che le ruote scorrano liberamente senza toccare nulla.
- Verificare che le ruote posteriori non risultino allentate nel loro alloggiamento, ma siano ben stabili.

In presenza di qualsiasi anomalia, rivolgersi al rivenditore per eseguire le riparazioni necessarie.

Rotelle e forcelle anteriori

Le rotelle e le forcelle anteriori devono muoversi liberamente durante la manovra del Passeggino.

Controllare le rotelle e forcelle anteriori in questo modo:

- Verificare che il dado della forcella frontale non sia allentato né eccessivamente serrato. Se il dado è allentato le ruote girano ma potrebbero verificarsi scomodità per l'utilizzatore. Se il dado è eccessivamente serrato la manovra del Passeggino potrebbe risultare difficoltosa in quanto i cuscinetti a sfera non si muovono liberamente. Quando il dado è serrato correttamente le rotelle anteriori si arrestano lentamente.
- Verificare l'assenza di segni di usura.

In presenza di qualsiasi anomalia, rivolgersi al rivenditore per eseguire le riparazioni necessarie.

Tappezzeria

Anche la tappezzeria del Passeggino è un elemento importante. Una tappezzeria strappata o usurata non è adatta al trasporto di persone e potrebbe essere pericolosa.

Controllare regolarmente la tappezzeria in questo modo:

- Verificare l'assenza di fori, strappi e segni di usura del tessuto.
- Verificare che gli anelli di montaggio siano correttamente allineati e sicuri.

In presenza di qualsiasi anomalia, rivolgersi al rivenditore per eseguire le riparazioni necessarie.

8. PULIZIA:

La pulizia del Passeggino è molto importante e deve essere eseguita regolarmente.

- Pulire regolarmente la tappezzeria, il telaio e i componenti in plastica con un acqua e un detergente delicato.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per evitare di danneggiare le superfici.
- Non utilizzare getti di vapore e ad alta pressione.
- Proteggere la vernice regolarmente passando della cera.
- Non utilizzare solventi, cere abrasive, prodotti chimici che contengono soda caustica né silicone spray.
- Asciugare il Passeggino dopo le operazioni di pulizia. Asciugare il Passeggino anche dopo l'esposizione alla pioggia.

9. CONTROLLI DEL PASSEGGINO:

Manutenzioni periodiche

La manutenzione preventiva rappresenta un aspetto fondamentale e può essere facilmente eseguita.

Manutenzioni mensili

- Verificare che il Passeggino si apra e si chiuda correttamente.
- Controllare eventuali segni di usura della tappezzeria.
- Verificare il movimento e la rotazione della ruote anteriori e posteriori.
- Controllare il perfetto funzionamento del freno.

Manutenzioni trimestrali

- Controllare tutti i dadi, le viti e i bulloni e serrarli se necessario.
- Controllare il battistrada delle gomme per eventuali segni di usura.

Tabella dei controlli periodici

Per ottimizzare la durata del dispositivo, si raccomanda di portare il Passeggino presso un'officina autorizzata per i controlli di manutenzione almeno una volta all'anno. La frequenza di utilizzo del Passeggino varia soggettivamente, pertanto potrebbero essere necessari diversi controlli di manutenzione all'anno. I controlli di manutenzione non sono coperti dalla garanzia.

Controlli di manutenzione	1	2	3	4	5	6	7	8
Data manutenzione								
Ruote: stabilità, usura, regolazioni, gomme								
Forcelle anteriori: stabilità, regolazione e cuscinetti a sfere dell'asse								
Cerchione : regolazione, stabilità								
Poggiapie di: regolazione, allineamento								
Telaio: danneggiamenti, saldatura giunzioni, componenti di plastica								

Passeggino Posturale ETA

Controlli di manutenzione	1	2	3	4	5	6	7	8
Verniciatura / Cromatura / Ceratura								
Tappezzeria: strappi, usura								
Elementi di fissaggio di tutti i componenti								
Trattamento al teflon su tutte le parti mobili								
Sedile								
Controllato da:								



In presenza di qualsiasi anomalia non utilizzare il Passeggino e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Prima di portare il Passeggino dal rivenditore, verificare se è possibile risolvere il problema secondo quanto indicato nella tabella seguente. Se non è possibile risolvere il problema, contattare il rivenditore per l'assistenza.

Problema	Soluzione				
	1	2	3	4	5
Il Passeggino non è stabile	X				
Il Passeggino cigola o è rumoroso		X			
Le rotelle anteriori vibrano		X			X
Il Passeggino si muove con difficoltà	X			X	
Il Passeggino ruota lentamente		X			X
Il Passeggino tira a sinistra	X		X		X
Il Passeggino tira a destra	X		X		X

1	Accertarsi che non sia presente sporcizia nelle ruote (ad es: sassolini) .
2	Verificare che tutti i dadi e i bulloni siano correttamente serrati.
3	Le ruote posteriori e le rotelle anteriori potrebbero essere state regolate impropriamente. Verificare che le ruote posteriori e le rotelle anteriori siano montate in modo identico.
4	Verificare che i cuscinetti a sfere non siano usurati.
5	Le forcelle anteriori potrebbero essere state regolate impropriamente. Regolare le forcelle anteriori correttamente.

11. NOTA:



Nota bene: Il produttore si riserva il diritto di modificare senza ulteriore preavviso qualsiasi particolare, peso, misura o dato indicati in questo manuale. Tutti i numeri, le dimensioni e le unità di misura contenuti in questo manuale sono approssimativi e non costituiscono alcuna specifica.

Movi S.P.A declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

Indirizzo del fabbricante

SOCIETÀ □ Movi s.p.a

Indirizzo □ Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Telefono □ 02 509051

E-mail □ infotecnichewimed@movigroup.com

Per ordinare le parti di ricambio, per ogni richiesta di assistenza e per ulteriori informazioni, contattare il fabbricante oppure il rivenditore autorizzato.

12. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

13. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:



	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA

Passeggino Posturale ETA

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

13. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dagli articoli. 128-135 del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 2005) .

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

Passeggino Posturale ETA

Cod. 15760000

Cod. 15761000

Rev.4 21/01/2022



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com