

MANUALE UTENTE

**SW-1260 SCOOTER GARY COLORE: GRIGIO
(SILVER)**

**SW-1260 RED SCOOTER GARY COLORE:
ROSSO (RED)**



INDICE

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	1
2. INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE (EMI)	4
3. SPECIFICHE.....	5
4. REGOLAZIONI.....	6
5. CARATTERISTICHE.....	8
7. SALIRE E SCENDERE DALLO SCOOTER.....	8
8. FUNZIONAMENTO DEI COMANDI DEL MANUBRIO	10
9. ISTRUZIONI PER LA RICARICA.....	12
10. ISTRUZIONI DELLA BATTERIA E MANUTENZIONE.....	15
11. MANUTENZIONE DELLO SCOOTER	16
12. TRASPORTO.....	17
13. RICERCA E RISOLUZIONE DEI GUASTI.....	18
14. DICHIARAZIONE DI GARANZIA.....	20

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare lo scooter per comprenderne a pieno le precauzioni per la sicurezza e il suo funzionamento. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare danni allo scooter o situazioni di pericolo che possono causare gravi lesioni alle persone.

1. Quando si utilizza il prodotto è inoltre necessario rispettare le normative locali in materia di circolazione.
2. Non tentare di modificare lo scooter senza autorizzazione o utilizzarlo per altri scopi.
3. Si prega di non utilizzare lo scooter in caso di vertigini o se si assumono farmaci che possano pregiudicare le condizioni psico-fisiche o la vista.
4. Nel caso siano stati prescritti dei farmaci da assumere o in presenza di qualunque tipo di limitazione fisica accertata, consultare il medico curante. Alcuni farmaci e determinate limitazioni potrebbero pregiudicare la capacità di far funzionare lo scooter in sicurezza.
5. La guida in stato di ebbrezza è severamente vietata.
6. Si prega di controllare il dispositivo di frenatura prima di utilizzare lo scooter.
7. Non portare l'interruttore di accensione su OFF prima che lo scooter si arresti stabilmente su un terreno pianeggiante.
8. Non rimuovere le rotelle anti-ribaltamento se lo scooter ne è provvisto.
9. Non arrestare lo scooter quando si sale su un pendio o guidare su un pendio più ripido del limite consentito, per la stabilità dello scooter e la propria sicurezza.
10. Per evitare lo scivolamento o il ribaltamento, si prega di guidare con cautela e di mantenere una distanza di sicurezza adeguata su strade con pioggia, olio e neve.
11. Rallentare e prestare attenzione durante le svolte o le manovre in retromarcia.
12. Non utilizzare sistemi di intrattenimento musicale durante la guida poiché potrebbero causare distrazioni e incidenti.
13. Si prega di non sovraccaricare lo scooter.
14. Spegnerlo lo scooter quando non è in uso per prolungare la durata della batteria e prevenire eventuali incidenti.
15. Non caricare la batteria sotto il sole in estate e caricare al chiuso in inverno quando la temperatura esterna è inferiore a 10 °C.

Riguardo eventuali modifiche

Abbiamo progettato e disegnato lo scooter per garantirne la massima durata. Tuttavia, non si deve in nessun caso modificare, aggiungere, rimuovere o arrecare danni a qualsiasi parte o funzione dello scooter, altrimenti si potrebbero verificare lesioni alle persone e danni allo scooter. Si prega di utilizzare accessori originali da noi forniti; accessori non testati o non previsti possono provocare danni o rotture.

Controlli da eseguire prima di utilizzare lo scooter

1. Se lo scooter è dotato di pneumatici è necessario garantire la corretta pressione prima di utilizzarlo.
2. Controllare tutti i collegamenti elettrici e assicurarsi che siano correttamente fissati e privi di danni.
3. Controllare tutti i cablaggi e assicurarsi che siano correttamente fissati.
4. Controllare l'impianto frenante e assicurarsi che sia in buone condizioni.

Limite di carico

1. Fare riferimento alla scheda tecnica per informazioni sulla portata massima. Lo scooter è stato progettato per un limite massimo di portata.
2. Rispettare la portata massima indicata per lo scooter. Il sovraccarico invaliderà la garanzia e non dovrà essere a noi imputata alcuna responsabilità per lesioni o danni alla proprietà derivanti da una mancata osservanza della limitazione del peso.
3. Non trasportare passeggeri sullo scooter progettato per un solo conducente. Il trasporto di passeggeri sullo scooter può produrre una variazione del baricentro con conseguente ribaltamento o inclinazione.

Pressione degli pneumatici

1. Se lo scooter è dotato di pneumatici, è necessario controllarne la pressione almeno una volta la settimana.
2. La pressione corretta prolunga la durata degli pneumatici e garantisce una marcia fluida.
3. Non gonfiare gli pneumatici troppo o troppo poco. È fondamentale che la pressione degli pneumatici sia mantenuta costantemente a 2- 2,4 bar (30-25 psi).
4. Il gonfiaggio degli pneumatici mediante una fonte di aria non regolata potrebbe provocare una sovrappressione e provocarne lo scoppio.

Temperatura

1. Alcune componenti dello scooter elettrico sono sensibili alle variazioni di temperatura. La centralina può funzionare in sicurezza solo tra i -25 e 50 °C.
2. Le batterie potrebbero congelarsi ad una temperatura estremamente bassa e lo scooter potrebbe non essere in grado di funzionare. In presenza di temperature estremamente alte il mezzo potrebbe funzionare a velocità ridotta grazie ad una funzione di sicurezza della centralina che previene danni al motore e ai componenti elettrici.

INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE(EMI)

Il rapido sviluppo dell'elettronica, principalmente nell'ambito delle comunicazioni, ha saturato l'ambiente in cui viviamo di onde elettromagnetiche emesse da segnali radio, televisivi e di comunicazione. Le onde elettromagnetiche sono invisibili e la loro intensità aumenta man mano che ci avviciniamo alla fonte. In presenza di segnali elettromagnetici tutti i conduttori elettrici si comportano come un'antenna e, in misura variabile, tutte le sedie a rotelle elettriche e gli scooter elettrici sono sensibili alle interferenze elettromagnetiche (EMI). Le interferenze possono provocare movimenti anomali e involontari e/o un comportamento imprevedibile del mezzo. L'agenzia governativa americana Food and Drug Administration (FDA) consiglia di aggiungere la seguente dichiarazione ai manuali utente degli scooter elettrici simili ai modelli SW1260. Gli scooter elettrici possono essere sensibili alle interferenze elettromagnetiche (EMI), ovvero all'energia elettromagnetica di interferenza emessa da fonti quali emittenti radio, emittenti televisive, trasmettenti radioamatoriali (HAM), ricetrasmittitori, telefoni cellulari e sistemi di allarme installati nei negozi. Le interferenze (provenienti dalle fonti di onde radio) possono provocare il rilascio dei freni, il movimento o lo spostamento autonomo e involontario dello scooter elettrico. Le interferenze possono anche danneggiare in modo permanente il sistema di controllo dello scooter. L'intensità dell'energia elettromagnetica di interferenza può essere misurata in volt per metro (V/m). Ogni scooter è in grado di resistere a un'interferenza elettromagnetica fino ad una determinata intensità chiamata resistenza alle interferenze, lo scooter ha una capacità di resistenza alle interferenze di 20 v/m che fornirebbe una protezione utile contro le sorgenti comuni di interferenze elettromagnetiche irradiate EMI.

Se si rispettano le avvertenze elencate di seguito, dovrebbe diminuire l'eventualità di un rilascio dei freni o di movimenti involontari che potrebbero provocare infortuni anche gravi:

1. Non utilizzare ricetrasmittenti portatili o un dispositivo di comunicazione come il telefono cellulare quando lo scooter è acceso.
2. Prestare attenzione e stare lontano da apparecchiature con emissione di onde elettromagnetiche come radio, stazioni TV o altro.
3. In caso di movimento o rilascio dei freni involontario, spegnere lo scooter fin quando la situazione non è tornata in sicurezza.
4. Tenere presente che l'aggiunta di accessori o componenti, oppure la modifica dello scooter può rendere questo più suscettibile alle interferenze provenienti da sorgenti di onde radio (Nota: è difficile valutare l'effetto sull'immunità generale dello scooter elettrico).
5. Riferire al produttore tutti gli episodi di movimenti o di rilascio involontario dei freni dello scooter e prestare attenzione alla presenza di fonti di onde radio nelle vicinanze.

SPECIFICHE TECNICHE




MODELLO	SW1260-S25
LUNGHEZZA	1280 mm
LARGHEZZA	650 mm
ALTEZZA	990 mm
PESO: CON BATTERIE	86 kg
MAX. CARICO	160kg/1per
MAX. VELOCITÀ in avanti	12 km/h
RAGGIO DI STERZATA	2000 mm
PENDENZA MASSIMA DI GUIDA	12°
AUTONOMIA DI GUIDA	30±5 km
SISTEMA DI AZIONAMENTO	Ruota posteriore con trasmissione
SISTEMA DI FRENATURA	Freno elettromagnetico intelligente
MOTORE	24V/500W
CENTRALINA	24V/90A
DIMENSIONI PNEUMATICI ANTERIORI	10" * 3,5"
DIMENSIONI PNEUMATICI POSTERIORI	10" * 3,5"
BATTERIE	Piombo-acido 12V/38Ah *2pc (52AH opzionale)
CARICATORE	CC24V4A CA115-230V
MAX. CORRENTE DI RICARICA	4A
TEMPO DI RICARICA fino all'80% di carica	8h
TEMPO DI RICARICA fino a ricarica completa	10h

* Le misure vengono fornite solo come riferimento.

REGOLAZIONI

Regolazioni per il comfort dei sedili

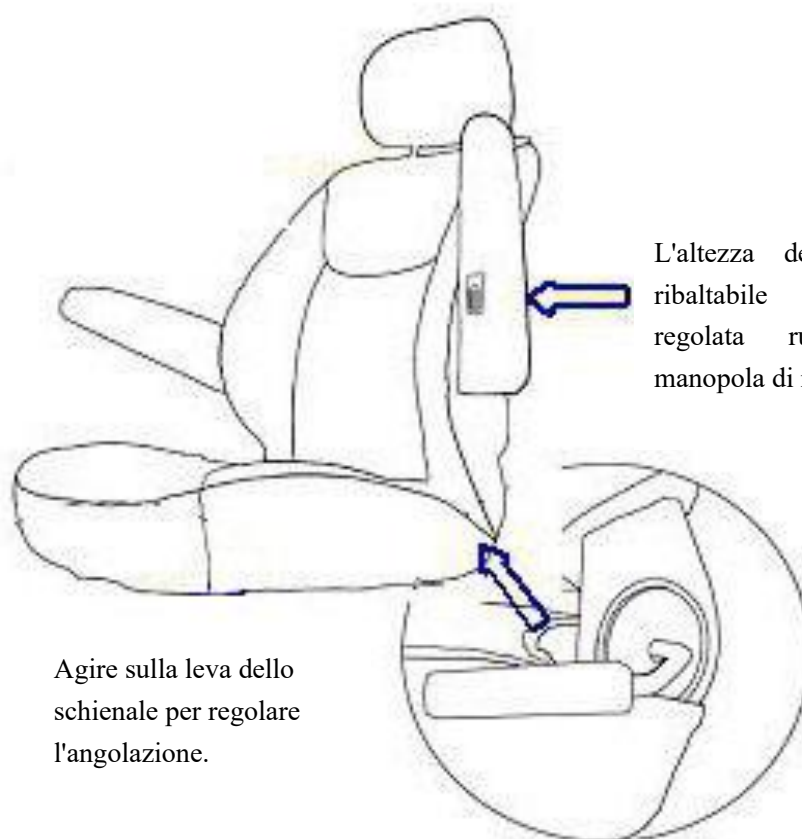

L'altezza del bracciolo ribaltabile può essere regolata ruotando la manopola di regolazione.

Agire sulla leva dello schienale per regolare l'angolazione.



Ruotare la leva di rotazione del sedile verso avanti per girare il sedile



Spingere la leva anteriore verso il basso per spostare il sedile in avanti e indietro

Regolazione posizione manubrio

16. Premere la leva e spostare nella posizione desiderata.



CARATTERISTICHE



SALIRE E SCENDERE DALLO SCOOTER

Salire sullo scooter

1. Assicurarsi che l'interruttore a chiave rimanga in posizione "spento" prima di salire sullo scooter.
2. Spingere in avanti la leva di rotazione del sedile situata sotto il sedile sul lato destro e girare il sedile verso di voi.
3. Abbassare i braccioli e utilizzarli per aiutarsi a sedere comodamente sul sedile.
4. Assicurarsi che i piedi siano saldamente appoggiati sulla pedana e che il sedile sia ben fissato e stabile.

Scendere dallo scooter

1. Portare lo scooter in un luogo adatto per parcheggiare e girare l'interruttore a chiave su "Spento".
2. Spingere in avanti la leva di rotazione del sedile situata sotto il sedile sul lato destro e girare il sedile di 90 gradi per scendere.
3. Diversamente, si dovrebbero mettere entrambi i piedi a terra e lasciare il sedile tenendosi con i braccioli.

FUNZIONAMENTO COMANDI DEL MANUBRIO

Interruttore a chiave




Spegnimento



Accensione

Quadro di comando

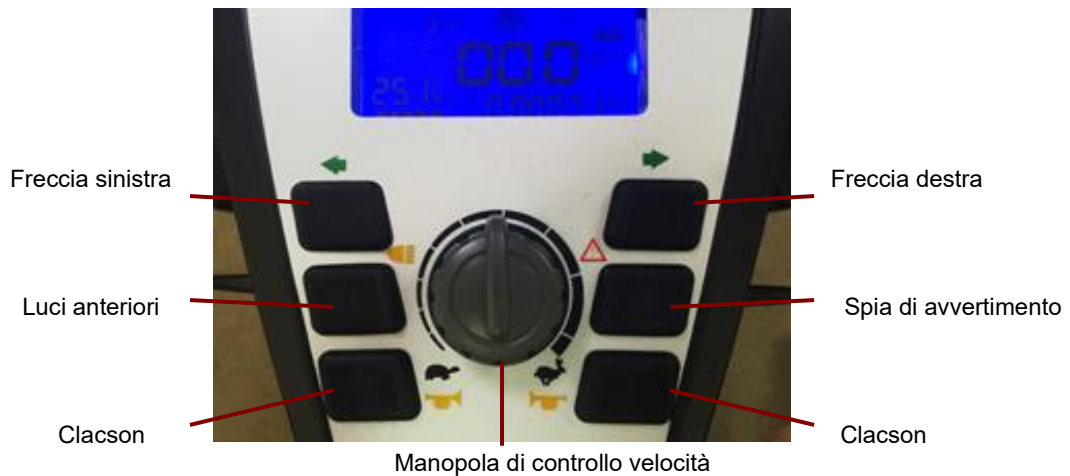

Funzioni

- Manopola di controllo velocità

Ruotare la manopola a sinistra per ridurre la velocità. Ruotare verso destra per aumentare la velocità.

- Pulsante luci anteriori

Premere il pulsante delle luci per accenderle nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità e premerlo nuovamente per spegnere.

- Pulsante Clacson

Se necessario, utilizzare il clacson in situazioni di pericolo per segnalare la propria presenza.

- Pulsante freccia sinistra/destra (indicatore di svolta)

Premere il pulsante per indicare che lo scooter sta per cambiare direzione.

Display a cristalli liquidi



Funzioni

- Marchio: Sweetrich
- Stato alimentazione: Indicatore di carica e capacità residua della batteria (Indicatore a barre 5 livelli di carica + tensione)
- Sensore di velocità: 2,5 cifre + 1 decimali + simbolo "km/h"
- Indicatore velocità Alta/Bassa: Simbolo per velocità preimpostata Alta "H" o velocità bassa "L"
- Indicatore di marcia Avanti/Retromarcia: Simbolo ↑ o ↓
- Indicatore di svolta con freccia sinistra/destra: Simbolo ← o →
- Contachilometri: Percorrenza (99,9 km max.)
- Tempo di funzionamento: Tempo di utilizzo
- Temperatura: Termometro in gradi centigradi
- Codici anomalia: Il simbolo READY lampeggia
- Retroilluminazione del display: Blu

Leva acceleratore



Marcia in avanti



Retromarcia

- Per la guida, tirare la leva dell'acceleratore destro (marcia in avanti) o la leva dell'acceleratore sinistro (retromarcia).
- Se si rilascia la leva lo scooter si arresta. Nella posizione centrale, il sistema frenante del motore magnetico funziona anche come freno di stazionamento.
- Per motivi di sicurezza, quando si guida in discesa con il freno manuale libero il freno automatico interviene se la velocità di marcia è superiore al 30% della velocità massima dello scooter.



Inserito




Disinserito

- Si prega di tener presente che lo scooter sarà in modalità a ruota libera quando il freno manuale è disinserito.
- Per utilizzare il freno manuale spostare e bloccare la leva in posizione inserito!

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

Aspetto e dimensioni

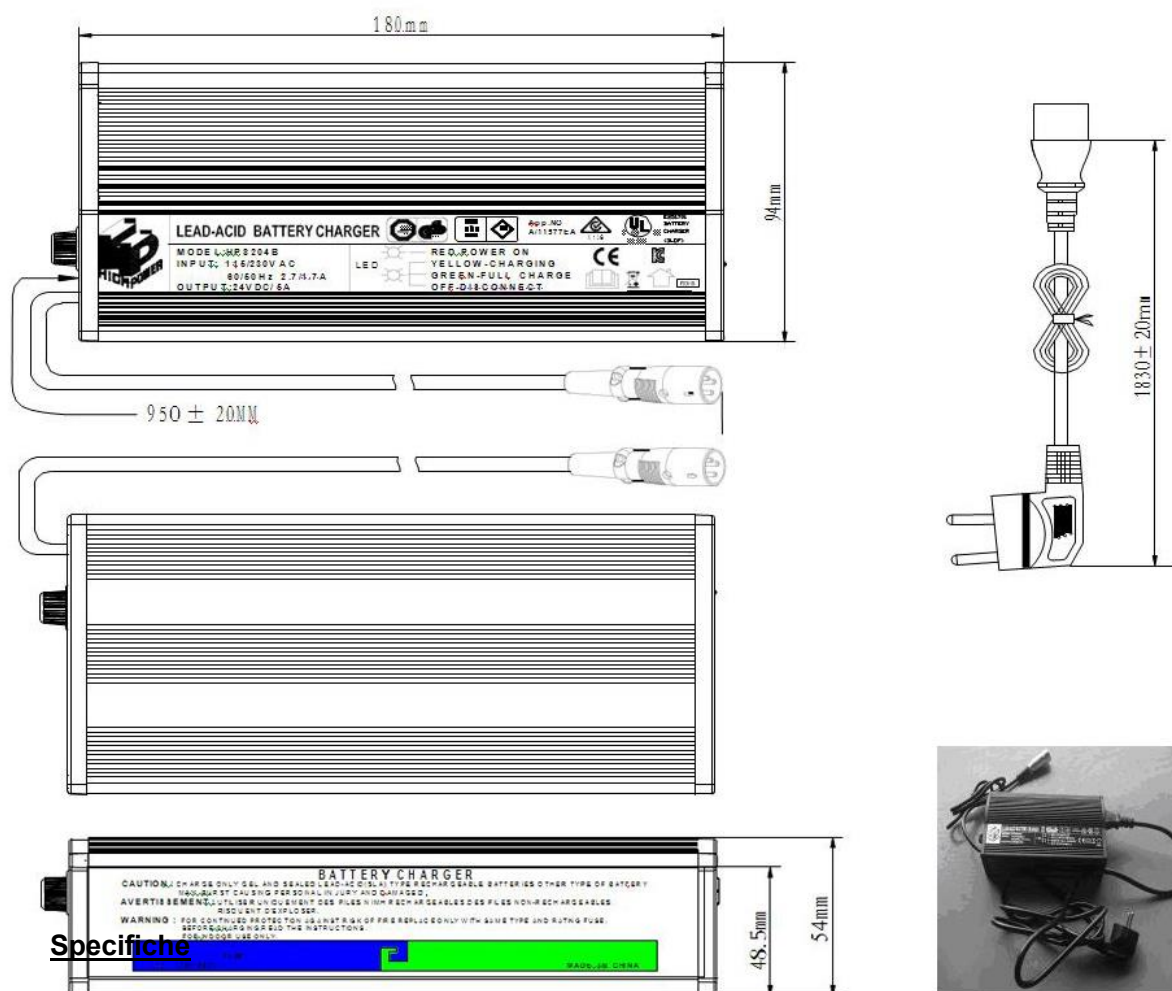

Specifiche

Articolo	Caricabatterie portatile
Modello	HP8204B
Rendimento	81% min.
Corrente di uscita	5A±0,2A max.
Tensione in uscita	29,8V±0,2V max.
Tensione flottante	31,2V±0,2V
Corrente di entrata	2,7A max.
Tensione di ingresso	115Vca/230Vca 50/60HZ
Corrente pulsante	0~5A

Protezione	1. Protezione da sovracorrente 2. Protezione da sovratensione 3. Protezione a inversione di alimentazione 4. Protezione da cortocircuito
Indicatore a LED	Rosso: Alimentazione accesa Arancione: In carica Verde: Carica completa
Temperatura di esercizio	0~40 °C
Umidità di funzionamento	20% ~ 85%
Altezza di funzionamento	0 ~ 2000 m
Dimensioni	180 mm (L) x 93 mm (P) x 53 mm (A)
Peso	0,83 kg
Colore	Nero
* Il caricabatterie può funzionare con correnti a 230V o 110V semplicemente spegnendo il caricabatterie e facendo scorrere con un cacciavite la linguetta rossa fino al valore desiderato. L'impostazione predefinita è 230V.	

Istruzioni per l'uso

1. Spegnerlo scooter con l'interruttore a chiave.
1. Ruotare il coperchio della presa di carica situato sul manubrio e collegare il caricabatteria.
2. Collegare il caricabatterie alla batteria.
3. Avviare la ricarica.



Precauzione

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il caricabatterie.
- Si prega di non ricaricare lo scooter all'aperto, in spazi ristretti o in ambienti con temperature elevate, gas infiammabili, nebbia d'olio e vapore. Non posizionare il caricabatterie nel vano sotto il sedile o vano bagagli durante la ricarica.
- Assicurarsi che lo scooter sia spento prima di iniziare la ricarica.
- Assicurarsi che la spina del caricabatterie sia asciutta e integra prima di collegarla.
- Dopo la ricarica, ricordarsi sempre di ruotare il coperchio della presa di carica in posizione chiuso per evitare infiltrazioni di polvere e acqua.
- Il caricabatterie deve essere tenuto in ambiente asciutto ad una temperatura compresa tra -25 e 40 °C.
- Utilizzare solo il caricabatterie originale. Un caricabatterie di altre marche invalida la garanzia e può causare danni e lesioni alle persone.
- In ogni caso, il caricabatterie deve essere riparato esclusivamente da un distributore autorizzato.

Suggerimenti

- Se si verifica un guasto il pulsante di ripristino scatta in posizione fuori. Spegnerlo scooter, premere il pulsante e riaccendere lo scooter.
- Se lo scooter non risponde al normale controllo dopo un periodo di ricarica, verificare che il caricabatterie sia stato completamente scollegato dallo scooter.



ISTRUZIONI PER BATTERIA E MANUTENZIONE

Cura del pacco batteria

- La batteria deve essere compatibile con lo scooter e con il caricabatterie corrispondente; non è consentito l'uso di combinazioni non adatte.
- Prima dell'uso, controllare che la batteria non sia danneggiata, fessurata e che la superficie della batteria sia pulita.
- Una batteria nuova garantisce le migliori prestazioni dopo 2 o 3 cicli completi di carica e scarica. Se le batterie rimangono inutilizzate per più di un mese si riduce la capacità di circa il 5%.
- Non lasciare il caricabatterie ancora collegato alle batterie quando il connettore è spento.
- In caso di cortocircuito, il sistema di gestione della batteria passa in modalità di protezione e il cavo di alimentazione in combinazione con il componente di sicurezza si fonde per fornire una doppia protezione alla batteria. Una volta eliminato il guasto la batteria può funzionare normalmente.
- Se non si utilizza lo scooter per un periodo prolungato (più di 5 giorni), caricare le batterie per 12 ore, quindi rimuovere il caricabatterie e assicurarsi che le batterie siano scollegate.
- Se la batteria deve essere conservata, scollegare la batteria e il caricabatterie e riporla in un ambiente ventilato e pulito. Durante il periodo di conservazione si dovrebbe effettuare un ciclo di ricarica ogni 3 mesi.
- Non smaltire le batterie con i normali rifiuti.

Precauzioni

- Ricordarsi di rimuovere la spina dallo scooter quando il caricabatterie è spento per evitare di lasciarlo collegato. Lo scooter non può essere utilizzato durante la ricarica.
- Le batterie devono essere controllate regolarmente per rilevare eventuali segni di danni. In caso di danni evidenti contattare immediatamente il distributore autorizzato locale.
- Fare attenzione a non cortocircuitare i terminali della batteria. Prima di controllare le batterie togliere tutti i gioielli che possono condurre elettricità (ad esempio orologi, collane, ecc.).
- Durante la ricarica, posizionare sempre il dispositivo di mobilità su una superficie stabile in un ambiente con buona ventilazione. Non si dovrebbe ricaricare le batterie in ambiente esterno.
- Non esporre alcuna parte della batteria al calore diretto (ad esempio incendio o fiamme libere).
- Non lasciare che le batterie congelino.
- Non smaltire le batterie con i normali rifiuti. Riciclare sempre in conformità alle normative locali.

Suggerimenti

Se durante l'utilizzo l'indicatore della batteria indica un valore basso, è possibile aumentare la percorrenza residua riducendo la velocità preimpostata mettendola su bassa.

MANUTENZIONE DELLO SCOOTER

Una corretta manutenzione dello scooter SW1260 può prolungarne la durata e prevenire potenziali problemi che possono influire sul funzionamento e sulle prestazioni; gli elementi sottoposti a regolare manutenzione sono elencati di seguito:

MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Mantenere lo scooter libero da polvere, sporcizia e liquidi. Pulire con un panno morbido inumidito con acqua calda saponata. Per evitare di danneggiare il prodotto, non utilizzare prodotti chimici, solventi o detergenti abrasivi.
2. Controllare ogni mese che tutti i componenti del veicolo non siano allentati, danneggiati o corrosi, quali connettori, terminali o cavi. Controllare che tutti i cavi siano bloccati per proteggerli da eventuali danni da contatto. Sostituire i componenti danneggiati.
3. Controllare regolarmente la pressione e il grado di usura degli pneumatici per verificare se è necessario sostituirli.
4. Prima di iniziare la guida, controllare se il sedile è stabile o se si muove bruscamente.
5. Controllare se il freno magnetico soddisfa i requisiti di frenatura e se lo scooter posizionato in pendenza rimane fermo.
6. Controllare il motore per verificare se deve essere sostituito, in particolar modo dopo un anno di utilizzo.
7. Sviluppare buone abitudini di guida e non utilizzare lo scooter oltre la percorrenza consentita.
8. Riporre lo scooter in un luogo asciutto e ventilato. Si prega di non metterlo in acqua o in un ambiente molto umido (l'umidità deve essere inferiore al 85%).
9. Se lo scooter non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, controllare le condizioni della batteria e mantenerla completamente carica, ricaricarla almeno una volta al mese.

IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Lo scooter SW1260 può essere smontato in più parti in modo rapido e semplice per il confezionamento e il trasporto, ed è necessario procedere come segue:

1. Spegnerlo lo scooter e assicurarsi che il motore sia innestato.
2. Smontare lo scooter e confezionare le parti separate, riporre le parti confezionate nella scatola di imballaggio per il trasporto.

Precauzione

Fissare sempre stabilmente le parti dello scooter prima del trasporto. Non sedersi sullo scooter mentre viene trasportato o all'interno di un veicolo in movimento.

Condizioni ambientali dell'imballo e per il trasporto

Il dispositivo di mobilità può essere trasportato con i comuni veicoli, ma è necessario evitare forti impatti, vibrazioni o ripararlo da neve e pioggia.

Gli scooter imballati dovrebbero essere collocati in un ambiente con una buona ventilazione e temperatura compresa tra -20 ~ 45 °C e umidità inferiore al 93% senza condensa.

RICERCA E RISOLUZIONE DEI GUASTI

Guasto	Possibile causa	Soluzione
Percorrenza ridotta	Batterie non ricaricate per un sufficiente periodo tempo	Caricare le batterie per almeno otto ore
	Le batterie stanno perdendo la capacità fino a esaurirsi	Sostituire le batterie
La batteria non si carica o l'indicatore della batteria indica che è scarica dopo la ricarica	Batteria guasta	Sostituire le batterie
	Anomalia di carica	Contattare il distributore autorizzato
	La spina del caricabatterie è danneggiata	Controllare la spina
	Connessione persa	Provare a utilizzare un'altra presa di rete
	Nessuna uscita dalla presa di rete	Scollegare dalla presa di rete e sostituire il fusibile
	Fusibile bruciato nella spina di alimentazione del caricabatterie	Spegnere e premere nuovamente il pulsante
	Il pulsante sul pacco batteria si è innescato spuntando fuori	Spegnere e premere nuovamente il pulsante
	Fusibile bruciato dell'uscita del caricabatterie	Scollegare il cavo dalla presa di rete e contattare il distributore autorizzato
Corrente di ricarica alta	Batteria guasta	Sostituire le batterie
	Scooter acceso durante la ricarica	Spegnere lo scooter
Lo scooter non funziona	Leva rilascio freno disinnestata	Innestare la leva di rilascio freno
	batteria scarica	Ricaricare il pacco batteria
	Lo scooter non viene acceso dalla chiave	Assicurarsi che la chiave sia inserita
	Il cavo della batteria è allentato	Controllare il cavo della batteria
	Caricabatterie collegato	Scollegare il caricabatterie
	Pulsante sul pacco batteria innescato e spuntato fuori	Premere il pulsante di ripristino
	Cablaggio o spine scollegati	Controllare tutte le spine e i cavi
	Guasto del sistema di controllo	Contattare il distributore autorizzato
Il motore funziona in	Anomalia elettrica	Contattare il distributore

modo irregolare e/o rumoroso		autorizzato
	Guasto del sistema di controllo	Contattare il distributore autorizzato
* Non tentare di smontare alcuna parte del sistema di controllo dello scooter, il pacco batteria o il caricabatterie. * Il sistema di controllo è di fondamentale importanza per la sicurezza e l'utente non dovrebbe intervenire arbitrariamente.		

Lo scooter è dotato di una centralina che esegue l'autodiagnosi e ne monitora costantemente il funzionamento. La centralina indica i problemi riscontrati con un messaggio di errore, l'indicatore **READY** sul pannello di controllo lampeggia e viene emesso un avviso acustico. Se si conta il numero di lampeggi e segnali acustici che sono separati da un breve ritardo tra ciascuna sequenza, è possibile individuare l'errore consultando l'elenco seguente.

Numero di lampeggianti /segnali acustici	Componente	Guasto	Soluzione
1	Batteria scarica	Potenza non sufficiente	La batteria deve essere ricaricata
2	Tensione della batteria bassa	Potenza insufficiente sufficiente	La batteria deve essere ricaricata
3	Tensione della batteria alta	Tensione troppo alta, sovraccarico o marcia in salita	Ridurre la velocità durante la salita
			Controllare i collegamenti alla batteria
4	Corrente elettrica oltre il limite	Corrente elettrica del motore oltre il limite	Controllare il motore e i relativi collegamenti elettrici
			Spegnere e attendere alcuni minuti, quindi riaccendere
5	Problema al freno libero	La leva della ruota libera è azionata	Controllare il cablaggio della leva ruota libera
			Verificare che la leva sia nella posizione corretta
6	Problema di accelerazione resistore variabile	Quando si accende la centralina, il resistore variabile di accelerazione non si trova in posizione neutra	Assicurarsi che il resistore variabile di accelerazione sia in posizione neutra
			Potrebbe essere necessario tarare nuovamente il resistore
7	Problema limitazione della velocità resistore variabile	Problema al resistore variabile per accelerazione o limitazione della velocità, altri problemi di	Controllare il resistore variabile e gli altri cablaggi

		cablaggio	
8	Problema di tensione del motore	Problema del motore e degli altri relativi cablaggi	Controllare il motore e gli altri cablaggi del motore
9	Altri aspetti	Vari problemi relativi alla centralina	Controllare tutti i collegamenti e cablaggi
10	Problemi di spinta/slittamento o	La velocità di spinta è oltre il limite o slittamento	Spegnere e riaccendere la centralina

GARANZIA

Tutte le attrezzature fornite da Sweetrich sono garantite per essere esenti da difetti di fabbricazione o materiali. Se entro il periodo di garanzia viene rilevato un difetto, l'azienda riparerà o a propria discrezione, sostituirà l'apparecchiatura senza alcun costo per materiali o manodopera.

1. La riparazione o la sostituzione di parti dovrà essere eseguita da un distributore autorizzato/Assistenza autorizzata.
2. In caso di guasto delle funzioni di sicurezza (i prodotti non sono conformi ai requisiti di sicurezza, presentano rischi per la sicurezza della persona/proprietà, non forniscono le dovute prestazioni o riportano altri difetti di progettazione/produzione/processo e causano problemi di qualità e danno agli accessori) entro 7 giorni (compreso) dalla data di vendita (la data della fattura prevale) anche se l'utente segue le istruzioni, può scegliere di restituire, sostituire o riparare il prodotto;
3. Qualora una parte o parti dello scooter richiedano la riparazione o la sostituzione a causa di un difetto di fabbricazione o di materiale entro due anni dalla data in cui il possesso dello scooter è stato trasferito all'acquirente originale e a condizione che questo rimanga di sua proprietà, successivamente, la parte o le parti verranno riparate o sostituite a titolo gratuito se restituite al centro di assistenza autorizzato. (Nota: La presente garanzia non è trasferibile o cedibile)
4. Le parti sostituite successivamente alla scadenza della garanzia sono coperte per tre mesi.
5. Gli elementi soggetti a consumo non sono generalmente coperti dal normale periodo di garanzia, a meno che tali articoli non abbiano chiaramente subito un'usura eccessiva come conseguenza diretta di un difetto di produzione all'origine. Questi articoli includono, tra gli altri, tappezzeria, pneumatici, camere d'aria,

batterie, cuscinetto del bracciolo, impugnature e altre parti simili.

6. Le condizioni di garanzia di cui sopra si applicano a tutte le parti di scooter per i modelli acquistati a prezzo pieno al dettaglio.

7. In circostanze normali, la garanzia verrà annullata e il produttore non si assumerà alcuna responsabilità per i seguenti motivi:

7.1 Lo scooter o le parti non sono state sottoposte a manutenzione in conformità alle istruzioni del produttore sopra riportate o non sono stati utilizzati ricambi o accessori originali forniti dal produttore o dal distributore.

7.2 Lo scooter o la parte è danneggiata a seguito di incuria, incidente o manomissioni.

7.3 Le caratteristiche originali dello scooter o delle parti sono state modificate senza autorizzazione, oppure lo scooter o le parti sono state riparate dall'utente senza autorizzazione.

Si prega di tenere nota dell'indirizzo e del numero di telefono del distributore locale nell'apposito spazio. Contattare in caso di guasto e cercare di fornire tutti i dettagli del caso in modo che possano fornire una soluzione rapida.

Lo scooter mostrato e descritto in questo manuale potrebbe non essere esattamente uguale in ogni dettaglio al proprio modello. Tuttavia, le istruzioni qui contenute rimangono valide e applicabili, indipendentemente dalle differenze riscontrate.

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche o altri dati tecnici indicati nel presente manuale. Tutte le immagini, le misure e le portate indicate nel presente manuale sono approssimative e non sono da intendersi come specifiche.



Suzhou Sweetrich Vehicle Industry Technology co., Ltd.
Building B, No.7 Chao Qian Road, Suzhou Industrial
Park , Suzhou, Jiangsu Province, China, 215000



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Movi S.p.a.
Via Dione Cassio 15
20138 Milano, Italia



Made in China

SCOOTER GARY



244000210



SW1260



2024-05



160kg



Suzhou Sweetrich Vehicle Industry Technology co., Ltd.
Building B, No.7 Chao Qian Road, Suzhou Industrial Park ,
Suzhou, Jiangsu Province, China, 215000



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Movi S.p.a.
Via Dione Cassio 15
20138 Milano, Italia



Made in China

SCOOTER GARY COLORE: ROSSO
SCOOTER GARY RED COLOUR



244000908



SW1260 RED



2025-01



160kg



Prodotto importato e distribuito da:
Movi S.p.a.
Via Dione Cassio 15, 20138 Milano
Italia

Per segnalazioni e reclami rivolgersi a:
regulatory@movigroup.com