

MANUALE D'USO

Comoda per doccia

COMODA PER DOCCIA WAVE-2

Cod. 15651262 - COMODA PER DOCCIA WAVE-2 LITE CON RUOTE DA 5"

Cod. 15651263 - COMODA PER DOCCIA WAVE-2 BASCULANTE




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI:	pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO:	pg.3
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:	pg.5
4. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:	pg.8
5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:	pg.9
6. MONTAGGIO E REGOLAZIONI:	pg.10
7. PULIZIA E DISINFEZIONE:	pg.24
8. MANUTENZIONE:	pg.25
9. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.27
10. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.29
11. NOTA:	pg.30
12. SMALTIMENTO:	pg.31
13. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.32
14. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.33

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,

desideriamo ringraziarla per il suo acquisto e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono concepiti per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza.

Le Comode da doccia Wave-2 Lite e Basculante, classificate come dispositivo medico di classe I, sono realizzate in conformità al Regolamento MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 sui dispositivi medici.

Il Fabbricante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbricante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

Il presente manuale fa riferimento alle seguenti comode:

- Cod 15651262 - Comoda per doccia Wave-2 Lite con ruote da 5"
- Cod 15651263 - Comoda per doccia Wave-2 Basculante

2. DESTINAZIONE D'USO:

Le Comode MOVI sono destinate a persone con difficoltà motorie e possono essere utilizzate come ausilio per l'utilizzo in doccia e in bagno.

Le Comode MOVI sono spinte manualmente e devono essere utilizzate esclusivamente per il trasporto assistito di una persona disabile o con difficoltà motorie.

La comoda deve essere utilizzata solo a livello del suolo, su superfici facilmente accessibili e solo all'interno di edifici.



Prima di utilizzare la comoda:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni al dispositivo a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente il dispositivo.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (gomme, freni, rivestimenti di seduta e schienale, poggiatesta, ecc.) e del serraggio della viteria.
- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano il dispositivo devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale. Utilizzare la Comoda unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale del dispositivo e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.
- Qualora il dispositivo risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.



- Il dispositivo deve essere utilizzato nelle condizioni di fornitura e non può essere modificato in alcun modo.
- Far controllare periodicamente lo stato del dispositivo e di tutti i suoi componenti da un centro tecnico autorizzato. Se si dovessero riscontrare

- segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.
- Contattare un centro tecnico autorizzato per eventuali riparazioni.
 - Accertarsi che nessuna parte del corpo (ad es. dita) né indumenti, coperte ecc. vengano intrappolati nelle parti mobili del dispositivo: **PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!**
 - Non utilizzare la Comoda su superfici sconnesse o pendenze.
 - Utilizzare con estrema cautela su superfici bagnate e scivolose.
 - In caso di utilizzo da parte di pazienti diversi, è necessario prendere opportune precauzioni per evitare il verificarsi di infezioni incrociate.
 - In particolare, pulire sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo, prestando particolare cura alle parti che vengono in contatto con l'utilizzatore, come ad esempio la seduta
 - Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi dalla destinazione d'uso prevista.
 - Prima dell'utilizzo, verificare che la Comoda sia posizionata su una superficie piana e sia perfettamente stabile.
 - Poiché i rivestimenti non sono ignifughi, tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, in particolare dalle sigarette accese.
 - Il dispositivo è progettato per essere utilizzato a tempo indeterminato a condizione che sia mantenuto integro e che non siano presenti segni di usura eccessiva nei componenti.
 - La Comoda deve sempre essere utilizzata con l'aiuto di un assistente.
 - Non salire in piedi sulla comoda.
 - Non salire in piedi sulle pedane.
 - Prima di salire e scendere dalla Comoda, l'assistente deve bloccare le ruote mediante i freni e contestualmente aiutare l'utilizzatore durante le operazioni di spostamento.
 - Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
 - Non utilizzare come sedile all'interno di veicoli.
 - Non utilizzare mai i braccioli per alzare o spostare la comoda.
 - **Il carico massimo di sicuro utilizzo è di kg 120. Non superare mai tale carico.**

Avvertenze sulla sicurezza per OPERATORI SANITARI

- Prima del primo utilizzo del dispositivo, informare l'utilizzatore riguardo a come utilizzare in sicurezza il dispositivo, seguendo attentamente le istruzioni riportate in questo manuale che deve essere fornito insieme a esso. Informare tutti gli utilizzatori su ogni possibile pericolo a causa di un utilizzo errato.
- Le comode sono classificate come dispositivi medici di Classe I. È necessario assolvere i propri doveri in conformità alle normative vigenti in materia di installazione e utilizzo dei dispositivi medici, al fine di assicurare un utilizzo duraturo e in sicurezza di questo prodotto senza alcun rischio per pazienti, utilizzatori e terze parti. In caso di utilizzo prolungato del dispositivo, è necessario eseguire controlli a cadenza regolare (si suggerisce almeno una volta all'anno), per verificarne le funzionalità e individuare eventuali danni visibili.
- Assicurarsi che questo dispositivo sia utilizzato esclusivamente da personale qualificato.
- Assicurarsi che eventuali sostituti del personale siano sufficientemente istruiti sul corretto utilizzo di questo dispositivo.
- Assicurarsi che il personale rispetti le avvertenze sulla sicurezza.

Avvertenze sulla sicurezza per l'UTILIZZATORE

- Leggere il presente manuale prima dell'utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato e l'assenza di difetti del dispositivo.
- Verificare il corretto montaggio delle parti removibili.
- La comoda non deve essere considerata un sedile da usare all'interno di un autoveicolo.
- Prima di inclinarsi in avanti o di alzarsi dalla comoda, arretrare di pochi centimetri per far in modo che le ruote anteriori siano rivolte in avanti e quelle posteriori siano bloccate, quindi frenare le ruote posteriori.
- Evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale, mantenendo sempre il baricentro entro il perimetro della comoda stessa.

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo delle Comode MOVI non è indicato a:

- Bambini di età inferiore ai 15 anni
- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso
- La comoda non deve essere utilizzata da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.

COMPLICAZIONI

Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

Qualora vi fosse il rischio di sviluppare piaghe da decubito, munirsi di strumenti di prevenzione adeguati a seguito di consulto con il medico curante.

4. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

Le comode MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Le Comode da doccia Wave-2 Lite e Basculante sono innovative sedie comode da doccia per uso in ambienti interni. Possono essere utilizzate sia come sedie da doccia che come comode.

Il telaio è interamente realizzato in alluminio trattato con vernice epossidica, per una completa protezione da agenti esterni.

Le imbottiture della seduta, del coprisedile, dei braccioli e dello schienale sono realizzate in schiuma poliuretanica. La seduta è predisposta con un'apertura centrale per l'utilizzo del secchio posizionato sotto la seduta stessa e richiudibile con il coprisedile imbottito. Il secchio è assicurato alla seduta mediante 2 binari che ne permettono la completa estrazione posteriore.

Le Comode sono dotate di 4 ruote piroettanti da 5" tutte dotate di freno di stazionamento.

I braccioli sono imbottiti e ribaltabili e lo schienale è eventualmente smontabile per limitare gli ingombri. I poggiapiedi sono regolabili in flessione-estensione.

Inoltre, nel modello Comoda per doccia Wave-2 Basculante - Cod. 15651263, le pedane sono estraibili, ribaltabili e regolabili in altezza.

6. MONTAGGIO E REGOLAZIONI:

Istruzioni di montaggio

Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Le presenti istruzioni per l'uso sono destinate a tutti gli utenti, in particolare al personale di assistenza, come base per un utilizzo sicuro e privo di rischi del dispositivo. Queste istruzioni descrivono la preparazione, il funzionamento, l'uso, la manutenzione e la cura del dispositivo. Per utilizzare al meglio questo dispositivo e garantire la massima sicurezza durante la movimentazione, leggere e osservare le istruzioni per l'uso e assicurarsi che siano sempre accessibili per l'utente.

Assemblaggio


Assemblare la comoda dopo il disimballaggio. L'assemblaggio e il controllo funzionale devono essere eseguiti da personale specializzato. Il tecnico specializzato adatterà la comoda all'utente. In caso di utenti esperti, le seguenti istruzioni possono fungere da supporto per il montaggio in autonomia della comoda.

Attenzione! Leggere le istruzioni per l'uso prima di montare e utilizzare la comoda da doccia.

Comoda per doccia Wave-2 Lite - Cod. 15651262


Parti

- (1) Struttura
- (2) Schienale completo di braccioli ribaltabili
- (3) Seduta
- (4) Pediera sinistra
- (5) Pediera destra
- (6) Secchio
- (7) Cover della seduta
- (8) Manopole x4
- (9) Viti 40 mm x2
- (10) Viti 30 mm x2

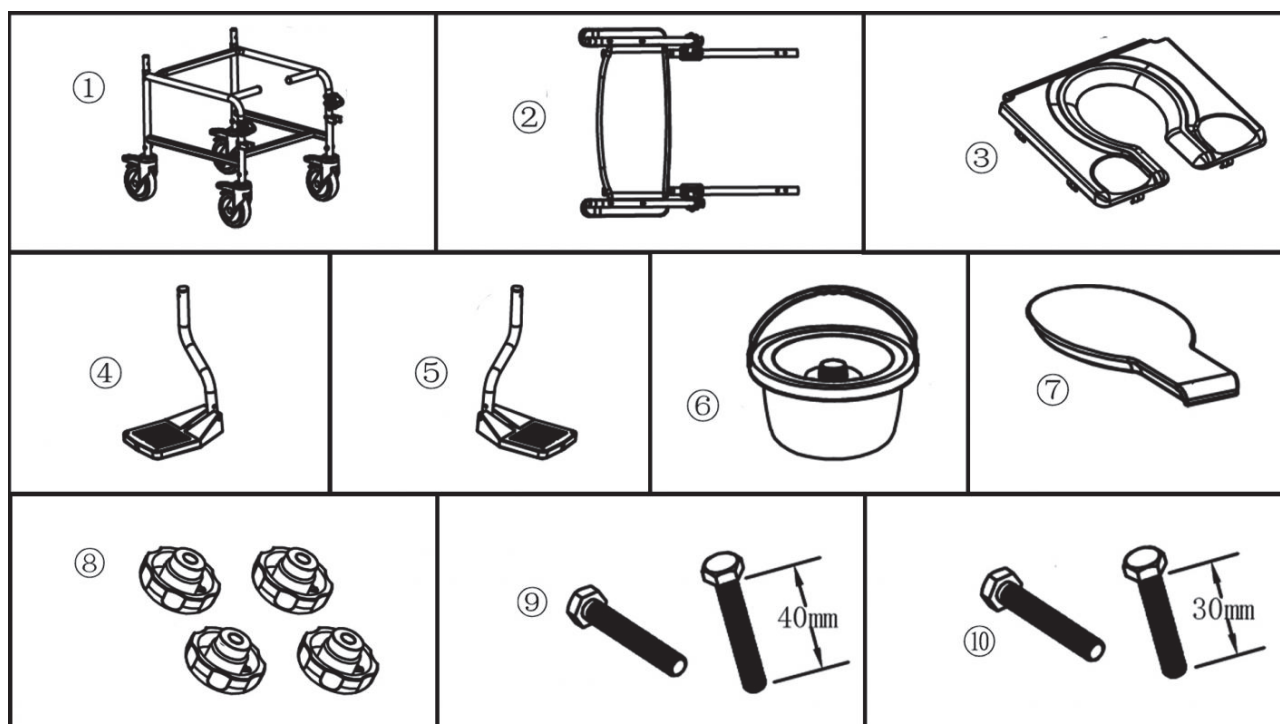

Montaggio della struttura e dello schienale


- Preparare la struttura (1), lo schienale (2), 2 manopole (8) e le viti da 30 mm (10).
- Allineare e inserire i tubolari di connessione dello schienale (2), negli appositi spazi della struttura (1), come mostrato nella Fig. 1.
- Dopo aver allineato i fori, presenti sui lati dei tubolari, inserire le viti da 30 mm (10) serrandole saldamente con le manopole (8), come mostrato nel dettaglio della Fig. 1.

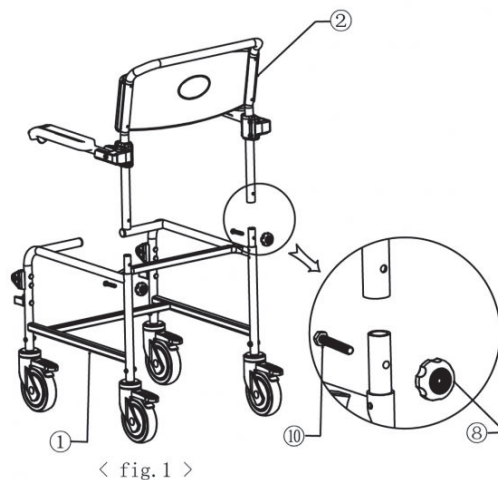

Montaggio della seduta

- Preparare la seduta (3) e la cover della seduta (7).
- Sollevare i braccioli e allineare gli attacchi a forma di U, che si trovano nella parte inferiore della seduta, con il telaio. Premere entrambe le estremità della seduta per bloccare gli attacchi nella corretta posizione, come mostrato nella Fig. 2.
- Inserire la cover nella scanalatura presente al centro della seduta.
- Abbassare i braccioli fino a quando non arrivano a fine corsa come mostrato nella Fig. 2.

NOTA: i braccioli possono essere facilmente ribaltati per agevolare la discesa o la salita dell'utente, o per posizionare la comoda sotto tavoli o scrivanie.

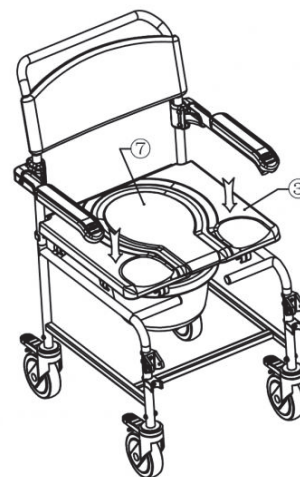


<fig. 2>

Montaggio delle pediere

- Preparare la pediera sinistra (4), una manopola (8) e una vite da 40 mm (9).
- Allineare correttamente i fori, presenti sulla pediera, con quelli presenti nell'apposito alloggiamento posizionato sulla struttura (1).
- Inserire la vite da 40 mm (9), nella corretta direzione mostrata nel dettaglio della Fig. 3, serrandola saldamente con la manopola (8).
- Ripetere l'operazione per la pediera destra, come mostrato nella Fig. 4.

NOTA: le pedane poggiapiedi sono pieghevoli e facilmente richiudibili.

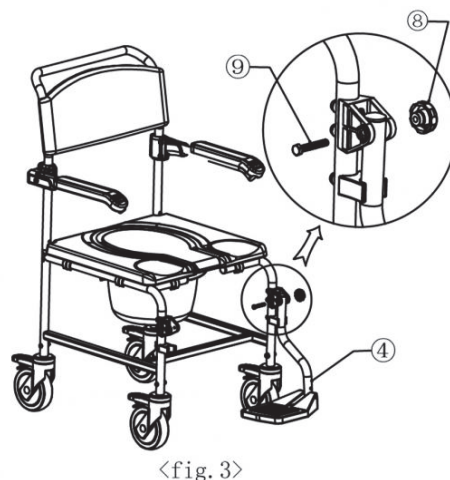

Montaggio del secchio


- Preparare il secchio (6).
- Allineare il secchio con lo spazio apposito presente sotto la seduta.
- Inserire il secchio fino al corretto posizionamento come mostrato nella Fig. 5.



Comoda per doccia Wave-2 Basculante - Cod. 15651263


Parti

- (1) Struttura
- (2) Schienale completo di braccioli ribaltabili
- (3) Ruote da 5" con freno di stazionamento x4
- (4) Poggiatesta
- (5) Pediera sinistra
- (6) Pediera destra
- (7) Seduta
- (8) Cover della seduta
- (9) Secchio
- (10) Viti e rondelle x4 set
- (11) Manopole x2
- (12) Chiave a brugola di 4mm

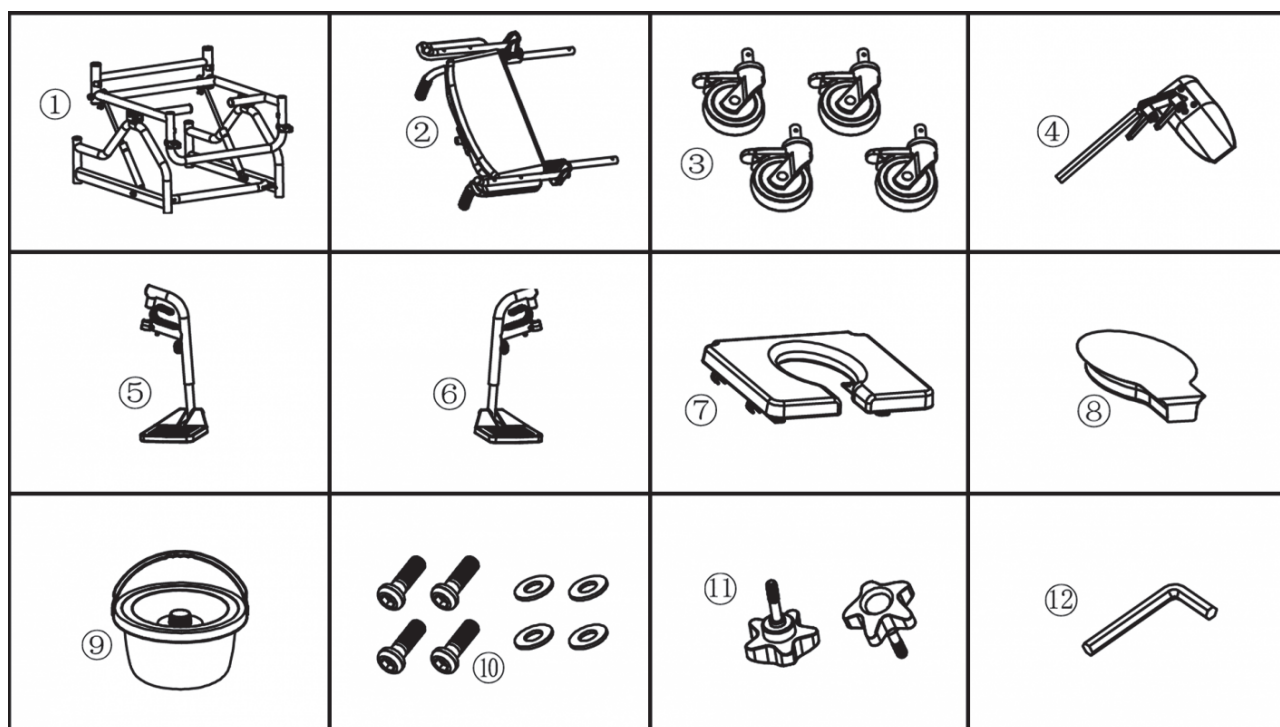

Montaggio delle ruote


- Preparare la struttura (1), le ruote (3), le viti e le rondelle (10) e la chiave a brugola (12).
- Inserire le ruote nella parte inferiore della struttura come mostrato nella Fig. 1, allineando correttamente entrambe le parti.
- Inserire le viti con le rondelle negli appositi fori ed utilizzare la chiave a brugola per stringerle saldamente. Ripetere l'operazione per tutte e 4 le ruote.

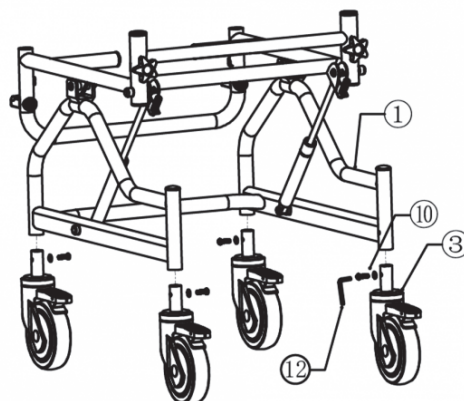

< fig. 1 >

Montaggio dello schienale e del poggiatesta


- Preparare lo schienale (2).
- Inserire lo schienale negli appositi tubi posti sulla struttura, come mostrato nella Fig. 2, verificando di allineare correttamente entrambe le parti.
- Dopo aver allineato i fori, posti sui lati delle due parti, inserire le manopole (11) e serrarle saldamente.
- Preparare il poggiatesta (4).
- Inserire il poggiatesta nell'apposito foro presente sulla parte alta dello schienale, come mostrato nel dettaglio E della Fig. 2.
- Fissare lo schienale alla struttura con i due fermi indicati con la lettera M nella Fig. 2.

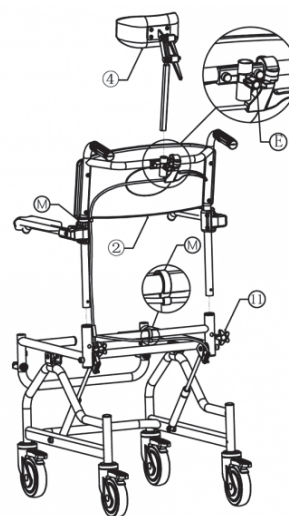


< fig. 2 >

Regolazione del poggiatesta

- Per bloccare e sbloccare il meccanismo di regolazione del poggiatesta fare riferimento alla Fig. 3.
- Quando la leva, indicata con la lettera F nella Fig. 3, è bloccata non si possono regolare le posizioni.
- Per sbloccare la leva è necessario tirarla verso l'esterno per sganciare il meccanismo e contemporaneamente ruotarla fino alla posizione desiderata. Quindi bloccarla nuovamente. Per effettuare la regolazione del poggiatesta seguire le istruzioni mostrate nella Fig. 4.

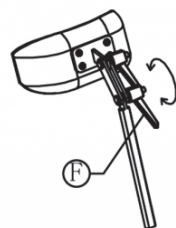

< fig. 3 >

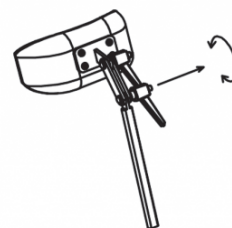


< fig, 4 >

NOTA: quando il caregiver deve spingere la comoda, si consiglia di regolare il poggiatesta in posizione verticale per evitare di urtarlo.

Montaggio della seduta

- Preparare la seduta (7) e la cover della seduta (8).
- Sollevare i braccioli e allineare gli attacchi a forma di U, che si trovano nella parte inferiore della seduta, con il telaio. Premere entrambe le estremità della seduta per bloccare gli attacchi nella corretta posizione, come mostrato nella Fig. 5.
- Inserire la cover nella scanalatura presente al centro della seduta.
- Abbassare i braccioli fino a quando non arrivano a fine corsa come mostrato nella Fig. 5.

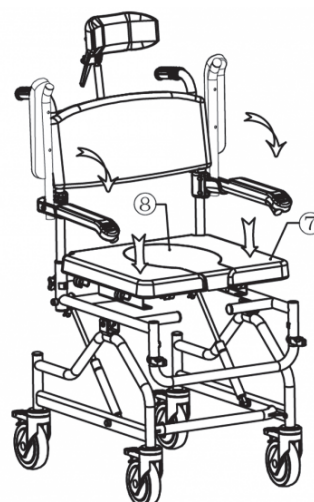


< fig. 5 >

NOTA: i braccioli possono essere facilmente ribaltati per agevolare la discesa o la salita dell'utente, o per posizionare la comoda sotto tavoli o scrivanie.

Montaggio delle pediere

- Preparare la pediera sinistra (5) e la pediera destra (6)
- Assicurarsi che la pediera destra sia ruotata verso l'esterno e allineare il tubo di connessione con la struttura della comoda come mostrato nella Fig. 6. Inserirla e ruotarla frontalmente, come mostrato dalla freccia, fino al suo bloccaggio.
- Ripetere l'operazione per la pediera sinistra


NOTA: le pedane poggiapiedi sono facilmente richiudibili. Inoltre, utilizzando la leva indicata nella Fig. 6, è possibile ruotare le pediere verso l'esterno. Una volta ruotate verso l'esterno è possibile rimuovere le pediere tirando verso l'alto.

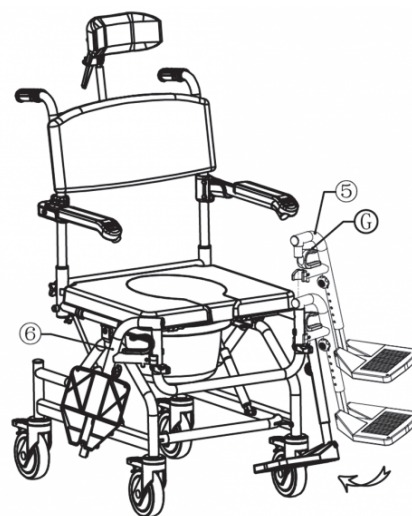

< fig. 6 >

Impostazioni di base

Equipaggiata con 4 ruote silenziose e piroettanti, dotate tutte di freni di stazionamento, come mostrato nella Fig. 7, la comoda può essere facilmente spinta e manovrata anche in spazi ristretti.

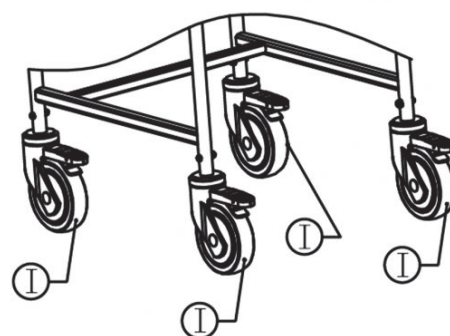


< fig. 7 >

Solo per il modello Comoda per doccia Wave-2 Basculante - Cod. 15651263

Le pediere, ribaltabili e removibili, possono essere regolate in altezza.

Come mostrato nella Fig. 8, le pediere hanno due fori di regolazione nella parte indicata con la lettera L e 7 fori di regolazione nella parte indicata con la lettera K.

Selezionare l'altezza in accordo con le esigenze dell'utilizzatore e bloccare la pediera con la manopola indicata con la lettera J. Ripetere l'operazione per entrambe le pediere.

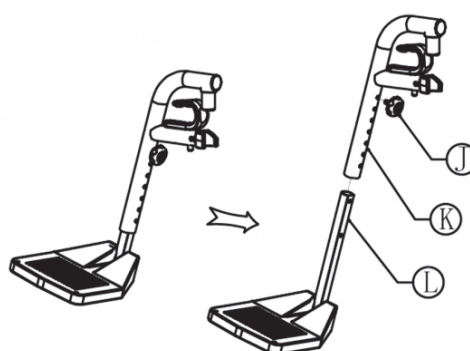

< fig. 8 >

La comoda può essere usata su un WC di medie dimensioni come mostrato nella Fig. 9.

- Estrarre il secchio dal lato posteriore. (6)
- Rimuovere la cover della seduta. (7)
- Aprire il coperchio del WC.
- Spostare la Comoda e inserire i freni di stazionamento.



< fig. 9 >


Uso della comoda da doccia

Uso del freno di stazionamento

La comoda da doccia è dotata di ruote piroettanti da 5".

- Azionare il freno spingendo il blocco (1)
- Per sbloccare il freno, sollevarlo da sotto il blocco (2)

Attenzione! Non utilizzare la comoda da doccia se i freni di bloccaggio sono danneggiati o non sono utilizzabili.

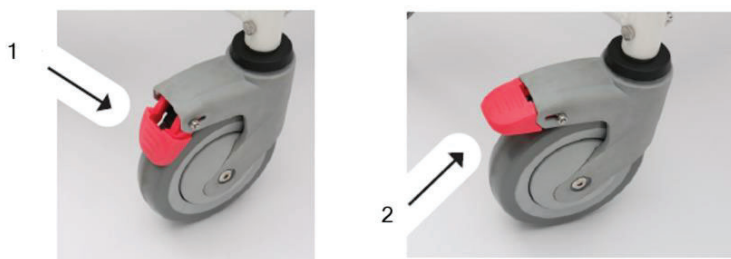

Salita e discesa laterale

- Inserire i freni di bloccaggio
- I braccioli possono essere ruotati all'indietro per facilitare la salita e la discesa

Attenzione! Pericolo di lesioni da schiacciamento! Quando si abbassano i braccioli, gli indumenti o parti del corpo possono incastrarsi nella staffa.

Salita e discesa frontale

- Inserire i freni di bloccaggio
- Per agevolare la salita e la discesa è possibile sollevare le pedane. In aggiunta, per il modello Wave-2 Basculante - Cod. 15651263, è possibile ruotare le pediere verso l'esterno.

Attenzione! Rischio di caduta! Non fare pressione sui poggiapiedi mentre ci si alza. Alzarsi e sedersi sempre posizionando i piedi a terra.

Uso della sedia come WC

- Inserire i freni di bloccaggio
- Per utilizzare la sedia come WC, posizionare il secchio senza coperchio sotto la seduta
- Spingere il secchio verso l'interno dalla parte posteriore fino a bloccarlo
- Rimuovere il rivestimento del foro per WC

Dopo l'uso

- Secchio (estrarre dal lato posteriore per svuotarlo)
- Posizionare il coperchio
- Dopo lo svuotamento, pulire come descritto

Uso della sedia in doccia


- Inserire i freni di bloccaggio
- Rimuovere il secchio per utilizzare la sedia doccia estraendolo dal lato posteriore
- Rimuovere il rivestimento del foro per WC per facilitare la cura e la pulizia personale

Attenzione! Rischio di lesioni da sfregamento e schiacciamento! Non estrarre il secchio mentre la persona è ancora seduta sulla sedia.

Basculamento seduta

Solo per il modello Wave-2 Basculante - cod. 15651263

La seduta può essere basculata, mediante la leva indicata con la lettera H nella Fig. 8, con un angolo compreso tra 0° e 30°. L'angolazione del poggiatesta (4) può essere regolata tramite i due snodi presenti nella sezione alta.

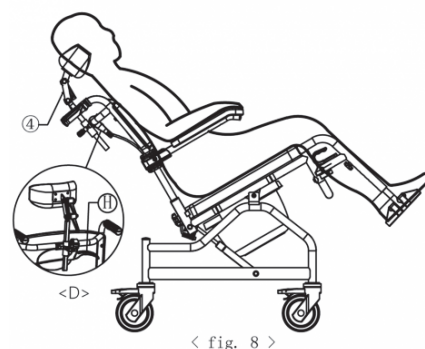

7. PULIZIA E DISINFEZIONE:

Rivestimenti e imbottiture

Tutte le imbottiture sono realizzate in schiuma poliuretanica lavabile con acqua e sapone neutro.



Ogni volta che la Comoda viene utilizzata da un nuovo paziente, deve essere obbligatoriamente pulita e disinfettata con uno strofinamento accurato!

Telaio

Mantenere sempre pulita la comoda per un comfort migliore e per garantirne le prestazioni per un lungo periodo. Pulire con acqua e detersivo neutro. In caso di sporco ostinato utilizzare uno sgrassante. Non utilizzare solventi o prodotti abrasivi. Asciugare con un panno morbido.

Freni

L'effetto frenante dipende anche dallo stato del battistrada. La presenza di sporcizia può influenzare negativamente il funzionamento dei freni. Eventualmente pulire con uno spazzolino per eliminare polvere e scorie.

Ruote

Gli pneumatici in gomma piena non necessitano di particolare manutenzione. Prestare attenzione allo stato di usura delle gomme, in quanto influisce sulle prestazioni dei freni.

8. MANUTENZIONE:

I proprietari delle comode, in conformità con la normativa vigente, sono tenuti a garantire le condizioni di sicurezza dei dispositivi medici durante il loro impiego. A tal fine è necessario eseguire regolarmente interventi di controllo e manutenzione da parte di personale specializzato ed autorizzato dal fabbricante.

Come regola generale, si raccomanda di eseguire un controllo almeno una volta all'anno presso un centro autorizzato.

Nel caso risultasse necessario l'utilizzo di ricambi, fornirsi unicamente di ricambi originali

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.



In seguito a ripetute operazioni di trasporto, montaggio, smontaggio, utilizzo errato e impiego per un lungo periodo di tempo, non è da escludere che si possano verificare danni, difetti e usura. Questi problemi possono rappresentare un pericolo per la sicurezza se non vengono riconosciuti e risolti in tempo!

Se si ritiene che siano presenti danni o problemi funzionali, la comoda non deve essere assolutamente utilizzata fino a quando i componenti danneggiati non siano stati sostituiti o riparati! Per la sostituzione e la riparazione dei componenti danneggiati, contattare il proprietario della carrozzina, il fabbricante o il rivenditore autorizzato.

Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del prodotto in caso di utilizzo di componenti/accessori non originali.

9. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

COMODA PER DOCCIA WAVE-2 LITE CON RUOTE DA 5" COMMODE CHAIR WAVE-2 LITE (5" castors)



15651262



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA



XXXXXXXXXX

20XX



120 kg



COMODA PER DOCCIA WAVE-2 BASCULANTE TILTING COMMODE CHAIR WAVE-2



15651263



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA



XXXXXXXXXX

20XX



120 kg



	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE

Comoda per doccia COMODA PER DOCCIA WAVE-2

	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA
	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

10. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Comoda per doccia Wave-2 Lite con ruote da 5"	
Codice prodotto	15651262
Larghezza seduta	46 cm
Altezza seduta	51 cm
Profondità seduta	40 cm
Altezza schienale	41 cm
Profondità massima	82 cm
Altezza	95,5 cm
Altezza braccioli dalla seduta	21 cm
Larghezza massima	58 cm
Portata massima	120 kg
Peso	11 kg

Comoda per doccia Wave-2 Basculante	
Codice prodotto	15651263
Larghezza seduta	46 cm
Altezza seduta	54 cm
Profondità seduta	40 cm
Altezza schienale	49 cm
Profondità massima	98 cm
Altezza	102 cm
Altezza braccioli dalla seduta	24 cm
Larghezza massima	59 cm
Inclinazione seduta	da 0° a 30°
Portata massima	120 kg
Peso	17 kg

11. NOTA:

Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un centro tecnico autorizzato, in quanto è necessaria una buona conoscenza del prodotto da ispezionare. Se tale ispezione dovesse rilevare qualsiasi difetto, malfunzionamento o segno di usura che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, la Comoda non deve assolutamente essere utilizzata fino alla riparazione.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Movi S.P.A - declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:
Movi SpA — Via Dione Cassio, 15 — 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

12. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

13. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

14. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate

sulla scheda tecnica del dispositivo);

- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movì S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movì S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano - www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

Comoda per doccia COMODA PER DOCCIA WAVE-2
Cod. 15651262 - COMODA PER DOCCIA WAVE-2 LITE CON
RUOTE DA 5"
Cod. 15651263 - COMODA PER DOCCIA WAVE-2
BASCULANTE
Rev.1 27/10/2025



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com