

# MANUALE D'USO

## ROLLY-2

Cod. 15609100



  
**WIMED**  
TECNOLOGIE MEDICALI



## INDICE:

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>1. INTRODUZIONE:</b>                    | pg.3  |
| <b>2. DESTINAZIONE D'USO:</b>              | pg.4  |
| <b>3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:</b>  | pg.6  |
| <b>4. DESCRIZIONE:</b>                     | pg.11 |
| <b>5. MONTAGGIO:</b>                       | pg.12 |
| <b>6. TECNICHE DI GUIDA:</b>               | pg.14 |
| <b>7. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:</b>      | pg.19 |
| <b>8. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:</b> | pg.20 |
| <b>9. CARATTERISTICHE TECNICHE:</b>        | pg.22 |
| <b>10. PULIZIA E DISINFEZIONE:</b>         | pg.22 |
| <b>11. MANUTENZIONE:</b>                   | pg.23 |
| <b>12. NOTE:</b>                           | pg.24 |
| <b>13. SMALTIMENTO:</b>                    | pg.25 |
| <b>14. RECLAMI E INCIDENTI:</b>            | pg.25 |
| <b>15. CERTIFICATO DI GARANZIA:</b>        | pg.26 |

## 1. INTRODUZIONE:

Gentile Cliente,  
desideriamo ringraziarla per l'acquisto del ROLLY-2 e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Il ROLLY-2 pieghevole è stato concepito per garantire all'utente la massima sicurezza e un comfort ottimale, ed è adatto per l'utilizzo in ambienti esterni e interni.

I rollator MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il presente manuale fornisce informazioni utili all'acquirente e all'utilizzatore per tutte le funzioni che garantiscono un utilizzo quotidiano, pratico e sicuro di questo rollator.

Si consiglia di usare questo manuale come guida pratica e di conservarlo vicino al rollator.

**Il presente manuale fa riferimento al seguente rollator:**

- Cod. 15609100 - Rolly-2

## 2. DESTINAZIONE D'USO:

I rollator MOVI sono destinati a persone con difficoltà motorie.

Il dispositivo medico è indicato per fornire un sostegno alla mobilità a persone con difficoltà motorie.



Prima di utilizzare il rollator:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni al rollator a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente il rollator.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (gomme, freni ecc.) e del serraggio della viteria.
- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

**Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano il rollator devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.**

### **CONTROINDICAZIONI**

L'utilizzo dei Rollator MOVI non è indicato a:

- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso.
- Il rollator non deve essere utilizzato da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.

### **COMPLICAZIONI**

Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

## 3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.
- Il carico massimo di utilizzo sicuro è di 160 Kg. Tale carico, non deve essere superato in nessun caso.
- I rollator Movi sono dispositivi medici. Assicurarsi, pertanto, di leggere l'intero manuale. Utilizzare i prodotti unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

**Tenere lontano da fonti di calore, umidità e contenitori di liquidi.**



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del letto o all'ambiente circostante.

**Il simbolo di sicurezza non sostituisce il testo di avvertenza a cui si riferisce. Leggere sempre le avvertenze sulla sicurezza e seguirle attentamente!**



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica l'obbligo di leggere le istruzioni prima dell'utilizzo del dispositivo



### Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale del rollator e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.
- Qualora il rollator risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.



Attenzione!



Leggere attentamente il manuale d'uso al fine di evitare danni in fase di movimentazione del rollator.

**Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per i danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.**



- In caso di utilizzo da parte di pazienti diversi, è necessario prendere opportune precauzioni per evitare il verificarsi di infezioni incrociate
- In particolare, pulire sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo, prestando particolare cura alle parti che vengono in contatto con l'utilizzatore come ad esempio le impugnature.
- Non utilizzare il dispositivo su terreni sconnessi, con scarsa aderenza (selciati, sterrati, sabbia) o pendenze, anche di modesta entità.
- In caso di sosta, inserire i freni di stazionamento delle ruote posteriori.

- Prima di affidare il proprio sostegno al dispositivo, accertarsi che si trovi in una configurazione stabile, completamente aperto, con il sedile inserito correttamente.
- Controllare sempre lo stato d'integrità del dispositivo prima di utilizzarlo mediante accurata ispezione visiva. Se tale ispezione, dovesse rilevare una qualunque anomalia, il dispositivo non deve essere utilizzato.
- Il dispositivo dev'essere utilizzato nelle condizioni di fornitura e non può essere modificato in nessun modo.
- Durante l'operazione di apertura o di chiusura del dispositivo, l'inserimento e l'estrazioni delle parti amovibili, o anche durante l'operazione di regolazione dell'altezza delle impugnature, fare molta attenzione alla posizione delle **dita per evitare il loro accidentale schiacciamento.**
- Il dispositivo è stato concepito come sostegno per utilizzatore, per questo non deve essere utilizzato come supporto per oggetti di alcun genere.
- Non disperdere il dispositivo nell'ambiente ma smaltire in base alle normative nazionali e/o locali.
- **NON UTILIZZARE MAI QUESTO DISPOSITIVO COME SEDILE ALL'INTERNO DI UN VEICOLO IN MOVIMENTO.**

### **Avvertenze sulla sicurezza per OPERATORI SANITARI**

- Prima del primo utilizzo del rollator, informare l'utilizzatore riguardo a come utilizzare in sicurezza il rollator, seguendo attentamente le istruzioni riportate in questo manuale che deve essere fornito insieme a esso. Informare tutti gli utilizzatori su ogni possibile pericolo a causa di un utilizzo errato.
- I rollator sono classificati come dispositivi medici di Classe I. È necessario assolvere i propri doveri in conformità alle normative vigenti in materia di installazione e utilizzo dei dispositivi medici, al fine di assicurare un utilizzo duraturo e in sicurezza di questo prodotto senza alcun rischio per pazienti, utilizzatori e terze parti. In caso di utilizzo prolungato del rollator, è necessario eseguire controlli a cadenza regolare (si suggerisce almeno una volta all'anno), per verificarne le funzionalità e individuare eventuali danni visibili.
- Assicurarsi che questo rollator sia utilizzato esclusivamente da personale qualificato.
- Assicurarsi che eventuali sostituti del personale siano sufficientemente istruiti sul corretto utilizzo di questo rollator.
- Assicurarsi che il personale rispetti le avvertenze sulla sicurezza.

### **Avvertenze sulla sicurezza per l'UTILIZZATORE**

- Leggere il presente manuale prima dell'utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato e l'assenza di difetti del rollator.
- Prima di affrontare ostacoli come scalini o dossi, assicurarsi che non si creino interferenze con il dispositivo.
- Evitare, quando possibile, di attraversare pozze d'acqua. Il dispositivo è resistente all'acqua, ma in caso venga bagnato è consigliabile provvedere all'asciugatura nel più breve tempo possibile.
- Verificare il corretto montaggio delle parti removibili.
- Nella scelta del prodotto, confrontarsi con il personale medico al fine di verificare la compatibilità con le caratteristiche dello stesso.


### 4. DESCRIZIONE:

Il ROLLY-2 pieghevole è un dispositivo medico di classe I, utilizzabile da chi necessita di appoggio per la posizione eretta o la deambulazione e da chi necessita di una carrozzina da transito.

Il dispositivo è costituito da un telaio pieghevole in alluminio con sistema di apertura / chiusura, ed è provvisto di due impugnature anatomiche regolabili in altezza tramite leve per i freni a pattino.

Il ROLLY-2 è dotato di 4 ruote antiforatura in ABS con anello in PU di diametro 20 cm, di cui 2 ruote anteriori piroettanti e 2 ruote posteriori frenanti.

Il dispositivo è richiudibile e può quindi essere riposto nonché trasportato in auto con estrema semplicità.

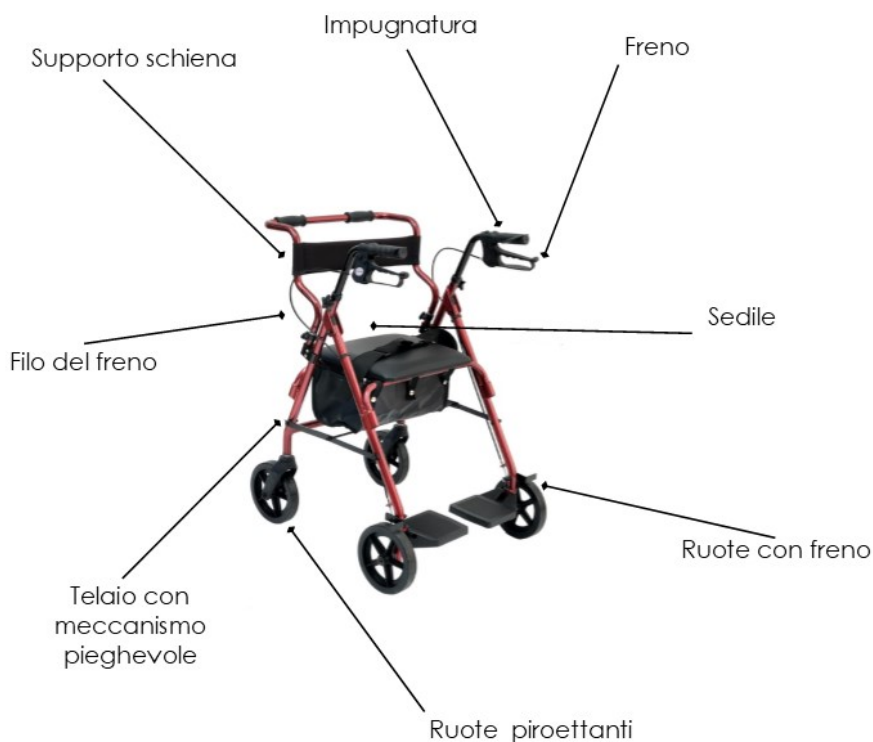

### 5. MONTAGGIO:

Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale prima di tentare di montare o di utilizzare il ROLLY-2.

1. Prelevare dalla confezione tutti gli elementi: schienale, manopole di spinta con relativo tubo, telaio, rotelle e cestello.
2. Aprire il telaio e far scivolare lo schienale imbottito nei supporti del telaio. Accertarsi che i pulsanti di blocco sporgano dai fori.
3. Allentare i pomoli di serraggio delle manopole di spinta e inserire i tubi delle manopole nel telaio all'altezza desiderata, accertandosi di allineare i fori.
4. Far passare i bulloni attraverso i fori dall'esterno e serrare i pomoli.
5. Posare il ROLLY-2 sul pavimento con il sedile rivolto verso il basso e raddrizzare le gambe fino al bloccaggio delle cerniere laterali.
6. Montare il cestello al telaio con i bottoni a pressione.



#### **Attenzione!**

**Durante l'operazione di montaggio del dispositivo prestare estrema attenzione alla posizione delle dita per evitare il loro accidentale schiacciamento.**



**Nella funzione CARROZZINA prestare attenzione a quanto segue:**

- Utilizzare la funzione carrozzina da transito solo se accompagnati.
- L'utilizzatore e il suo assistente devono rivolgersi a una figura professionale qualificata per l'apprendimento della tecnica corretta di utilizzo di questo dispositivo sulle rampe di accesso.
- Prima di inclinarsi in avanti o di alzarsi dalla carrozzina, assicurarsi che le ruote anteriori siano dritte e quelle posteriori siano bloccate.
- Evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale, mantenendo sempre il baricentro entro il perimetro della carrozzina stessa.
- Non sporgersi in avanti privi di un'assistenza adeguata durante l'utilizzo, pericolo di ribaltamento!

### 6. TECNICHE DI GUIDA:

ROLLY 2 è un rollator con due funzioni in 1:

- Il passaggio dalla **FUNZIONE ROLLATOR** alla **FUNZIONE CARROZZINA DA TRANSITO** avviene abbassando le pedane presenti nella parte anteriore del rollator (Fig. 1) .
- In questo modo, l'utilizzatore potrà sedersi sul sedile, appoggiare la schiena e posizionare i piedi sull'apposito appoggio.

Fig. 1



## Ripiegare il rollator

Per ripiegare il rollator, occorre sbloccarlo sollevando il sedile e tirando verso l'alto la cinghia che si trova all'interno del cestello per iniziare il ripiegamento. Continuare a ripiegare il rollator facendo pressione sul telaio finché non sia diventato compatto. Se necessario, rimuovere lo schienale.

## Meccanismo di bloccaggio

Attivare sempre simultaneamente il meccanismo di bloccaggio delle due rotelle.

- Quando l'utilizzatore si trova in posizione eretta, è necessario tirare verso l'alto la manopola di bloccaggio per mantenere in posizione le rotelle posteriori (Fig. 3) .
- **Bloccaggio temporaneo delle rotelle:** con il palmo delle mani, premere verso il basso entrambe le manopole di bloccaggio fino a sentire un "clic" che indica il blocco delle rotelle (Fig. 4) .
- **Sbloccaggio delle rotelle:** con il palmo delle mani, premere verso l'alto le manopole di bloccaggio e riportarle alla posizione iniziale (Fig. 5) .



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

## Regolazione dei freni

L'intensità della frenata può essere regolata su ogni freno individualmente.

A questo scopo, ruotare le ghiere di regolazione poste sul cavo flessibile per allontanarle (frenata dura) o avvicinarle (frenata morbida) .

Quando i freni non sono attivati, i pattini non devono toccare le ruote.

Prima di ogni utilizzo verificare che i freni siano in grado di bloccare saldamente le ruote. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al centro di assistenza.



## Controllo delle ruote

Verificare che le ruote frenanti scorrano liberamente.

Eseguire il controllo sollevando il ROLLY-2 e attivando il freno. Se la ruota gira regolarmente il freno è stato regolato correttamente, se la ruota è frenata occorre allentare il freno e successivamente ripetere l'operazione.



### Attenzione!

**Durante l'operazione di controllo delle ruote prestare estrema attenzione alla posizione delle dita per evitare il loro accidentale schiacciamento.**



### Attenzione!

**Verificare il meccanismo di bloccaggio prima dell'utilizzo.**

Se le ruote sono state bloccate, il meccanismo di bloccaggio dovrebbe impedire alle ruote posteriori di girare liberamente. Se le ruote girano nonostante siano state bloccate, rivolgersi al rivenditore autorizzato per la regolazione del dispositivo. Le ruote devono girare liberamente solo quando il meccanismo di bloccaggio è disattivato.

## Utilizzo in posizione eretta e deambulazione

Posizionarsi all'interno del perimetro, appoggiando le mani sulle apposite

impugnature.

Procedere compiendo piccoli passi e cercando di non sbilanciarsi lateralmente. In caso di sosta è necessario attivare i freni posizionati sulle impugnature.

### **Utilizzo in posizione seduta**

Verificare che i freni siano inseriti e bloccati e che il sedile sia posizionato stabilmente prima di sedersi, per evitare il rischio di cadute.

### **Regolazione delle impugnature**

Le impugnature possono essere regolate in altezza in base alle necessità dell'utilizzatore.

Allentare i due morsetti a vite che bloccano i supporti regolabili, spostare i supporti facendoli scorrere verticalmente, come indicato nella Fig. 6. Una volta raggiunta la posizione desiderata serrare saldamente i due morsetti.

Ripetere l'operazione dall'altro lato regolando il supporto nella stessa posizione del primo.



Fig. 6



## Avvertenze speciali per la sicurezza

- **NON** utilizzare il dispositivo prima di aver letto il presente manuale in ogni sua parte.
- **NON** utilizzare il dispositivo come seduta se non si trova su una superficie perfettamente orizzontale.
- **NON** utilizzare il dispositivo su pendenze, anche di modesta entità.
- **NON** utilizzare il dispositivo su terreni scivolosi o con scarsa aderenza (fango, sabbia...)
- **NON** utilizzare il dispositivo per appoggiare o trasportare oggetti.
- **NON** superare il carico massimo di utilizzo di 160 Kg.
- **NON** salire in piedi sulle pedane poggia piedi.
- Quando si utilizza il rollator come carrozzina da transito assicurarsi sempre che: lo schienale sia correttamente inserito, i piedi siano ben posizionati sulle pedane e la cintura di sicurezza sia correttamente allacciata.
- **CONTROLLARE SEMPRE** prima di ogni utilizzo lo stato e l'integrità del dispositivo.
- **CONTROLLARE SEMPRE** dopo un lungo periodo di inutilizzo il serraggio di tutti i bulloni.
- **CONTROLLARE SEMPRE** dopo un lungo periodo di inutilizzo lo stato dei componenti soggetti a usura (gomme e maniglie con imbottitura) .
- Qualora dopo il controllo il ROLLATOR non dovesse risultare integro, **NON** utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.
- **LAVARE SEMPRE** il dispositivo a ogni cambio di utilizzatore per evitare infezioni incrociate.

## **7. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:**

I rollator MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

## 8. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

**ROLLY-2** Rollator doppia funzione  
**ROLLY-2 2** Dual function Rollator  
 Colore Bordeaux / Colour Burgundy

REF 15609100 MD

**MOVI S.p.A.** - Divisione Wimed  
 Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy  
MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXXX

20XX 

160 kg 



|                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | FABBRICANTE                           | EC REP                                                                              | RAPPRESENTANTE<br>AUTORIZZATO NELLA COMUNITA<br>EUROPEA                                                                            |
|    | DATA DI FABBRICAZIONE                 | LOT                                                                                 | LOTTO                                                                                                                              |
| REF                                                                                 | CODICE PRODOTTO                       | SN                                                                                  | NUMERO DI SERIE                                                                                                                    |
|    | CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER<br>L'USO |    | ATTENZIONE! CONSULTARE LE<br>ISTRUZIONI PER L'USO PER<br>IMPORTANTI INFORMAZIONI DI<br>SICUREZZA QUALI AVVERTENZE<br>E PRECAUZIONI |
|  | DATA DI SCADENZA                      |  | NON RIUTILIZZARE                                                                                                                   |
|  | FRAGILE, MANEGGIARE CON<br>CURA       |  | MANTENERE ASCIUTTO                                                                                                                 |
| MD                                                                                  | DISPOSITIVO MEDICO                    | CE                                                                                  | PRODOTTO CONFORME ALLE<br>DIRETTIVE/REGOLAMENTI<br>EUROPEI DI SETTORE                                                              |
|  | QUESTO LATO VERSO L'ALTO              |  | PESO MASSIMO DEL PAZIENTE                                                                                                          |
|  | CARICO LAVORO IN SICUREZZA            | ~                                                                                   | CORRENTE ALTERNATA                                                                                                                 |

## ROLLY-2

|                                                                                   |                            |                                                                                   |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | APPARECCHIO DI CLASSE II   |  | PARTE APPLICATA DI TIPO B                                               |
|  | PARTE APPLICATA DI TIPO BF |  | RACCOLTA SEPARATA DELLE<br>APPARECCHIATURE ELETTRICHE<br>E ELETTRONICHE |
|  | PORTATA                    |                                                                                   |                                                                         |

## 9. CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Peso:                     | 9,5 Kg        |
| Portata:                  | 160 Kg        |
| Altezza sedile da terra:  | 56 cm         |
| Altezza fascia schienale: | 8 cm          |
| Dimensione sedile:        | 31 x 34 cm    |
| Distanza pedane/seduta:   | 40 cm         |
| Altezza regolabile:       | da 84 a 96 cm |
| Profondità:               | 58 cm         |
| Larghezza:                | 62 cm         |
| Diametro ruote:           | 20 cm         |
| Colore:                   | Bordeaux      |

## 10. PULIZIA E DISINFEZIONE:

- Pulire il dispositivo a ogni cambio di utilizzatore detergendolo con una soluzione saponata tiepida.
- Non utilizzare solventi, sostanze corrosive o abrasive.
- Asciugare con un panno morbido.

## 11. MANUTENZIONE:

- Il dispositivo deve essere ispezionato accuratamente almeno una volta all'anno.
- Tale ispezione deve comprendere:
  1. Attento esame visivo di tutti i componenti del dispositivo per accertarne l'integrità.
  2. Prova di corretto funzionamento dei vari meccanismi.
  3. Controllo di tutte le regolazioni e di tutti i serraggi.
  4. Eventuali interventi di ripristino, se necessari.

**La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.**



**Nota:** Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un tecnico competente, in quanto è necessaria una buona conoscenza dell'oggetto da ispezionare. Se tale ispezione dovesse rilevare qualsiasi tipo di difetto, segno di usura o guasto, che potrebbero in qualche modo compromettere la sicurezza, il dispositivo deve rimanere fuori servizio fino alla riparazione.

**Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del ROLLY-2 in caso di utilizzo di componenti non originali.**

## 12. NOTE:



**Nota bene:** Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

**Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:**

Movi SpA - Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano  
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

### 13. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

### 14. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:  
**[regulatory@movigroup.com](mailto:regulatory@movigroup.com)**

Per segnalare un incidente inviare una mail a:  
**[qualityeregulatory@pec.movigroup.com](mailto:qualityeregulatory@pec.movigroup.com)**

## 15. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dagli articoli. 128-135 del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 2005).

### Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: [satwimed@movigroup.com](mailto:satwimed@movigroup.com)

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

### Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);

- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

### **Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)**

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

**MOVI S.p.A** divisione Wimed - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano  
[www.movigroup.com](http://www.movigroup.com)

# MANUALE D'USO ORIGINALE

ROLLY-2  
Cod. 15609100  
Rev.4 12/09/2024



# WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

**Movi SpA**

Via Dione Cassio 15, Milano  
[www.movigroup.com](http://www.movigroup.com)  
[infotecnichewimed@movigroup.com](mailto:infotecnichewimed@movigroup.com)