

MANUALE D'USO

CARROZZINA

TRANSIT LIGHT ALU 42 cm

Cod. 15400000




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INTRODUZIONE: pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO: pg.4
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI: pg.6
4. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO: pg.10
5. TECNICHE DI TRASFERIMENTO: pg.13
6. CLASSIFICAZIONE - STANDARD: pg.14
7. ETICHETTATURA: pg.15
8. CARATTERISTICHE TECNICHE: pg.17
9. INSTALLAZIONE E REGOLAZIONI: pg.18
10. PULIZIA E DISINFEZIONE: pg.21
11. MANUTENZIONE: pg.24
12. RICAMBI: pg.27
13. DOPO L'UTILIZZO: pg.28
14. SMALTIMENTO: pg.29
15. RECLAMI E INCIDENTI: pg.29
16. CERTIFICATO DI GARANZIA: pg.30

1. INTRODUZIONE:

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarla per il suo acquisto e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Le Carrozze Transit Light di MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il presente manuale fornisce informazioni utili all'acquirente e all'utilizzatore per tutte le funzioni che garantiscono un utilizzo quotidiano, pratico e sicuro di questa carrozzina.

Si consiglia di usare questo manuale come guida pratica e di conservarlo vicino alla carrozzina.

Il Fabbrikante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbrikante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

2. DESTINAZIONE D'USO:

Le Carrozze Transit Light di MOVI sono destinate a persone con difficoltà motorie e possono essere utilizzate tramite il supporto di un operatore

Le carrozzine MOVI sono spinte manualmente e devono essere utilizzate esclusivamente per il trasporto assistito di una persona disabile con difficoltà motorie.

Le Carrozze MOVI, ad esclusione dei modelli pediatrici, sono concepite per consentire la mobilità di persone di età maggiore di 15 anni.

Il dispositivo medico è indicato per fornire mobilità a persone con difficoltà motorie.

La carrozzina deve essere utilizzata solo a livello del suolo, su superfici facilmente accessibili e all'interno di edifici.

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.



Prima di utilizzare la carrozzina:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni alla carrozzina a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente la carrozzina.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (gomme, freni, rivestimenti di seduta e schienale, poggiatesta, ecc.) e del serraggio della viteria.
- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo

improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.

- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano la carrozzina devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

Le carrozzine Movi sono dispositivi medici. Assicurarsi, pertanto, di leggere l'intero manuale. Utilizzare i prodotti unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Tenere lontano da fonti di calore, umidità e contenitori di liquidi.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

Il simbolo di sicurezza non sostituisce il testo di avvertenza a cui si riferisce. Leggere sempre le avvertenze sulla sicurezza e seguirle attentamente!



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica l'obbligo di leggere le istruzioni prima dell'utilizzo del dispositivo



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo della carrozzina e una migliore comprensione delle istruzioni.

CARROZZINA TRANSIT LIGHT ALU 42 cm

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale della carrozzina e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.
- Qualora la carrozzina risulti non integra, non utilizzarla e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.



- Evitare di utilizzare il dispositivo in condizioni di scarsa visibilità o illuminazione, oppure provvedere a rendersi chiaramente visibili tramite catarifrangenti.
- Sia per la sicurezza dell'utilizzatore che per quella del dispositivo, non usare il dispositivo su terreni con scarsa aderenza, come sabbia, fango e neve.
- **ATTENZIONE:** non modificare in alcun modo questo dispositivo.
- **ATTENZIONE:** non sollevare mai la carrozzina afferrando le pedane ma utilizzare invece il telaio metallico.
- **ATTENZIONE:** non salire mai sui poggiatesta per evitare il rischio di ribaltamento.
- **ATTENZIONE:** non modificare questo dispositivo senza l'autorizzazione del fabbricante.
- **ATTENZIONE:** prestare attenzione per evitare lo schiacciamento delle mani quando si compiono le operazioni di apertura e chiusura della carrozzina.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare mai scale mobili, neanche con l'aiuto dell'assistente.

Avvertenze sulla sicurezza per OPERATORI SANITARI

- Prima del primo utilizzo della carrozzina, informare l'utilizzatore riguardo a come utilizzare in sicurezza la carrozzina, seguendo attentamente le istruzioni riportate in questo manuale che deve essere fornito insieme a essa. Informare tutti gli utilizzatori su ogni possibile pericolo a causa di un utilizzo errato.
- Le carrozzine sono classificate come dispositivi medici di Classe I. È necessario assolvere i propri doveri in conformità alle normative vigenti in materia di installazione e utilizzo dei dispositivi medici, al fine di assicurare un utilizzo duraturo e in sicurezza di questo prodotto senza alcun rischio per pazienti, utilizzatori e terze parti. In caso di utilizzo prolungato della carrozzina, è necessario eseguire controlli a cadenza regolare (si suggerisce almeno una volta all'anno), per verificarne le funzionalità e individuare eventuali danni visibili.
- Assicurarsi che questa carrozzina sia utilizzata esclusivamente da personale qualificato.
- Assicurarsi che eventuali sostituti del personale siano sufficientemente istruiti sul corretto utilizzo di questa carrozzina.
- Assicurarsi che il personale rispetti le avvertenze sulla sicurezza.

Avvertenze sulla sicurezza per l'UTILIZZATORE

- Leggere il presente manuale prima dell'utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato e l'assenza di difetti della carrozzina.
- Prima di affrontare ostacoli come scalini o dossi, assicurarsi che non si creino interferenze con il dispositivo.
- Evitare, quando possibile, di attraversare pozze d'acqua. Il dispositivo è resistente all'acqua, ma in caso venga bagnato è consigliabile provvedere all'asciugatura nel più breve tempo possibile.
- La carrozzina non deve essere considerata un sedile da usare all'interno di un autoveicolo.
- Prima di inclinarsi in avanti o di alzarsi dalla carrozzina, arretrare di pochi centimetri per far in modo che le ruote anteriori siano rivolte in avanti e quelle posteriori siano bloccate, quindi frenare le ruote posteriori.
- Evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale, mantenendo sempre il baricentro entro il perimetro della carrozzina stessa.
- Verificare il corretto montaggio delle parti removibili.

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo delle Carrozze MOVIE non è indicato a:

- Bambini di età inferiore ai 15 anni (ad esclusione dei modelli pediatrici)
- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso
- La carrozzina non deve essere utilizzata da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.

COMPLICAZIONI

Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

Qualora vi fosse il rischio di sviluppare piaghe da decubito, munirsi di strumenti di prevenzione adeguati a seguito di consulto con il medico curante.

4. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO:

Chiusura:

- Alzare i poggiatesta.
- Sollevare il telo della seduta e avvicinare le due estremità della crociera.



Fare attenzione a non schiacciarsi le dita tra le parti in movimento, vedere figura.

Apertura:



- Tenendo una mano sulla seduta, premere verso il basso uno dei tubi della seduta, come indicato nella figura.



Durante l'apertura togliere la mano dal tubo per evitare il rischio di incastrarsi.

Sollevamento della sedia a rotelle:

- Alzare i poggipiedi.
- Sollevare la sedia per le impugnature e la parte anteriore del telaio, in corrispondenza dei fermi delle pedane.

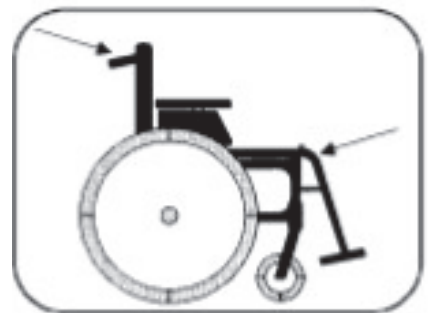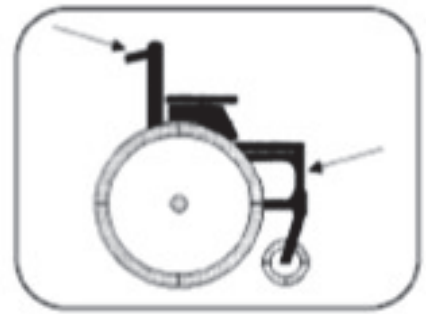

Trasporto

Automobile privata/Taxi

Sistemare la sedia a rotelle nel bagagliaio. Se non fosse possibile, posizionarla sul sedile posteriore in modo che sia sufficientemente stabile e non possa ribaltarsi o scivolare. Se possibile, bloccare la sedia con la cintura di sicurezza dell'automobile.





Minibus:

L'utente della sedia a rotelle deve sedere su uno dei sedili del minibus, mentre la sedia a rotelle deve essere bloccata in modo che non possa ribaltarsi o scivolare.

Se il minibus è dotato di apposito spazio per utilizzatori di sedie a rotelle, adottare le seguenti precauzioni:

- Per la sicurezza dell'utente, lo spazio deve essere dotato di un montante con cintura di sicurezza a tre punti e poggiatesta (non è sufficiente il poggiatesta della sedia a rotelle) .
- La sedia a rotelle deve essere fissata per le fiancate, non per le ruote. Le cinghie di fissaggio devono avere un'inclinazione compresa fra 0° e 30°.
- La cintura (optional) della sedia a rotelle non è sufficiente per impedire che l'utente venga proiettato in avanti in caso di brusca frenata.

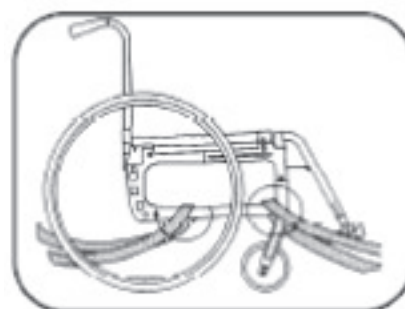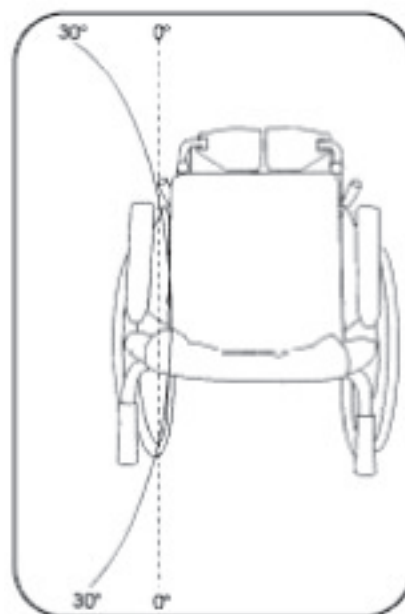

5. TECNICHE DI TRASFERIMENTO:

Salita

- Avvicinare il più possibile la carrozzina, in modo da posizionarla di fianco alla superficie sulla quale si siede con un angolo di 30° - 45°.
- Azionare i freni di stazionamento.
- Sollevarsi facendo forza sulle braccia e appoggiandosi al telaio della seduta e, se possibile, anche a qualcosa di stabile e vicino.
- Spostarsi, anche a piccoli passaggi, verso la seduta della carrozzina.



Discesa

- Avvicinarsi il più possibile alla superficie che si intende raggiungere e posizionarsi rispetto a essa con un angolo di 30°-45°.
- Arretrare di qualche centimetro in modo da posizionare le ruote anteriori in avanti e aumentare la superficie di appoggio della carrozzina, e di conseguenza la sua stabilità.
- Azionare i freni di stazionamento.
- Posizionarsi con il bacino nella porzione anteriore della seduta, scivolando in avanti o sollevandosi con le braccia.
- Sollevarsi facendo forza sulle braccia e appoggiarsi al letto o alla seduta e, se possibile, anche a qualcosa di stabile e vicino.
- Lasciarsi scivolare verso il letto o la seduta che si desidera raggiungere.



6. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

Le carrozzine MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

CARROZZINA TRANSIT LIGHT ALU 42 cm

7. ETICHETTATURA:

CARROZZINA TRANSIT LIGHT WHEELCHAIR TRANSIT LIGHT

Colore Blu / Colour Blue

REF 15400000

MD


 **MOVI S.p.A.** - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT 204000122

2020 

100 kg 

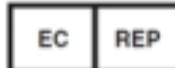

	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA

CARROZZINA TRANSIT LIGHT ALU 42 cm

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

8. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio.
- Rivestimenti in nylon nero
- Braccioli imbottiti
- Sedile e schienale in tessuto lavabile rinforzato.
- Pedane indipendenti, estraibili e regolabili in altezza.
- Cinturini fermatalloni.

Accessori complementari: pedane regolabili in inclinazione, tavolino

Codice Prodotto	15400000
Larghezza Seduta	42 cm
Larghezza massima	+ 12 cm
Altezza schienale	45 cm
Profondità Seduta	40 cm
Altezza seduta anteriore	50 cm
Altezza seduta posteriore	49 cm
Peso	11,5 kg
Portata massima	100 Kg

9. INSTALLAZIONE E REGOLAZIONI:

Descrizione della carrozzina

La carrozzina è stata sottoposta a numerose pre-regolazioni standard a cura del costruttore, ma successivamente all'acquisto essa deve essere specificatamente adattata alle esigenze dell'utilizzatore.

La carrozzina si compone di numerosi elementi; nel presente manuale viene fornita una descrizione dei principali componenti dell'ausilio.

- Il gruppo seduta comprende i rivestimenti del sedile e dello schienale, lo schienale ed i braccioli. Questo assieme è stato concepito, in modo da garantire all'utilizzatore un comfort ottimale
- Il dispositivo pedana ribaltabile o il poggia gambe: si tratta del componente di raccordo tra il telaio e il poggiapiedi; è un componente orientabile per facilitare i trasferimenti e smontabile per ragioni di trasporto
- Il poggiapiedi comprende il tubo regolabile e la pedana che sostiene il piede
- Il telaio pieghevole comprende i montanti laterali e il sistema di piegatura, ivi inclusi i tubi reggi seduta. Questi elementi costituiscono il telaio, ossia la struttura portante della carrozzina, in questo caso è stata prestata particolare attenzione alla robustezza.
- Il tubo sterzante è l'elemento di raccordo tra il telaio e le ruote piroettanti, è lo sterzo che permette di regolare l'angolo del gruppo seduta.
- La ruota posteriore è composta della ruota e dall'asse. Le ruote posteriori, garantiscono la stabilità all'indietro. Le ruote sono montate su supporti fissi.
- La ruota piroettante è composta della ruota anteriore e dalla forcella. Le ruote piroettanti assicurano il contatto con il suolo quando la carrozzina avanza e determinano la direzione tramite l'orientamento delle forcelle.
- Freno accompagnatore è anche il freno di stazionamento. I 2 freni devono essere usati per bloccare la carrozzina quando si è fermi.

CARROZZINA TRANSIT LIGHT ALU 42 cm



- 1) Bracciolo
- 2) Schienale
- 3) Freno
- 4) Pedana
- 5) Ruota posteriore
- 6) Telaio pieghevole
- 7) Ruota piroettante
- 8) Tubo poggiapiedi regolabile
- 9) Dispositivo pedana ribaltabile
- 10) Schienale piegato

Regolazione pedane

Allentare la vite di blocco posta sul fondo del tubo senza svitarla del tutto. Regolare il tubo verso l'alto o verso il basso fino a raggiungere l'altezza idonea. Una volta individuata la posizione corretta, serrare la vite in modo saldo. Procedere allo stesso modo dall'altro lato.

Freni

I freni a manopola sono installati sulla parte posteriore della carrozzina, in corrispondenza delle impugnature per l'accompagnatore.

Per frenare è sufficiente tirare la leva verso l'alto, chiudendo la mano sull'impugnatura: in questo modo i freni agiscono sulle ruote posteriori, rallentando o bloccando il movimento finché la leva resta premuta.

Rilasciando la leva, il freno si disattiva automaticamente, permettendo alle ruote di girare liberamente.

Per bloccare le ruote in modo permanente, ad esempio durante una sosta o durante il trasferimento dell'utente, è sufficiente spingere la leva verso il basso fino a quando entra in funzione il meccanismo di blocco automatico.

Il freno resterà attivo senza necessità di mantenere la pressione. Per sbloccarlo, sarà sufficiente riportare la leva verso l'alto fino alla posizione di riposo.

Aggancio e sgancio delle pedane

Accertarsi che il poggiapiedi sia ruotato verso l'esterno e far combaciare i fori di quest'ultimo con i perni posti sul telaio. Dopo aver spinto completamente verso il basso la pedana, ruotarla in posizione frontale fino al suo bloccaggio.

Per rimuoverle sganciare la pedana facendo pressione sulla leva apposita e ruotare verso l'esterno, quindi rimuovere.

Schienale

Lo schienale può essere ripiegato per facilitare il trasporto.

Sbloccare la leva da entrambi i lati e ribaltarla all'indietro.

10. PULIZIA E DISINFEZIONE:

La pulizia rappresenta l'elemento e la condizione più importante per una corretta disinfezione chimica.

In generale, una regolare pulizia della carrozzina in caso di utilizzo da parte di uno stesso paziente è sufficiente dal punto di vista igienico.

Una disinfezione del telaio della carrozzina si rende necessaria solo in caso di contaminazione visibile con materiale infettivo o potenzialmente infettivo (sangue, feci, pus) oppure in presenza di una malattia infettiva su richiesta del medico.

Con una pulizia regolare, la carrozzina durerà più a lungo.



Attenzione! A ogni cambio di utilizzatore, la carrozzina deve essere prima pulita e quindi disinfettata per strofinamento!



Importante! La sabbia e l'acqua di mare possono provocare danni ai cuscini e far arrugginire le parti in acciaio in caso di deterioramento della superficie. Esporre la carrozzina a sabbia e acqua di mare solo per brevi periodi e pulirla bene ogni volta che si rientra dalla spiaggia.

Programma di pulizia e disinfezione

- Si raccomanda di utilizzare un metodo di disinfezione (umido) per strofinamento. Scegliere un detergente di tipo ecologico e non aggressivo. In generale, può essere utilizzato un detergente di uso domestico.
- Non utilizzare prodotti abrasivi, prodotti per la pulizia dell'acciaio inossidabile, tamponi detergenti o detergenti contenenti solventi, per evitare di danneggiare le superfici.
- In caso di contaminazione visibile con materiale infettivo o potenzialmente infettivo, la carrozzina deve essere disinfettata per strofinamento utilizzando un disinfettante appositamente raccomandato per l'uso ospedaliero adatto alla superficie in questione.
- La disinfezione delle ruote è necessaria solo in caso di contaminazione visibile con materiale infettivo o potenzialmente infettivo.
- In caso di pioggia, asciugare bene la carrozzina con un panno.
- Se la carrozzina è sporca, pulirla non appena possibile con un panno umido, quindi asciugarla.

DISINFEZIONE

E' necessario disinfettare la carrozzina (e suoi eventuali accessori) quando:

- la carrozzina si trova in centri di assistenza, ospedali, case di cura
- la carrozzina presenta evidenti segni di contaminazione
- in ogni caso in cui la disinfezione garantisce la sicurezza del paziente e del personale autorizzato

Procedura:

Utilizzare un detergente che risulti essere non altamente corrosivo per non danneggiare alcuna parte della carrozzina

- Attenersi alle indicazioni fornite dal produttore del disinfettante, riguardo modalità di utilizzo e indicazioni di utilizzo.



- Per la pulizia e la disinfezione delle parti in metallo verniciato, utilizzare un panno umido impregnato di detergente non aggressivo per uso domestico.

In caso di mancato rispetto di queste norme, non è possibile escludere gravi danni alla carrozzina con le relative conseguenze!



- Tutte le superfici devono essere integre ed eventuali danni devono essere immediatamente eliminati.
- I disinfettanti a base di aldeidi, pur essendo ecologici, hanno un potenziale allergizzante e irritante.
- I disinfettanti a base di composti a scissione di cloro possono avere un effetto corrosivo su metalli, plastica, gomma o altri materiali in caso di contatto prolungato o ad alte concentrazioni.

11. MANUTENZIONE:

Normativa

I proprietari delle carrozzine, in conformità con la normativa vigente, sono tenuti a garantire le condizioni di sicurezza dei dispositivi medici durante il loro impiego.

A tal fine è necessario eseguire regolarmente interventi di controllo e manutenzione da parte di personale specializzato ed autorizzato dal fabbricante.

Come regola generale, si raccomanda di eseguire un controllo almeno una volta all'anno presso un centro autorizzato.

Nel caso risultasse necessario l'utilizzo di ricambi, fornirsi unicamente di ricambi originali.



Se si ritiene che siano presenti danni o problemi funzionali, la carrozzina non deve essere assolutamente utilizzata fino a quando i componenti danneggiati non siano stati sostituiti o riparati! Per la sostituzione e la riparazione dei componenti danneggiati, contattare il proprietario della carrozzina, il fabbricante o il rivenditore autorizzato.

Di seguito sono descritte le attività di manutenzione per garantire l'uso sicuro della carrozzina Wimed:

Prima di ogni utilizzo:

- Controllare visivamente la carrozzina (assenza di rotture, danni sulle parti strutturali ecc. .)
- Verificare il funzionamento e l'integrità delle ruote
- Controllare che tutte le viti, le leve e i pulsanti di regolazione siano fissati saldamente.
- Controllare i freni e regolare se necessario

Ogni 8 settimane ispezione e possibilmente lubrificazione e regolazione di:

- Braccioli o proteggi abiti
- Poggiapiedi o pedana
- Leva del freno
- Assi delle ruote
- Sistema di regolazione dello schienale (Per carrozzine con inclinazione dello schienale)
- Altri sistemi di regolazione

Ogni anno o per ogni nuovo utente:

- Controllo generale
- Disinfezione se necessaria
- Ruote anteriori, possibilmente pulire i cuscinetti

CARROZZINA TRANSIT LIGHT ALU 42 cm

CHECK LIST – CONTROLLO FUNZIONALE	Prima di ogni utilizzo	Ogni 2 mesi	Una volta all'anno
1. CONTROLLO VISIVO Verificare l'assenza di danni esterni sulle parti Meccaniche e l'assenza di strappi e lacerazioni sulle parti in tessuto e sui rivestimenti, che potrebbero causare eventuali cedimenti	V		
2. STABILITA' STRUTTURALE / MECCANISMI DI MOVIMENTAZIONE Verificare che il dispositivo sia stabile sui punti di appoggio, accertare che il telaio sia bene fissato nei punti di serraggio, accertare che i movimenti di (basculamento /inclinazione) siano fluidi e funzionali, che la movimentazione del dispositivo avvenga attriti		V	V
3. INTEGRITA' RUOTE Accertare che le ruote siano libere di ruotare e piroettare (se previsto), verificare l'assenza di eventuali ostruzioni e serraggio corretto, verifica allineamento	V	V (pulire accuratamente)	
4. SISTEMA FRENANTE Verificare il meccanismo di bloccaggio delle ruote e accertarsi del corretto inserimento e disinserimento del blocco	v	v (regolare e stringere le viti di fissaggio)	
5. BRACCIOLO/POGGIABRACCIO Verificare la corretta fluidità dei meccanismi presenti sul dispositivo: apertura /chiusura, aggancio/sgancio, regolazioni presenti, accertarsi dell'assenza di difetti strutturali		V (regolare e stringere le viti di fissaggio)	
6. PEDANE / POGGIAPIEDI Verificare la corretta fluidità dei meccanismi presenti sul dispositivo: apertura /chiusura, aggancio/sgancio, regolazioni presenti accertarsi dell'assenza di difetti strutturali		V (regolare e stringere le viti di fissaggio)	
7. PARTI IN TESSUTO Accertarsi che le parti in tessuto non presentino strappi, rotture o segni di usura, deformazioni, controllare l'integrità dei cuscini e delle cinghie di tensionamento del sedile /schienale ove presenti	V		
8. PULIZIA Effettuare la pulizia come da indicazione rimuovendo residui di polvere e sporcizia, asciugare bene la carrona per evitare corrosioni	V	V (pulire accuratamente con detergenti neutri)	
9. DISINFEZIONE			V
10. ACCESSORI Verificare integrità e la corretta funzionalità degli accessori presenti. (ruote antiribaltamento/ascensore, poggiatesta ect)		V	

12. RICAMBI:

I ricambi originali Movi sono garantiti per un (1) anno a decorrere dalla data di ricezione del ricambio stesso.

Le informazioni necessarie si trovano sull'etichetta del prodotto applicata sulla carrozzina.

Le parti di ricambio sono disponibili indicando il modello della carrozzina, il codice articolo e il numero di lotto.

"REF"	Codice articolo
"LOT"	Numero di lotto



Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza della carrozzina in caso di utilizzo di componenti non originali.

13. DOPO L'UTILIZZO:

Conservazione

A seguito di un lungo periodo di stoccaggio (più di quattro mesi), la carrozzina deve essere controllata secondo quanto indicato nel capitolo Manutenzione.

Riutilizzo

La carrozzina è adatta per essere riutilizzata. Devono essere intraprese le seguenti azioni:

- Pulizia e disinfezione
- Ispezione e manutenzione
- La carrozzina deve essere adattata al nuovo utilizzatore in base alla documentazione di manutenzione (disponibile con il prodotto)

14. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

15. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

16. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica, via Dione Cassio, 1520138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al seguente recapito e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito di:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MANUALE D'USO ORIGINALE

CARROZZINA TRANSIT LIGHT ALU 42 cm

Cod. 15400000

Rev.3 07/08/2025



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com