


Gomitiera
EASY ELBOW Fibre

Cod. 94004053

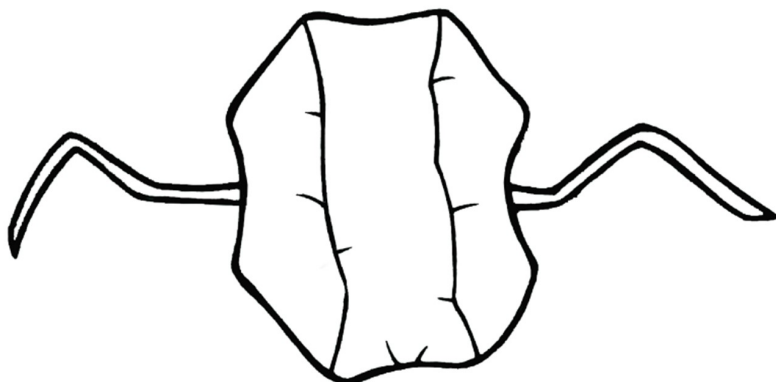

Manuale d'uso



Gomitiera EASY ELBOW Fibre

INDICE:

1. INTRODUZIONE:	pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO:	pg.4
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:	pg.5
4. PULIZIA E DISINFEZIONE:	pg.8
5. MANUTENZIONE:	pg.8
6. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.9
7. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.11
8. NOTE:	pg.11
9. SMALTIMENTO:	pg.12
10. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.12
11. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.13

Gomitiera EASY ELBOW Fibre

1. INTRODUZIONE:

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarla per l'acquisto della gomitiera EASY ELBOW Fibre e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

La gomitiera EASY ELBOW Fibre, classificato come dispositivo medico di classe I, è conforme al Regolamento Europeo 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il presente manuale fornisce informazioni utili all'acquirente e all'utilizzatore per tutte le funzioni che garantiscono un uso quotidiano, pratico e sicuro di questo prodotto.

Si consiglia di usare questo manuale come guida pratica e di conservarlo vicino al dispositivo.

Il Fabbrikante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbrikante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

Gomitiera EASY ELBOW Fibre

2. DESTINAZIONE D'USO:

Gomitiera in fibra cava siliconata per la protezione del gomito e altre parti del corpo.

Le gomitiere EASY ELBOW Fibre sono costituite da materiali che assicurano l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio, limitando i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta e valutati a Basso Rischio.

Sono idonee all'utilizzo su carrozzelle, sedie o letti. Assumono la proprietà principale del materiale di imbottitura in fibra cava siliconata: la resilienza, la capacità cioè di ritornare alla forma originaria anche dopo forte sollecitazione. Un manufatto realizzato con questo materiale risulta molto morbido ma allo stesso tempo garantisce portanza ed elasticità.

Gli ausili, realizzati con una federa per l'80% poliestere e 20% di cotone e riempiti con fibra di poliestere, isolano dal caldo e dal freddo poiché la fibra ha anche un elevato potere di coibentazione termica.

Gomitiera EASY ELBOW Fibre

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale. Utilizzare il dispositivo unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.



Divieto di fumare e utilizzare fiamme libere

Questo simbolo indica il divieto di accendere sigarette o altre fonti di fuoco, come ad esempio accendini o fiammiferi perché sussiste il pericolo d'incendio.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale del dispositivo e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.
- Qualora il dispositivo risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.

Il simbolo di sicurezza non sostituisce il testo di avvertenza a cui si riferisce. Leggere sempre le avvertenze sulla sicurezza e seguirle attentamente!

Gomitiera EASY ELBOW Fibre



Attenzione!



Leggere attentamente il manuale d'uso al fine di evitare danni in fase di utilizzo del dispositivo.

Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per i danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.



- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.
- Per motivi igienici, l'utilizzo del dispositivo per la prevenzione delle lesioni da pressione dovrebbe essere riservato a un unico paziente.
- Non esporre alla luce diretta del sole.
- Prodotto confezionato in doppio involucro, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Fare attenzione a NON stringere le cinghie in velcro sino alla compressione degli arti per non ostruire il passaggio di sangue.
- Verificare periodicamente che la fodera non risulti strappata o abbia cedimenti.
- Controllare sempre lo stato d'integrità del dispositivo prima di utilizzarlo mediante accurata ispezione visiva. Se tale ispezione, dovesse rilevare una qualunque anomalia, il dispositivo non deve essere utilizzato.
- **La capacità massima di portata è di 110 kg. Non superare mai il peso indicato!**

Gomitiera EASY ELBOW Fibre



- Utilizzare il dispositivo lontano da materiali ed agenti chimici infiammabili o sensibili al calore.
- È severamente vietato fumare, utilizzare sigarette, sigari, pipe, accendini, candele, fiammiferi o qualsiasi altra fonte di calore o fiamma libera sul dispositivo o nelle immediate vicinanze dello stesso. Questi comportamenti possono causare l'innescare di incendi anche su materiali ignifughi.
- Non utilizzare apparecchi elettrici non idonei o non certificati sul dispositivo, né esporre lo stesso a fonti di calore diretto (stufe, lampade riscaldanti, ferri da stiro, ecc.).
- Utilizzare tutte le precauzioni ragionevoli per prevenire il rischio di incendio, mantenendo il dispositivo lontano da fonti di accensione e rispettando le istruzioni del presente manuale.

Nota: Movi Spa declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da incendi causati da un uso improprio del dispositivo o comportamenti non conformi alle presenti istruzioni, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di sigarette, accendini, fiammiferi o altre fonti di calore/fiamma libera sul dispositivo. L'utilizzatore è tenuto a rispettare tutte le norme di sicurezza e prevenzione incendi indicate nel presente manuale.

Gomitiera EASY ELBOW Fibre

4. PULIZIA E DISINFEZIONE:

Pulizia gomitiera



Lavare con un ciclo delicato fino a una temperatura massima di 30°C.

Non lavare a secco.

Non candeggiare.

Non asciugare nell'asciugatrice.

Non stirare.

5. MANUTENZIONE:

Composizione

Imbottitura: fibra di poliestere.

Fodera esterna: 80% poliestere 20% cotone.

Conservazione

Non esporre a fonti di calore.

Per una lunga durata, conservare in ambiente secco e temperato, lontano dalla luce diretta e da fonti di calore.

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.

Gomitiera EASY ELBOW Fibre

6. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

EASY ELBOW Fibre

Gomitiera in Fibra di Poliestere
Elbow Protection with Polyester Fibres

REF 94004053

LOT XXXXXX

 20xx

 110 Kg



MOVI S.p.A.

Via Dione Cassia, 15
20138 Milano, Italy

MADE IN CHINA



Vietato fumare e
usare fiamme libere

ISTRUZIONI per il LAVAGGIO WASHING LABEL



FABBRICANTE

EC

REP

RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO NELLA
COMUNITA EUROPEA

Gomitiera EASY ELBOW Fibre

	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA
	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

Gomitiera EASY ELBOW Fibre

7. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni	Codice articolo	Peso gomitiera	Peso max paziente
25X24X5 Cm	94004053	0.064 Kg	110 Kg

8. NOTE:



Nota bene: Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA - Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

Gomitiera EASY ELBOW Fibre

9. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati con i rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base al D.Lgs 151/2005.

In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

10. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

Gomitiera EASY ELBOW Fibre

11. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail:
satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Gomitiera EASY ELBOW Fibre

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com



www.movigroup.com

Manuale d'uso originale

Gomitiera EASY ELBOW Fibre
Rev.3 28/07/2025

Movi SpA

Via Dione Cassio, 15—Milano—Italy