

DEAMBULATORI

WALKER FISSI IN ACCIAIO

**MANUALE
ISTRUZIONI
MANUTENZIONE
SCHEDE TECNICHE**



DEAMBULATORI

WALKER FISSI IN ACCIAIO

TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO SMALTIMENTO

In caso di trasporto di terzi, verificare che sia correttamente protetto con imballo in cartone chiuso e robusto

Durante trasporti a propria cura o nel periodo di magazzinaggio verificare la pulizia di automezzi e locali, eventualmente proteggendo con telo antipolvere

Il prodotto non contiene componenti classificabili come rifiuto speciale all'atto dello smaltimento
Verificare ed attenersi alle disposizioni locali riguardanti la raccolta differenziata.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Verificare ogni 3 mesi lo stato delle ruote
Controllare ogni 3 mesi ed eventualmente registrare i freni di stazionamento
Controllare ogni 6 mesi il serraggio di viti e bulloni
Controllare ogni 6 mesi ed eventualmente lubrificare le parti in movimento

Sostituire immediatamente parti difettose

Pulizia ordinaria va eseguita con acqua e detergente neutro
Pulizia straordinaria e sanificazione con getto di vapore a bassa pressione
Lavare ed asciugare subito in caso di contatto con sabbia ed acqua di mare

Per eventuali manutenzioni straordinarie rivolgersi alla ditta o al rivenditore autorizzato



ISTRUZIONI/AVVERTENZE RISCHI GENERICI

La scelta del Dispositivo spetta all'utilizzatore coadiuvato da personale medico-ortopedico.
Le indicazioni contenute in questo manuale devono essere rispettate per evitare danni a cose o persone.
La ditta si riserva di modificare i dati e le dotazioni aggiuntive riportati in questo manuale.

Fare attenzione alla esposizione al sole, le superfici potrebbero raggiungere temperature dannose
Utilizzare solo su superfici in piano, stabili e lisce
Non utilizzare su gradini, scale o scale mobili.
Prestare attenzione alla presenza di tappeti, fili elettrici od altri ingombri a pavimento
Nel caso di trasferimento dal deambulatore ad una carrozzina, bloccare i freni di entrambi i dispositivi
Non utilizzare il prodotto con carichi superiori alla portata max
Non spingere il deambulatore distante dal corpo, potrebbe sfuggire
Non utilizzare il deambulatore con sedile come fosse una carrozzina
Prima di sedersi frenare il deambulatore e non accedere dal lato cestino

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

REF	
DEA-xxx	DESTINAZIONE D'USO
xxxxxxx	descrizione


**VEDI PAGINE SEGUENTI
SCHEDE TECNICHE ORDINE DISPOSITIVO**




ISTRUZIONI PER L'USO SPECIFICHE

AVVERTENZE E RISCHI

procedere con modello a quattro puntali	Alzare e posarlo comodamente davanti a se stessi assicurandosi che tutti e quattro i puntali appoggino al suolo
procedere con modello a due ruote e due puntali	Alzare e posarlo comodamente davanti a se stessi assicurandosi che le due ruote ed i due puntali appoggino al suolo. Sollevare solo la parte con puntali moderatamente per evitare che il deambulatore sfugga
procedere con modello a quattro ruote	Impugnare il deambulatore prestando attenzione ad avere preventivamente frenato le ruote posteriori, per evitare che il deambulatore sfugga

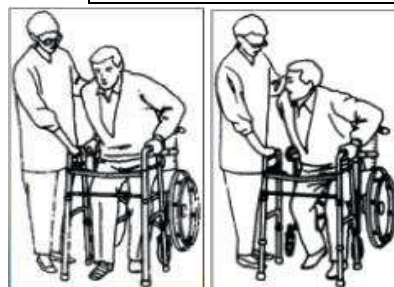

trasferimenti con eventuali freni bloccati

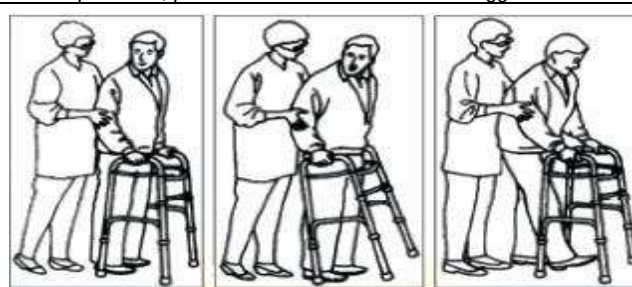

procedere con modello a quattro puntali

1

regolazione altezza impugnature

Svitare il pomello dal bullone e sfilare l'allungabile in corrispondenza dei fori, poi riavvitare. Con il braccio steso l'impugnatura deve essere all'altezza del polso. Con la mano appoggiata sull'impugnatura il gomito deve essere piegato di circa 20-30°. Nella eventualità seguire indicazioni ortopedica

2

freno integrato su ruote

Frenare le ruote prima dell'impugnatura, per evitare che il deambulatore sfugga

DEA

DEAMBULATORI SU RUOTE E PUNTALI

WALKER

SCHEDA TECNICA
ORDINE DISPOSITIVO

DATA	AZIENDA SANITARIA	PRESCRITTORE	ASSISTITO
RIF			

NOTE


DEAMBULATORI FISSI A QUATTRO PUNTALI

73A	Deambulatore fisso in acciaio cromato regolabile in altezza - 4 puntali di appoggio	12.06.03.003 12.06.09.109
	regolazione altezza 78-95 cm larghezza 55 cm lunghezza 45 cm Peso 5 Kg Max utilizzatore 150 Kg	GMDN 31118 CND Y120603 DM 56519




DEAMBULATORI FISSI A 2 RUOTE E DUE PUNTALI

73B	Deambulatore fisso in acciaio cromato regolabile in altezza - 2 ruote 80 mm piroettanti con freno - 2 puntali	12.06.06.003 12.06.09.109
	regolazione altezza 78-95 cm larghezza 55 cm lunghezza 45 cm Peso 5 Kg Max utilizzatore 150 Kg	GMDN 31119 CND Y120606 DM 56564

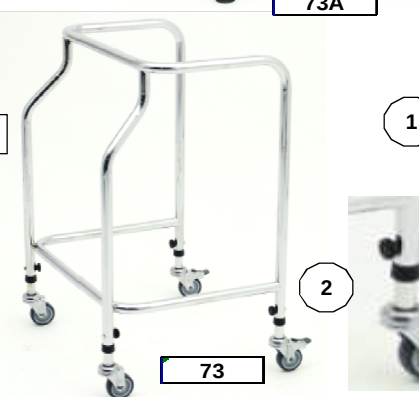

DEAMBULATORI FISSI A QUATTRO RUOTE PIROETTANTI CON FRENO

73	Deambulatore fisso in acciaio cromato regolabile in altezza - 4 ruote 80 mm piroettanti (2 con freno)	12.06.09.006 12.06.09.109
	regolazione altezza 78-95 cm larghezza 55 cm lunghezza 45 cm Peso 5 Kg Max utilizzatore 150 Kg	GMDN 31119 CND Y120606 DM 56564

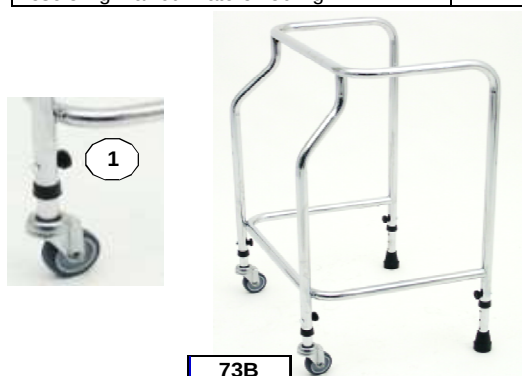

MISURE	VARIATIONE PORTATA
PESO MAX UTILIZZATORE	
larghezza standard	
lunghezza standard	
altezza standard telaio	

DI SERIE AGGIUNTIVO

R77E	R80	72 ...	71 ...	73 ...	75CH	75C	73PR
150	125	125	125	150	125	150	150
55	55	55	54	57	57	57	50
50	50	55	48	45	72	72	62
80-98	80-88	70-95	78-95	78-95	80	80	80-98

ACC

ACCESSORI TELAIO E RUOTE

370	Ruote con rotazione frizionata	12.06.09.133
371	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote	12.06.09.145
380-1	Coppia barre appesantimento Kg 1	12.06.09.127
380-2	Coppia barre appesantimento Kg 2	12.06.09.127
380-3	Coppia barre appesantimento Kg 3	12.06.09.127
380-4	Coppia barre appesantimento Kg 4	12.06.09.127
380-P	Fissaggi a pomelli barre appesantimento	-
381	Divisorio intermedio	12.06.09.112
384	Extra per manubrio regolabile in altezza	12.06.09.142
329	Freno a leva monocomando anziché doppio	-
302	Coppia Manopole autoadesive	-

*	-	-	☐	☐	☐	☐
*	-	-	☐	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐



DLG	DIRETTIVA
MDR UE	2017/745



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

relativamente ai prodotti identificati come:

REF	DEAMBULATORI FISSI SU RUOTE E PUNTALI
DEA-	8058480835089

73A	DEAMBULATORE FISSO - 4 PUNTALI
73B	DEAMBULATORE FISSO 2 RUOTE PIROETTANTI E 2 PUNTALI
73	DEAMBULATORE FISSO - 4 RUOTE PIROETTANTI (2 CON FRENO)
Maxi	PORTATA 250 KG
	e relativi aggiuntivi a costituire sistema kit
+ACC	ACCESSORI TELAIO E RUOTE DEAMBULATORI

Classificati come:

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I - Allegato VIII (non invasivi)

Il fabbricante Piai Ortotech srl, con sede in Vittorio Veneto via Meucci, 32, C.F. e P.I. 04193400266, Iscrizione Registro Imprese TV330742, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i dispositivi descritti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2017/745 che abroga le direttive 90/385/CEE e 43/42/CEE del Consiglio.

Normativa tecnica di riferimento applicata:

UNI EN ISO 11199-1:1999

UNI EN ISO 11199-2:2005

Vittorio Veneto, (*) vedi originale
Legale Rappresentante
Piai Fabio

Responsabile per il
rispetto della normativa
Campodell'Orto Mauro



FABBRICANTE

PIAI ORTOTECH srl
Via Meucci 32 - 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALIA
tel +390438500884 fax +390438902058



CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia copre in tutta Italia per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto qualsiasi difetto relativo a progettazione, materiali, fabbricazione ed assemblaggio, escludendo da ogni garanzia i danni causati da usura, manomissione od uso improprio.

Il prodotto difettoso dovrà essere accompagnato da una copia delle presenti Condizioni di Garanzia unitamente ad un giustificativo a comprovare la data di acquisto e la Scheda ANALISI DIFETTOSITA' sottostante.

La garanzia decade in mancanza di comprovante data di acquisto, tentativi di riparazione non autorizzati, danni causati da eventi accidentali, non osservanza delle istruzioni od avvertenze riportate nel manuale d'uso.

ANALISI DIFETTOSITA PER EVENTUALE INOLTRO:

ARTICOLO REF:

AGGIUNTIVI

DIFETTO RISCONTRATO:

DITTA RICHIEDENTE

COMPROVANTE ACQUISTO

Ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy informiamo che i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'assistenza tecnica