



Erregi⁺
AUSILIMEDICI

Erregi S.a.s.

via Adua, 40
21040 Veduggio Olona (VA)
Tel. +39 0332 400980
commerciale@ausilimedici.it
www.ausilimedici.it

MADE IN ITALY



Erregi⁺
AUSILIMEDICI

**AUSILI E ACCESSORI PER LETTO
PARASPONDE - SOVRAMATERASSI - MATERASSI**



**REF.
17/18/C**

MATERASSO LAVORAZIONE A SCACCO

□ Dim. 195x85x14 cm



**REF.
17/18/E**

MATERASSO DI SUPPORTO

□ Dim. 190x80x6 cm



**REF.
17/15/B**

SOVRAMATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA



**REF.
18/23/I**

PARASPONDE CON NASTRO DI FISSAGGIO (2 pz.)



**REF.
18/16/I**

PARASPONDE AD UNCINO CON VELCRI

□ Dim. 90x40x3 cm (4 pz.) □ Dim. 190x40x3 cm (2 pz.)



Dispositivo Medico di Classe 1 conforme al Regolamento UE 2017/745 e s.m.i.

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Erregi sas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

In caso di incidente grave verificatosi in relazione all'utilizzo del dispositivo, si prega di segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

DESCRIZIONE

Ref. 17/18/C: Materasso rivestito con fodera in tessuto gommato, idrorepellente, ignifugo omologato in classe 1, con cerniera. Imbottitura in poliuretano espanso con lavorazione a scacco densità kg 30 mc ignifugo omologato in classe 1 IM.

Ref. 17/18/E: Materasso di supporto, rivestito con fodera in tessuto gommato idrorepellente, ignifugo omologato in classe 1, con cerniera. Imbottitura in poliuretano espanso densità Kg 30 mc ignifugo omologato in classe 1 IM, ad alta resilienza, priva di lattice, flessibile, inodore, indeformabile. Antibatterica, anallergica, antimicotica.

Ref. 17/15/B: Sovramaterasso realizzato in 100% cotone con imbottitura in fibra cava siliconata, suddiviso in 12 settori per una maggior stabilizzazione della fibra e una migliore areazione. **Dispositivo non ignifugo.**

Ref. 18/23/I: Parasponde con nastri di fissaggio e chiusura a gancio, realizzato in tessuto idrorepellente ignifugato, con imbottitura in poliuretano espanso.

Ref. 18/16/I: Parasponde forma ad uncino con cerniera e velcri di fissaggio, realizzato in tessuto gommato idrorepellente, ignifugo omologato in classe 1, con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo classe 1 IM.

INDICAZIONI

Ref. 17/15/B, 17/18/C: Dispositivo utilizzato come antidecubito.

Ref. 17/18/E: Dispositivo utilizzato come supporto ad un altro dispositivo antidecubito.

Ref. 18/23/I, 18/16/I: Dispositivi utilizzati per evitare gli urti accidentali contro le spondine rigide del letto e garantire la sicurezza in soggetti con difficoltà motorie e di controllo.

PRECAUZIONI D'USO

Utilizzare il dispositivo sempre indossando un indumento a protezione della persona.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

COMPOSIZIONE

Ref. 17/15/B: Fodera: 100% Cotone - Imbottitura: Fibra cava siliconata

Ref. 17/18/C, 17/18/E: Fodera: Tessuto gommato, idrorepellente, ignifugo omologato in classe 1 50% poliestere 50% poliuretano

Imbottitura: poliuretano espanso ignifugo omologato in classe 1 IM

Ref. 18/23/I: Fodera: 92% poliammide 8% poliuretano Imbottitura: poliuretano espanso

Ref. 18/16/I: Fodera: Tessuto gommato, idrorepellente, ignifugo omologato in classe 1 50% poliestere 50% poliuretano

Imbottitura: Poliuretano espanso ignifugo classe 1 IM

MODALITÀ DI LAVAGGIO

Ref. 17/15/B, 18/23/I:     

Ref. 17/18/C, 18/16/I:     

FODERA ESTERNA

IMBOTTITURA: PULIRE CON UN PANNO MORBIDO UMIDIFICATO

Ref. 17/18/E:     

FODERA ESTERNA

IMBOTTITURA: Lastra lavabile in lavatrice con miscele calde disinfettanti detergenti, dai 30° ai 90° raggiungendo gradualmente la massima temperatura. Sterilizzare in autoclave a vapore sino a 105°. Asciugatura in essiccatoio con aria calda a 70°.

La Ditta produttrice non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dell'ausilio in caso di mancata osservanza delle modalità di lavaggio.

DISINFEZIONE

Utilizzare prodotti con presidio medico chirurgico.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore, umidità.

SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da 12 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati, a parti soggette ad usura e in caso di uso improprio.