

MANUALE D'USO

SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO

Cod. 15641029/KD




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI:	pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO:	pg.3
3. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:	pg.5
4. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:	pg.9
5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:	pg.10
6. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:	pg.11
7. ISTRUZIONI PER L'USO:	pg.12
8. PULIZIA E DISINFEZIONE:	pg.12
9. MANUTENZIONE:	pg.13
10. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.14
11. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.15
12. NOTE:	pg.16
13. SMALTIMENTO:	pg.17
14. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.17
15. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.18

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,

desideriamo ringraziarla per l'acquisto della SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono concepiti per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza.

La SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO, classificata come dispositivo medico di classe I, è conforme al Regolamento Europeo 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il Fabbricante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbricante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

2. DESTINAZIONE D'USO:

Le Comode MOVI sono destinate a persone con difficoltà motorie.

La comoda deve essere utilizzata solo a livello del suolo, su superfici stabili e facilmente accessibili e solo all'interno di edifici.



Prima di utilizzare la comoda:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni al dispositivo a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente il dispositivo.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (seduta e schienale, braccioli, ecc.) e del serraggio della viteria.
- É vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano il dispositivo devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.

3. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale. Utilizzare la SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale del dispositivo e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.
- Qualora il dispositivo risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.

SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO



- Non utilizzare il dispositivo prima di avere letto attentamente il manuale d'uso.
- Verificare lo stato del dispositivo prima di ogni utilizzo. Se si dovessero riscontrare segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.
- Il prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni causati da usi impropri, erronei o irragionevoli.
- Attenzione: non è ammessa alcuna modifica. Interventi, anche di lieve entità, devono essere effettuati da personale autorizzato. Ogni manomissione o modifica non preventivamente autorizzate dal costruttore sollevano quest'ultimo dai danni derivati o riferibili agli atti suddetti.
- Far controllare periodicamente lo stato del dispositivo e di tutti i suoi componenti da un centro tecnico autorizzato. Se si dovessero riscontrare segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.
- Accertarsi che nessuna parte del corpo (ad es. dita) né indumenti, coperte ecc. vengano intrappolati nelle parti mobili del dispositivo: **PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!**
- Non lasciare parti dell'imballo alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- In caso di utilizzo da parte di pazienti diversi, è necessario prendere opportune precauzioni per evitare il verificarsi di infezioni incrociate.
- In particolare, pulire sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo, prestando particolare cura alle parti che vengono in contatto con l'utilizzatore, come ad esempio la seduta.
- Prima dell'utilizzo, verificare che la Comoda sia posizionata su una superficie piana e sia perfettamente stabile.
- Verificare periodicamente la stabilità, la rigidità e il corretto serraggio di tutte le parti e dei puntali in gomma del prodotto.
- Non lasciare né conservare in ambienti esterni.
- Il dispositivo deve essere utilizzato in ambienti interni e su superfici piane e orizzontali.
- Non utilizzare in ambienti esterni o come sedile all'interno di veicoli.

SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO

- Non utilizzare mai i braccioli per alzare o spostare la comoda.
 - Il dispositivo è progettato per essere utilizzato a tempo indeterminato a condizione che sia mantenuto integro e che non siano presenti segni di usura eccessiva nei componenti.
 - La comoda deve sempre essere utilizzata con l'aiuto di un assistente.
 - Non salire in piedi sulla comoda.
 - Conservare l'imballo e riutilizzarlo per il trasporto della sedia.
 - Utilizzare con estrema cautela su superfici bagnate e scivolose.
 - Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
-
- **Il carico massimo di sicuro utilizzo è di Kg 136. Non superare mai tale carico.**

Avvertenze sulla sicurezza per OPERATORI SANITARI

- Prima del primo utilizzo del dispositivo, informare l'utilizzatore riguardo a come utilizzare in sicurezza il dispositivo, seguendo attentamente le istruzioni riportate in questo manuale che deve essere fornito insieme a esso. Informare tutti gli utilizzatori su ogni possibile pericolo a causa di un utilizzo errato.
- Le comode sono classificate come dispositivi medici di Classe I. È necessario assolvere i propri doveri in conformità alle normative vigenti in materia di installazione e utilizzo dei dispositivi medici, al fine di assicurare un utilizzo duraturo e in sicurezza di questo prodotto senza alcun rischio per pazienti, utilizzatori e terze parti. In caso di utilizzo prolungato del dispositivo, è necessario eseguire controlli a cadenza regolare (si suggerisce almeno una volta all'anno), per verificarne le funzionalità e individuare eventuali danni visibili.
- Assicurarsi che questo dispositivo sia utilizzato esclusivamente da personale qualificato.
- Assicurarsi che eventuali sostituti del personale siano sufficientemente istruiti sul corretto utilizzo di questo dispositivo.
- Assicurarsi che il personale rispetti le avvertenze sulla sicurezza.

Avvertenze sulla sicurezza per l'UTILIZZATORE

- Leggere il presente manuale prima dell'utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato e l'assenza di difetti del dispositivo.
- La comoda non deve essere considerata un sedile da usare all'interno di un autoveicolo.
- Evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale, mantenendo sempre il baricentro entro il perimetro della comoda stessa.
- Verificare il corretto montaggio delle parti removibili.

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo delle Comode MOVI non è indicato a:

- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso
- La comoda non deve essere utilizzata da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.

COMPLICAZIONI

Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

4. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

Le comode MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

La SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO è indicata per soggetti con disabilità motorie che necessitano di una sedia comoda. È richiesto sempre il sostegno da parte di un accompagnatore.

Se le dimensioni della tazza WC di casa e le dimensioni della stanza lo permettono, la SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO può essere utilizzata anche direttamente sul WC.

Utilizzare il prodotto come sedia comoda, rialzo stabilizzante per wc e supporto per wc.

Occasionalmente, la comoda può essere utilizzata anche come sedia doccia.

Attenzione! Al termine dell'utilizzo in doccia, asciugare completamente la sedia comoda in tutte le sue parti. Un prolungato contatto con l'acqua potrebbe danneggiarne la struttura.

- Struttura in ferro
- Ausilio dalle molteplici funzioni: sedia comoda, rialzo stabilizzante per wc e supporto per wc
- Altezza regolabile
- Braccioli di sostegno
- Schienale rimovibile
- Puntali antiscivolo in gomma rinforzati con anello per una maggiore stabilità
- Semplice da montare
- Facile da pulire in tutte le sue parti

6. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

- Ruotare le porzioni del telaio dotate di braccioli in modo che risultino parallele e contengano al loro interno il supporto per la vaschetta come indicato nella figura.
- Fissare il lato libero della struttura che supporta vaschetta alle gambe della comoda infilando il tubo nelle apposite sedi. Premere il bottone metallico e far scorrere fino a bloccaggio avvenuto.
- Posizionare il tubo orizzontale all'intento delle gambe della comoda in prossimità dei fori e fissare utilizzando le apposite viti.
- Inserire il poggiaschiena nei tubi di supporto



- 1) Schienale
- 2) Struttura di supporto
- 3) Coperchio della comoda
- 4) Secchio
- 5) Tubo di rinforzo frontale
- 6) Gamba

Anello di seduta e coperchio vanno fissati a pressione al tubo della struttura posteriore della comoda, come in figura.

7. ISTRUZIONI PER L'USO:

La SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN ALLUMINIO può essere utilizzata principalmente per:

- L'utilizzo sopra il water dove è necessario, oltre alla regolazione in altezza delle gambe, l'inserimento dello "splash guard" sulla struttura, sotto all'anello di seduta.
- L'utilizzo come comoda dove è necessario, oltre alla regolazione in altezza delle gambe, l'inserimento del secchio sulla struttura sotto all'anello di seduta.

La regolazione in altezza si effettua intervenendo sui perni presenti nei quattro tubi delle gambe:

- Con una leggera pressione spingere il perno all'interno del tubo.
- Regolare la gamba della comoda all'altezza desiderata e far fuoriuscire il perno nel foro corrispondente.
- Ripetere l'operazione per tutte e quattro le gambe.

8. PULIZIA E DISINFEZIONE:



Ogni volta che la Comoda viene utilizzata da un nuovo paziente, deve essere obbligatoriamente pulita e disinfettata con uno strofinamento accurato!

9. MANUTENZIONE:

I proprietari delle comode, in conformità con la normativa vigente, sono tenuti a garantire le condizioni di sicurezza dei dispositivi medici durante il loro impiego. A tal fine è necessario eseguire regolarmente interventi di controllo e manutenzione da parte di personale specializzato ed autorizzato dal fabbricante.

Come regola generale, si raccomanda di eseguire un controllo almeno una volta all'anno presso un centro autorizzato.

Nel caso risultasse necessario l'utilizzo di ricambi, fornirsi unicamente di ricambi originali

Verificare periodicamente il buono stato dei puntali in gomma per garantire una efficace aderenza al pavimento.

Sostituire i puntali in caso di usura eccessiva.

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.



Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del prodotto in caso di utilizzo di componenti/accessori non originali.

SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO

10. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO - DIAMETRO 22.2 mm
3-IN-1- KD IRON COMMODE CHAIR - DIAMETER 22.2mm

LOT 224000552

REF 15641029/KD

MD

 **MOVI S.p.A. - Divisione Wimed**
 Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
 MADE IN CHINA

2022 

136 kg 



	FABBRICANTE	EC REP	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE	LOT	LOTTO
REF	CODICE PRODOTTO	SN	NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
MD	DISPOSITIVO MEDICO	CE	PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA	~	CORRENTE ALTERNATA

SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

11. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Portata max:	136 Kg
Regolabile in altezza:	da 56 a 63 cm
Profondità seduta:	37 cm
Peso:	7,5 Kg
Colore:	Grigio

12. NOTE:

Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un centro tecnico autorizzato, in quanto è necessaria una buona conoscenza del prodotto da ispezionare. Se tale ispezione dovesse rilevare qualsiasi difetto, malfunzionamento o segno di usura che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, la Comoda non deve assolutamente essere utilizzata fino alla riparazione.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Movi S.P.A - declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:
Movi SpA — Via Dione Cassio, 15 — 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

13. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

14. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

15. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate

sulla scheda tecnica del dispositivo);

- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movì S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movì S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

SEDIA COMODA 3-IN-1 KD IN FERRO

Cod. 15641029/KD

Rev.1 18/09/2025



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com