

EASY COMMODE

Cod. 15591110

Cod. 15591111

Cod. 15591112

Cod. 15591113



Manuale d'uso



EASY COMMODE

INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI:	pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO:	pg.3
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:	pg.5
4. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:	pg.10
5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:	pg.10
6. MONTAGGIO E PRIMO UTILIZZO:	pg.11
7. PULIZIA E DISINFEZIONE:	pg.13
8. MANUTENZIONE	pg.14
9. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.15
10. CORRISPONDENZA CODICI:	pg.18
11. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.19
12. NOTA:	pg.23
13. SMALTIMENTO:	pg.24
14. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.24
15. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.25

EASY COMMODE

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarla per l'acquisto di questa EASY COMMODE e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Il presente manuale fornisce informazioni utili all'acquirente e all'utilizzatore per tutte le funzioni che garantiscono un uso quotidiano, pratico e sicuro di questo prodotto.

La EASY COMMODE, classificata come dispositivo medico di classe I, è conforme al Regolamento Europeo 2017/745 del 5 Aprile 2017 sui dispositivi medici.

Il presente manuale d'uso contiene avvertenze sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutti gli utilizzatori che lavorano con la EASY COMMODE devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.

Il Fabbrikante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbrikante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

2. DESTINAZIONE D'USO:

Le Comode MOVI sono destinate a persone con difficoltà motorie e possono essere utilizzate come ausilio per l'utilizzo in doccia e in bagno.

La comoda deve essere utilizzata solo a livello del suolo, su superfici facilmente accessibili e solo all'interno di edifici.

EASY COMMODE



Prima di utilizzare la comoda:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni al dispositivo a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente il dispositivo.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (puntali, rivestimenti di seduta e schienale ecc.) e del serraggio della viteria.
- É vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano il dispositivo devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.

EASY COMMODE

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale. Utilizzare La Comoda imbottita unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale del dispositivo e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.
- Qualora il dispositivo risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.

EASY COMMODE



- Non utilizzare il dispositivo prima di avere letto attentamente il manuale d'uso.
- Verificare lo stato del dispositivo prima di ogni utilizzo. Se si dovessero riscontrare segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.
- Il dispositivo deve essere utilizzato nelle condizioni di fornitura e non può essere modificato in alcun modo.
- Far controllare periodicamente lo stato del dispositivo e di tutti i suoi componenti da un centro tecnico autorizzato. Se si dovessero riscontrare segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.
- Contattare un centro tecnico autorizzato per eventuali riparazioni.
- Accertarsi che nessuna parte del corpo (ad es. dita) né indumenti, coperte ecc. vengano intrappolati nelle parti mobili del dispositivo: **PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!**
- Non utilizzare la comoda su superfici sconnesse o pendenze.
- In caso di utilizzo da parte di pazienti diversi, è necessario prendere opportune precauzioni per evitare il verificarsi di infezioni incrociate.
- In particolare, pulire sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo, prestando particolare cura alle parti che vengono in contatto con l'utilizzatore, come ad esempio la seduta.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi dalla destinazione d'uso prevista.
- Prima dell'utilizzo, verificare che la comoda sia posizionata su una superficie piana e sia perfettamente stabile.
- Controllare lo stato delle gomme, dei freni e dello spessore degli pneumatici prima di utilizzare la comoda.
- Il dispositivo è progettato per essere utilizzato a tempo indeterminato a condizione che sia mantenuto integro e che non siano presenti segni di usura eccessiva nei componenti.

EASY COMMODE

- La comoda deve sempre essere utilizzata con l'aiuto di un assistente.
- Non salire in piedi sulla comoda.
- Non salire in piedi sulle pedane.
- Prima di salire e scendere dalla comoda, l'assistente deve bloccare le ruote mediante i freni e contestualmente aiutare l'utente durante le operazioni di spostamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni ma obbligatoriamente su superfici piane e orizzontali.
- Non utilizzare come sedile all'interno di veicoli.
- Non utilizzare su scale mobili.
- Non affrontare da soli gradini, scale o rampe: farsi sempre aiutare da un assistente.
- Non utilizzare mai i braccioli per alzare o spostare la comoda.
- **La portata massima è di Kg 130.** Tale carico non deve essere superato in nessun caso. Prima di utilizzare la sedia accertatevi che il peso dell'utilizzatore non sia superiore a questo valore.

EASY COMMODE

Avvertenze sulla sicurezza per OPERATORI SANITARI

- Prima del primo utilizzo del dispositivo, informare l'utilizzatore riguardo a come utilizzare in sicurezza il dispositivo, seguendo attentamente le istruzioni riportate in questo manuale che deve essere fornito insieme a esso. Informare tutti gli utilizzatori su ogni possibile pericolo a causa di un utilizzo errato.
- Le comode sono classificate come dispositivi medici di Classe I. È necessario assolvere i propri doveri in conformità alle normative vigenti in materia di installazione e utilizzo dei dispositivi medici, al fine di assicurare un utilizzo duraturo e in sicurezza di questo prodotto senza alcun rischio per pazienti, utilizzatori e terze parti. In caso di utilizzo prolungato del dispositivo, è necessario eseguire controlli a cadenza regolare (si suggerisce almeno una volta all'anno), per verificarne le funzionalità e individuare eventuali danni visibili.
- Assicurarsi che questo dispositivo sia utilizzato esclusivamente da personale qualificato.
- Assicurarsi che eventuali sostituti del personale siano sufficientemente istruiti sul corretto utilizzo di questo dispositivo.
- Assicurarsi che il personale rispetti le avvertenze sulla sicurezza.

Avvertenze sulla sicurezza per l'UTILIZZATORE

- Leggere il presente manuale prima dell'utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato e l'assenza di difetti del dispositivo.
- La comoda non deve essere considerata un sedile da usare all'interno di un autoveicolo.
- Evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale, mantenendo sempre il baricentro entro il perimetro della comoda stessa.
- Verificare il corretto montaggio delle parti removibili.

EASY COMMODE

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo delle Comode MOVI non è indicato a:

- Bambini di età inferiore ai 15 anni
- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso
- La comoda non deve essere utilizzata da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.

COMPLICAZIONI

Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

EASY COMMODE

4. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

Le comode MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

La EASY COMMODE è una sedia da comodo progettata per persone con ridotta capacità motoria e in grado manovrarla negli spazi di vita quotidiana.

Disponibile in 4 modelli, è dotata di schienale avvolgente e reclinabile, braccioli estraibili, piano di seduta con foro wc, vaschetta estraibile, pedane elevabili e regolabili in altezza con poggiambracci imbottiti.

EASY COMMODE

6. MONTAGGIO E PRIMO UTILIZZO:

Montaggio

Riceverete la vostra EASY COMMODE in una scatola di cartone, con lo schienale smontato.

Per il montaggio e le regolazioni seguire le istruzioni seguenti:

1. Posizionare lo schienale nelle guide e fissarlo con gli appositi perni.
2. Inclinare quindi lo schienale nella posizione desiderata e stringere le manopole per fissarlo.
3. Per regolare l'inclinazione delle pedane e la lunghezza del poggiatesta, allentare il dado posizionato sul retro del tubo della pedana, fare scorrere la parte interna del tubo fino alla lunghezza desiderata, quindi stringere il bullone.
4. Inserire i braccioli nell'apposito alloggiamento e accertarsi che siano fissati.
5. Per rimuovere i braccioli, premere il pulsante di sgancio e tirarli verso l'alto.
6. Controllare il funzionamento corretto dei freni. In caso di malfunzionamenti, non utilizzare il dispositivo ma rivolgersi al rivenditore o al centro tecnico autorizzato.

EASY COMMODE



Avvertenze di utilizzo - Ambienti interni

- Utilizzare la comoda esclusivamente come previsto dal presente Manuale d'uso.
- Controllare che la vaschetta estraibile non sia stata spostata o rimossa.
- Non salire mai sui poggiapiedi per evitare il rischio di ribaltamento.
- Evitare di sporgersi dalla comoda, ad esempio quando di devono prendere degli oggetti.
- Evitare di sedersi sul bordo della comoda: pericolo di ribaltamento!

Avvertenze di utilizzo - Ambienti esterni



- Se la comoda è spinta da un assistente, l'utente deve essere bene appoggiato allo schienale con le braccia posizionate sui braccioli.
- Non affrontare pendenze con inclinazione superiore al 10%!
- Utilizzare entrambi i freni per la sosta, la salita e la discesa dalla comoda e scegliere sempre un terreno pianeggiante e stabile.
- Non salire né scendere da rampe o gradini con altezza superiore a 3 cm.
- Prestare estrema attenzione agli abiti ampi che potrebbero impigliarsi nei raggi delle ruote.
- L'assistente non deve mai sollevare la comoda utilizzando i braccioli per il superamento degli ostacoli.

EASY COMMODE

7. PULIZIA E DISINFEZIONE:

Rivestimenti e imbottiture

Tutte le imbottiture sono realizzate in schiuma poliuretanica lavabile con acqua e sapone neutro.



Attenzione!

Ogni volta che la comoda viene utilizzata da un nuovo paziente, deve essere obbligatoriamente pulita e disinfettata con uno strofinamento accurato!

Telaio e parti metalliche

Mantenere sempre pulita la comoda per un comfort migliore e per garantirne le prestazioni per un lungo periodo. Pulire le parti metalliche con acqua e detersivo neutro.

In caso di sporco ostinato utilizzare uno sgrassante. Non utilizzare solventi o prodotti abrasivi. Asciugare con un panno morbido.

Freni

L'effetto frenante dipende anche dallo stato del battistrada. La presenza di sporcizia può influenzare negativamente il funzionamento dei freni. Eventualmente pulire con uno spazzolino per eliminare polvere e scorie.

EASY COMMODE

8. MANUTENZIONE



In seguito a ripetute operazioni di trasporto, montaggio, smontaggio, utilizzo errato e impiego per un lungo periodo di tempo, non è da escludere che si possano verificare danni, difetti e usura. Questi problemi possono rappresentare un pericolo per la sicurezza se non vengono riconosciuti e risolti in tempo!

Pertanto si raccomanda di far controllare **almeno ogni 2 anni** il corretto funzionamento del prodotto da parte di un centro tecnico autorizzato.

Gli pneumatici in gomma piena non necessitano di particolare manutenzione. Prestare attenzione allo stato di usura delle gomme, in quanto influisce sulle prestazioni dei freni.

In presenza di qualsiasi anomalia non utilizzare la comoda e rivolgersi al rivenditore o a un centro tecnico specializzato.

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.



Movi S.p.A. non garantisce il funzionamento e la sicurezza della comoda in caso di utilizzo di componenti non originali.

EASY COMMODE

9. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

CARROZZINA EASY COMMODE 4 RUOTE DA 100mm
WHEELCHAIR EASY COMMODE 4 WHEELS OF 100 mm

REF 15591110

MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
 Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT xxxxxxxx

20xx

130 kg



CARROZZINA EASY COMMODE 4 RUOTE DA 200 mm
WHEELCHAIR EASY COMMODE 4 WHEELS OF 200 mm

REF 15591111

MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
 Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT xxxxxxxx

20xx

130 kg



CARROZZINA EASY COMMODE ruote posteriori da 600 mm
WHEELCHAIR EASY COMMODE with 600 mm rear wheels

REF 15591112

MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
 Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT xxxxxxxx

20xx

130 kg



EASY COMMODE

CARROZZINA EASY COMMODE ruote anteriori da 600 mm
WHEELCHAIR EASY COMMODE 600 mm front wheels

LOT XXXXXXXX

REF 15591113


MD

20xx 

130 kg 

 **MOVI S.p.A.** - Divisione Wimed
 Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

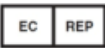

	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA
	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B

EASY COMMODE

	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

EASY COMMODE

10. CORRISPONDENZA CODICI:

Il manuale fa riferimento ai codici qui di seguito riportati

Cod. 15591110 con 4 ruote da 100 mm



Cod. 15591111 con 4 ruote da 200 mm



Cod. 15591112 con ruote posteriori da 600 mm



Cod. 15591113 con ruote anteriori da 600 mm



EASY COMMODE

11. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Codice prodotto	15591110
Larghezza totale	56 cm
Larghezza seduta	43 cm
Altezza totale	107 cm
Altezza del sedile	50 cm
Lunghezza totale	85 cm
Profondità seduta	45 cm
Altezza schienale	58 cm
Altezza bracciolo	26 cm
Peso	23,5 kg
Peso max paziente	130 Kg
Telaio	in lega di metallo
Rivestimenti	in materiale lavabile ed ignifugo
Schienale	anatomico, reclinabile con pomelli e ribaltabile
Braccioli	imbottiti ed estraibili
Pedane	ribaltabili e regolabili in altezza con poggia polpacci imbottiti e ruotine anti-urto sul poggia piedi
Ruote Anteriori	da 100mm piroettanti
Ruote Posteriori	da 100mm piroettanti
Freno	su ruote posteriori a leva
Vaschetta	sotto il sedile, in PVC
Tappo di chiusura	con maniglia per rimozione

EASY COMMODE

Codice prodotto	15591111
Larghezza totale	62 cm
Larghezza seduta	43 cm
Altezza totale	107 cm
Altezza del sedile	50 cm
Lunghezza totale	84 cm
Profondità seduta	45 cm
Altezza schienale	58 cm
Altezza bracciolo	26 cm
Peso	24,5 kg
Peso max paziente	130 Kg
Telaio	in lega di metallo
Rivestimenti	in materiale lavabile ed ignifugo
Schienale	anatomico, reclinabile con pomelli e ribaltabile
Braccioli	imbottiti ed estraibili
Pedane	ribaltabili e regolabili in altezza con poggia polpacci imbottiti e ruotine anti-urto sul poggia piedi
Ruote Anteriori	da 200mm piene
Ruote Posteriori	da 200mm piene
Freno	su ruote posteriori da azionare col piede
Vaschetta	sotto il sedile, in PVC
Tappo di chiusura	con maniglia per rimozione

EASY COMMODE

Codice prodotto	15591112
Larghezza totale	66 cm
Larghezza seduta	43 cm
Altezza totale	107 cm
Altezza del sedile	50 cm
Lunghezza totale	110 cm
Profondità seduta	45 cm
Altezza schienale	58 cm
Altezza bracciolo	26 cm
Peso	25,5 kg
Peso max paziente	130 Kg
Telaio	in lega di metallo
Rivestimenti	in materiale lavabile ed ignifugo
Schienale	anatomico, reclinabile con pomelli e ribaltabile
Braccioli	imbottiti ed estraibili
Pedane	ribaltabili e regolabili in altezza con poggia polpacci imbottiti e ruotine anti-urto sul poggia piedi
Ruote Anteriori	da 200mm piene
Ruote Posteriori	da 600mm da autospinta
Freno	su ruote posteriori a leva
Vaschetta	sotto il sedile, in PVC
Tappo di chiusura	con maniglia per rimozione

EASY COMMODE

Codice prodotto	15591113
Larghezza totale	66 cm
Larghezza seduta	43 cm
Altezza totale	107 cm
Altezza del sedile	50 cm
Lunghezza totale	89 cm
Profondità seduta	45 cm
Altezza schienale	58 cm
Altezza bracciolo	26 cm
Peso	26,5 kg
Peso max paziente	130 Kg
Telaio	in lega di metallo
Rivestimenti	in materiale lavabile ed ignifugo
Schienale	anatomico, reclinabile con pomelli e ribaltabile
Braccioli	imbottiti ed estraibili
Pedane	ribaltabili e regolabili in altezza con poggia polpacci imbottiti e ruotine anti-urto sul poggia piedi
Ruote Anteriori	da 600mm da autospinta
Ruote Posteriori	da 200mm piene
Freno	su ruote posteriori a leva
Vaschetta	sotto il sedile, in PVC
Tappo di chiusura	con maniglia per rimozione

EASY COMMODE

12. NOTA:

Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un tecnico competente, in quanto è necessaria una buona conoscenza del prodotto da ispezionare.

Se tale ispezione dovesse rilevare qualsiasi difetto, malfunzionamento o segno di usura che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, la comoda non deve assolutamente essere utilizzata fino alla riparazione.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA — Via Dione Cassio, 15 — 20138 Milano

Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

EASY COMMODE

13. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

14. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

EASY COMMODE

15. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail:
satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto

EASY COMMODE

e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

Movi S.p.A.- Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com



www.movigroup.com

Manuale d'uso originale

EASY COMMODE
Rev.3 29/07/2025

Movi SpA

Via Dione Cassio, 15—Milano—Italy