

MANUALE D'USO

Seggiolone Polifunzionale

CONCEPT PRO

Ruote da 400 mm

Ruote da 600 mm

Cod. 15584010 - 15584015

Cod. 15584510 - 15584515

Cod. 15585010 - 15585015




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI



INDICE:

1. INTRODUZIONE: pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO: pg.4
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI: pg.6
4. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO: pg.10
5. TECNICHE DI GUIDA: pg.11
6. TECNICHE DI TRASFERIMENTO: pg.14
7. CLASSIFICAZIONE - STANDARD: pg.16
8. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI: pg.17
9. CARATTERISTICHE TECNICHE: pg.20
10. MONTAGGIO E REGOLAZIONI: pg.23
11. PULIZIA E DISINFEZIONE: pg.32
12. MANUTENZIONE: pg.34
13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: pg.35
14. DOPO L'UTILIZZO: pg.36
15. SMALTIMENTO: pg.37
16. NOTE: pg.37
17. RECLAMI E INCIDENTI: pg.38
18. CERTIFICATO DI GARANZIA: pg.38

1. INTRODUZIONE:

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarla per il suo acquisto e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Il Seggiolone Polifunzionale CONCEPT PRO, classificato come dispositivo medico di classe I, è conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il presente manuale d'uso contiene avvertenze sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate.

Tutti gli utilizzatori che lavorano con il Seggiolone CONCEPT PRO devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.

Il Fabbrikante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbrikante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

ELENCO CODICI:

Il presente manuale fa riferimento ai modelli e codici indicati al capitolo "Caratteristiche tecniche".

2. DESTINAZIONE D'USO:

Il Seggiolone CONCEPT PRO è stato concepito per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza ed è adatto per l'utilizzo in ambienti esterni e interni.

Il Seggiolone CONCEPT PRO deve essere utilizzato unicamente con l'aiuto di un assistente. Le tecniche di guida consigliate sono rivolte solo a persone esperte.

Il Seggiolone CONCEPT PRO è indicato per persone adulte e/o anziane con ridotta capacità motoria in grado di compiere percorsi interni in spazi ridotti e percorsi esterni in autonomia e che, trascorrendo periodi prolungati in posizione seduta, necessitano di poter variare la postura del tronco. Il telaio è adatto ad accogliere sistemi posturali complessi.

Quando viene utilizzato senza accompagnatore, il Seggiolone CONCEPT PRO può essere impiegato esclusivamente da parte di persone che siano fisicamente e cognitivamente in grado di effettuarne un utilizzo in totale sicurezza (ad esempio, per spingere il proprio seggiolone, sterzare e frenare). Il seggiolone deve essere utilizzato solo a livello del suolo e su superfici facilmente accessibili anche all'interno di edifici.



Prima di utilizzare il dispositivo:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni al dispositivo a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente il dispositivo.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (gomme, freni, rivestimenti di seduta e schienale, poggiatesta, ecc.) e del serraggio della viteria.
- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.

- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano il dispositivo devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

I Seggioloni Polifunzionali CONCEPT PRO di Movi sono dispositivi medici. Assicurarsi, pertanto, di leggere l'intero manuale. Utilizzare i prodotti unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

Il simbolo di sicurezza non sostituisce il testo di avvertenza a cui si riferisce. Leggere sempre le avvertenze sulla sicurezza e seguirle attentamente!



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica l'obbligo di leggere le istruzioni prima dell'utilizzo del dispositivo



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale del seggiolone e

verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.

- Qualora il seggiolone risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.



- Evitare di utilizzare il dispositivo in condizioni di scarsa visibilità o illuminazione, oppure provvedere a rendersi chiaramente visibili tramite catarifrangenti.
- Sia per la sicurezza dell'utilizzatore che per quella del dispositivo, non usare il dispositivo su terreni con scarsa aderenza, come sabbia, fango e neve.
- ATTENZIONE: non modificare in alcun modo questo dispositivo.
- ATTENZIONE: non sollevare mai il Seggiolone afferrando le pedane ma utilizzare invece il telaio metallico.
- ATTENZIONE: non salire mai sui poggiatesta per evitare il rischio di ribaltamento.
- ATTENZIONE: non modificare questo dispositivo senza l'autorizzazione del fabbricante.
- ATTENZIONE: prestare attenzione per evitare lo schiacciamento delle mani quando si compiono le operazioni di apertura e chiusura del seggiolone.
- ATTENZIONE: non utilizzare mai scale mobili, neanche con l'aiuto dell'assistente.

Avvertenze sulla sicurezza per OPERATORI SANITARI

- Prima del primo utilizzo del dispositivo, informare l'utilizzatore riguardo a come utilizzare in sicurezza il dispositivo, seguendo attentamente le istruzioni riportate in questo manuale che deve essere fornito insieme a esso. Informare tutti gli utilizzatori su ogni possibile pericolo a causa di un utilizzo errato.
- I seggioloni sono classificati come dispositivi medici di Classe I. È necessario assolvere i propri doveri in conformità alle normative vigenti in materia di installazione e utilizzo dei dispositivi medici, al fine di assicurare un utilizzo duraturo e in sicurezza di questo prodotto senza alcun rischio per pazienti, utilizzatori e terze parti. In caso di utilizzo prolungato del dispositivo, è necessario eseguire controlli a cadenza regolare (si suggerisce almeno una volta all'anno), per verificarne le funzionalità e individuare eventuali danni visibili.
- Assicurarsi che questo dispositivo sia utilizzato esclusivamente da personale qualificato.
- Assicurarsi che eventuali sostituti del personale siano sufficientemente istruiti sul corretto utilizzo di questo dispositivo.
- Assicurarsi che il personale rispetti le avvertenze sulla sicurezza.

Avvertenze sulla sicurezza per l'UTILIZZATORE

- Leggere il presente manuale prima dell'utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato e l'assenza di difetti del dispositivo.
- Prima di affrontare ostacoli come scalini o dossi, assicurarsi che non si creino interferenze con il dispositivo.
- Evitare, quando possibile, di attraversare pozze d'acqua. Il dispositivo è resistente all'acqua, ma in caso venga bagnato è consigliabile provvedere all'asciugatura nel più breve tempo possibile.
- Il Seggiolone non deve essere considerato un sedile da usare all'interno di un autoveicolo.
- Non inclinare il Seggiolone senza assistenza.
- Prima di inclinarsi in avanti o di alzarsi del Seggiolone, assicurarsi che le

ruote anteriori siano dritte e quelle posteriori siano bloccate.

- Evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale, mantenendo sempre il baricentro entro il perimetro del Seggiolone stesso.
- Verificare il corretto montaggio delle parti removibili.

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo dei Seggioloni Polifunzionali MOVI non è indicato a:

- Bambini di età inferiore ai 15 anni (ad esclusione dei modelli pediatrici)
- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso
- I seggioloni non devono essere utilizzati da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.
- I seggioloni, a causa delle funzionalità di inclinazione del sedile e reclinazione dello schienale, non sono adatte per utenti sensibili all'ipertensione nella parte superiore del corpo.

COMPLICAZIONI


Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

Qualora vi fosse il rischio di sviluppare piaghe da decubito, munirsi di strumenti di prevenzione adeguati a seguito di consulto con il medico curante.

4. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO:

Automobile privata/Taxi

- Rimuovere le pedane.
- Sfilare i braccioli.
- Rimuovere l'imbottitura di schienale e sedile.
- Rimuovere il perno con anello (fissaggio del pistone).
- Abbattere lo schienale.


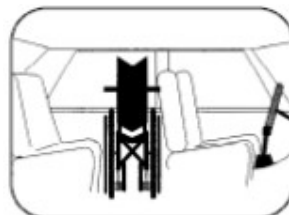


Minibus / Autobus / Mezzi pubblici:

L'utilizzatore del Seggiolone deve sedere su uno dei sedili del minibus, mentre il Seggiolone deve essere bloccato in modo che non possa ribaltarsi o scivolare.

Se il minibus è dotato di apposito spazio per utilizzatori di carrozzine, adottare le seguenti precauzioni:

- Per la sicurezza dell'utilizzatore, lo spazio deve essere dotato di un montante con cintura di sicurezza a tre punti e poggiatesta (non è sufficiente lo schienale del Seggiolone).
- Il Seggiolone deve essere fissato per le fiancate e non per le ruote. Le cinghie di fissaggio devono avere un'inclinazione compresa fra 0° e 30°.

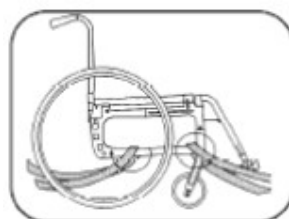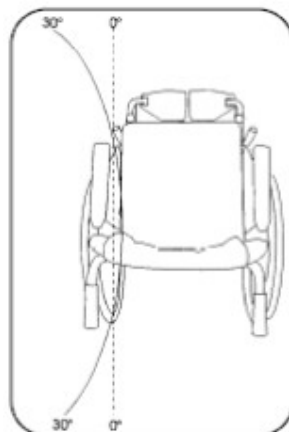

5. TECNICHE DI GUIDA:



Attenzione!

Le tecniche di guida elencate qui di seguito sono consigliate a utilizzatori esperti: assicurarsi delle proprie capacità e dei propri limiti.

Affrontare marciapiedi e dislivelli

Il Seggiolone polifunzionale CONCEPT PRO rende possibile salire e scendere marciapiedi o piccoli ostacoli con l'aiuto di un assistente.

Assistente - Salita in avanti:

Portare il Seggiolone in corrispondenza del bordo del marciapiede o del gradino.

Inclinare il Seggiolone, agendo eventualmente sul telaio posteriore, in modo che le ruote anteriori siano sollevate da terra, e spingere il Seggiolone sopra l'ostacolo.

Continuare a spingere finché anche le ruote posteriori non siano salite sopra l'ostacolo.



Assistente - Salita all'indietro:

Arretrare fino a portare il Seggiolone in corrispondenza del bordo del marciapiede o del gradino. Inclinare il Seggiolone, agendo eventualmente sul telaio posteriore, in modo che le ruote anteriori siano sollevate da terra, e tirare il Seggiolone sopra l'ostacolo. Continuare a tirare finché anche le ruote anteriori non siano salite sopra l'ostacolo.



Assistente - Discesa in avanti:

Inclinare il Seggiolone, agendo eventualmente sul telaio posteriore in modo che le ruote anteriori siano sollevate da terra. Scendere lentamente dal marciapiede o dal gradino, quindi abbassare le ruote a terra.



Assistente - Discesa all'indietro:

Verificare che gli anti-ribaltamento siano alzati, inclinare il seggiolone all'indietro sullo scalino e condurre la carrozzina, con attenzione, giù dallo scalino spostandola all'indietro sulle ruote posteriori finché le ruote anteriori non sono lontane dallo scalino. Appoggiare le ruote anteriori a terra. Riposizionare gli anti-ribaltamento verso il basso



Tecniche di guida sulle scale



Attenzione! Si consiglia agli assistenti di utilizzare la forza delle gambe, senza piegare o fare leva sulla schiena.

Assistente - Salita all'indietro:

- Fare arretrare il Seggiolone fino al primo scalino.
- Inclinare il Seggiolone sulle ruote posteriori, aiutandosi eventualmente con il pedale di sollevamento.
- Tirare il Seggiolone lentamente verso l'alto uno scalino alla volta, mantenendolo costantemente bilanciato sulle ruote posteriori.
- Dopo l'ultimo scalino, tirare indietro il Seggiolone in modo che le ruote anteriori siano appoggiate sul pavimento, prima di "abbassare" il Seggiolone su tutte e 4 le ruote.



Assistente - Discesa in avanti:

- Fare avanzare il Seggiolone fino al primo scalino. Inclinare il Seggiolone sulle ruote posteriori, aiutandosi eventualmente con il pedale di sollevamento.
- Scendere lentamente uno scalino alla volta, tenendo costante e bilanciato il Seggiolone sulle ruote posteriori.
- Dopo l'ultimo scalino, "abbassare" il Seggiolone su tutte e 4 le ruote.



Nota: In caso di disponibilità di due assistenti, il secondo può aiutare sollevando il Seggiolone afferrando le pedane bloccabili o, in mancanza di esse, reclinando/smontando le pedane e sollevando il Seggiolone afferrandolo per il telaio.



Attenzione! Si consiglia agli assistenti di utilizzare la forza delle gambe, senza piegare o fare leva sulla schiena.

6. TECNICHE DI TRASFERIMENTO:



Attenzione!

Salire o scendere da soli dalla Seggiolone è un'operazione potenzialmente molto pericolosa: procedere solo se fisicamente in grado e comunque prestare estrema cautela.

Non appoggiarsi sui freni né caricare il peso sulle pedane durante la salita e la discesa dal Seggiolone: esiste il rischio di ribaltamento!

Salita

- Avvicinare il più possibile il Seggiolone, in modo da posizionarlo di fianco a sé.
- Azionare i freni di stazionamento. Se necessario rimuovere la spondina o il bracciolo.
- Sollevarsi facendo forza sulle braccia e appoggiandosi al telaio della seduta e, se possibile, anche a qualcosa di stabile e vicino.
- Lasciarsi scivolare verso la seduta del Seggiolone

Discesa

- Dalla posizione seduta sul Seggiolone, avvicinarsi il più possibile in modo da trovarsi di fianco alla zona di arrivo.
- Arretrare di qualche centimetro in modo da posizionare le ruote anteriori in avanti e aumentare la superficie di appoggio del Seggiolone, e di conseguenza la sua stabilità.
- Azionare i freni di stazionamento. Se necessario rimuovere la spondina o il bracciolo. Lasciarsi scivolare verso la zona di arrivo.





Attenzione!

Le tecniche di trasferimento devono essere esercitate sotto la guida di personale esperto. Di seguito vengono fornite solo raccomandazioni importanti da osservare.

Da Seggiolone a letto

Con o senza assistente, anteriormente.

Prima del trasferimento:

- Fare arretrare il Seggiolone di 5-10 cm dal punto di arresto, in modo che le ruote guida siano rivolte in avanti.
- Innestare i freni, alzare le spondine o i braccioli e le pedane sul lato in cui avviene il trasferimento.



Da letto a Seggiolone

Con o senza assistente, anteriormente.

Prima del trasferimento:

- Fare arretrare il Seggiolone di 5-10 cm dal punto di arresto, in modo che le ruote guida siano rivolte in avanti.
- Innestare i freni, alzare le spondine o i braccioli e le pedane sul lato in cui avviene il trasferimento.
- Il Seggiolone deve essere il più vicino possibile al punto di arrivo del trasferimento.



Attenzione!

Accertarsi di innestare i freni e di alzare le pedane!

Non salire sui poggiatesta, pericolo di ribaltamento!

Si consiglia agli assistenti di utilizzare la forza delle gambe, senza piegare o fare leva sulla schiena.

7. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

I Seggioloni Polifunzionali CONCEPT PRO di MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

8. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO RUOTE POST.16" 40 CM.

TILTING WHEELCHAIR CONCEPT PRO 40 CM WHEEL 16"

Colore Nero / Colour Black



REF 15584010



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy

MADE IN CHINA



LOT XXXXXXXX



20XX

136 Kg



SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO RUOTE 24" 40 CM.

TILTING WHEELCHAIR CONCEPT PRO 40 CM WHEEL 24"

Colore Nero / Colour Black



REF 15584015



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy

MADE IN CHINA



LOT XXXXXXXX



20XX

136 Kg



SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO RUOTE POST.16"

45 CM. TILTING WHEELCHAIR CONCEPT PRO 45 CM WHEEL 16"

Colore Nero / Colour Black



REF 15584510



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy

MADE IN CHINA



LOT XXXXXXXX



20XX

136 Kg



SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO RUOTE 24" 45 CM.

TILTING WHEELCHAIR CONCEPT PRO 45 CM WHEEL 24"

Colore Nero / Colour Black

REF 15584515 MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy

MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXX

20XX

136 Kg



SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO RUOTE POST.16" 50 CM.

TILTING WHEELCHAIR CONCEPT PRO 50CM WHEEL 16"

Colore Nero / Colour Black

REF 15585010 MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy

MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXX

20XX

136 Kg



SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO RUOTE 24" 50 CM.

TILTING WHEELCHAIR CONCEPT PRO 50CM WHEEL 24"

Colore Nero / Colour Black

REF 15585015 MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy

MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXX

20XX

136 Kg



	FABBRICANTE	EC REP	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE	LOT	LOTTO
REF	CODICE PRODOTTO	SN	NUMERO DI SERIE

	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA
	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

9. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Portata massima 136 Kg
- Larghezza seduta 40 cm, 45 cm, 50 cm
- Ruote anteriori piene da 8"
- Ruote posteriori da 16" e 24"
- Freni manuali a leva
- Braccioli imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e larghezza
- Appoggiagambe elevabili e regolabili in profondità
- Pedane appoggiapiedi separate con dispositivo per la trasformazione in pedana unica
- Rivestimento in Nylon rinforzato, lavabile
- Schienale reclinabile fino a 35°
- Basculamento della seduta fino a 30°



- 1 Poggiatesta
- 2 Schienale
- 3 Manopole di spinta con freno
- 4 Corrimano (solo modelli autospinta)
- 5 Ruota posteriore
- 6 Pulsante di sgancio rapido
- 7 Ruotine antiribaltamento
- 8 Forcella anteriore
- 9 Ruota anteriore
- 10 Pedana poggiapiedi
- 11 Ferma tallone
- 12 Alzagambe elevabili
- 13 Poggia-polpacci
- 14 Cuneo divaricatore
- 15 Cuscino in PU con piastra di contenimento in acciaio
- 16 Supporto per il tronco

Basculamento:	30°
Reclinazione schienale:	35°
Larghezza seduta:	40 - 45 - 50 cm
Larghezza massima d'ingombro:	61 - 66 - 71 cm
Profondità seduta:	da 43 a 56 cm
Profondità massima:	114-186 cm (Recl. e basc. max. pedane allungate e inclinate, poggiatesta montato)
Altezza schienale:	63 cm
Altezza posteriore seduta:	Autospinta 42-45 cm Transito 43 cm
Altezza anteriore seduta:	41-45 cm
Altezza bracciolo:	27-33 cm
Manopole di spinta:	7 livelli di regolazione in altezza da: 91 a 108 cm
Portata massima:	136 Kg

Il presente manuale fa riferimento ai seguenti modelli di Seggiolone Polifunzionale CONCEPT PRO:

Codice prodotto	Modello	Larghezza seduta
15584010	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO ruote post.16"	40 cm
15584015	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO ruote post.24"	40 cm
15584510	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO ruote post.16"	45 cm
15584515	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO ruote post.24"	45 cm
15585010	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO ruote post.16"	50 cm
15585015	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT PRO ruote post.24"	50 cm

10. MONTAGGIO E REGOLAZIONI:


Schienale

Posizionarsi nella parte posteriore del seggiolone e piegare lo schienale indietro fino a circa 90° (Immagine 1).

Rimuovere il perno del pistone situato sotto il sedile sul retro della seggiolone. (Immagine 2)

Far combaciare il foro del pistone con i due fori presenti sulla piastra posteriore del telaio e inserire il perno, come mostrato nell'immagine.

Per ripiegare lo schienale, è necessario rimuovere i cuscini dello schienale e della seduta ed eseguire il procedimento inverso a quello precedentemente illustrato.

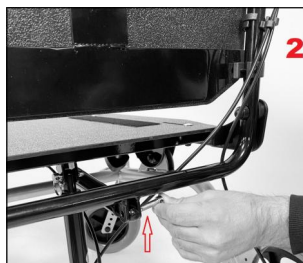

Poggiatesta

L'appoggiatesta è completamente rimovibile.

È regolabile in altezza, profondità e lateralmente.

Regolazione altezza:

- Allentare la manopola, quindi rimuoverla (A) .
- Regolare l'altezza dell'appoggiatesta.
- Riposizionare la manopola e stringerla fino al bloccaggio (A)

Regolazione profondità:


- Allentare in senso antiorario le leve (B) posizionate dietro al poggiatesta.
- Regolare fino alla posizione desiderata (regolazione simultanea in profondità e altezza) .
- Stringere le leve (B).

Regolazione laterale:

- Allentare in senso antiorario le viti (C) e (D).
- Regolare fino alla posizione desiderata (le viti C e D consentono due regolazioni laterali) .
- Stringere le viti (C) e (D).

Regolazione appoggi laterali:

- Allentare in senso antiorario le leve (E) posizionate dietro al poggiatesta.
- Regolare le angolazioni fino alla posizione desiderata e stringere le leve (E).

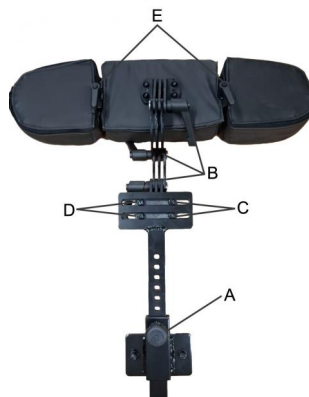


Montaggio delle manopole di spinta

Le manopole di spinta sono regolabili in altezza per adattarsi alle diverse esigenze dei caregivers, rendendo più comoda la spinta del seggiolone.

Allentare le due manopole degli alloggiamenti situati sullo schienale e inserire i tubi.

Stringere saldamente le manopole una volta scelta l'altezza corretta.


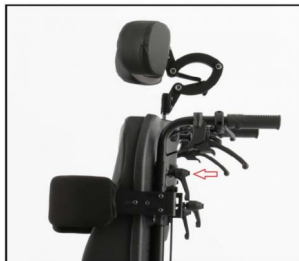


Montaggio del sedile e dello schienale imbottiti

Sia il sedile imbottito che lo schienale, incorporano strisce in velcro sul retro che devono combaciare con le strisce presenti sulle piastre del telaio del seggiolone.

Montare lo schienale e il sedile come mostrato nell'immagine

Assicurarsi che il velcro combaci in modo che entrambe le parti siano saldamente fissate e non si muovano.

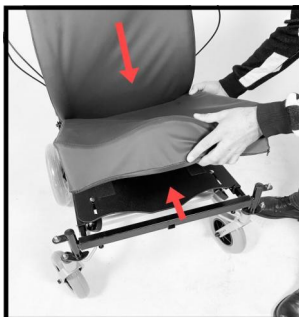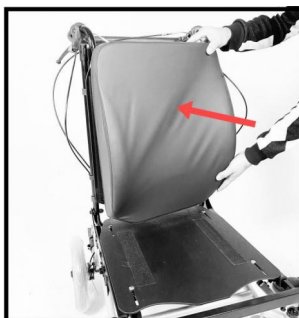

Montaggio dei poggiapiedi


Allineare i fori del poggiapiedi con i perni sul davanti del telaio e agganciarli.

Ripiegare il poggiapiedi verso la sedia fino a quando il meccanismo di chiusura non scatta in posizione.

Assicurarsi che il poggiapiedi sia correttamente ancorato tirandolo lateralmente per effettuare un controllo.

Ripiegare la piattaforma del poggiapiedi fino a renderla parallela al suolo.

Ripetere la stessa operazione con l'altro poggiapiedi sul lato opposto.

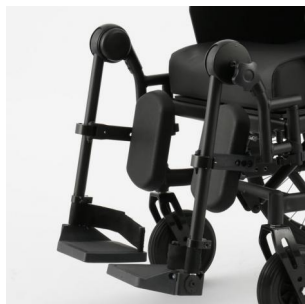

Regolazione dell'angolo delle pedane poggiapiedi

Allentare la vite di fissaggio con una chiave a brugola.

Ruotare la pedana all'angolo desiderato e stringere nuovamente saldamente la vite di fissaggio.

Regolazione dell'altezza dei poggiapiedi

Per regolare l'altezza dei poggiapiedi, allentare prima la manopola fino a poter muovere il tubo della piattaforma.

Regolarlo all'altezza desiderata e stringere nuovamente la manopola in modo saldo.

Ripetere la stessa operazione per l'altro poggiapiedi e verificare che sia ben fissato tirando il tubo della piattaforma.

Regolazione della larghezza dei poggiapiedi

Allentare le viti con una chiave a brugola.

Regolare i poggiapiedi alla larghezza adeguata.

Riavvitare saldamente le viti.

Utilizzo dei freni di bloccaggio – Modello autospinta con ruote posteriori da 24" (600 mm)

Il seggiolone dispone di un freno di bloccaggio su ciascun lato, che permette all'utente di parcheggiare in sicurezza.

I freni devono essere applicati solo quando il seggiolone è completamente fermo.

Per attivare il freno, spingere la leva in avanti fino a quando non si blocca e non ritorna indietro.

Sentirete un clic quando il freno è stato azionato.

Il seggiolone sarà ora stabile e si potrà passare su un'altra sedia o parcheggiarlo.

Per sbloccare i freni, basta tirare la leva indietro.



Utilizzo dei freni – Modello transito con ruote posteriori da 12" (300 mm)

Il seggiolone è dotato di una leva freno, su ciascun lato delle maniglie di spinta, che aziona i freni a tamburo sulle ruote posteriori.

I freni consentono all'accompagnatore di parcheggiare e/o frenare il seggiolone in modo controllato.

Per frenare progressivamente, premere contemporaneamente entrambe le leve dei freni fino a rallentare o fermarsi completamente.

La forza applicata sulle leve determinerà l'intensità della frenata.



Blocco freni (Parcheggio)

Per bloccare i freni e parcheggiare il seggiolone, premere le due leve dei freni fino a fine corsa e azionare i dispositivi di blocco di colore rosso

Per sbloccare i freni, premere le leve dei freni e rilasciare i dispositivi di blocco rosso su entrambi i lati.

Regolazione dei freni di bloccaggio (solo per modello autospinta con ruote da 24")

La distanza tra la ganaschia del freno e il copertone della ruota posteriore deve essere di 3-5 mm nel punto più stretto quando il freno è completamente aperto.

Per regolare la distanza, allentare la vite, posizionare il freno correttamente e stringere nuovamente la vite.

Controllare che la sedia non si muova quando i freni sono attivati



Sollevamento degli alzagambe

Gli alzagambe del seggiolone permettono di sollevare le gambe in diverse posizioni.

Girare la manopola a D con una mano mentre si tiene l'alzagambe con l'altra.

Una volta raggiunta l'angolazione desiderata, stringere saldamente la manopola per fissare l'alzagambe in posizione.

Ripetere l'operazione con l'altro poggiatesta.



Regolazione del poggia-polpacci

Ruotare il poggia-polpacci in avanti per chiuderlo o ruotarlo all'indietro per aprirlo.

Per regolare l'altezza, posizionare il poggia-polpacci nella posizione chiusa e farlo scorrere in una delle tre posizioni disponibili.

Per regolare la profondità rimuovere le viti con una chiave a brugola e riavvitarle saldamente nella posizione desiderata.

Regolazione della posizione della seduta

Spostare il bordo anteriore del sedile in avanti o all'indietro.

Stringere saldamente le manopole di regolazione.

Riposizionare il cuscino del sedile.

La distanza tra la parte posteriore del ginocchio/polpaccio e il cuscino dovrebbe essere la più breve possibile, ma senza contatto.

Montaggio del bracciolo

Allentare la manopola di regolazione situata sul lato inferiore del sedile della sedia.

Inserire il bracciolo nel telaio quadrato.

Nota: Per una regolazione precisa della larghezza tra i braccioli, è possibile utilizzare un metro a nastro.

Assicurarsi che entrambe le manopole di regolazione della larghezza siano ben serrate.

Regolazione della larghezza

Impostare la larghezza desiderata e stringere nuovamente saldamente la manopola di regolazione.

Eseguire la stessa operazione per l'altro bracciolo.

Regolazione dell'altezza

Per regolare l'altezza del bracciolo, premere semplicemente il pulsante e sollevarlo dal cuscinetto.

Una volta regolata l'altezza desiderata, stringere nuovamente saldamente la manopola.

Ripetere la stessa operazione per il bracciolo opposto.

Regolazione delle protezioni laterali imbottite

Le protezioni laterali imbottite possono essere regolate in altezza indipendentemente dal cuscinetto.

Allentare la manopola per regolarle alla posizione desiderata.



Attenzione! NON SOLLEVARE MAI il Seggiolone. afferrando i braccioli. Il Seggiolone deve essere sollevato afferrando il telaio.



Attenzione! Durante la regolazione dei braccioli accertarsi che lo spazio tra il bracciolo e la spondina proteggi-abiti nonché quello tra la spondina e la ruota sia compreso tra 1 e 2,5 cm.

Regolazione dell'angolo dello schienale

Utilizzare la leva destra per regolare l'angolazione dello schienale.

Premere la leva e posizionare lo schienale nell'angolazione desiderata utilizzando la maniglia di spinta.

Rilasciare la leva una volta scelta la posizione.



11. PULIZIA E DISINFEZIONE:

La pulizia rappresenta l'elemento e la condizione più importante per una corretta disinfezione chimica.

In generale, una regolare pulizia del Seggiolone in caso di utilizzo da parte di uno stesso paziente è sufficiente dal punto di vista igienico.

Una disinfezione del telaio del Seggiolone si rende necessaria solo in caso di contaminazione visibile con materiale infettivo o potenzialmente infettivo (sangue, feci, pus) oppure in presenza di una malattia infettiva su richiesta del medico.



Attenzione!

A ogni cambio di utilizzatore, il Seggiolone deve essere prima pulito e quindi disinfettato per strofinamento!

Programma di pulizia e disinfezione:

- Si raccomanda di utilizzare un metodo di disinfezione (umido) per strofinamento. Scegliere un detergente di tipo ecologico e non aggressivo. In generale, può essere utilizzato un detergente di uso domestico.
- Non utilizzare prodotti abrasivi, prodotti per la pulizia dell'acciaio inossidabile, tamponi detergenti o detergenti contenenti solventi, per evitare di danneggiare le superfici.
- In caso di contaminazione visibile con materiale infettivo o potenzialmente infettivo, il Seggiolone deve essere disinfettato per strofinamento utilizzando un disinfettante appositamente raccomandato per l'uso ospedaliero adatto alla superficie in questione.
- La disinfezione delle ruote è necessaria solo in caso di contaminazione visibile con materiale infettivo o potenzialmente infettivo.



NOTA: La disinfezione continua è necessaria solo in caso di pazienti portatori di agenti patogeni pluri resistenti all'interno di una struttura ospedaliera.

Addestramento degli utilizzatori e del personale specializzato

Per garantire una corretta procedura di pulizia e disinfezione, si consiglia di istruire in modo appropriato tutti gli utilizzatori e il personale specializzato coinvolti. Devono essere rispettati i seguenti punti:

- Assicurarsi che il Seggiolone non venga sporcato o contaminato durante il trasporto al domicilio del paziente.
- Il personale specializzato deve essere informato sulle particolarità che caratterizzano il procedimento di pulizia e disinfezione ed eseguire il trattamento necessario correttamente.
- Per questa operazione il personale specializzato deve essere provvisto di grembiuli e guanti monouso impermeabili.
- Per il trattamento devono essere utilizzati solo panni puliti che vanno poi portati al lavaggio.
- In seguito al trattamento e prima di abbandonare il posto, il personale specializzato deve disinfettarsi le mani, prima di partire per il luogo di utilizzo successivo.

Se il Seggiolone non viene riutilizzato immediatamente, deve essere conservato con una copertura che protegga da polvere e contaminazioni accidentali.

12. MANUTENZIONE:

- Sottoporre il dispositivo a un controllo da parte di personale specializzato almeno ogni 2 anni.
- **Tappezzeria:** I rivestimenti sono realizzati in nylon rinforzato e possono essere asportati dal telaio semplicemente svitandoli. I rivestimenti di sedile e schienale possono essere lavati con una spugna inumidita in una soluzione saponata. Pulire le parti metalliche con detersivo o sapone per auto e in caso di sporco ostinato utilizzare uno sgrassante.
- **Raggi:** Raggi allentati possono deformare le ruote. Se occorre regolare i raggi, rivolgersi a un centro di assistenza per articoli sanitari.
- **Corrimani:** Se i corrimani dovessero graffiarsi in misura tale da irritare la mano dell'utilizzatore, devono essere sostituiti.
- **Assi delle ruote:** Accertarsi di mantenere gli assi delle ruote puliti evitando l'accumularsi di sporcizia.
- **Freni:** L'effetto frenante dipende anche dallo stato delle gomme. La forte presenza di sporcizia può influenzare negativamente l'utilizzo dei freni. Controllare frequentemente il funzionamento dei freni.

In presenza di qualsiasi anomalia non utilizzare il Seggiolone e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.



Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del Seggiolone in caso di utilizzo di componenti non originali.

13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Il Seggiolone polifunzionale tende a sterzare da una parte:

- I fermi delle gomme non sono montati correttamente.
- L'utilizzatore non distribuisce equamente il carico sul Seggiolone.

Il Seggiolone polifunzionale avanza con difficoltà:

- I blocchi delle ruote posteriori non sono montati correttamente.
- Eliminare detriti e sporcizia dagli assi delle ruote anteriori.
- Carico eccessivo sulle ruote anteriori, regolare il baricentro del Seggiolone.

Il Seggiolone polifunzionale sterza con difficoltà:

- Accertarsi che i fermi delle forcelle anteriori non siano serrati eccessivamente.
- Eliminare detriti e sporcizia dagli assi delle ruote anteriori.
- I freni non funzionano bene:
 - Regolare la distanza fra gomma e freno.
 - Ispezionare gomme e battistrada. Eliminare eventuale sporcizia.

Il Seggiolone polifunzionale si apre e si chiude con difficoltà:

- Il rivestimento è troppo teso.
- Ingrassare e pulire i giunti della struttura a crociera sotto il sedile.

Il Seggiolone polifunzionale è instabile:

- Accertarsi che le viti e i comandi siano serrati correttamente.

Nota: L'utilizzatore può avvertire questi problemi anche a causa di una errata regolazione del dispositivo e/o di una tecnica di guida errata.

Se il problema persiste contattare un centro di assistenza autorizzato.

Per segnalare incidenti o reclami scrivere a: regulatory@movigroup.com

14. DOPO L'UTILIZZO:

Conservazione

A seguito di un lungo periodo di stoccaggio (più di quattro mesi), il dispositivo deve essere controllato secondo quanto indicato nel capitolo Manutenzione.

Riutilizzo

Il dispositivo è adatto per essere riutilizzato. Devono essere intraprese le seguenti azioni:

- Pulizia e disinfezione (si veda il capitolo Pulizia e Disinfezione del presente manuale)
- Ispezione e manutenzione (si veda capitolo Manutenzione del presente manuale)
- Il dispositivo deve essere adatto al nuovo utilizzatore in base alla documentazione di manutenzione (disponibile presso il fornitore Wimed autorizzato)

15. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

16. NOTE:

Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un tecnico competente, in quanto è necessaria una buona conoscenza del prodotto da ispezionare. Se tale ispezione dovesse rilevare qualsiasi difetto, malfunzionamento o segno di usura che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, il Seggiolone non deve assolutamente essere utilizzato fino alla riparazione.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Indirizzo del fabbricante

SOCIETÀ: Movi s.p.a

Indirizzo: Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Telefono: 02 509051 Fax: 02 5061048

E-mail: infotecnichewimed@movigroup.com

17. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityregulatory@pec.movigroup.com

18. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica, via Dione Cassio, 1520138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate,

previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al seguente recapito e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito di:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

Seggiolone Polifunzionale CONCEPT PRO Ruote da 400 mm
Ruote da 600 mm

Cod. 15584010 - 15584015

Cod. 15584510 - 15584515

Cod. 15585010 - 15585015

Rev.0 04/06/2025



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com