

MANUALE D'USO

ROLLATOR PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO "MAGIC"

Cod. 15615210




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. GENERALITA' pg.3
2. AVVERTENZE pg.4
3. DESCRIZIONE pg.5
4. MONTAGGIO pg.5
5. ISTRUZIONI PER L'USO pg.6
6. REGOLE FONDAMENTALI: pg.7
7. MANUTENZIONE pg.8
8. CARATTERISTICHE TECNICHE pg.9
9. ETICHETTATURA: pg.10
10. NOTE: pg.11
11. RECLAMI E INCIDENTI: pg.11
12. CERTIFICATO DI GARANZIA: pg.12

1. GENERALITA'

Vi ringraziamo per la vostra scelta.

Il rollator Magic, adatto per l'utilizzo all'interno dell'abitazione o all'esterno, è stato concepito per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza.

E' un Dispositivo Medico di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il presente Manuale d'Uso contiene avvertenze sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate.

Tutti gli utilizzatori del rollator Magic devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.



Attenzione!

Leggere attentamente il manuale d'uso al fine di evitare danni in fase di movimentazione del rollator .

Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.



NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.

2. AVVERTENZE

Verificare il carico massimo di utilizzo; tale carico non deve essere superato in nessun caso.



- In caso di utilizzo da parte di pazienti diversi, è necessario prendere opportune precauzioni per evitare il verificarsi di infezioni incrociate.
- In particolare, pulire sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo, prestando particolare cura alle parti che vengono in contatto con l'utilizzatore come ad esempio le impugnature.
- Non utilizzare il dispositivo su terreni sconnessi, con scarsa aderenza (selciati, sterrati, sabbia) o pendenze, anche di modesta entità.
- In caso di sosta, inserire i freni di stazionamento delle ruote posteriori.
- Prima di affidare il proprio sostegno al dispositivo, accertarsi che si trovi in una configurazione stabile, completamente aperto, con il sedile inserito correttamente.
- Controllare sempre lo stato d'integrità del dispositivo prima di utilizzarlo mediante accurata ispezione visiva. Se tale ispezione, dovesse rilevare una qualunque anomalia, il dispositivo non deve essere utilizzato.
- Il dispositivo dev' essere utilizzato nelle condizioni di fornitura e non può essere modificato in nessun modo.
- Durante l'operazione di apertura o di chiusura del dispositivo, l'inserimento e l'estrazione delle parti amovibili, o anche durante l'operazione di regolazione dell'altezza, fare molta attenzione alla posizione delle **dita per evitare il loro accidentale schiacciamento**.
- Il dispositivo è stato concepito come sostegno per utilizzatore, per questo non deve essere utilizzato come supporto per oggetti di alcun genere.
- Il dispositivo è progettato per essere utilizzato per un tempo di 60 mesi.
- Non disperdere nell'ambiente: smaltire insieme ai normali rifiuti solidi urbani.

3. DESCRIZIONE

Il rollator Magic è un dispositivo medico utilizzabile da chi necessita di un appoggio per stare in piedi o per camminare.

Esso è costituito da un telaio pieghevole in alluminio con sistema di apertura/chiusura.

E' provvisto di due impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni a pattino.

E' dotato di 4 ruote antiforo in ABS con anello in PU, di cui le anteriori piroettanti, mentre quelle posteriori frenanti.

Il dispositivo è richiudibile e può quindi essere riposto facilmente, nonchè trasportato in auto.

4. MONTAGGIO



- Piegare il rollator sollevando la seduta tramite l'apposita maniglia, situata al centro della seduta
- Una volta che il rollator è completamente chiuso afferrarlo per le maniglie di spinta e tirare entrambe queste maniglie indietro, verso il basso
- Per riaprire il rollator sollevare le maniglie di spinta in posizione verticale fino al loro blocco (si sentirà un "clack")
- Successivamente aprirlo premendo sui tubi di sostegno del telino della seduta fino a completa apertura (si sentirà un "clack" che indica che il sistema è arrivato a blocco)

5. ISTRUZIONI PER L'USO



• ISTRUZIONI PER L'USO

1. Per chiudere il dispositivo seguire quanto riportato a pagina 5
2. Nelle operazioni di chiusura / apertura, stare attenti allo schiacciamento delle dita

• UTILIZZO IN PIEDI:

Posizionarsi all'interno del perimetro, appoggiando le mani sulle apposite impugnature. Procedere compiendo piccoli passi e cercando di non sbilanciarsi lateralmente. In caso di sosta è necessario attivare i freni posti sulle impugnature stesse

• UTILIZZO SEDUTO

Verificare che il sedile sia posizionato stabilmente prima di sedersi, per evitare il rischio di cadute.

• REGOLAZIONI DELLE IMPUGNATURE

Le impugnature, possono essere regolate in altezza, secondo le necessità dell'utente.

Allentare i due morsetti a vite che vincolano i supporti regolabili, premere i pulsanti e spostare i supporti (traslando verticalmente) , fino a portarlo nella posizione desiderata, controllare che il pulsante fuoriesca nel foro corretto e serrare nuovamente a fondo i due morsetti.

Ripetere l'operazione per l'altro lato, regolando il supporto nella stessa posizione del primo.



• **COSA NON FARE:**

- Non utilizzare il dispositivo prima di aver letto il presente manuale
- Non utilizzare il dispositivo come seduta se esso non si trova su di una superficie perfettamente orizzontale.
- Non utilizzare il dispositivo su pendenze, neanche di modesta entità.
- Non utilizzare il dispositivo su terreni scivolosi o con scarsa aderenza (fango, sabbia ..)
- Non utilizzare il dispositivo come appoggio o per trasportare oggetti.
- Non superare il carico massimo di utilizzo.

6. REGOLE FONDAMENTALI:

- **CONTROLLARE SEMPRE** prima di ogni utilizzo lo stato e l'integrità del dispositivo.
- **CONTROLLARE SEMPRE** dopo un lungo periodo di inutilizzo il serraggio di tutti i bulloni.
- **CONTROLLARE SEMPRE** dopo un lungo periodo di inutilizzo lo stato dei componenti soggetti ad usura (le gomme e le imbottiture sottoascellari) .
- **QUALORA**, dopo il controllo, il rollator non risulti integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o ad un centro di assistenza specializzato
- **LAVARE SEMPRE** il dispositivo dopo ogni passaggio ad un altro utente, per evitare infezioni incrociate

7. MANUTENZIONE

Pulire il dispositivo dopo ogni passaggio a un utente diverso, detergendolo con sapone neutro e acqua tiepida.

- Non utilizzare solventi, sostanze corrosive o abrasive.
- Asciugare con un panno morbido e asciutto.
- Il dispositivo deve essere ispezionato accuratamente almeno una volta all'anno.
- Tale ispezione deve comprendere un attento esame visivo di tutte le componenti del dispositivo per accertarne l'integrità, una prova di corretto funzionamento dei vari meccanismi e il controllo di tutte le regolazioni e tutti i serraggi, nonché eventuali interventi di ripristino laddove ce ne sia bisogno.



Nota: Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un tecnico competente, in quanto è necessaria una buona conoscenza dell'oggetto da ispezionare.

Se tale ispezione dovesse rilevare un qualsiasi difetto o segno di usura o guasto, che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, esso deve rimanere, fuori servizio, fino alla riparazione,

Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del Rollator in caso di utilizzo di componentistiche non originali.

8. CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO:	ROLLATOR MAGIC Cod. 15615210
Peso:	8 Kg
Portata:	136 Kg
Altezza manopole regolabile:	83 - 95 cm
Larghezza:	66 cm
Profondità:	67 cm
Altezza seduta:	54 cm
Dimensione seduta:	25 x 44 cm

ROLLATOR PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO "MAGIC"

9. ETICHETTATURA:

ROLLATOR PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO "MAGIC"
"MAGIC" ALUMINUM FOLDING ROLLATOR



15615210



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
 Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
 MADE IN CHINA



XXXXXXXXXX



136 kg



	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA

ROLLATOR PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO "MAGIC"

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

10. NOTE:



Nota bene:

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA — Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 — 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

11. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

12. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dagli articoli. 128-135 del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 2005) .

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

ROLLATOR PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO "MAGIC"

Cod. 15615210

Rev.1 06/06/2024



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com