

# MANUALE D'USO

## ROLLY-HD

ROLLATOR BARIATRICO IN ALLUMINIO

Cod. 15605900



  
**WIMED**  
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

# INDICE:

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| <b>1. GENERALITA':</b>                      | pg.3  |
| <b>2. AVVERTENZE:</b>                       | pg.3  |
| <b>3. DESCRIZIONE:</b>                      | pg.5  |
| <b>4. MONTAGGIO:</b>                        | pg.7  |
| <b>5. ISTRUZIONI PER L'USO:</b>             | pg.8  |
| <b>6. REGOLE FONDAMENTALI:</b>              | pg.12 |
| <b>7. MANUTENZIONE:</b>                     | pg.13 |
| <b>8. CARATTERISTICHE TECNICHE:</b>         | pg.14 |
| <b>9. CORRISPONDENZA CODICI:</b>            | pg.14 |
| <b>10. NOTE:</b>                            | pg.14 |
| <b>11. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:</b> | pg.15 |
| <b>12. RECLAMI E INCIDENTI:</b>             | pg.17 |
| <b>13. CERTIFICATO DI GARANZIA:</b>         | pg.18 |

## 1. GENERALITA':

Vi ringraziamo per la vostra scelta.

Il ROLLY-HD pieghevole è stato concepito per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza ed è adatta per l'utilizzo in esterni ed interni.

Il Rollator è realizzato in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.

È classificato come dispositivo medico di classe I.

Il presente Manuale d'Uso contiene avvertenze sulla sicurezza, che devono essere assolutamente rispettate.

Tutti gli utilizzatori del ROLLY-HD, devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.



Attenzione!



Leggere attentamente il manuale d'uso al fine di evitare danni in fase di movimentazione del rollator.

**Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per i danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.**

## 2. AVVERTENZE:

- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.
- Il carico massimo di utilizzo sicuro è di 225 Kg. Tale carico, non deve essere superato in nessun caso.



- In caso di utilizzo da parte di pazienti diversi, è necessario prendere opportune precauzioni per evitare il verificarsi di infezioni incrociate
- In particolare, pulire sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo, prestando particolare cura alle parti che vengono in contatto con l'utilizzatore come ad esempio le impugnature.
- Non utilizzare il dispositivo su terreni sconnessi, con scarsa aderenza (selciati, sterrati, sabbia) o pendenze, anche di modesta entità.
- In caso di sosta, inserire i freni di stazionamento delle ruote posteriori.
- Prima di affidare il proprio sostegno al dispositivo, accertarsi che si trovi in una configurazione stabile, completamente aperto, con il sedile inserito correttamente.
- Controllare sempre lo stato d'integrità del dispositivo prima di utilizzarlo mediante accurata ispezione visiva. Se tale ispezione, dovesse rilevare una qualunque anomalia, il dispositivo non deve essere utilizzato.
- Il dispositivo dev'essere utilizzato nelle condizioni di fornitura e non può essere modificato in nessun modo.
- Durante l'operazione di apertura o di chiusura del dispositivo, l'inserimento e l'estrazioni delle parti amovibili, o anche durante l'operazione di regolazione dell'altezza delle impugnature, fare molta attenzione alla posizione delle **dita per evitare il loro accidentale schiacciamento**.
- Il dispositivo è stato concepito come sostegno per utilizzatore, per questo non deve essere utilizzato come supporto per oggetti di alcun genere.
- Il dispositivo è progettato per essere utilizzato a tempo indeterminato, sempre che rimanga integro e non mostri soprattutto nei suoi componenti usurabili, segni di consumo eccessivo.
- Non disperdere il dispositivo nell'ambiente ma smaltire in base alle normative nazionali e/o locali.
- **NON UTILIZZARE MAI QUESTO DISPOSITIVO COME CARROZZINA DI TRASPORTO ALL'INTERNO DI UN VEICOLO IN MOVIMENTO.**

### 3. DESCRIZIONE:


Il rollator ROLLY-HD è un dispositivo medico, utilizzabile da chi necessita di appoggio per stare in piedi o per camminare. Esso è costituito da un telaio pieghevole in alluminio con sistema di apertura/chiusura.

È provvisto di due impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni a pattino.

È dotato di 4 ruote antiforo in ABS con anello in PU di diametro 18,5 cm, di cui le anteriori piroettanti, mentre quelle posteriori frenanti.

Il dispositivo è richiudibile e può quindi essere riposto facilmente, nonché trasportato in auto.

Tutte le immagini presenti nel manuale sono a scopo illustrativo

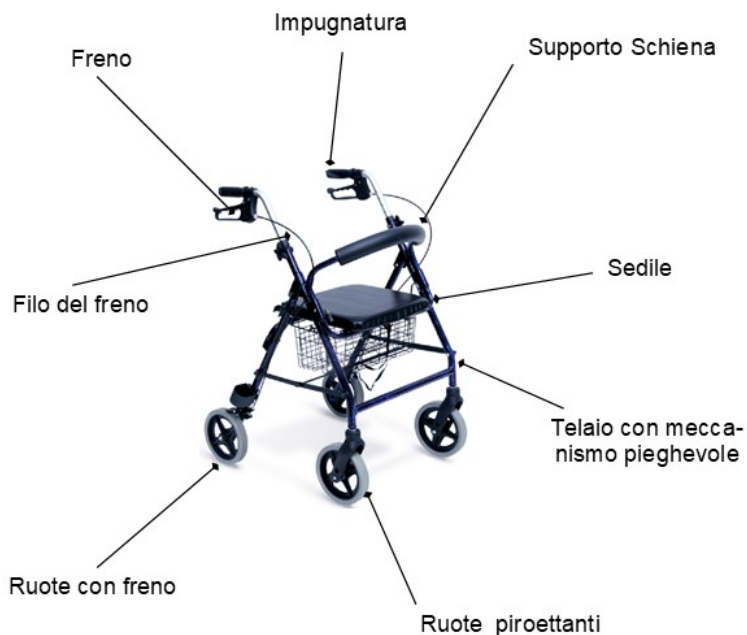

Il rollator viene fornito quasi completamente montato.

1. Rimuovere le viti e i dadi a stella dalla struttura.
2. Inserire le impugnature nei tubi di guida della struttura.
3. Posizionare le impugnature all'altezza desiderata.
4. La regolazione è corretta quando le impugnature si trovano all'altezza dei polsi.
5. Fissare la regolazione desiderata inserendo le viti e serrando i dadi a stella.
6. Verificare che le impugnature si trovino alla stessa altezza.



## 4. MONTAGGIO:



### Attenzione!

**Durante l'operazione di montaggio del dispositivo prestare estrema attenzione alla posizione delle dita per evitare il loro accidentale schiacciamento.**

### Montaggio del cestino:

Montare il cestino mediante gli appositi ganci.  
Non trasportare carichi troppo pesanti.  
Ricordare che carichi eccessivi aumentano il rischio di ribaltamento.



### Montaggio sostegno lombare

Il sostegno deve essere montato solamente quando il rollator è in posizione sicura e con i freni attivati.  
Prendere il sostegno lombare e premere con gli indici sui fermi a destra e sinistra.  
Inserire il sostegno nelle guide.  
Fare attenzione a non piegarlo.  
Per rimuovere il sostegno lombare ripetere le operazioni in senso inverso.



## 5. ISTRUZIONI PER L'USO:

### Regolazione dei freni

L'intensità della frenata può essere regolata su ogni freno individualmente.

A questo scopo, ruotare le ghiera di regolazione poste sul cavo flessibile per allontanarle (frenata dura) o avvicinarle (frenata morbida) .

Quando i freni non sono attivati, i pattini non devono toccare le ruote.



### Ripiegare il rollator

Per ripiegare il rollator, occorre sbloccarlo tirando verso l'esterno il pulsante rosso, posizionato sul tubo orizzontale del telaio.

Sollevare contemporaneamente il sedile e tirare verso l'alto la cinghia che si trova all'interno del cestello per iniziare il ripiegamento.

Continuare a ripiegare il rollator facendo pressione sul telaio finché non sia diventato compatto. Se necessario, rimuovere lo schienale.

## Meccanismo di bloccaggio

Attivare sempre simultaneamente il meccanismo di bloccaggio delle due rotelle.

- Quando l'utilizzatore si trova in posizione eretta, è necessario tirare verso l'alto la manopola di bloccaggio per mantenere in posizione le rotelle posteriori **(Fig. 1)**.
- Bloccaggio temporaneo delle rotelle: con il palmo delle mani, premere verso il basso entrambe le manopole di bloccaggio fino a sentire un "clic" che indica il blocco delle rotelle **(Fig. 2)**.
- Sbloccaggio delle rotelle: con il palmo delle mani, premere verso l'alto le manopole di bloccaggio e riportarle alla posizione iniziale **(Fig. 3)**.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

## Controllo ruote

Verificare che le ruote frenanti, siano libere in esecuzione

Per il controllo, sollevare il deambulatore, e attivare il freno

Se la ruota gira regolarmente, il freno è stato regolato correttamente, se la ruota è frenata, bisognerà allentare il freno, ripetendo l'operazione.



**Nelle suddetta operazione, stare attenti a non schiacciarsi le dita.**



**Attenzione!**

**Verificare il meccanismo di bloccaggio prima dell'utilizzo.**

Se le rotelle sono state bloccate (consultare le figure 1,2,3 per il bloccaggio e lo sbloccaggio delle rotelle) , il blocchetto dovrebbe impedire alle rotelle posteriori di girare liberamente. Se le rotelle ruotano nonostante siano state bloccate, rivolgersi al rivenditore autorizzato per la regolazione del dispositivo. Le rotelle dovrebbero girare liberamente quando il meccanismo di bloccaggio è disattivato.

### Utilizzo in piedi:

Posizionarsi all'interno del perimetro, appoggiando le mani sulle apposite impugnature.

Procedere compiendo piccoli passi e cercando di non sbilanciarsi lateralmente. In caso di sosta è necessario attivare i freni posizionati sulle impugnature stesse.

### Utilizzo seduto:

Verificare che il sedile sia posizionato stabilmente prima di sedersi, per evitare il rischio di cadute.

### Regolazione delle impugnature

Le impugnature, possono essere regolate in altezza, secondo le necessità dell'utente.

Allentare i due morsetti a vite che vincolano i supporti regolabili, premere i pulsanti e spostare i supporti (traslando verticalmente - **Fig A**), fino a portarlo nella posizione desiderata, controllare che il pulsante fuoriesca nel foro corretto e serrare nuovamente a fondo i due morsetti.

Ripetere l'operazione dall'altro lato regolando il supporto nella stessa posizione del primo.

**Fig. A**





• **Cosa non fare:**

- Non utilizzare il dispositivo prima di aver letto il presente manuale.
- Non utilizzare il dispositivo come seduta se esso non si trova su di una superficie perfettamente orizzontale.
- Non utilizzare il dispositivo su pendenze, neanche di modesta entità.
- Non utilizzare il dispositivo su terreni scivolosi o con scarsa aderenza (fango, sabbia ..) .
- Non utilizzare il dispositivo come appoggio di oggetti o per trasportare oggetti.
- Non superare il carico massimo di utilizzo.

## 6. REGOLE FONDAMENTALI:

- CONTROLLARE SEMPRE prima di ogni utilizzo lo stato e l'integrità del dispositivo.
- CONTROLLARE SEMPRE dopo un lungo periodo di inutilizzo il serraggio di tutti i bulloni.
- CONTROLLARE SEMPRE dopo un lungo periodo di inutilizzo lo stato dei componenti soggetti a usura (le gomme e le maniglie con imbottitura) .
- QUALORA, dopo il controllo, il rollator risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o ad un centro di assistenza specializzato
- LAVARE SEMPRE il dispositivo dopo ogni utenza, per evitare infezioni incrociate .

## 7. MANUTENZIONE:

- Pulire il dispositivo a ogni cambio di utilizzatore detergendolo con una soluzione saponata tiepida.
- Non utilizzare solventi, sostanze corrosive o abrasive.
- Asciugare con un panno morbido.
- Il dispositivo deve essere ispezionato accuratamente almeno una volta all'anno.
- Tale ispezione deve comprendere un attento esame visivo di tutte le componenti del dispositivo per accertarne l'integrità, una prova di corretto funzionamento dei vari meccanismi e il controllo di tutte le regolazioni e tutti i serraggi, nonché eventuali interventi di ripristino là dove ce ne sia bisogno.



**Nota:** Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un tecnico competente, in quanto è necessaria una buona conoscenza dell'oggetto da ispezionare. Se tale ispezione dovesse rilevare qualsiasi tipo di difetto, segno di usura o guasto, che potrebbero in qualche modo compromettere la sicurezza, il dispositivo deve rimanere fuori servizio fino alla riparazione.

**Movi Spa—Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del Rollator in caso di utilizzo di componentistiche non originali.**

## 8. CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Peso:                        | 9,2 Kg        |
| Portata:                     | 225 Kg        |
| Dimensioni sedile:           | 50x34 cm      |
| Altezza manopole regolabile: | da 85 a 98 cm |
| Ingombro massimo:            | 73 cm         |
| Profondità:                  | 70 cm         |
| Altezza seduta da terra:     | 57 cm         |

## 9. CORRISPONDENZA CODICI:

**Il presente manuale fa riferimento al seguente rollator :**

- Cod 15605900 - ROLLATOR BARIATRICO IN ALLUMINIO ROLLY-HD

## 10. NOTE:



**Nota bene:** Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

**Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:**

Movi SpA - Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

## 11. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

**ROLLATOR BARIATRICO IN ALLUMINIO ROLLY-HD**  
**ALUMINIUM BARIATRIC ROLLATOR ROLLY-HD**

LOT XXXXXXXXX

REF 15605900 MD

20XX 

225 kg 

 **MOVI S.p.A.**  
 Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy  
 MADE IN CHINA



|                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | FABBRICANTE                           | EC REP                                                                              | RAPPRESENTANTE<br>AUTORIZZATO NELLA COMUNITA<br>EUROPEA                                                                            |
|    | DATA DI FABBRICAZIONE                 | LOT                                                                                 | LOTTO                                                                                                                              |
| REF                                                                                 | CODICE PRODOTTO                       | SN                                                                                  | NUMERO DI SERIE                                                                                                                    |
|    | CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER<br>L'USO |    | ATTENZIONE! CONSULTARE LE<br>ISTRUZIONI PER L'USO PER<br>IMPORTANTI INFORMAZIONI DI<br>SICUREZZA QUALI AVVERTENZE<br>E PRECAUZIONI |
|  | DATA DI SCADENZA                      |  | NON RIUTILIZZARE                                                                                                                   |
|  | FRAGILE, MANEGGIARE CON<br>CURA       |  | MANTENERE ASCIUTTO                                                                                                                 |
| MD                                                                                  | DISPOSITIVO MEDICO                    | CE                                                                                  | PRODOTTO CONFORME ALLE<br>DIRETTIVE/REGOLAMENTI<br>EUROPEI DI SETTORE                                                              |
|  | QUESTO LATO VERSO L'ALTO              |  | PESO MASSIMO DEL PAZIENTE                                                                                                          |
|  | CARICO LAVORO IN SICUREZZA            | ~                                                                                   | CORRENTE ALTERNATA                                                                                                                 |

## ROLLY-HD

|                                                                                   |                            |                                                                                   |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | APPARECCHIO DI CLASSE II   |  | PARTE APPLICATA DI TIPO B                                               |
|  | PARTE APPLICATA DI TIPO BF |  | RACCOLTA SEPARATA DELLE<br>APPARECCHIATURE ELETTRICHE<br>E ELETTRONICHE |
|  | PORTATA                    |                                                                                   |                                                                         |

## 12. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:  
**[regulatory@movigroup.com](mailto:regulatory@movigroup.com)**

Per segnalare un incidente inviare una mail a:  
**[qualityregulatory@pec.movigroup.com](mailto:qualityregulatory@pec.movigroup.com)**

### 13. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dagli articoli. 128-135 del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 2005) .

**MOVI S.p.A** divisione Wimed - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano  
[www.movigroup.com](http://www.movigroup.com)



# MANUALE D'USO ORIGINALE

ROLLY-HD  
ROLLATOR BARIATRICO IN ALLUMINIO  
Cod. 15605900  
Rev.0 10/02/2023



# WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

**Movi SpA**

Via Dione Cassio 15, Milano  
[www.movigroup.com](http://www.movigroup.com)  
[infotecnichewimed@movigroup.com](mailto:infotecnichewimed@movigroup.com)