

MANUALE D'USO

Ausili antidecubito in fibra cava

Cod. 94009090 Materasso / Cod. 94004039 Rivestimento per carrozzina

Cod. 94004040 Ginocchiera / Cod. 94004041 Gomitiera

Cod. 94004042 Talloniera / Cod. 94004044 Talloniera small

Cod. 94004043 Cuscino senza foro

Cod. 94004047 Cuscino con foro




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI: pg.3
2. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI: pg.4
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: pg.6
4. CARATTERISTICHE TECNICHE: pg.7
5. MANUTENZIONE E PULIZIA: pg.9
6. NOTE: pg.10
7. SMALTIMENTO: pg.11
8. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI: pg.12
9. RECLAMI E INCIDENTI: pg.13
10. CERTIFICATO DI GARANZIA: pg.14

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarla per l'acquisto degli Ausili antidecubito in fibra cava e per la fiducia accordata ai nostri prodotti. Tutti i nostri prodotti sono concepiti per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza.

I cuscini in fibra cava, sono classificati come dispositivo medico di classe I, sono realizzati in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il Fabbrikante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbrikante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

2. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

I cuscini in fibra cava di Movi sono dispositivi medici. Assicurarsi, pertanto, di leggere l'intero manuale. Utilizzare i prodotti unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Tenere lontano da fonti di calore, umidità e contenitori di liquidi.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

Il simbolo di sicurezza non sostituisce il testo di avvertenza a cui si riferisce. Leggere sempre le avvertenze sulla sicurezza e seguirle attentamente!



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica l'obbligo di leggere le istruzioni prima dell'utilizzo del dispositivo



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.

- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.
- Per motivi igienici, l'utilizzo del dispositivo per la prevenzione delle lesioni da pressione dovrebbe essere riservato a un unico paziente.
- In caso di incontinenza, procedere alla pulizia della fodera ed eventualmente del cuscino.
- L'utilizzo del cuscino per una parte del corpo diversa da quella prevista (regione glutea e sacrale) è assolutamente sconsigliato.
- Non esporre alla luce diretta del sole.
- Conservare e utilizzare il dispositivo lontano da fiamme libere e da fonti di calore.
- Non bucare il prodotto.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare sempre lo stato d'integrità del dispositivo prima di utilizzarlo mediante accurata ispezione visiva. Se tale ispezione, dovesse rilevare una qualunque anomalia, il dispositivo non deve essere utilizzato.
- I cuscini agli angoli sono provvisti di lacci di fissaggio, dopo il definitivo posizionamento eliminare la parte in eccesso.
- Verificare periodicamente la fodera non risulti strappata o abbia cedimenti.
- Fate attenzione a NON stringere le cinghie in velcro sino alla compressione degli arti per non ostruire il passaggio di sangue.
- I dispositivi sono confezionati in doppio involucro, tenere lontano dai bambini.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Ausili antidecubito in fibra cava siliconata con fodera esterna

La prima misura preventiva dalle lesioni da pressione consiste nel cambiare i punti di appoggio del corpo sul materasso, in media ogni tre ore. Quando il corpo si trova in posizione seduta su un cuscino, sarebbe opportuno sollevarsi regolarmente ogni volta che ciò è possibile per poter limitare la compressione troppo prolungata dei vasi rispetto alle protuberanze ossee e per permettere l'irrorazione dei tessuti.

Gli ausili antidecubito in fibra cava sono costituiti da materiali atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni d'appoggio, limitando i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta e valutati a Basso Rischio.

Sono idonei all'utilizzo su carrozzine, sedie o letti.

Assumono la proprietà principale del materiale di imbottitura, la fibra cava siliconata, la resilienza, la capacità cioè di ritornare alla forma originaria anche dopo forte sollecitazione.

Un manufatto realizzato con questo materiale risulta molto morbido ma allo stesso tempo garantisce portanza ed elasticità.

Gli ausili realizzati con una federa in puro cotone 100% e riempiti con questa particolare fibra, isolano dal caldo e dal freddo poiché la fibra cava ha anche un elevato potere di coibentazione termica.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

TALLONIERA SMALL (COPPIA)

Protezioni per il tallone, soffici e traspirante. Due lacci in velcro garantiscono una perfetta adattabilità. Non stringere esageratamente le cinghie.

Cod. 94004044



TALLONIERA

Protezione del tallone. Serrare i lacci in velcro sino a raggiungere una perfetta adattabilità. Fare attenzione a non stringere esageratamente le cinghie.

Cod. 94004042



GINOCCHIERA

Per la protezione del ginocchio. Non stringere esageratamente le cinghie.

Cod. 94004040



GOMITIERA

Per la protezione del gomito ed altre parti del corpo. Non stringere esageratamente le cinghie.

Cod. 94004041



RIVESTIMENTO UNIVERSALE PER CARROZZINA

Utilizzare come un normale cuscino da seduta. Assicurare alla sedia con i laccetti.

Cod. 94004039



CUSCINO SENZA FORO

Utilizzare come un normale cuscino da seduta.
Posizionare al centro della sedia e legare i laccetti
Cod. 94004043



CUSCINO CON FORO

Utilizzare come un normale cuscino da seduta.
Posizionare al centro della sedia e legare i laccetti.
Cod. 94004047



MATERASSO

Idoneo all'utilizzo come sovrामaterasso su letti normali. Composto da 12 elementi fissi, spessore 20 cm.
Cod. 94009090



5. MANUTENZIONE E PULIZIA:

- Lavabile in acqua calda a massima temperatura di 60°C ad azione meccanica ridotta
- Risciacquo a temperatura gradualmente ridotta (immettere acqua fredda)
- Lavare a secco con tutti i solventi tranne tricloroetilene o trielina
- Centrifugazione ridotta
- Sterilizzabile a raggi ultravioletti
- Non stirare
- Non asciugare a macchina

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.

6. NOTE:

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.



Movi S.P.A - declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un utilizzo improprio del dispositivo o da un utilizzo diverso da quanto indicato nel presente manuale.

Indirizzo del fabbricante

SOCIETÀ: Movi s.p.a

Indirizzo: Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Telefono: 02 509051 Fax : 02 5061048

E-mail: infotecnichewimed@movigroup.com

7. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base al D.Lgs 151/2005.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

8. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

RIVESTIMENTO UNIVERSALE PER CARROZZINA
UNIVERSAL WHEELCHAIR COVER

LOT 22XXXXXXX

REF 94004039

MD

20xx 

 **MOVI S.p.A. - Divisione Wimed**
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN ITALY



	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

9. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

10. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica, via Dione Cassio, 1520138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al seguente recapito e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito di:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

Movi S.p.A.- Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

Ausili antidecubito in fibra cava

Cod. 94009090 Materasso / Cod. 94004039 Rivestimento per
carrozzina

Cod. 94004040 Ginocchiera / Cod. 94004041 Gomitiera

Cod. 94004042 Talloniera / Cod. 94004044 Talloniera smart

Cod. 94004043 Cuscino senza foro

Cod. 94004047 Cuscino con foro

Rev.3 12/09/2025



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com