

MANUALE D'USO

Seggiolone Polifunzionale

CONCEPT II

Ruote da 400 mm

Ruote da 600 mm

Cod. 15544010 - 15544510

Cod. 15545010 - 15544015

Cod. 15544515 - 15545015




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI



INDICE:

1. INTRODUZIONE: pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO: pg.4
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI: pg.6
4. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO: pg.10
5. TECNICHE DI GUIDA: pg.11
6. TECNICHE DI TRASFERIMENTO: pg.14
7. CLASSIFICAZIONE - STANDARD: pg.16
8. ETICHETTATURA: pg.17
9. CARATTERISTICHE TECNICHE: pg.19
10. REGOLAZIONI: pg.21
11. ACCESSORI: pg.30
12. PULIZIA E DISINFEZIONE: pg.31
13. MANUTENZIONE: pg.33
14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: pg.34
15. DOPO L'UTILIZZO: pg.35
16. SMALTIMENTO: pg.36
17. NOTA: pg.36
18. RECLAMI E INCIDENTI: pg.37
19. CERTIFICATO DI GARANZIA: pg.37

1. INTRODUZIONE:

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarla per il suo acquisto e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Il Seggiolone Polifunzionale CONCEPT II, classificato come dispositivo medico di classe I, è conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il presente manuale d'uso contiene avvertenze sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate.

Tutti gli utilizzatori che lavorano con il Seggiolone CONCEPT II devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.

Il Fabbricante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbricante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

ELENCO CODICI:

Il presente manuale fa riferimento ai modelli e codici indicati al capitolo "Caratteristiche tecniche".

2. DESTINAZIONE D'USO:

Il Seggiolone CONCEPT II è stato concepito per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza ed è adatto per l'utilizzo in ambienti esterni e interni.

Il Seggiolone CONCEPT II deve essere utilizzato unicamente con l'aiuto di un assistente. Le tecniche di guida consigliate sono rivolte solo a persone esperte. Il Seggiolone CONCEPT II è indicato per persone adulte e/o anziane con ridotta capacità motoria in grado di compiere percorsi interni in spazi ridotti e percorsi esterni in autonomia e che, trascorrendo periodi prolungati in posizione seduta, necessitano di poter variare la postura del tronco. Il telaio è adatto ad accogliere sistemi posturali complessi.

Quando viene utilizzato senza accompagnatore, il Seggiolone CONCEPT II può essere impiegato esclusivamente da parte di persone che siano fisicamente e cognitivamente in grado di effettuarne un utilizzo in totale sicurezza (ad esempio, per spingere il proprio seggiolone, sterzare e frenare). Il seggiolone deve essere utilizzato solo a livello del suolo e su superfici facilmente accessibili anche all'interno di edifici.



Prima di utilizzare il dispositivo:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni al dispositivo a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente il dispositivo.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (gomme, freni, rivestimenti di seduta e schienale, poggiatesta, ecc.) e del serraggio della viteria.
- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo

improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.

- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano il dispositivo devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

I Seggioloni Polifunzionali CONCEPT II di Movi sono dispositivi medici. Assicurarsi, pertanto, di leggere l'intero manuale. Utilizzare i prodotti unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

Il simbolo di sicurezza non sostituisce il testo di avvertenza a cui si riferisce. Leggere sempre le avvertenze sulla sicurezza e seguirle attentamente!



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica l'obbligo di leggere le istruzioni prima dell'utilizzo del dispositivo



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale del seggiolone e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.

- Qualora il seggiolone risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.



- Evitare di utilizzare il dispositivo in condizioni di scarsa visibilità o illuminazione, oppure provvedere a rendersi chiaramente visibili tramite catarifrangenti.
- Sia per la sicurezza dell'utilizzatore che per quella del dispositivo, non usare il dispositivo su terreni con scarsa aderenza, come sabbia, fango e neve.
- ATTENZIONE: non modificare in alcun modo questo dispositivo.
- ATTENZIONE: non sollevare mai il Seggiolone afferrando le pedane ma utilizzare invece il telaio metallico.
- ATTENZIONE: non salire mai sui poggiatesta per evitare il rischio di ribaltamento.
- ATTENZIONE: non modificare questo dispositivo senza l'autorizzazione del fabbricante.
- ATTENZIONE: prestare attenzione per evitare lo schiacciamento delle mani quando si compiono le operazioni di apertura e chiusura del seggiolone.
- ATTENZIONE: non utilizzare mai scale mobili, neanche con l'aiuto dell'assistente.

Avvertenze sulla sicurezza per OPERATORI SANITARI

- Prima del primo utilizzo del dispositivo, informare l'utilizzatore riguardo a come utilizzare in sicurezza il dispositivo, seguendo attentamente le istruzioni riportate in questo manuale che deve essere fornito insieme a esso. Informare tutti gli utilizzatori su ogni possibile pericolo a causa di un utilizzo errato.
- I seggioloni sono classificati come dispositivi medici di Classe I. È necessario assolvere i propri doveri in conformità alle normative vigenti in materia di installazione e utilizzo dei dispositivi medici, al fine di assicurare un utilizzo duraturo e in sicurezza di questo prodotto senza alcun rischio per pazienti, utilizzatori e terze parti. In caso di utilizzo prolungato del dispositivo, è necessario eseguire controlli a cadenza regolare (si suggerisce almeno una volta all'anno), per verificarne le funzionalità e individuare eventuali danni visibili.
- Assicurarsi che questo dispositivo sia utilizzato esclusivamente da personale qualificato.
- Assicurarsi che eventuali sostituti del personale siano sufficientemente istruiti sul corretto utilizzo di questo dispositivo.
- Assicurarsi che il personale rispetti le avvertenze sulla sicurezza.

Avvertenze sulla sicurezza per l'UTILIZZATORE

- Leggere il presente manuale prima dell'utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato e l'assenza di difetti del dispositivo.
- Prima di affrontare ostacoli come scalini o dossi, assicurarsi che non si creino interferenze con il dispositivo.
- Evitare, quando possibile, di attraversare pozze d'acqua. Il dispositivo è resistente all'acqua, ma in caso venga bagnato è consigliabile provvedere all'asciugatura nel più breve tempo possibile.
- Il Seggiolone non deve essere considerato un sedile da usare all'interno di un autoveicolo.
- Non inclinare il Seggiolone oltre il 10% senza assistenza.
- Prima di inclinarsi in avanti o di alzarsi del Seggiolone, assicurarsi che le

ruote anteriori siano dritte e quelle posteriori siano bloccate.

- Evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale, mantenendo sempre il baricentro entro il perimetro del Seggiolone stesso.
- Verificare il corretto montaggio delle parti removibili.

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo dei Seggioloni Polifunzionali MOVI non è indicato a:

- Bambini di età inferiore ai 15 anni (ad esclusione dei modelli pediatrici)
- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso
- I seggioloni non devono essere utilizzati da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.

COMPLICAZIONI


Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

Qualora vi fosse il rischio di sviluppare piaghe da decubito, munirsi di strumenti di prevenzione adeguati a seguito di consulto con il medico curante.

4. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO:

Automobile privata/Taxi

- Rimuovere le pedane.
- Sfilare i braccioli.
- Rimuovere l'imbottitura di schienale e sedile.
- Rimuovere il perno con anello (fissaggio del pistone).
- Abbattere lo schienale.


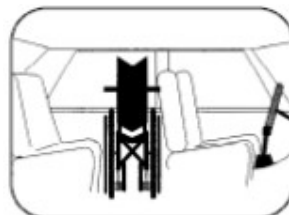


Minibus / Autobus / Mezzi pubblici:

L'utilizzatore del Seggiolone deve sedere su uno dei sedili del minibus, mentre il Seggiolone deve essere bloccato in modo che non possa ribaltarsi o scivolare.

Se il minibus è dotato di apposito spazio per utilizzatori di carrozzine, adottare le seguenti precauzioni:

- Per la sicurezza dell'utilizzatore, lo spazio deve essere dotato di un montante con cintura di sicurezza a tre punti e poggiatesta (non è sufficiente lo schienale del Seggiolone).
- Il Seggiolone deve essere fissato per le fiancate e non per le ruote. Le cinghie di fissaggio devono avere un'inclinazione compresa fra 0° e 30°.
- La cintura **(accessorio opzionale)** del Seggiolone non è sufficiente per impedire che l'utilizzatore venga proiettato in avanti in caso di brusca frenata.

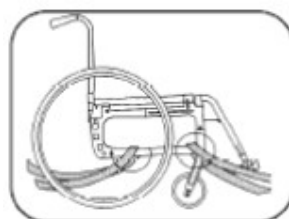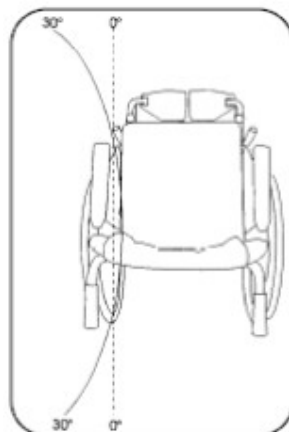

5. TECNICHE DI GUIDA:



Attenzione!

Le tecniche di guida elencate qui di seguito sono consigliate a utilizzatori esperti: assicurarsi delle proprie capacità e dei propri limiti.

Affrontare marciapiedi e dislivelli

Il Seggiolone polifunzionale CONCEPT rende possibile salire e scendere marciapiedi o piccoli ostacoli con l'aiuto di un assistente.

Assistente - Salita in avanti:

Portare il Seggiolone in corrispondenza del bordo del marciapiede o del gradino.

Inclinare il Seggiolone, agendo eventualmente sul telaio posteriore, in modo che le ruote anteriori siano sollevate da terra, e spingere il Seggiolone sopra l'ostacolo.

Continuare a spingere finché anche le ruote posteriori non siano salite sopra l'ostacolo.



Assistente - Salita all'indietro:

Arretrare fino a portare il Seggiolone in corrispondenza del bordo del marciapiede o del gradino. Inclinare il Seggiolone, agendo eventualmente sul telaio posteriore, in modo che le ruote anteriori siano sollevate da terra, e tirare il Seggiolone sopra l'ostacolo. Continuare a tirare finché anche le ruote anteriori non siano salite sopra l'ostacolo.



Assistente - Discesa in avanti:

Inclinare il Seggiolone, agendo eventualmente sul telaio posteriore in modo che le ruote anteriori siano sollevate da terra. Scendere lentamente dal marciapiede o dal gradino, quindi abbassare le ruote a terra.



Assistente - Discesa all'indietro:

Verificare che gli anti-ribaltamento siano alzati, inclinare il seggiolone all'indietro sullo scalino e condurre la carrozzina, con attenzione, giù dallo scalino spostandola all'indietro sulle ruote posteriori finché le ruote anteriori non sono lontane dallo scalino. Appoggiare le ruote anteriori a terra. Riposizionare gli anti-ribaltamento verso il basso.



Tecniche di guida sulle scale



Attenzione! Si consiglia agli assistenti di utilizzare la forza delle gambe, senza piegare o fare leva sulla schiena.

Assistente - Salita all'indietro:

- Fare arretrare il Seggiolone fino al primo scalino.
- Inclinare il Seggiolone sulle ruote posteriori, aiutandosi eventualmente con il pedale di sollevamento.
- Tirare il Seggiolone lentamente verso l'alto uno scalino alla volta, mantenendolo costantemente bilanciato sulle ruote posteriori.
- Dopo l'ultimo scalino, tirare indietro il Seggiolone in modo che le ruote anteriori siano appoggiate sul pavimento, prima di "abbassare" il Seggiolone su tutte e 4 le ruote.



Assistente - Discesa in avanti:

- Fare avanzare il Seggiolone fino al primo scalino. Inclinare il Seggiolone sulle ruote posteriori, aiutandosi eventualmente con il pedale di sollevamento.
- Scendere lentamente uno scalino alla volta, tenendo costante e bilanciato il Seggiolone sulle ruote posteriori.
- Dopo l'ultimo scalino, "abbassare" il Seggiolone su tutte e 4 le ruote.



Nota: In caso di disponibilità di due assistenti, il secondo può aiutare sollevando il Seggiolone afferrando le pedane bloccabili o, in mancanza di esse, reclinando/smontando le pedane e sollevando il Seggiolone afferrandolo per il telaio.



Attenzione! Si consiglia agli assistenti di utilizzare la forza delle gambe, senza piegare o fare leva sulla schiena.

6. TECNICHE DI TRASFERIMENTO:



Attenzione!

Salire o scendere da soli dalla Seggiolone è un'operazione potenzialmente molto pericolosa: procedere solo se fisicamente in grado e comunque prestare estrema cautela.

Non appoggiarsi sui freni né caricare il peso sulle pedane durante la salita e la discesa dal Seggiolone: esiste il rischio di ribaltamento!

Salita

- Avvicinare il più possibile il Seggiolone, in modo da posizionarlo di fianco a sé.
- Azionare i freni di stazionamento. Se necessario rimuovere la spondina o il bracciolo.
- Sollevarsi facendo forza sulle braccia e appoggiandosi al telaio della seduta e, se possibile, anche a qualcosa di stabile e vicino.
- Lasciarsi scivolare verso la seduta del Seggiolone

Discesa

- Dalla posizione seduta sul Seggiolone, avvicinarsi il più possibile in modo da trovarsi di fianco alla zona di arrivo.
- Arretrare di qualche centimetro in modo da posizionare le ruote anteriori in avanti e aumentare la superficie di appoggio del Seggiolone, e di conseguenza la sua stabilità.
- Azionare i freni di stazionamento. Se necessario rimuovere la spondina o il bracciolo. Lasciarsi scivolare verso la zona di arrivo.





Attenzione!

Le tecniche di trasferimento devono essere esercitate sotto la guida di personale esperto. Di seguito vengono fornite solo raccomandazioni importanti da osservare.

Da Seggiolone a letto

Con o senza assistente, anteriormente.

Prima del trasferimento:

- Fare arretrare il Seggiolone di 5-10 cm dal punto di arresto, in modo che le ruote guida siano rivolte in avanti.
- Innestare i freni, alzare le spondine o i braccioli e le pedane sul lato in cui avviene il trasferimento.



Da letto a Seggiolone

Con o senza assistente, anteriormente.

Prima del trasferimento:

- Fare arretrare il Seggiolone di 5-10 cm dal punto di arresto, in modo che le ruote guida siano rivolte in avanti.
- Innestare i freni, alzare le spondine o i braccioli e le pedane sul lato in cui avviene il trasferimento.
- Il Seggiolone deve essere il più vicino possibile al punto di arrivo del trasferimento.



Attenzione!

Accertarsi di innestare i freni e di alzare le pedane!

Non salire sui poggiatesta, pericolo di ribaltamento!

Si consiglia agli assistenti di utilizzare la forza delle gambe, senza piegare o fare leva sulla schiena.

7. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

I Seggioloni Polifunzionali CONCEPT II di MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

8. ETICHETTATURA:

Seggiolone polifunzionale CONCEPT II ruote posteriori 24"- 40cm

Tilting wheelchair CONCEPT II rear wheels 24"- 40cm

Colore Grigio / Colour Gray

REF

15544015

MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT

XXXXXXXX

20xx

136 kg



	FABBRICANTE	 	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

9. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Portata massima 136 Kg
- Larghezza seduta 40 cm, 45 cm, 50 cm
- Ruote anteriori piene da 8"
- Ruote posteriori da 16" e 24"
- Freni manuali a leva
- Braccioli imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e larghezza
- Appoggiambraccioli elevabili e regolabili in profondità
- Pedane appoggia piedi separate con dispositivo per la trasformazione in pedana unica
- Rivestimento in Nylon rinforzato, lavabile
- Schienale reclinabile fino a 30°
- Basculamento della seduta fino a 20°

Basculamento:	20 °
Reclinazione schienale:	30 °
Larghezza seduta:	40 - 45 - 50 cm
Larghezza massima d'ingombro:	61 - 66 - 71 cm
Profondità seduta:	da 43 a 56 cm
Profondità massima:	114-186 cm (Recl. e basc. max. pedane allungate e inclinate, poggiatesta montato)
Altezza schienale:	63 cm
Altezza posteriore seduta:	Autospinta 42-45 cm Transito 43 cm
Altezza anteriore seduta:	41-45 cm
Altezza bracciolo:	27-33 cm
Peso:	34 - 35 - 36 kg
Portata massima:	136 Kg
Colore:	Grigio, nero, con dettagli blu

Il presente manuale fa riferimento ai seguenti modelli di Seggiolone Polifunzionale CONCEPT II:

Codice prodotto	Modello	Larghezza seduta	Colore
15544010	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II ruote post.16"	40 cm	Grigio, nero, con dettagli blu
15544510		45 cm	Grigio, nero, con dettagli blu
15545010		50 cm	Grigio, nero, con dettagli blu
15544015	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II ruote 24"	40 cm	Blu
15544515		45 cm	Grigio, nero, con dettagli blu
15545015		50 cm	Grigio, nero, con dettagli blu

10. REGOLAZIONI:

Parti del Seggiolone

1. Appoggiatesta

L'appoggiatesta è completamente rimovibile.

È regolabile in altezza, profondità e lateralmente.

Regolazione altezza:

- Allentare la manopola, quindi rimuoverla (A).
- Regolare l'altezza dell'appoggiatesta.
- Riposizionare la manopola e stringerla fino al bloccaggio (A).

Regolazione profondità:

- Allentare in senso antiorario le leve (B) posizionate dietro al poggiatesta.
- Regolare fino alla posizione desiderata (regolazione simultanea in profondità e altezza).
- Stringere le leve (B).

Regolazione laterale:


- Allentare in senso antiorario le viti (C) o (D) .
- Regolare fino alla posizione desiderata (le viti C e D consentono due regolazioni laterali).
- Stringere le viti (C) e (D).

Regolazione appoggi laterali:

- Allentare in senso antiorario le leve (E) posizionate dietro al poggiatesta.
- Regolare le angolazioni fino alla posizione desiderata e stringere le leve (E).

Rimuovere l'appoggiatesta:

- Allentare la manopola (A) , quindi sollevare l'appoggiatesta fino alla sua estrazione.

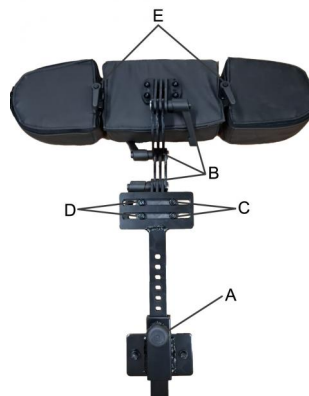



2. Manopole di spinta

Posizionate dietro allo schienale, le manopole di spinta (A) consentono all'assistente la spinta del Seggiolone.



3. Braccioli

I braccioli sono rimovibili, regolabili in altezza e dotati di spondine protetti-abbiti.

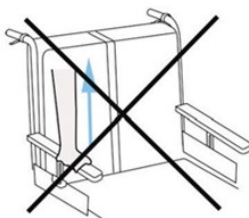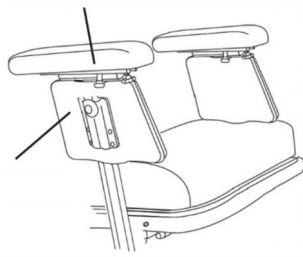

Attenzione! NON SOLLEVARE MAI il Seggiolone. afferrando i braccioli. Il Seggiolone deve essere sollevato afferrando il telaio.

Regolazione altezza e rimozione:

- Premere il pulsante (A) posizionato sul lato del bracciolo.
- Regolare il bracciolo all'altezza desiderata.
- Tirare verso l'alto il bracciolo per rimuoverlo.

Regolazione larghezza:

- Allentare le viti (B) .
- Spostare lateralmente il supporto per regolare la posizione del bracciolo.
- Stringere le viti (B) .



Attenzione! Durante la regolazione dei braccioli accertarsi che lo spazio tra il bracciolo e la spondina proteggi-abiti nonché quello tra la spondina e la ruota sia compreso tra 1 e 2,5 cm.

4. Schienale

Schienale rimovibile e reclinabile tramite pistone nonché regolabile in altezza.

Regolazione inclinazione schienale:

- Premere la leva sinistra (A) inclinando lo schienale nella posizione desiderata.

Regolazione inclinazione seduta:

- Premere la leva destra (B) inclinando la seduta nella posizione desiderata



Rimuovere / Riposizionare lo schienale:

- Rimuovere / Posizionare il pistone (A) utilizzando la testa (B) .



Attenzione! Verificare che lo schienale sia posizionato e bloccato correttamente prima dell'utilizzo.

5. Seduta

Regolazione profondità:


- Allentare le viti (B) .
- Far scivolare il supporto nella posizione desiderata.
- Stringere le viti (B) .

Regolazione larghezza:

- Allentare le viti (C) .
- Far scivolare il supporto lateralmente.
- Stringere le viti (C) .

Regolazione in abduzione:

- Allentare le viti (A) , quindi far scivolare lateralmente il supporto degli appoggiamambe.
- Stringere le viti (A) .

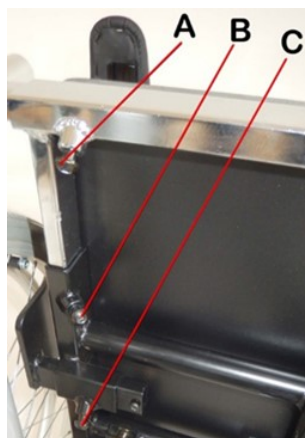


Attenzione!

Accertarsi che il Seggiolone sia completamente aperto e che la guida di scorrimento sia bloccata prima di sedersi e prima di ogni trasferimento.

6. Ruote anteriori e posteriori

- Ruote anteriori piene da 8" (20 cm).
- Prima dell'utilizzo, verificare sempre che sulle ruote non siano presenti corpi estranei.
- Verificare che sulle ruote non siano presenti segni di usura eccessiva. Nel caso, provvedere alla sostituzione.
- Verificare la regolazione dell'asse delle forcelle facendo girare le ruote. Le ruote devono arrestarsi progressivamente.

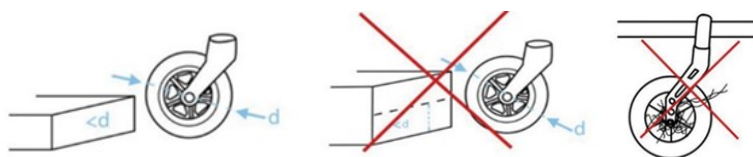

- L'altezza di un ostacolo NON DEVE essere superiore al raggio della ruota. Se l'ostacolo fosse superiore, è necessario sollevare il Seggiolone.

7. Ruote posteriori

- Dimensioni: 24"
- Asse a smontaggio rapido per facilitare trasporto e montaggio.

Smontare le ruote posteriori:

- Posizionare il telaio del Seggiolone su una superficie rialzata in modo che le ruote centrali non siano a contatto col terreno.
- Tenendo una mano sul telaio del Seggiolone., afferrare con l'altra mano il centro della ruota premendo il pulsante (A), quindi rimuovere completamente la ruota dal Seggiolone. (B).
- Per riposizionare la ruota, ripetere la procedura in ordine inverso.





Attenzione!

**Dopo ogni utilizzo verificare che il pulsante (A) non sia rimasto premuto.
Non smontare mai le ruote quando il Seggiolone è occupato.**



Attenzione!

**Prima di ogni utilizzo verificare che l'asse (A) sia correttamente inserito
nel supporto (B) provando a tirare la ruota verso l'esterno.**

8. Corrimani

- Il Seggiolone è fornito di corrimani di spinta.
- Spingere i corrimani con un movimento da dietro in avanti per avanzare.
- Prima dell'utilizzo, verificare sempre che i corrimani siano fissati saldamente alle ruote.
- I corrimani potrebbero surriscaldarsi a causa di ripetute frizioni. **Attenzione: esiste il rischio di lesioni per l'utilizzatore.**

9. Freni manuali

I freni permettono di effettuare i trasferimenti dell'utilizzatore in sicurezza.

Attivare i freni:

- Tirare la leva (A) per frenare (spingerla per sbloccarla) .
- Le ruote sono bloccate e il Seggiolone non si muove.

Regolazione profondità:

- Svitare le viti (B) .
- Regolare il freno spostandolo sul foro (C) .
- Riavvitare saldamente le viti (B) .



Attenzione!

Questi freni non devono essere utilizzati per rallentare il Seggiolone.

Verificare che le viti siano serrate e che il freno non si muova.

Verificare che il freno, una volta spostato, non vada a toccare le ruote.

11. Appoggiagambe

- Gli appoggiagambe sono rimovibili e ribaltabili.
- Le pedane sono regolabili in altezza e angolazione.

Rimuovere gli appoggiagambe:

- Posizionare verticalmente le pedane e gli appoggiapolpacci.
- Tirare il pulsante di sblocco (A) .
- Far ruotare l'appoggiagambe verso l'esterno del Seggiolone.
- Sollevare l'appoggiagambe per rimuoverlo.

Posizionare gli appoggiagambe:

- Posizionare verticalmente le pedane.
- Posizionare l'appoggiagambe verso l'esterno del Seggiolone.
- Posizionare il perno nel tubo del telaio.
- Far ruotare l'appoggiagambe verso l'interno del Seggiolone.

Regolazione altezza:


- Allentare la vite (D) per sbloccare la regolazione dell'altezza, quindi regolare all'altezza desiderata.
- Riavvitare saldamente la vite (D) .

Regolazione in abduzione:

- Allentare la vite (B) per sbloccare la regolazione in abduzione, quindi regolare nella posizione desiderata.
- Riavvitare saldamente la vite (B) .

Regolazione angolazione pedane:

- Allentare la vite (E) per sbloccare la regolazione dell'angolazione della pedana, quindi regolare all'angolazione desiderata.
- Riavvitare saldamente la vite (E) .

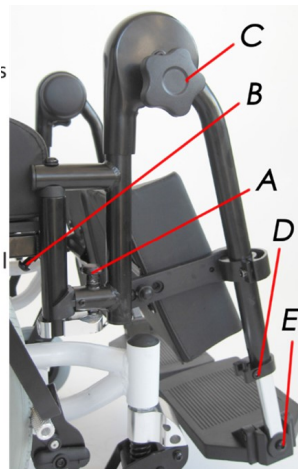

Regolazione angolazione appoggiagambe:

- Allentare la rotella (C) per sbloccare la regolazione dell'angolazione dell'appoggiagambe.
- Una volta trovata la posizione desiderata, serrare saldamente la rotella (C) .
- NON salire in piedi né appoggiarsi sulle pedane.
- Verificare sempre che le pedane siano posizionate verticalmente prima di salire o scendere dal Seggiolone.
- Verificare sempre che gli appoggiagambe siano correttamente bloccati prima dell'utilizzo.



11. ACCESSORI:

COD.15541211 - Spinte laterali standard

COD.15541212 - Spinte laterali corte

COD.15541213 - Cuneo divaricatore

COD.15991000 - Tavolino universale

12. PULIZIA E DISINFEZIONE:

La pulizia rappresenta l'elemento e la condizione più importante per una corretta disinfezione chimica.

In generale, una regolare pulizia del Seggiolone in caso di utilizzo da parte di uno stesso paziente è sufficiente dal punto di vista igienico.

Una disinfezione del telaio del Seggiolone si rende necessaria solo in caso di contaminazione visibile con materiale infettivo o potenzialmente infettivo (sangue, feci, pus) oppure in presenza di una malattia infettiva su richiesta del medico.



Attenzione!

A ogni cambio di utilizzatore, il Seggiolone deve essere prima pulito e quindi disinfettato per strofinamento!

Programma di pulizia e disinfezione:

- Si raccomanda di utilizzare un metodo di disinfezione (umido) per strofinamento. Scegliere un detergente di tipo ecologico e non aggressivo. In generale, può essere utilizzato un detergente di uso domestico.
- Non utilizzare prodotti abrasivi, prodotti per la pulizia dell'acciaio inossidabile, tamponi detergenti o detergenti contenenti solventi, per evitare di danneggiare le superfici.
- In caso di contaminazione visibile con materiale infettivo o potenzialmente infettivo, il Seggiolone deve essere disinfettato per strofinamento utilizzando un disinfettante appositamente raccomandato per l'uso ospedaliero adatto alla superficie in questione.
- La disinfezione delle ruote è necessaria solo in caso di contaminazione visibile con materiale infettivo o potenzialmente infettivo.



NOTA: La disinfezione continua è necessaria solo in caso di pazienti portatori di agenti patogeni pluri resistenti all'interno di una struttura ospedaliera.

Addestramento degli utilizzatori e del personale specializzato

Per garantire una corretta procedura di pulizia e disinfezione, si consiglia di istruire in modo appropriato tutti gli utilizzatori e il personale specializzato coinvolti. Devono essere rispettati i seguenti punti:

- Assicurarsi che il Seggiolone non venga sporcato o contaminato durante il trasporto al domicilio del paziente.
- Il personale specializzato deve essere informato sulle particolarità che caratterizzano il procedimento di pulizia e disinfezione ed eseguire il trattamento necessario correttamente.
- Per questa operazione il personale specializzato deve essere provvisto di grembiuli e guanti monouso impermeabili.
- Per il trattamento devono essere utilizzati solo panni puliti che vanno poi portati al lavaggio.
- In seguito al trattamento e prima di abbandonare il posto, il personale specializzato deve disinfettarsi le mani, prima di partire per il luogo di utilizzo successivo.

Se il Seggiolone non viene riutilizzato immediatamente, deve essere conservato con una copertura che protegga da polvere e contaminazioni accidentali.

13. MANUTENZIONE:

- Sottoporre il dispositivo a un controllo da parte di personale specializzato almeno ogni 2 anni.
- **Tappezzeria:** I rivestimenti sono realizzati in nylon rinforzato e possono essere asportati dal telaio semplicemente svitandoli. I rivestimenti di sedile e schienale possono essere lavati con una spugna inumidita in una soluzione saponata. Pulire le parti metalliche con detersivo o sapone per auto e in caso di sporco ostinato utilizzare uno sgrassante.
- **Raggi:** Raggi allentati possono deformare le ruote. Se occorre regolare i raggi, rivolgersi a un centro di assistenza per articoli sanitari.
- **Corrimani:** Se i corrimani dovessero graffiarsi in misura tale da irritare la mano dell'utilizzatore, devono essere sostituiti.
- **Assi delle ruote:** Accertarsi di mantenere gli assi delle ruote puliti evitando l'accumularsi di sporcizia.
- **Freni:** L'effetto frenante dipende anche dallo stato delle gomme. La forte presenza di sporcizia può influenzare negativamente l'utilizzo dei freni. Controllare frequentemente il funzionamento dei freni.

In presenza di qualsiasi anomalia non utilizzare il Seggiolone e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.



Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del Seggiolone in caso di utilizzo di componenti non originali.

14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Il Seggiolone polifunzionale tende a sterzare da una parte:

- I fermi delle gomme non sono montati correttamente.
- L'utilizzatore non distribuisce equamente il carico sul Seggiolone.

Il Seggiolone polifunzionale avanza con difficoltà:

- I blocchi delle ruote posteriori non sono montati correttamente.
- Eliminare detriti e sporcizia dagli assi delle ruote anteriori.
- Carico eccessivo sulle ruote anteriori, regolare il baricentro del Seggiolone.

Il Seggiolone polifunzionale sterza con difficoltà:

- Accertarsi che i fermi delle forcelle anteriori non siano serrati eccessivamente.
- Eliminare detriti e sporcizia dagli assi delle ruote anteriori.
- I freni non funzionano bene:
 - Regolare la distanza fra gomma e freno.
 - Ispezionare gomme e battistrada. Eliminare eventuale sporcizia.

Il Seggiolone polifunzionale si apre e si chiude con difficoltà:

- Il rivestimento è troppo teso.
- Ingrassare e pulire i giunti della struttura a crociera sotto il sedile.

Il Seggiolone polifunzionale è instabile:

- Accertarsi che le viti e i comandi siano serrati correttamente.

Nota: L'utilizzatore può avvertire questi problemi anche a causa di una errata regolazione del dispositivo e/o di una tecnica di guida errata.

Se il problema persiste contattare un centro di assistenza autorizzato.

Per segnalare incidenti o reclami scrivere a: regulatory@movigroup.com

15. DOPO L'UTILIZZO:

Conservazione

A seguito di un lungo periodo di stoccaggio (più di quattro mesi), il dispositivo deve essere controllato secondo quanto indicato nel capitolo Manutenzione.

Riutilizzo

Il dispositivo è adatto per essere riutilizzato. Devono essere intraprese le seguenti azioni:

- Pulizia e disinfezione (si veda il capitolo Pulizia e Disinfezione del presente manuale)
- Ispezione e manutenzione (si veda capitolo Manutenzione del presente manuale)
- Il dispositivo deve essere adatto al nuovo utilizzatore in base alla documentazione di manutenzione (disponibile presso il fornitore Wimed autorizzato)

16. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

17. NOTA:

Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un tecnico competente, in quanto è necessaria una buona conoscenza del prodotto da ispezionare. Se tale ispezione dovesse rilevare qualsiasi difetto, malfunzionamento o segno di usura che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, il Seggiolone non deve assolutamente essere utilizzato fino alla riparazione.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Indirizzo del fabbricante

SOCIETÀ: Movi s.p.a

Indirizzo: Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Telefono: 02 509051 Fax: 02 5061048

E-mail: infotecnichewimed@movigroup.com

18. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityregulatory@pec.movigroup.com

19. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica, via Dione Cassio, 1520138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate,

previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al seguente recapito e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito di:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movì S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movì S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

Seggiolone Polifunzionale CONCEPT II Ruote da 400 mm Ruote
da 600 mm

Cod. 15544010 - 15544510

Cod. 15545010 - 15544015

Cod. 15544515 - 15545015

Rev.7 04/06/2025



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com