

MANUALE D'USO

BASTONI IN ALLUMINIO

Cod. 1565500x - Bastoni in alluminio

Cod. 15656000 - Bastone pieghevole in alluminio nero

Cod. 15656001 - Bastone con luce in alluminio nero




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INTRODUZIONE:	pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO:	pg.4
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:	pg.6
4. DESCRIZIONE:	pg.8
5. ISTRUZIONI PER L'USO:	pg.14
6. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:	pg.14
8. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.15
8. PULIZIA E DISINFEZIONE:	pg.16
9. MANUTENZIONE:	pg.16
10. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.17
11. NOTE:	pg.19
12. SMALTIMENTO:	pg.20
13. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.20
14. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.21

1. INTRODUZIONE:

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarla per l'acquisto dei bastoni in alluminio Movi e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono concepiti per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza.

I bastoni in alluminio sono classificati come dispositivi medici di classe I in conformità Regolamento Europeo MDR del 5 Aprile 2017.

Il presente manuale fornisce informazioni utili all'acquirente e all'utilizzatore per tutte le funzioni che garantiscono un utilizzo quotidiano, pratico e sicuro di questo bastone. Si consiglia di usare questo manuale come guida pratica e di conservarlo vicino al bastone.

Il Fabbricante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbricante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

Il presente manuale fa riferimento ai seguenti bastoni:

- Cod. 15655002 - BASTONE IN ALLUMINIO BLU OPACO
- Cod. 15655003 - BASTONE IN ALLUMINIO ROSSO OPACO
- Cod. 15655000 - BASTONE IN ALLUMINIO GRIGIO OPACO
- Cod. 15655004 - BASTONE IN ALLUMINIO NERO OPACO
- Cod. 15655001 - BASTONE IN ALLUMINIO VERDE OPACO
- Cod. 15656000 - BASTONE PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO NERO
- Cod. 15656001 - BASTONE CON LUCE IN ALLUMINIO NERO

2. DESTINAZIONE D'USO:

I bastoni in alluminio MOVI sono indicati per fornire un sostegno alla mobilità a persone con difficoltà motorie.



Prima di utilizzare il bastone:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni al bastone a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente il bastone.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili.
- É vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano il bastone devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo dei bastoni MOVI non è indicato a:

- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso.
- Il bastone non può essere utilizzato da pazienti che presentano una funzionalità compromessa delle mani e/o delle braccia.

COMPLICAZIONI

Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale. Utilizzare il bastone in alluminio unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.



Movi S.P.A - declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un utilizzo improprio del dispositivo o da un utilizzo diverso da quanto indicato nel presente manuale.

BASTONI IN ALLUMINIO




- Non utilizzare il dispositivo prima di avere letto attentamente il manuale d'uso.
- Il dispositivo deve essere utilizzato nelle condizioni di fornitura e non può essere modificato in alcun modo.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi dalla destinazione d'uso prevista.
- Verificare lo stato del dispositivo prima di ogni utilizzo. Se si dovessero riscontrare segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.
- Fare controllare periodicamente lo stato del dispositivo e di tutti i suoi componenti da un centro tecnico autorizzato. Se si dovessero riscontrare segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.
- Per eventuali riparazioni, contattare il centro tecnico autorizzato.
- Qualora i puntali risultassero usurati, provvedere alla sostituzione.
- Prima dell'uso, verificare che l'impugnatura non sia allentata.
- Verificare che il pulsante di regolazione e la ghiera di bloccaggio siano correttamente in posizione.
- Prestare estrema attenzione all'utilizzo del dispositivo su superfici scivolose e/o bagnate.
- Il bastone è un ausilio per la deambulazione. Non utilizzarlo come oggetto di supporto per altri scopi.
- Tenere il bastone lontano dalla portata dei bambini.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo, consultare sempre il medico e/o il terapeuta.
- **Il carico massimo di sicuro utilizzo è di 110 Kg. Non superare mai tale carico.**

4. DESCRIZIONE:

I bastoni in alluminio sono un dispositivo medico di classe I, realizzato in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017. Sono indicati per persone che necessitano di sostegno per camminare. L'impugnatura ha una forma anatomica per la mano destra e sinistra. Questa caratteristica garantisce un supporto ottimale al palmo della mano diminuendo la pressione e lo sforzo sul polso. Il dispositivo è regolabile in altezza.

Parti del bastone in alluminio - cod. 1565500x


- A) Impugnatura
- B) Parte superiore
- C) Pulsante di regolazione
- D) Ghiera di bloccaggio
- E) Parte inferiore
- F) Puntale

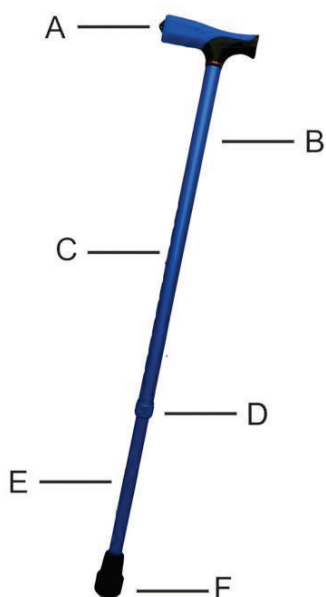

BASTONI IN ALLUMINIO

Parti del bastone in alluminio pieghevole - cod. 15656000

- A) Impugnatura
- B) Pulsante di regolazione
- C) Ghiera di bloccaggio
- D) Snodi
- E) Puntale

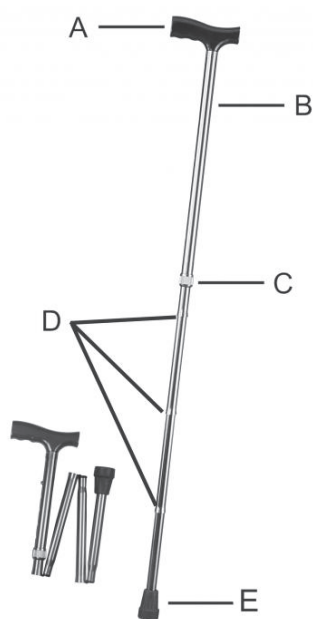

BASTONI IN ALLUMINIO

Parti del bastone in alluminio con luce - cod. 15656001


- A) Luce anteriore
- B) Impugnatura e vano porta pile
- C) Pulsante di regolazione
- D) Ghiera di bloccaggio
- E) Puntale largo



Regolare l'altezza del bastone

Normalmente l'altezza giusta del bastone viene misurata con la persona in piedi con le scarpe, le braccia rilassate lungo i fianchi, il bastone di fronte, ad una distanza di circa 20 cm. L'impugnatura del bastone deve essere alla stessa altezza della parte alta del femore.

- Svitare la ghiera di bloccaggio ruotando in senso antiorario. (Fig. 1)
- Premere il pulsante di regolazione e portare il bastone all'altezza desiderata. (Fig. 2)
- Rilasciare il pulsante facendo attenzione che fuoriesca completamente dal foro di regolazione. (Fig. 3)
- Ruotare in senso orario la ghiera di bloccaggio fino a quando non è completamente serrata. (Fig. 4)

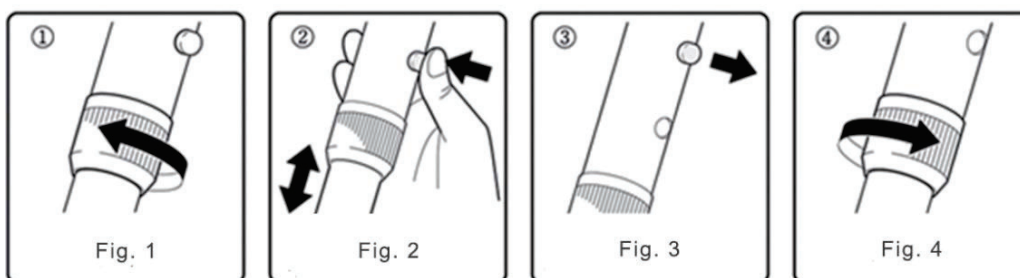

BASTONI IN ALLUMINIO

Assemblare il bastone pieghevole in alluminio - cod. 15656000

- Prendere il manico del bastone e lasciare snodare le diverse sezioni verso il basso.
- Innestare le parti del bastone ruotandole poi in senso antiorario.
- Verificare che tutti gli snodi siano correttamente innestati e stabili.




BASTONI IN ALLUMINIO

Inserimento e cambio batterie del bastone in alluminio con luce - cod. 15656001

Il bastone è compatibile con batterie mini stilo AAA.

- Svitare il tappo nero all'estremità del manico del bastone.
- Se presente estrarre la batteria esausta dal vano batterie all'interno del manico.
- Inserire la nuova batteria nell'alloggiamento previsto, verificando la polarità indicata.
- Riavvitare il tappo nero fino a chiuderlo completamente.

Nota: smaltire sempre le batterie esauste rispettando le disposizioni nazionali e/o locali.

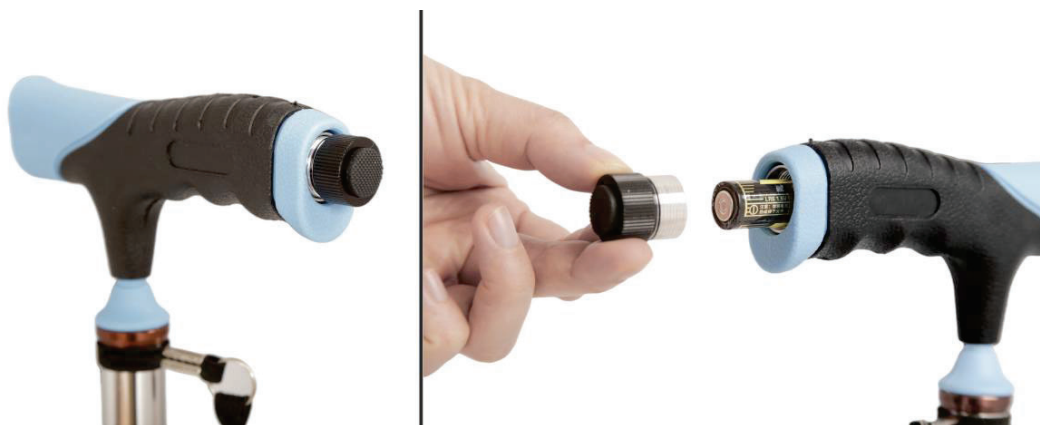

5. ISTRUZIONI PER L'USO:

Camminare con il bastone

- Posizionare il bastone a circa 20 cm dal corpo in modo che il gomito formi un angolo di circa 30° - 40°.
- Tenere saldamente il bastone e portare avanti insieme la gamba più debole. Tenere il gomito vicino al corpo.
- Camminare nel modo più naturale possibile, con passi di lunghezza uniforme ed equilibrata. Procedere lentamente finché non si acquisisce sicurezza.

Salire le scale

- Posizionarsi vicino al primo gradino.
- Salire, sul primo gradino, con la gamba di appoggio facendo attenzione a posizionare bene il piede sul gradino.
- Piegarsi leggermente in avanti mentre si sale con la gamba più debole e, contemporaneamente, con il bastone.

Scendere le scale

- Scendere con il bastone e, contemporaneamente, con la gamba più debole.
- Scendere poi, sullo stesso gradino, con la gamba di appoggio.

Attenzione: mantenere il corpo dritto, piegandosi in avanti il meno possibile.

6. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

I bastoni MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

8. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Codice prodotto	15655000	15655001	15655002	15655003	15655004
Altezza regolabile	da 70 a 93 cm	da 70 a 93 cm	da 70 a 93 cm	da 70 a 93 cm	da 70 a 93 cm
Portata max	110 Kg	110 Kg	110 Kg	110 Kg	110 Kg
Colore	Grigio Opaco	Verde Opaco	Blu Opaco	Rosso Opaco	Nero Opaco

Codice prodotto	15656000	15656001
Altezza regolabile	da 80 a 90 cm	da 75 a 98 cm
Portata max	110 Kg	110 Kg
Colore	Nero Opaco	Nero Opaco

8. PULIZIA E DISINFEZIONE:

La pulizia e la disinfezione sono aspetti fondamentali. In generale, una pulizia regolare del bastone, in caso di utilizzo da parte di un singolo paziente, è sufficiente in termini di igiene.

Pulizia

- Pulire la superficie con un panno morbido e asciutto.

Attenzione! Ogni volta che il bastone viene utilizzato da un nuovo paziente, deve essere obbligatoriamente pulito e disinfettato mediante strofinamento accurato!

Disinfezione

- Quando si utilizza un disinfettante, diluirlo secondo la concentrazione specificata:
 - Disinfettante a base di cloruro d'ammonio allo 0,05-0,2%
 - Disinfettante fenilclorurato allo 0,05-0,2%
 - Soluzione di diclofenac etano allo 0,05%
- A seconda del disinfettante, le parti metalliche potrebbero corrodersi o quelle in plastica scolorirsi, deteriorarsi o creparsi: utilizzare solo i disinfettanti raccomandati.
- Verificare la composizione del disinfettante prima dell'uso.
- Dopo la disinfezione, rimuovere il disinfettante residuo.
- Non utilizzare ozono o autoclavi come sterilizzatori.

9. MANUTENZIONE:

- Il dispositivo deve essere ispezionato dall' utilizzatore almeno una volta all'anno
- Sostituire i puntali antiscivolo quando usurati

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.

10. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

BASTONE IN ALLUMINIO GRIGIO OPACO (PZ) GRAY MATT ALUMINIUM STICK (PC)

REF 15655000 MD

 **MOVI S.p.A.** - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXXXX

20XX 

110 kg 



BASTONE PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO NERO (PZ) BLACK ALUMINUM FOLDING STICK (PC)

REF 15656000 MD

 **MOVI S.p.A.** - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXXXX

20XX 

110 kg 



BASTONE CON LUCE IN ALLUMINIO NERO (PZ) BLACK ALUMINUM STICK WITH LIGHT (PC)

REF 15656001 MD

 **MOVI S.p.A.** - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXXXX

20XX 

110 kg 



	FABBRICANTE	EC REP	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
---	-------------	--------	---

BASTONI IN ALLUMINIO

	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA
	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

11. NOTE:



Nota bene: Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA - Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

12. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

13. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityregulatory@pec.movigroup.com

14. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281 F.: 02 50905217 e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

BASTONI IN ALLUMINIO

Cod. 1565500x - Bastoni in alluminio

Cod. 15656000 - Bastone pieghevole in alluminio nero

Cod. 15656001 - Bastone con luce in alluminio nero

Rev.0 12/06/2025



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com